

超低床介護用ベッド

ラフィオ

Rafio




ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド


ハイバック
サポート機能



超低床15cm

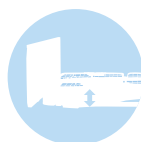

垂直昇降

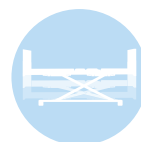



適合するマットレス幅: 90cm幅

- 特許第5089786号(手元スイッチ形状)
- 特許出願中 ハイバックサポート機能
- 特許出願中 リクライニング制御

詳しい説明や動画はこちらから

<http://www.platz-ltd.co.jp/product/rafi/rafi/>

QRコードからも
アクセスできます!



自然なリクライニング姿勢により
床ずれ・誤嚥リスクを低減。
ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。




木製フラットボード
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ

90cm幅



樹脂ボード(木目調)
「サンキューポイントマットレス」との組み合わせ

90cm幅

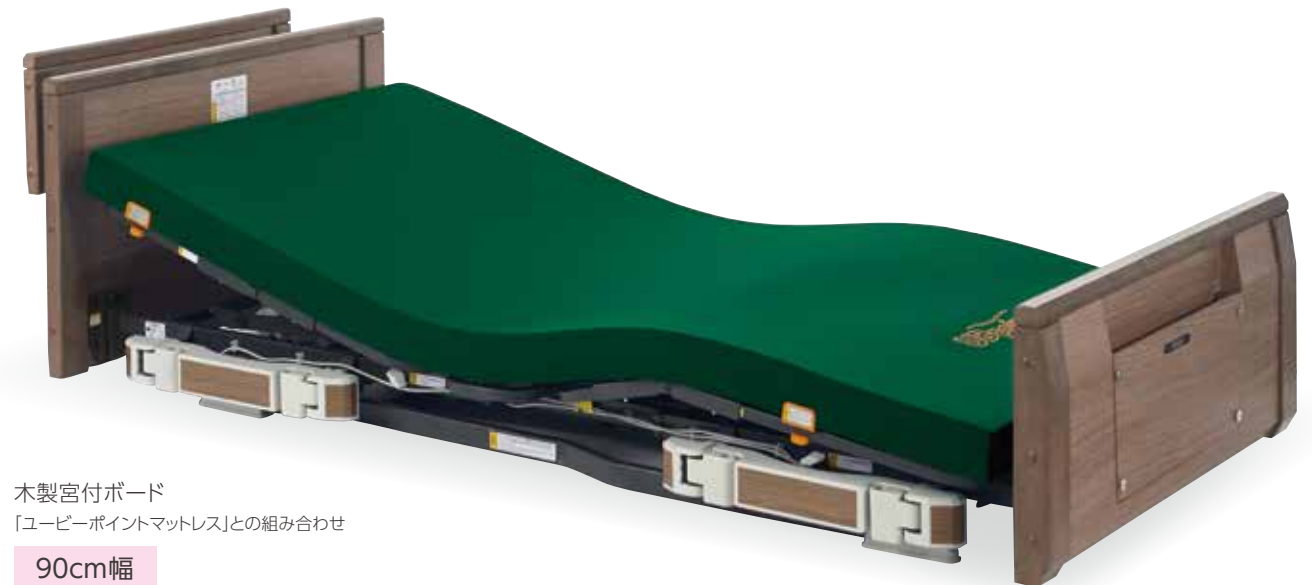

木製宮付ボード
「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ

90cm幅

ラフィオシリーズ

超低床介護用ベッド ラフィオは、身体状況やご使用状況に合わせて2つのシリーズをご用意しました。

ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

P3

ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用して身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢(体位)を安全で快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。この考えのもと、ラフィオ ポジショニングベッドシリーズは「ハイバックサポート機能」と背と膝の「フィッティング機能」を搭載、背上げ時のズレ力の軽減とリラックスできる快適な姿勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、在宅医療もサポートする新しい超低床介護用ベッドです。



ラフィオ ベーシックベッドシリーズ

P11

ラフィオ ベーシックベッドシリーズは、床面高15cmの超低床を実現。身体のズレや背圧・腹圧の軽減にも配慮した様々な機能を搭載しています。認知症の方やベッドの高さに不安のある方へ、安心してお使いいただける超低床介護用ベッドです。


ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

ハイバックサポート機能
フィッティング機能
足先上げ切替

超低床
垂直昇降
ライジングモーション機構


ラフィオ ベーシックベッドシリーズ

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

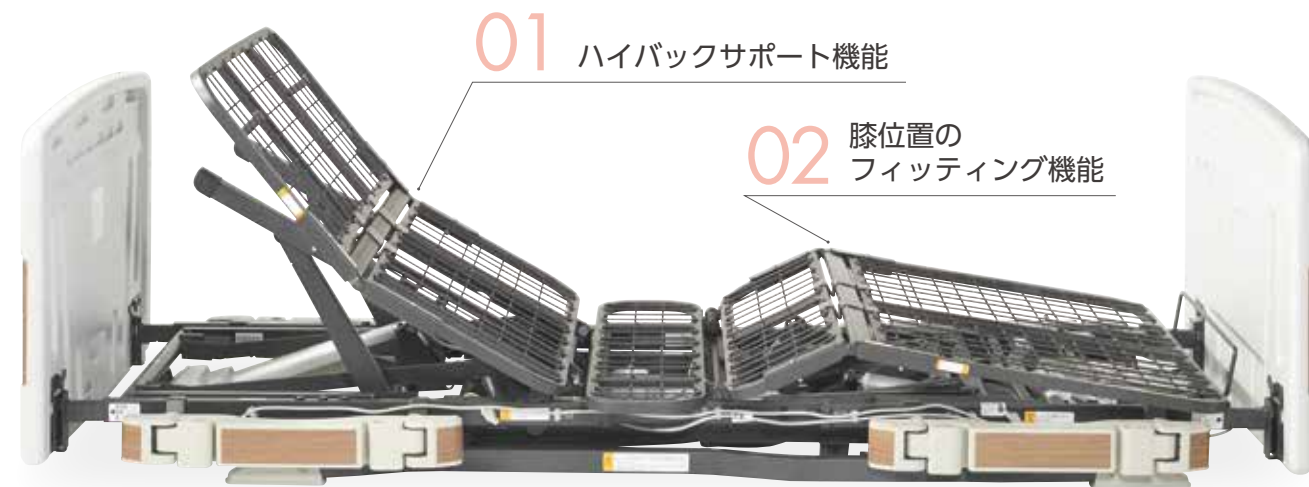

01 ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック:頭-背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。1モーター、2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することができます。

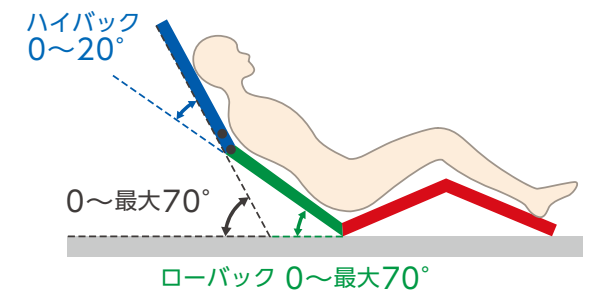

ハイバックサポート機能 未使用時
(背上げ45°)



ハイバックサポート機能 使用時(ハイバック20°・ローバック45°)
屈曲位置は体格などに合わせて2段階に調節可能



専門家のアドバイスのもと、 リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました



総合開発アドバイザー

共同開発 佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門
松尾 清美 准教授

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通事故で車いす生活となるも、多くの福祉機器メーカーと研究開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗機器、移動用具などの特許は30を超える。また、1750軒を超える障がい者のための住環境設計を行うなど、30年に渡り障がい者や高齢者の自立(律)生活をサポート。日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター協会、日本障がい者スポーツ学会などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。著書:「障害受容はいのちの受容」など。

開発アドバイザー ポジショニングベッド命名者



共同開発 株式会社ぶつうのくらし研究所 代表取締役
吉川 和徳 先生

理学療法士、シーティング・コンサルタント。2004年NPO法人日本シーティング・コンサルタント協会設立、座位姿勢の重要性を広めるなどシーティング、ポジショニングに関して多方面で活躍中。著書:「シーティング入門」など。

開発アドバイザー ハイバックサポート命名者




共同開発 コネクトリハビリテーション 代表
山形 茂生 先生

作業療法士。福祉用具プランナーやリフトリーダー研修会、移乗・移動に関する研修会等 数多くの研修会で福祉用具の活用に関して講師を務める。元別府リハビリテーションセンターリハ支援課 課長。NPO福祉用具ネット理事、日本リハビリテーション工学協会理事。


02 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な姿勢をサポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

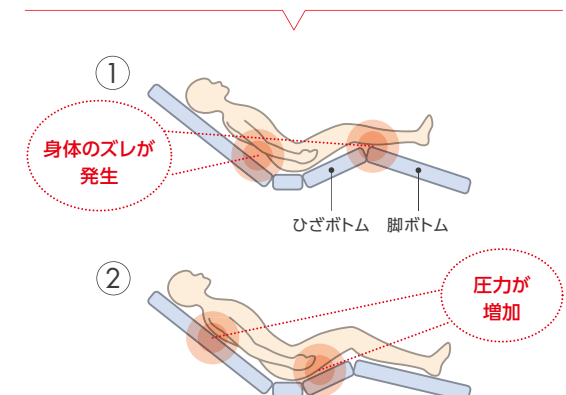

⚠ 褥瘡(床ずれ)の原因になります

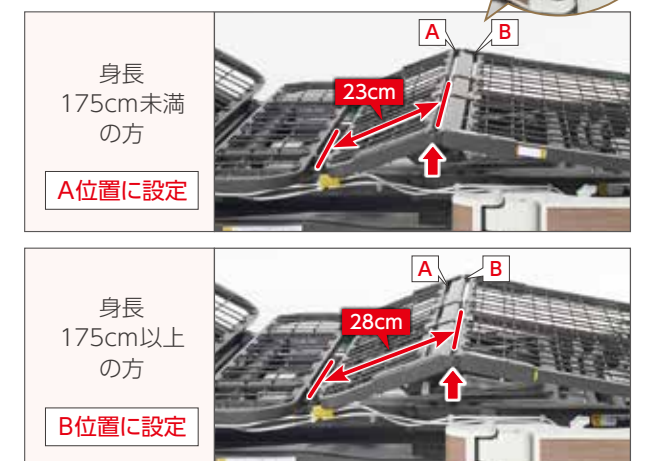

ポジショニングベッドに期待できる効果

誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節することで、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



呼吸がしやすい姿勢に

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。




円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができ、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。

股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げを提供します。

角度の確認に便利な角度計付


ボトムへの取り付けが可能な角度計2つを標準装備。適切な角度を確認しながら背上げ動作を行うことができます。
(ポジショニングベッドシリーズにのみ取付可能です。)

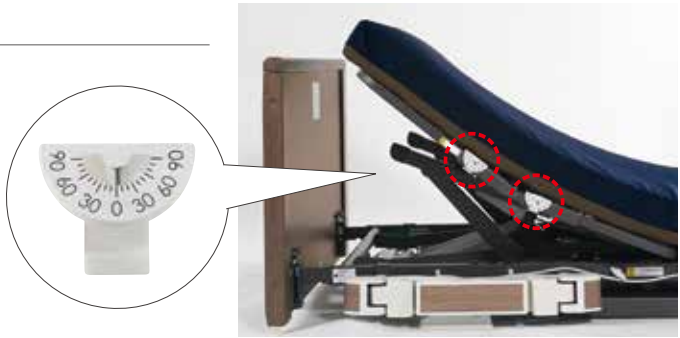


褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレカ、圧力の軽減)

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。

背上げ30°の場合

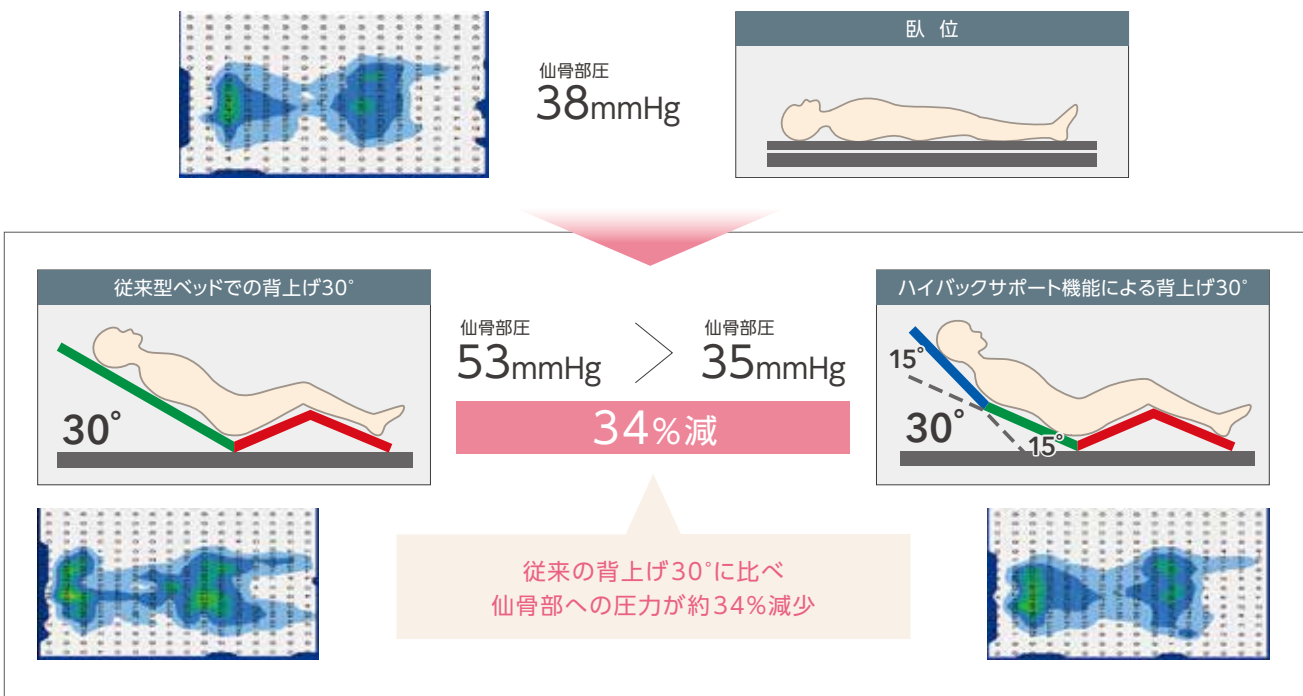


背上げ70°の場合

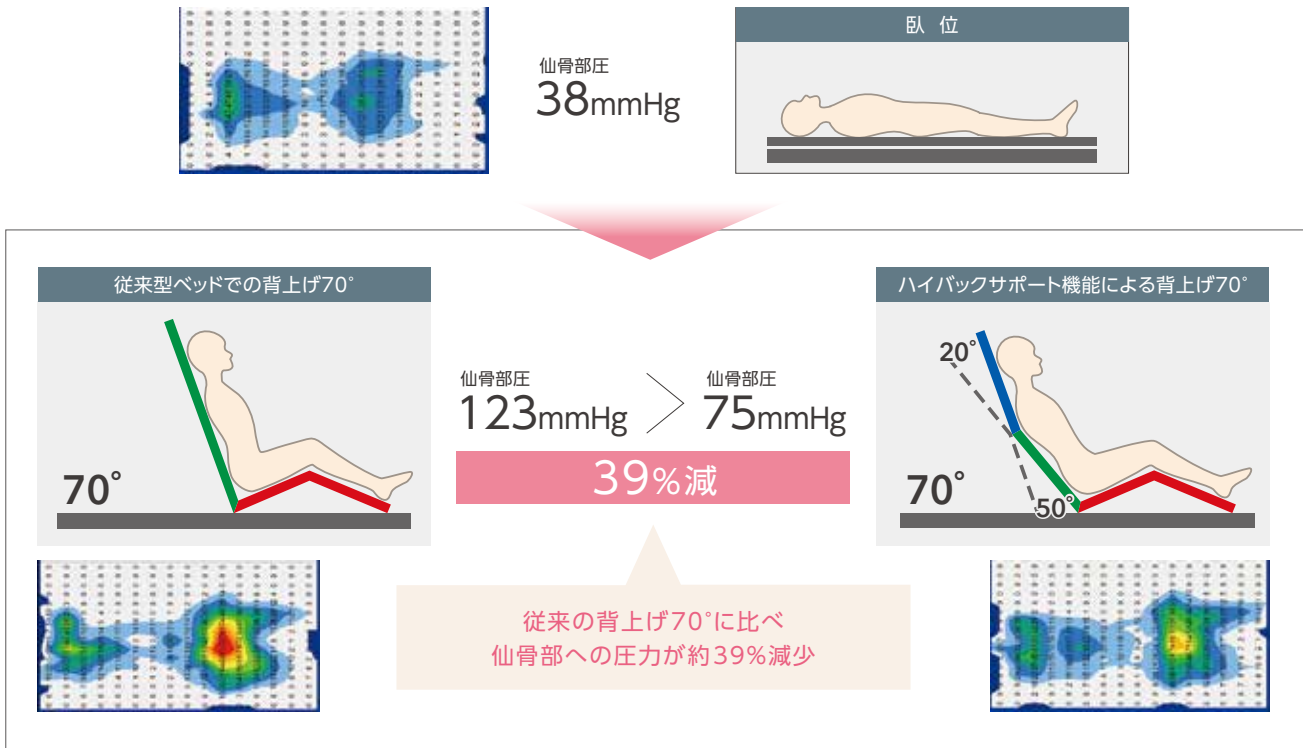


被験者:162cm、55kg、29歳 計測機器:FSA(タカノ社製) サンキューポイントマットレス使用時
※データは一例です。測定値には個人差があります。

身体のスレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のスレや腹部の圧迫を抑制します。

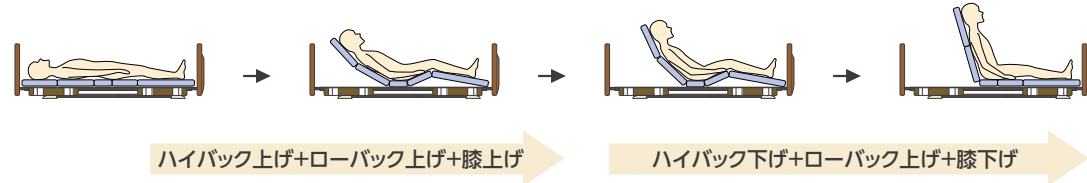

ハイバックは0°から最大20°、ローバックは0°から最大70°まで上がります。ハイバックとローバックの角度は合わせて最大70°を超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。

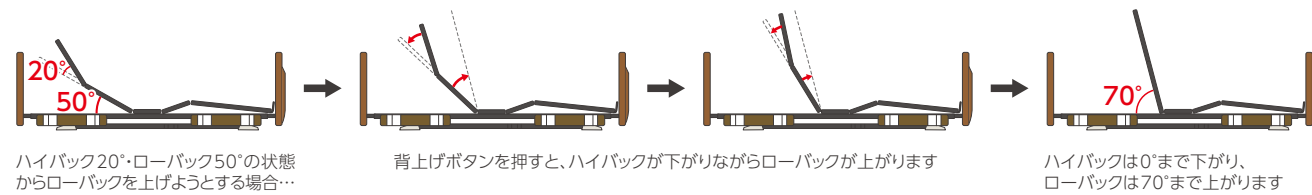

足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切り替えます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。

足先上げ



足先下げ



収納式サイドレールホルダー

全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。



使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間に引っかけて保持することができます。麻痺やリウマチの手でも握りやすく、使いやすい設計です。

手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。

ベッドを下げる際は床面高が24cmになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。



省スペースに設置可能な垂直昇降機構

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。

また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。


※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。



身長に合わせて選べるベッドサイズ

ボトムのみの変更でベッドのサイズをショート・レギュラー・ロングに変更できます。

※ロングタイプのベッドでサイドレールやベッド用グリップをご使用の際は、別売の「ロングタイプ対応スペーサー(P16)」が必要となります。

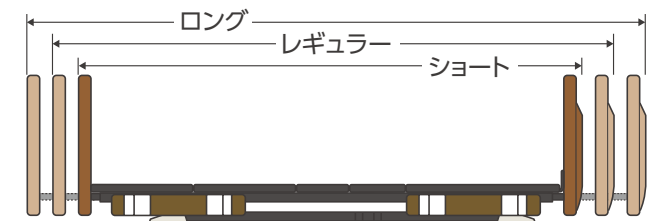

モータータイプ



背上げ1モーター
連動ハイバックサポート
機能付



※組立時に2段階の高さに設定できます。



2モーター
連動ハイバックサポート
機能付



3モーター
電動ハイバックサポート
機能付



ポジショニングベッドシリーズ 型式

※価格はオープン価格です。**非課税**

■ 樹脂ボード(木目調)

	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11ACR ■TAIS/00631-000321 ■JAN/4539940004763	P110-21ACR ■TAIS/00631-000331 ■JAN/4539940005067	P110-71ACR ■TAIS/00631-000341 ■JAN/4539940005364
ショートタイプ	P110-11ACS ■TAIS/00631-000321 ■JAN/4539940004756	P110-21ACS ■TAIS/00631-000331 ■JAN/4539940005050	P110-71ACS ■TAIS/00631-000341 ■JAN/4539940005357
ロングタイプ	P110-11ACL ■TAIS/00631-000321 ■JAN/4539940004770	P110-21ACL ■TAIS/00631-000331 ■JAN/4539940005074	P110-71ACL ■TAIS/00631-000341 ■JAN/4539940005371

■ 木製フラットボード

	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11BAR ■TAIS/00631-000322 ■JAN/4539940004794	P110-21BAR ■TAIS/00631-000332 ■JAN/4539940005098	P110-71BAR ■TAIS/00631-000342 ■JAN/4539940005395
ショートタイプ	P110-11BAS ■TAIS/00631-000322 ■JAN/4539940004787	P110-21BAS ■TAIS/00631-000332 ■JAN/4539940005081	P110-71BAS ■TAIS/00631-000342 ■JAN/4539940005388
ロングタイプ	P110-11BAL ■TAIS/00631-000322 ■JAN/4539940004800	P110-21BAL ■TAIS/00631-000332 ■JAN/4539940005104	P110-71BAL ■TAIS/00631-000342 ■JAN/4539940005401

■ 木製宮付ボード

	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11BBR ■TAIS/00631-000324 ■JAN/4539940004855	P110-21BBR ■TAIS/00631-000334 ■JAN/4539940005159	P110-71BBR ■TAIS/00631-000344 ■JAN/4539940005456
ショートタイプ	P110-11BBS ■TAIS/00631-000324 ■JAN/4539940004848	P110-21BBS ■TAIS/00631-000334 ■JAN/4539940005142	P110-71BBS ■TAIS/00631-000344 ■JAN/4539940005449
ロングタイプ	P110-11BBL ■TAIS/00631-000324 ■JAN/4539940004862	P110-21BBL ■TAIS/00631-000334 ■JAN/4539940005166	P110-71BBL ■TAIS/00631-000344 ■JAN/4539940005463

ラフィオ用バッテリー付

■ 樹脂ボード(木目調)

	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11ACR-B ■TAIS/00631-000381 ■JAN/4539940006569	P110-21ACR-B ■TAIS/00631-000391 ■JAN/4539940006866	P110-71ACR-B ■TAIS/00631-000401 ■JAN/4539940007160
ショートタイプ	P110-11ACS-B ■TAIS/00631-000381 ■JAN/4539940006552	P110-21ACS-B ■TAIS/00631-000391 ■JAN/4539940006859	P110-71ACS-B ■TAIS/00631-000401 ■JAN/4539940007153
ロングタイプ	P110-11ACL-B ■TAIS/00631-000381 ■JAN/4539940006576	P110-21ACL-B ■TAIS/00631-000391 ■JAN/4539940006873	P110-71ACL-B ■TAIS/00631-000401 ■JAN/4539940007177

■ 木製フラットボード

	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11BAR-B ■TAIS/00631-000382 ■JAN/4539940006590	P110-21BAR-B ■TAIS/00631-000392 ■JAN/4539940006897	P110-71BAR-B ■TAIS/00631-000402 ■JAN/4539940007191
ショートタイプ	P110-11BAS-B ■TAIS/00631-000382 ■JAN/4539940006583	P110-21BAS-B ■TAIS/00631-000392 ■JAN/4539940006880	P110-71BAS-B ■TAIS/00631-000402 ■JAN/4539940007184
ロングタイプ	P110-11BAL-B ■TAIS/00631-000382 ■JAN/4539940006606	P110-21BAL-B ■TAIS/00631-000392 ■JAN/4539940006903	P110-71BAL-B ■TAIS/00631-000402 ■JAN/4539940007207


■ 木製宮付ボード

	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11BBR-B ■TAIS/00631-000384 ■JAN/4539940006651	P110-21BBR-B ■TAIS/00631-000394 ■JAN/4539940006958	P110-71BBR-B ■TAIS/00631-000404 ■JAN/4539940007252
ショートタイプ	P110-11BBS-B ■TAIS/00631-000384 ■JAN/4539940006644	P110-21BBS-B ■TAIS/00631-000394 ■JAN/4539940006941	P110-71BBS-B ■TAIS/00631-000404 ■JAN/4539940007245
ロングタイプ	P110-11BBL-B ■TAIS/00631-000384 ■JAN/4539940006668	P110-21BBL-B ■TAIS/00631-000394 ■JAN/4539940006965	P110-71BBL-B ■TAIS/00631-000404 ■JAN/4539940007269


ポジショニングベッドシリーズ 仕様

背上げ1モーター


■ 樹脂ボード(木目調)

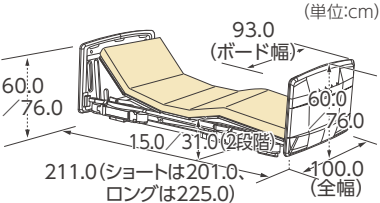

■ 木製フラットボード

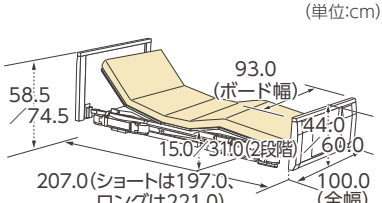


■ 木製宮付ボード

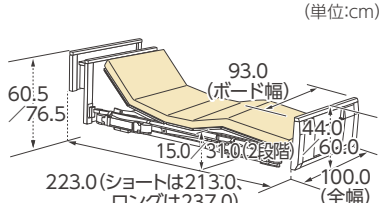


2モーター／3モーター


■ 樹脂ボード(木目調)

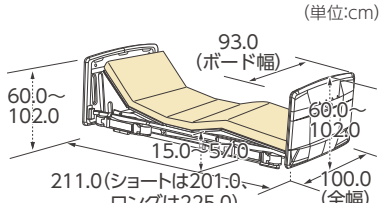

■ 木製フラットボード

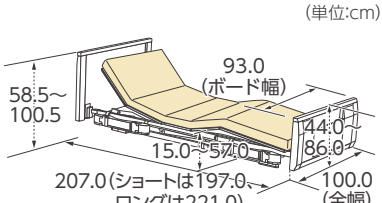

■ 木製宮付ボード

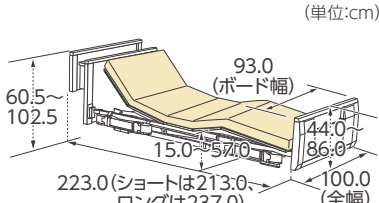

※床からベースフレームの間は1cmとなります。

■ ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

			背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
マットレス適合寸法			全長190.0～192.0cm(ショートタイプ182cm)、幅88.0～91.0cm		
質量	樹脂ボード(木目調)	レギュラータイプ	93.4kg	94.9kg	96.9kg
		ショートタイプ	92.9kg	94.4kg	96.4kg
		ロングタイプ	94.4kg	95.9kg	97.9kg
	木製フラットボード	レギュラータイプ	98.4kg	99.9kg	101.9kg
		ショートタイプ	97.9kg	99.4kg	101.4kg
		ロングタイプ	99.4kg	100.9kg	102.9kg
	木製宮付ボード	レギュラータイプ	104.4kg	105.9kg	107.9kg
		ショートタイプ	103.9kg	105.4kg	107.4kg
		ロングタイプ	105.4kg	106.9kg	108.9kg
バッテリー付の場合：+1.7kg					
梱包		7梱包(バッテリー付の場合:8梱包)			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂タイプ)PE樹脂 (木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装			
電動機能	ハイバック角度	20度			
	背上げ角度	70度			
	膝上げ角度	22度			
床面高		15.0／31.0cm(2段階)	15.0～57.0cm		
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		105W	165W		
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

ベッド高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド ラフィオ ベーシックベッドシリーズ



高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。
ベッドを下げる際は床面高が24cmになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。



省スペースに設置可能な垂直昇降機構


昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。

※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。




身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながら理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

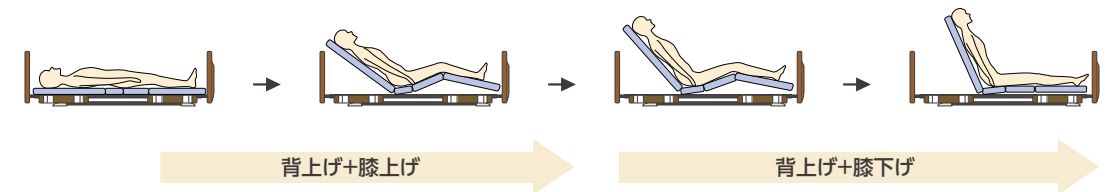

収納式サイドレールホルダー

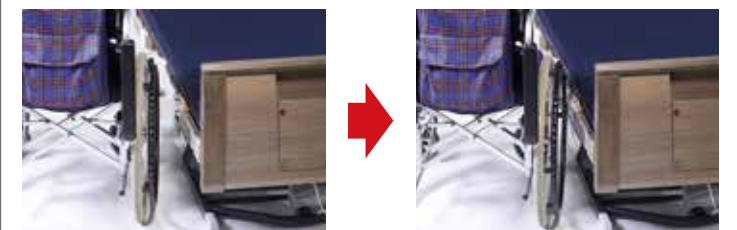

全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。

身長に合わせて選べるベッドサイズ

ボトムのみの変更でベッドのサイズをショート・レギュラー・ロングに変更できます。

※ロングタイプのベッドでサイドレールやベッド用グリップをご使用の際は、別売の「ロングタイプ対応スパーサー(P16)」が必要となります。



便利な収納ポケット

フットボードには収納ポケットが標準装備。取扱説明書や部品パックの保管に便利です。

※樹脂ボード(木目調)のヘッドボード・フットボードは共通です。




静音性・防水性にも優れたデンマーク LINAK社製モーターを搭載

静音性・防水性(IPX6)に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載(ハイバックモーターのみIPX4)。さらにお手入れがしやすくなりました。また、深夜でも気兼ねなくベッド操作が可能です。

※IPX6とは、全方向からの強い水の噴射に対応した防水規格・IPX4とは、全方向からの水の飛沫に対応した防水規格です。



持ちやすく使いやすいユニバーサルデザインの手元スイッチ

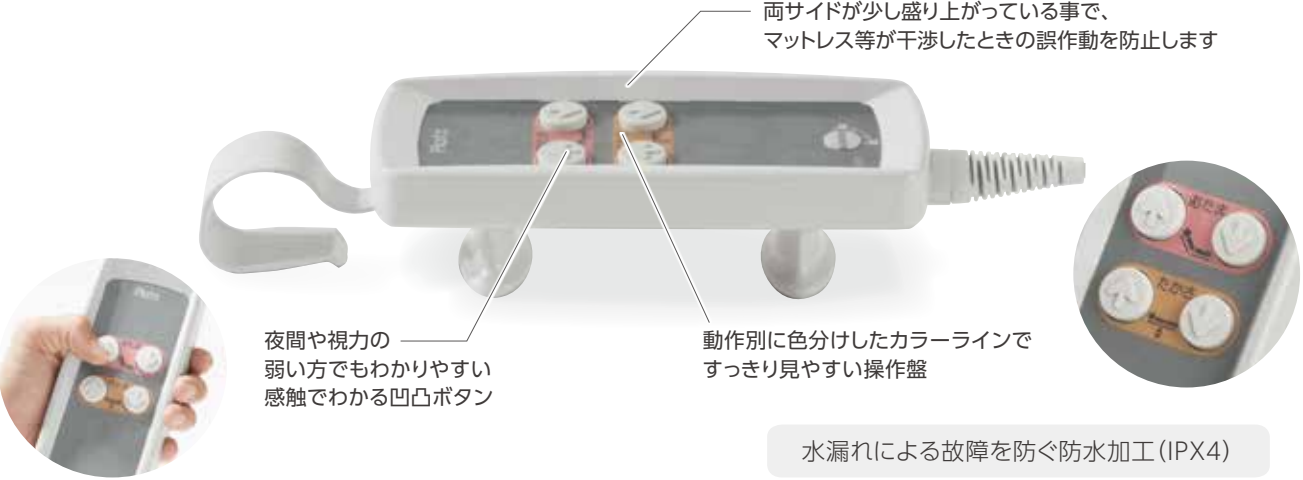

操作ロック機能

手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも保持しやすい

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指にひっかけて保持することができます。麻痺やリウマチの手でも握りやすく、使いやすい設計です。



サイドレールから落下しにくい

サイドレールにしっかりと掛けることができ、サイドレールの端までスライドしても落下しにくい形状です。



モータータイプ

1 モーター 背上げ1モーター

背上げ70° 背腰連動70°/22° 高さ調節(2段階)

2 モーター 2モーター

背上げ70° 背腰連動70°/22° 高さ調節

3 モーター 3モーター

背上げ70° 背腰連動70°/22° 膝上げ22° 高さ調節

※組立時に2段階の高さに設定できます。

ベーシックベッドシリーズ 型式

※価格はオープン価格です。**非課税**

■ 樹脂ボード(木目調)

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12ACR ■TAIS/00631-000326 ■JAN/4539940004916	P110-22ACR ■TAIS/00631-000336 ■JAN/4539940005210	P110-32ACR ■TAIS/00631-000346 ■JAN/4539940005517
ショートタイプ	P110-12ACS ■TAIS/00631-000326 ■JAN/4539940004909	P110-22ACS ■TAIS/00631-000336 ■JAN/4539940005203	P110-32ACS ■TAIS/00631-000346 ■JAN/4539940005500
ロングタイプ	P110-12ACL ■TAIS/00631-000326 ■JAN/4539940004923	P110-22ACL ■TAIS/00631-000336 ■JAN/4539940005227	P110-32ACL ■TAIS/00631-000346 ■JAN/4539940005524

■ 木製フラットボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12BAR ■TAIS/00631-000327 ■JAN/4539940004947	P110-22BAR ■TAIS/00631-000337 ■JAN/4539940005241	P110-32BAR ■TAIS/00631-000347 ■JAN/4539940005548
ショートタイプ	P110-12BAS ■TAIS/00631-000327 ■JAN/4539940004930	P110-22BAS ■TAIS/00631-000337 ■JAN/4539940005234	P110-32BAS ■TAIS/00631-000347 ■JAN/4539940005531
ロングタイプ	P110-12BAL ■TAIS/00631-000327 ■JAN/4539940004954	P110-22BAL ■TAIS/00631-000337 ■JAN/4539940005258	P110-32BAL ■TAIS/00631-000347 ■JAN/4539940005555

■ 木製宮付ボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12BBR ■TAIS/00631-000329 ■JAN/4539940005005	P110-22BBR ■TAIS/00631-000339 ■JAN/4539940005302	P110-32BBR ■TAIS/00631-000349 ■JAN/4539940005609
ショートタイプ	P110-12BBS ■TAIS/00631-000329 ■JAN/4539940004992	P110-22BBS ■TAIS/00631-000339 ■JAN/4539940005296	P110-32BBS ■TAIS/00631-000349 ■JAN/4539940005593
ロングタイプ	P110-12BBL ■TAIS/00631-000329 ■JAN/4539940005012	P110-22BBL ■TAIS/00631-000339 ■JAN/4539940005319	P110-32BBL ■TAIS/00631-000349 ■JAN/4539940005616

ラフィオ用バッテリー付

■ 樹脂ボード(木目調)

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12ACR-B ■TAIS/00631-000386 ■JAN/4539940006712	P110-22ACR-B ■TAIS/00631-000396 ■JAN/4539940007016	P110-32ACR-B ■TAIS/00631-000406 ■JAN/4539940007313
ショートタイプ	P110-12ACS-B ■TAIS/00631-000386 ■JAN/4539940006705	P110-22ACS-B ■TAIS/00631-000396 ■JAN/4539940007009	P110-32ACS-B ■TAIS/00631-000406 ■JAN/4539940007306
ロングタイプ	P110-12ACL-B ■TAIS/00631-000386 ■JAN/4539940006729	P110-22ACL-B ■TAIS/00631-000396 ■JAN/4539940007023	P110-32ACL-B ■TAIS/00631-000406 ■JAN/4539940007320

■ 木製フラットボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12BAR-B ■TAIS/00631-000387 ■JAN/4539940006743	P110-22BAR-B ■TAIS/00631-000397 ■JAN/4539940007047	P110-32BAR-B ■TAIS/00631-000407 ■JAN/4539940007344
ショートタイプ	P110-12BAS-B ■TAIS/00631-000387 ■JAN/4539940006736	P110-22BAS-B ■TAIS/00631-000397 ■JAN/4539940007030	P110-32BAS-B ■TAIS/00631-000407 ■JAN/4539940007337
ロングタイプ	P110-12BAL-B ■TAIS/00631-000387 ■JAN/4539940006750	P110-22BAL-B ■TAIS/00631-000397 ■JAN/4539940007054	P110-32BAL-B ■TAIS/00631-000407 ■JAN/4539940007351


■ 木製宮付ボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12BBR-B ■TAIS/00631-000389 ■JAN/4539940006804	P110-22BBR-B ■TAIS/00631-000399 ■JAN/4539940007108	P110-32BBR-B ■TAIS/00631-000409 ■JAN/4539940007405
ショートタイプ	P110-12BBS-B ■TAIS/00631-000389 ■JAN/4539940006798	P110-22BBS-B ■TAIS/00631-000399 ■JAN/4539940007092	P110-32BBS-B ■TAIS/00631-000409 ■JAN/4539940007399
ロングタイプ	P110-12BBL-B ■TAIS/00631-000389 ■JAN/4539940006811	P110-22BBL-B ■TAIS/00631-000399 ■JAN/4539940007115	P110-32BBL-B ■TAIS/00631-000409 ■JAN/4539940007412


ベーシックベッドシリーズ 仕様

背上げ1モーター


■ 樹脂ボード(木目調)

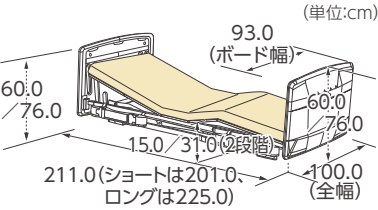

■ 木製フラットボード

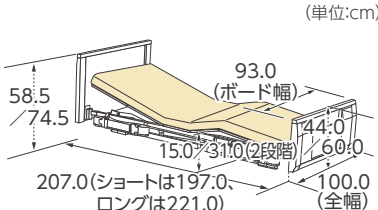


■ 木製宮付ボード

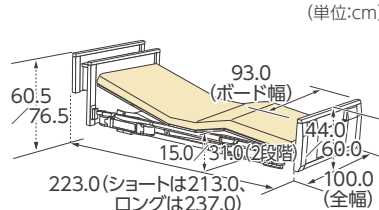


2モーター／3モーター


■ 樹脂ボード(木目調)

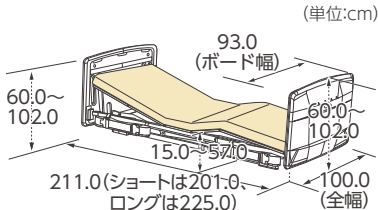

■ 木製フラットボード

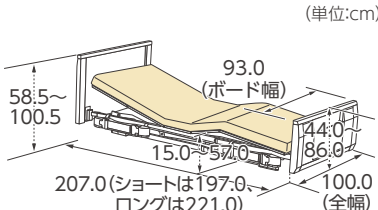

■ 木製宮付ボード

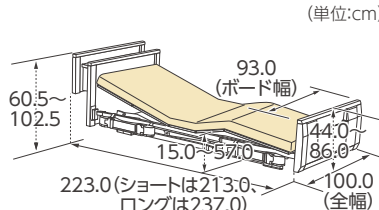

※床からベースフレームの間は1cmとなります。

■ ラフィオ ベーシックベッドシリーズ

			背上げ1モーター	2モーター	3モーター
マットレス適合寸法			全長190.0～192.0cm(ショートタイプ182cm)、幅88.0～91.0cm		
質量	樹脂ボード(木目調)	レギュラータイプ	88.4kg	89.9kg	91.4kg
		ショートタイプ	87.9kg	89.4kg	90.9kg
		ロングタイプ	89.4kg	90.9kg	92.4kg
	木製フラットボード	レギュラータイプ	93.4kg	94.9kg	96.4kg
		ショートタイプ	92.9kg	94.4kg	95.9kg
		ロングタイプ	94.4kg	95.9kg	97.4kg
	木製宮付ボード	レギュラータイプ	99.4kg	100.9kg	102.4kg
		ショートタイプ	98.9kg	100.4kg	101.9kg
		ロングタイプ	100.4kg	101.9kg	103.4kg
バッテリー付の場合：+1.7kg					
梱包		7梱包(バッテリー付の場合:8梱包)			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂タイプ)PE樹脂 (木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装			
電動機能	ハイバック角度	－			
	背上げ角度	70度			
	膝上げ角度	22度			
床面高		15.0／31.0cm(2段階)	15.0～57.0cm		
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		105W	165W		
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

専用オプション

※その他オプションはP17～P20をご覧ください。

超低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+0.5cmになります。
※人感センサー付フットライト、サイドテーブル、DC電源タイプの離床センサーはご使用できません。

PC01-5CK

■メーカー希望小売価格
23,000円(税別)
■TAISコード/00631-000461
■JANコード/4539940083157
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂

低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+8cmになります。

PC02-8CK

■メーカー希望小売価格
19,500円(税別)
■TAISコード/00631-000462
■JANコード/4539940083164
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組)



装着時の床面高は+8cmになります。
※キャスターとの併用はできません。

PH04-80

■メーカー希望小売価格
6,900円(税別)
■TAISコード/00631-000463
■JANコード/4539940083171
■材質/ABS樹脂

ラフィオ用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

PE06-BA19

■メーカー希望小売価格
20,000円(税別)
■JANコード/4539940083195
■質量/1.7kg

ロングタイプ対応スペーサー(サイドレール用)(1個入り)



ロングタイプのベッドをご使用の際にサイドレールの長さを延長します。

■メーカー希望小売価格
2,500円(税別)

PA505シリーズ用
PS02-PA505

■JANコード/4539940082822
■寸法/幅3.0×長さ17.0×高さ43.0cm
■材質/PP樹脂、PVC樹脂

BGシリーズ用
PS02-BG

■JANコード/4539940082815
■寸法/幅3.0×長さ17.0×高さ41.0cm
■材質/PP樹脂、PVC樹脂

ロングタイプ対応スペーサー(ベッド用グリップ用)(1個入り)



ロングタイプのベッドをご使用の際にベッド用グリップの長さを延長します。

■メーカー希望小売価格
2,500円(税別)

ニーパロⅡ用
PS03-PF500

■JANコード/4539940082846
■寸法/幅3.5×長さ17.5×高さ36.0cm
■材質/PP樹脂、PVC樹脂

ニーパロ用
PS03-AT116J

■JANコード/4539940082839
■寸法/幅3.5×長さ17.5×高さ34.0cm
■材質/PP樹脂、PVC樹脂

延長マットレス(固綿タイプ) 90cm幅



マットレスの長さを延長します。

PM08-90A

■メーカー希望小売価格
10,000円(税別)
■TAISコード/00631-000465
■JANコード/4539940061032
■寸法/幅90.0×長さ14.0×厚さ8.0cm
■質量/0.6kg
■材質/外カバー:中材:ポリエステル

延長マットレス(防水ウレタンタイプ) 90cm幅



マットレスの長さを延長します。

PM08-90B

■メーカー希望小売価格
10,000円(税別)
■TAISコード/00631-000466
■JANコード/4539940061049
■寸法/幅90.0×長さ14.0×厚さ8.0cm
■質量/0.5kg
■材質/外カバー:ポリウレタン
ラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム

人感センサー付フットライト



電源はベッドの電力を使用するため、電池や別のコンセントは必要ありません。
※超低床用キャスター装着時にはご使用できません。

PL01-5VL

■メーカー希望小売価格
オープン価格
■JANコード/4539940082501
■寸法/幅9.0×高さ6.0×奥行5.0cm
■材質/PC樹脂
■原産国/中国

ナースコールホルダー/万能フック

ナースコールやお薬カレンダー等を掛けすることができます。

PL-235

■メーカー希望小売価格
600円(税別)
■JANコード/4539940083188
■寸法/幅2.6×奥行2.4×高さ11.5cm
■材質/PP樹脂

酸素ボンベホルダー

ヘッドボード・フットボードに取り付けて、酸素ボンベを設置できます。


PE02-S1

■メーカー希望小売価格
オープン価格
■JANコード/4539940082778
■寸法/幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm
■質量/2.2kg
■材質/スチール

※点滴棒もご用意しています(受注生産)。詳しくはお問い合わせください。

サイドレール


■PA505シリーズ

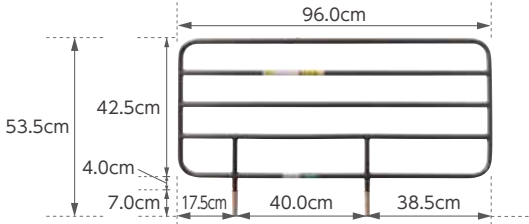

ロングサイドレール(2本組)

PA505-96 ■メーカー希望小売価格 **16,100円(税別)**


■TAISコード/00631-000232 ■JANコード/4539940082051
■質量/6.8kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム

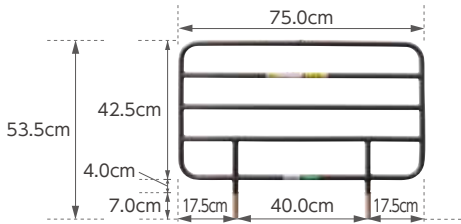

レギュラーサイドレール(2本組)

PA505-75 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**

■TAISコード/00631-000230 ■JANコード/4539940082020
■質量/5.4kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム

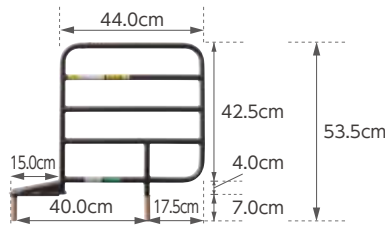

ショートサイドレール(2本組)

PA505-44 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**

■TAISコード/00631-000228 ■JANコード/4539940081986
■質量/4.5kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂
■原産国/ベトナム



安全カバー付 ロングサイドレール(2本組)

PA505-96S ■メーカー希望小売価格 **31,000円(税別)**

■TAISコード/00631-000233 ■JANコード/4539940082075
■質量/7.4kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:
ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PA505S-96(1枚入) ¥7,400(税別)



安全カバー付 レギュラーサイドレール(2本組)

PA505-75S ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**

■TAISコード/00631-000231 ■JANコード/4539940082044
■質量/5.9kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:
ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PA505S-75(1枚入) ¥7,400(税別)




安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)

PA505-44S ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**

■TAISコード/00631-000229 ■JANコード/4539940082013 ■質量/
4.8kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂 カバー:
ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PA505S-44(1枚入) ¥7,400(税別)

PF500、PA505シリーズは、乗り越え・転落防止対策として、従来品に比べレール高さを2cmアップし、より安全性を高めました。

※マットレスの厚さは18cmまで対応しています。

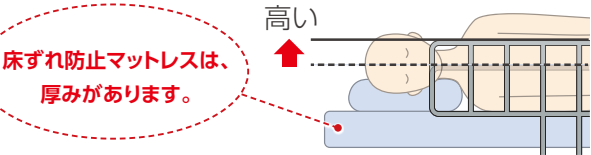

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セット(4本)まで非課税となります。

※旧タイプのPZR-116J、PZR-K900TAH、BG-53J、BG-500VN、BG-500VS、BG-1000V用の安全カバーもご用意しています。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

■BGシリーズ

ロングサイドレール(2本組)

BG-96J ■メーカー希望小売価格 **16,100円(税別)**

■TAISコード/00631-000150 ■JANコード/4539940081399
■寸法/幅96.0×高さ51.5cm ■質量/6.8kg(2本)
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム

レギュラーサイドレール(2本組)

BG-75J ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**

■TAISコード/00631-000151 ■JANコード/4539940081405
■寸法/幅75.0×高さ51.5cm ■質量/5.4kg(2本)
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム

ショートサイドレール(2本組)

PA500-FU44 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**

■TAISコード/00631-000202 ■JANコード/4539940081719
■寸法/幅59.0×高さ51.5cm ■質量/4.5kg(2本)
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂 ■原産国/ベトナム

※適合サイドレールの組み合わせについては、各商品の取扱説明書をご覧ください。

安全カバー付 ロングサイドレール(2本組)

BG-96JSN ■メーカー希望小売価格 **31,000円(税別)**

■TAISコード/00631-000168 ■JANコード/4539940081528 ■寸法/幅96.5
×高さ52.0cm ■質量/7.4kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ BGSN-96J1(1枚入) ¥7,400(税別)

安全カバー付 レギュラーサイドレール(2本組)

BG-75JSN ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**



■TAISコード/00631-000167 ■JANコード/4539940081535 ■寸法/幅75.5
×高さ52.0cm ■質量/5.9kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP
樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ BGSN-75J1(1枚入) ¥7,400(税別)

安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)

PA500-FU44SN ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**

■TAISコード/00631-000207 ■JANコード/4539940081740 ■寸法/幅59.5×
高さ52.0cm ■質量/4.8kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP
樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ BGSN-FU441(1枚入) ¥7,400(税別)

組み合わせ例

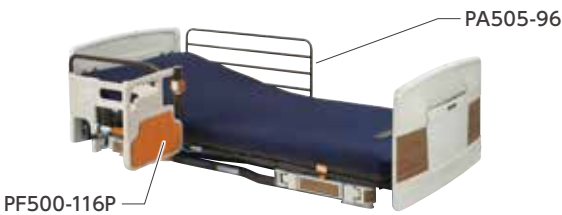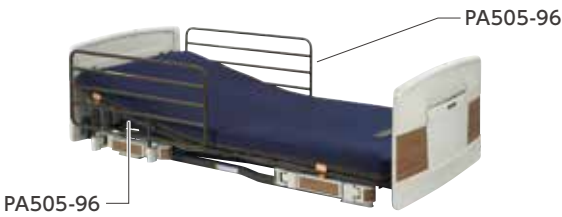


自動ロック式ベッド用グリップ ニーパロPⅡ

ノーリフト環境を実現する自動ロック式
ベッド用グリップ



01 安心で安全な立ち上がり・移乗をサポートする 安心ひざパッド ニーパロ・パッド

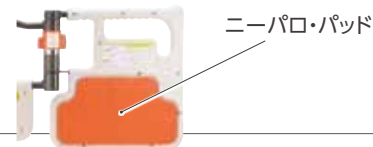

従来のベッド用グリップでは・・・

写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



安心ひざパッドがあると・・・



■ ずり落ちを予防します

膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。



■ 楽な立ちあがり

膝をパッドにあて腕を引くことで腰が浮きやすくなり、より少ない力で立ち上がることができます。



■ 立位を安定させます

腕・ひざ・足の3点で身体を支えるため、立位状態が安定しやすくなります。



■ 端座位時のずり落ちを予防

グリップ角度45度で使用すると、膝位置が固定できマットからのずり落ちを予防できます。



■ 移乗用具を安全に使用できます

トランスファーボードなど滑りやすい移乗用具を使用する際も「ひざ折れ」の心配がなく、安心して使用できます。

■ 後方介助を実現します

介助者の腰への負担が大きい「前方介助」から、腰への負担が少ない「後方介助」を安心して行うことが可能です。

02 ロック忘れによる事故を予防する 自動ロック方式(業界初)

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、「ニーパロⅡ」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。

(特許第4921535号)



03 握力の弱った方でも簡単にロックできる ユニバーサルデザインの解除ハンドル



指や手のひらで楽に解除できるユニバーサルデザインです。



仕様

■ ニーパロⅡシリーズ



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPⅡ」

PF500-116P ■メーカー希望小売価格 60,000円(税別)

■TAISコード/00631-000235 ■JANコード/4539940082112
■寸法/幅116.5×高さ52.0cm ■質量/9.2kg
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国/ベトナム



安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロPSⅡ」

PF500-116PS ■メーカー希望小売価格 68,600円(税別)

■TAISコード/00631-000246 ■JANコード/4539940082136
■寸法/幅116.5×高さ52.0cm ■質量/9.5kg
■材質/本体:スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PF500S-116 ■メーカー希望小売価格 8,600円(税別)

■ ニーパロシリーズ

パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロP」

PZR-AT116JHP ■メーカー希望小売価格 60,000円(税別)

■TAISコード/00631-000181 ■JANコード/4539940081658

安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロPS」

PZR-AT116JHPSN ■メーカー希望小売価格 68,600円(税別)

■TAISコード/00631-000182 ■JANコード/4539940081665

マットレス

サンキューポイントマットレス

ブレスエアーを採用した3層構造で
寝心地を追求したマットレス



撥水タイプ



透湿防水タイプ



ニューポイントマットレス

通気性を考慮したリバーシブルタイプのマットレス



スタンダードマットレス

背圧の軽減を考慮した2層構造のマットレス



撥水タイプ

■メーカー希望小売価格 **66,000円(税別)**

90cm幅	レギュラータイプ	PD500-TU8909
	■TAISコード/00631-000203 ■JANコード/4539940060769	
	ショートタイプ	PD505-A9009S
	■TAISコード/00631-000227 ■JANコード/4539940060844	

■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ192.0cm(ショート182.0cm)
■質量/8.5kg(ショート7.8kg) ■材質/外カバー:内カバー:ポリエステル 中材:
ウレタンフォーム、ポリエステル ■原産国/日本

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。

透湿防水タイプ

■メーカー希望小売価格 **78,000円(税別)**

90cm幅 レギュラータイプ PD501-TU8909

■TAISコード/00631-000222 ■JANコード/4539940060806
■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ192.0cm ■質量/8.5kg
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル
内カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム、ポリエステル ■原産国/日本

内カバーは取り外して洗濯が可能です。

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税別)**

90cm幅	レギュラータイプ	PKM-9080
	■TAISコード/00631-000161 ■JANコード/4539940060684	
	ショートタイプ	PD504-A9008S
	■TAISコード/00631-000226 ■JANコード/4539940060837	

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/7.5kg(ショート7.4kg) ■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。

■メーカー希望小売価格 **36,000円(税別)**

90cm幅 レギュラータイプ PKM-E80BR

■TAISコード/00631-000163 ■JANコード/4539940060721
■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量/6.2kg
■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

ユービーポイントマットレス

リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス



通気タイプ



防水タイプ



ビカムポイントマットレス

体圧分散ブロック構造とムレにくい
透湿防水カバーの床ずれ防止マットレス



通気タイプ

■メーカー希望小売価格 **36,000円(税別)**

90cm幅	レギュラータイプ	PM09-A9008
	■TAISコード/00631-000464 ■JANコード/4539940061056	
	ショートタイプ	PM09-A9008S
	■TAISコード/00631-000467 ■JANコード/4539940061063	

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.1kg(ショート5.9kg) ■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタン
フォーム ■原産国/ベトナム

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

防水タイプ

■メーカー希望小売価格 **36,000円(税別)**

90cm幅	レギュラータイプ	PD503-A9008
	■TAISコード/00631-000247 ■JANコード/4539940060851	
	ショートタイプ	PD503-A9008S
	■TAISコード/00631-000253 ■JANコード/4539940060868	

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.1kg(ショート5.9kg) ■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリ
エステル 中材:ウレタンフォーム ■原産国/ベトナム

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

■メーカー希望小売価格 **109,000円(税別)**

90cm幅 レギュラータイプ PD502-BP8914

■TAISコード/00631-000215
■JANコード/4539940060790
■寸法/幅90.0×厚さ14.0×長さ192.0cm
■質量/10.5kg
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル
内カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

その他、様々なベッド、マットレス、離床センサー等のオプションも取り揃えております。

詳しくは弊社ホームページ、または営業担当までお問合せください。
<http://www.platz-ltd.co.jp/>

QRコードからも
アクセスできます!





安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

PLATZ(プラッツ)製品カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- 発売予定時期は開発・製造の都合上、予告なく変更する場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
- 製品の価格に「**非課税**」の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故(例:当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ)
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元

株式会社 **プラッツ**

25th
PLATZ 25TH ANNIVERSARY
since 1992



挑戦します!
お客様の笑顔のために。

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL:092-584-3434 / FAX:092-584-3436

●北海道営業所

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102
TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

●東北営業所

〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29
ホワイトアーバンシティ102
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108
オフィス・クロンドビル1F
TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701

■関西支店・関西ショールーム

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアパードビルディング2F
TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107

●中四国営業所

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

Facebookプラッツオフィシャルページ

<http://www.facebook.com/PlatzJapan>

■ご意見・ご質問等は

iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは