


取扱説明書

木付きサイドレール

PA504-PR743Y

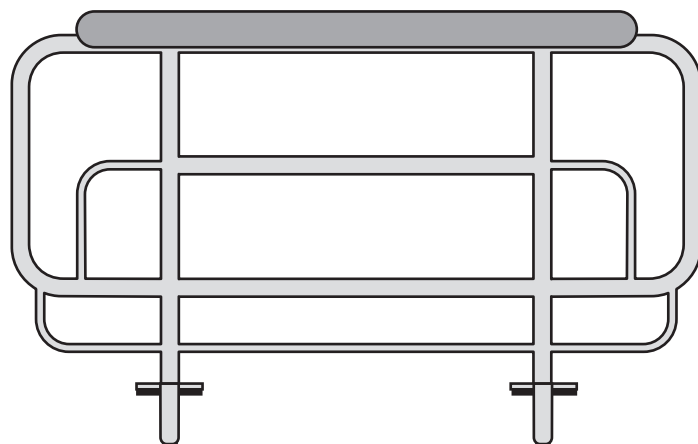

この度は、当商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」は、取り付け・ご使用前に必ずお読みいただき正しくご使用いただきますようお願い致します。

- 介護が必要な方がお使いになる場合は、介護する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- お買い上げの商品は改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

保証書別添え

商品名
型 式



木付き
サイドレール
PA504-PR743Y

株式会社 **プラッツ**

目次と適合ベッド

目次	ページ
■目次・適合ベッド・使用目的……………	1
■安全にご使用いただくための注意事項……………	2～3
■各部の名称・商品の確認……………	4
■ベッドへの取り付け方法……………	5
■適合ベッド型式……………	6
■商品の仕様、お手入れ……………	7
■保証とアフターサービス……………	8
■メモ……………	9～10

適合ベッド

(ケアレットシリーズの以下の機種にお使いいただけます)
P108-11 シリーズ、P200-11 シリーズ、P201-1K シリーズ

使用目的

サイドレールは、ベッドからの転落防止および、マット等の落下防止を目的としております。
それ以外の用途ではご使用にならないようお願い致します。

安全にご使用いただくための注意事項

安全にご使用いただくために（必ずお守りください）

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や他の人々への危害や財産への阻害を未然に防止する為に、色々な絵表示をしております。下記をよくお読みいただき、内容をよく理解してから正しくお使いください。



警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。



注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■絵表示の例



禁止

この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



注

この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。




ご使用前・ご使用上の警告と注意



禁止

商品の上に腰掛けたり、ぶら下がったり、商品を持ってベッドを移動させたりするなどの無理な力を加えるような使い方はしないでください。


●破損や事故の原因になります。

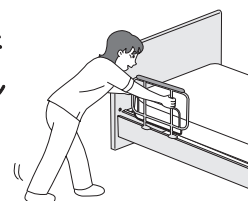

禁止

当社商品以外のベッドに取り付けての使用をしないでください。弊社が指定する適合品以外の商品とは組み合わせないでください。

●破損や事故の原因になります。

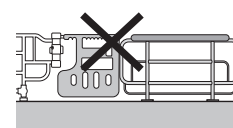

禁止

分解や改造はしないでください。


●破損や事故の原因になります。



注

ご自身での操作が困難な方がベッドを使われる場合、付添いの方がベッド操作をしてください。

●操作ミスは、怪我や事故の原因となります。

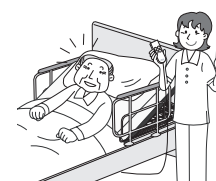


⚠️ ご使用上の警告と注意



禁止

ストーブなどの火気類に商品を近づけ過ぎないでください。

●火災や変色・変形の原因になります。

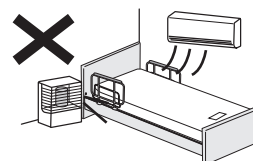


禁止

体の一部（頭、腕、足）をサイドレールから出さないでください。また出した状態でベッドの背・ひざ上げ操作をしないでください。

●骨折など、怪我をする恐れがあります。


安全に使用していただくためにサイドレール用安全カバーを別売りにてご用意しております。

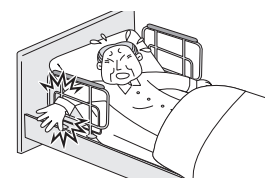

禁止


本体の「指はさみ注意」シールを貼ってある周囲に手をおかないでください。

●骨折など、怪我の原因になります。

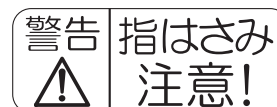

体位変換（寝返り等）の際に転落の危険性があるのでマット面からレールの上まで 22 cm 以上を確保してください。

●怪我や事故の原因になります。

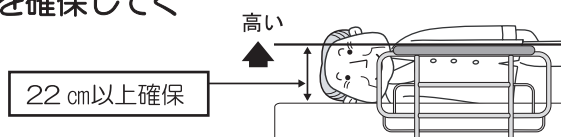


ベッドの背上げ・ひざ上げ操作時は、商品に体の一部や手元スイッチコードをはさまないように注意してください。

●破損や事故の原因になります。


重要なお知らせと注意事項

本商品と組み合わせ不適合なサイドレールを使用されますと「危険なすき間」が発生します。

不適合商品との組合せは、けがや重大事故の原因になりますのでご注意ください。

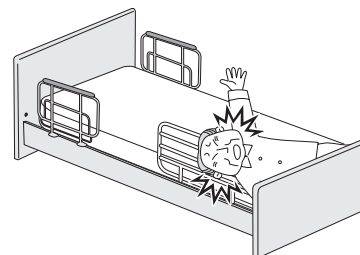


各部の名称

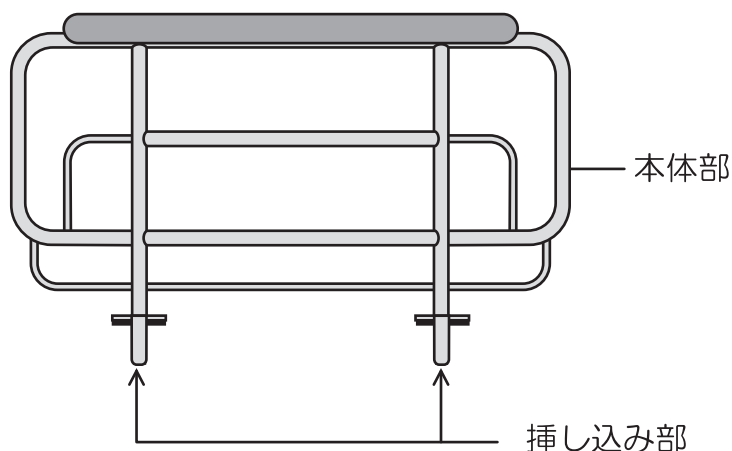


商品の確認

- 開梱した時点で商品がすべて同梱されているか、また、破損していないか確認してください。
万一不足や破損があった場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

■取扱説明書……………1冊

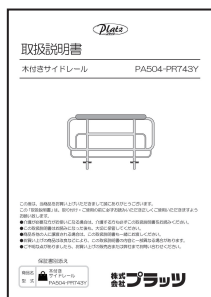

■木付きサイドレール……………2本

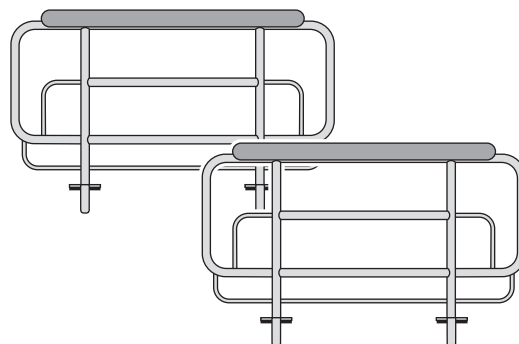


■保証書……………1枚




ベッドへの取り付け方法

サイドレール挿し込み部をサイドレール取り付け穴に挿し込みます。サイドレールの取り付け位置は下図をご覧ください。頭側と中央、脚側と中央には同時に取り付けはできません。

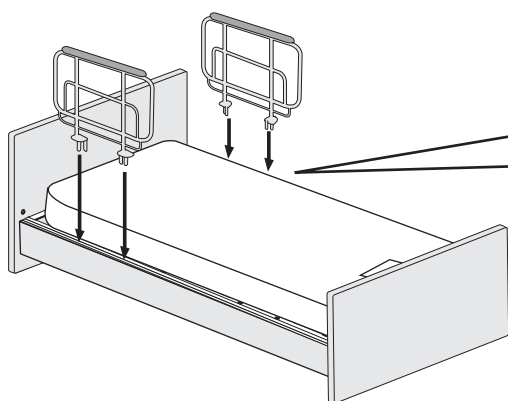


P108-11 シリーズに取り付けた場合
(PA504-PR743Y、2本取り付け)

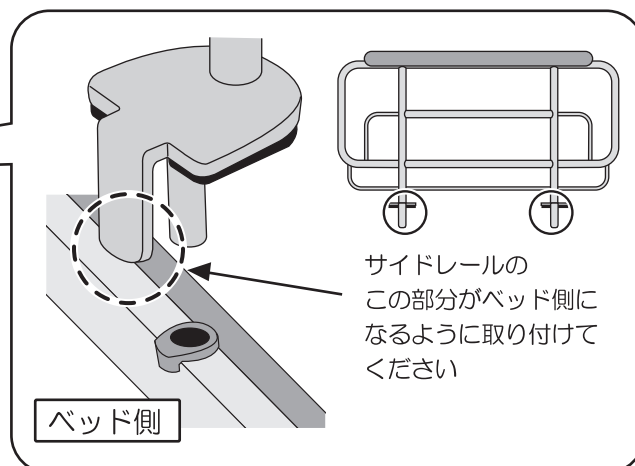


※サイドレールはベッドの左右どちらにも取り付け可能です。
適合ベッド以外に取り付けないでください。


●頭側への取り付け

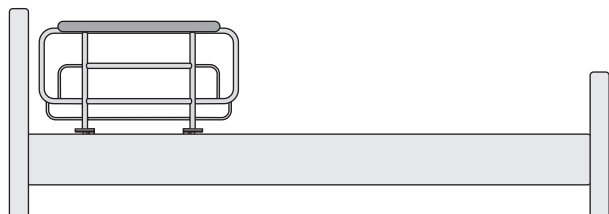


●足側への取り付け

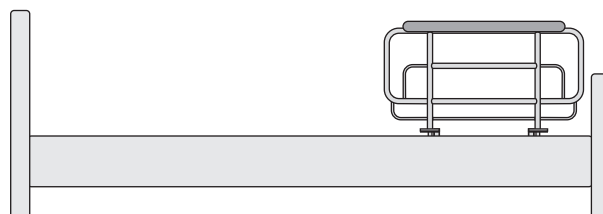

●中央への取り付け

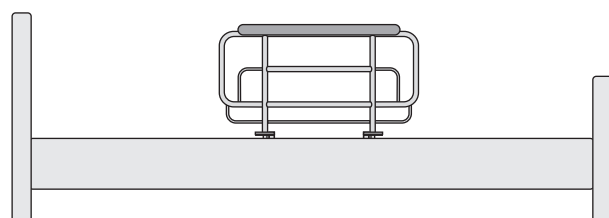


●頭側と足側への取り付け

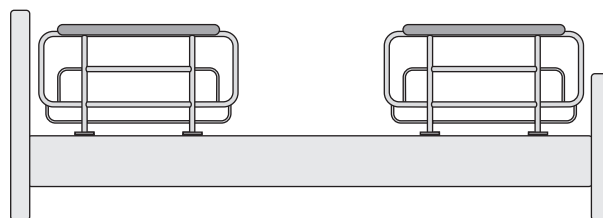

適合ベッド型式

サイドレール型式	ベッド型式
PA504-PR743Y	P108-11 シリーズ、 P200-11 シリーズ、 P201-1K シリーズ

商品の仕様

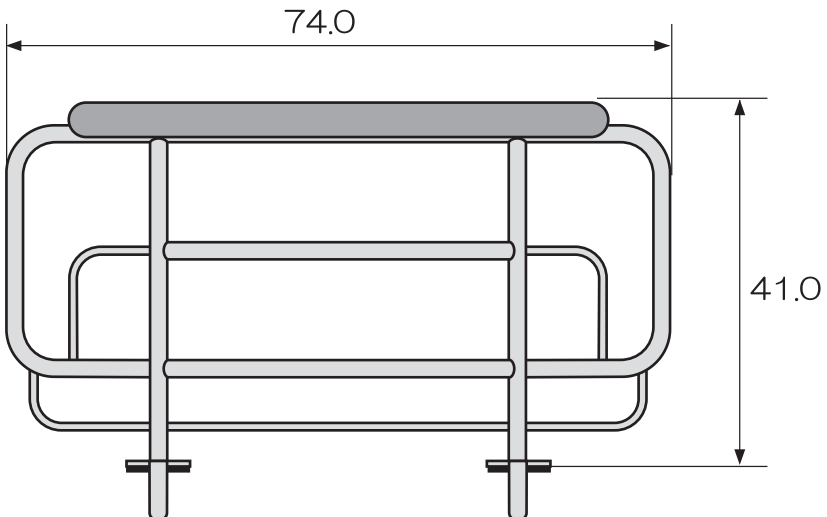型 式	PA504-PR743Y	
商品名	木付きサイドレール	
サイズ	 (単位：cm)	
梱包サイズ 梱包質量 (本体質量)	79.0×55.0×8.5 cm	8.5 kg (7.0 kg / 2 本組み)
原産国	中国	

お手入れについて

○お手入れ

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
清拭する場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- ベンジン・シンナー・アセトン・磨き粉等は使用しないでください。
(塗装が剥がれたり、樹脂部品が破損する恐れがあります。)
- シールが剥がれないようご注意ください。



保証とアフターサービス

よくお読みください

- サービスを依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読みください。
それでも異常がある場合は、お買い上げの販売店か下記フリーアクセスまでご連絡ください。




0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

ご連絡いただきたい内容

- ・商品名及び型式
- ・故障内容(出来るだけ詳しく)
- ・ご住所/お名前/お電話番号
- ・お買い上げ日
- ・お買い上げの販売店

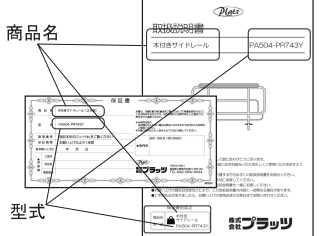

保証書(別添付)

お買い上げ日/販売店/お名前を必ず記入し、保証書の内容をよくお読みになって大切に保管してください。(※保証書の再発行はいたしません。)

保証期間について

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。但し、保証期間内でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。

保証期間を過ぎている場合

修理及び部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理いたします。

修理代について

- 修理代は、部品代、出張費、技術料で構成されます。
- 部品代…修理で使用した部品代です。
 - 出張費…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生する費用です。
 - 技術料…商品の診断・故障箇所の修理等の作業にかかる費用です。

※注：お買い上げ時の送り状等を保管いただくことをおすすめします

プラッツネットワーク

■本 社	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目8-39	TEL:092-584-3434
■関東支店	〒105-0014 東京都港区芝2丁目16-9	TEL:03-5427-8033
■東海支店	〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社 3丁目108	TEL:052-704-2700
■関西支店	〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4-2F	TEL:06-6233-2105
■九州支店	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目8-39 (本社内)	TEL:092-584-3433
●東北営業所	〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29	TEL:022-781-7072
●中四国営業所	〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6	TEL:084-946-6000
●北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102	TEL:011-807-4750

●MEMO●

[illegible]

●MEMO●

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

