




# 取扱説明書

レギュラーサイドレール(2本組)

BG-75J

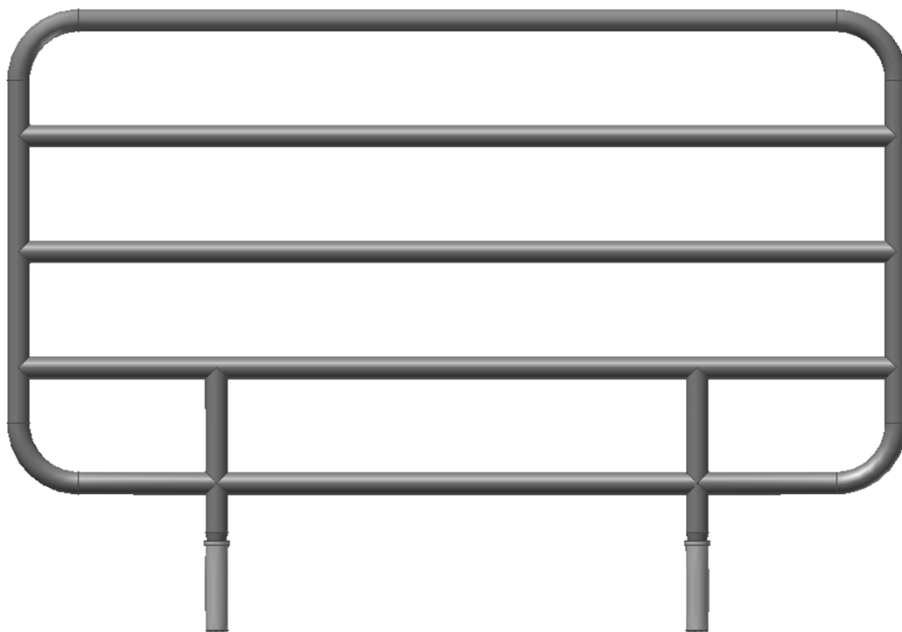

この度は、当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
この「取扱説明書」は、取り付け・ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願い致します。

- 介護が必要な方がお使いになる場合は、介護する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

## 目次・適合ベッド・使用目的

### 目次

	ページ
目次・適合ベッド・使用目的	1
安全にご使用いただくための注意事項	2~3
各部の名称、商品の確認	4
ベッドへの取り付け方法	5
各種サイドレールとの組み合わせについて	6
商品の仕様、お手入れ	7
保証とアフターサービス	8
メモ	9~10

### 適合ベッド

**PZB-M(1・2・3)J シリーズ**  
**PZB-ES1JFA**  
**P100 シリーズ**  
**P110 シリーズ**

### 使用目的

サイドレールは、ベッドからの転落防止および、マット等の落下防止を目的としておりますのでそれ以外の用途ではご使用にならないようお願い致します。

## 安全にご使用いただくための注意事項

### 安全にご使用いただくために（必ずお守りください）

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使い頂き、ご利用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、色々な絵表示をしております。下記をよくお読み頂き、内容をよく理解してから正しくお使いください。



#### 警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。



#### 注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### ■ 絵表示の例



禁止

この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



この記号は、気をつけて頂きたい「注意喚起」の内容です。

### 警告



禁止

身体の不自由な方や、意思表示できない方がご使用になる時は、付き添いの方が取り付けて下さい。

● 取り付けミスは大きな事故につながります。



禁止

商品の上に腰掛けたり、ぶら下がったり、商品を持ってベッドを移動させたりするなどの無理な力を加えるような使い方はしないでください。

● 破損や事故の原因になります。




禁止

当社製以外のベッドに取り付けて使用しないでください。

当社が指定する適合品以外の商品とは組み合わせないでください。

● 破損や事故の原因になります。

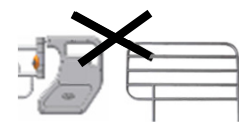

禁止

分解や改造はしないでください。

● 事故の原因になります。




## 警告




ストーブなどの火気類に商品を近づけ過ぎないでください。  
●火災や変色・変形の原因になります。

禁止

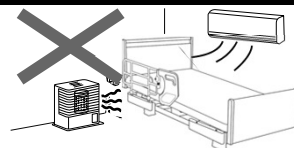


隙間から頭や手足などを出さないでください。  
●怪我や故障の原因になります。

禁止

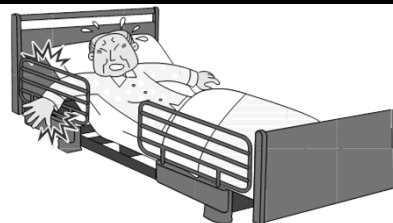

本体の「指はさみ注意」シールを貼ってある周囲に手をおかないで下さい。  
●骨折など怪我の原因になります。


禁止

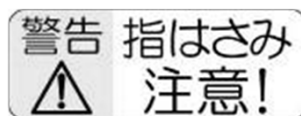

体位変換(寝返り等)の際に転落の危険性があるのでマット面からレールの上まで22cm以上を確保してください。  
●怪我や事故の原因になります。

禁止

220mm以上確保

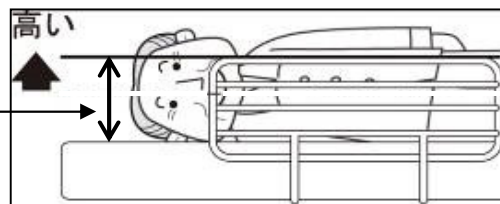


## 注意




ベッドの背上げ・ひざ上げ操作時は、商品に体の一部や手元スイッチコードをはさまないように注意してください。  
●破損や事故の原因になります。

### 重要なお知らせと注意事項

本商品と組み合わせ不適合なサイドレール、ベッド用グリップを使用されますと、「危険な隙間」「干渉」が発生します。サイドレール、ベッド用グリップと組み合わせて使用される場合は、各ベッド本体の取扱説明書をご参照ください。不適合商品との組み合わせは怪我や重大事故の原因になりますのでご注意ください。

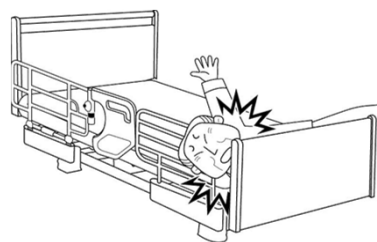

## 各部の名称

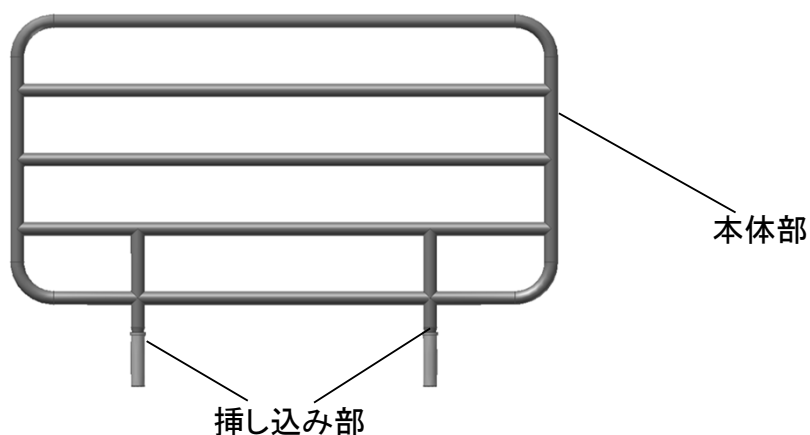

## 商品の確認

- 開梱した時点で、商品がすべて同梱されているか、また、破損していないかを確認してください。万一、不足や破損があった場合は販売店または弊社までご連絡ください。


### ■ 取扱説明書……1冊




### ■ 保証書……1枚




### ■ 本商品……2本

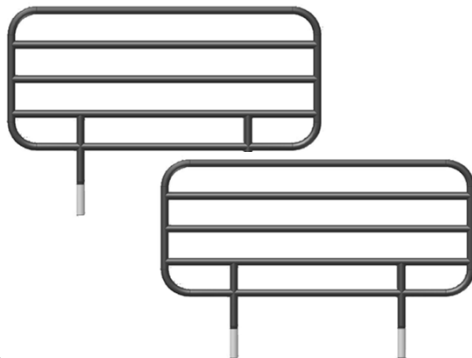

## ベッドへの取り付け方法

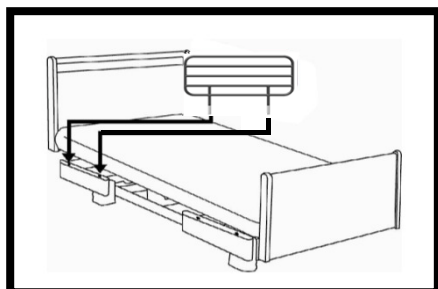

サイドレール挿し込み部をベッドサイドフレームのホルダー(穴)へ挿し込みます。

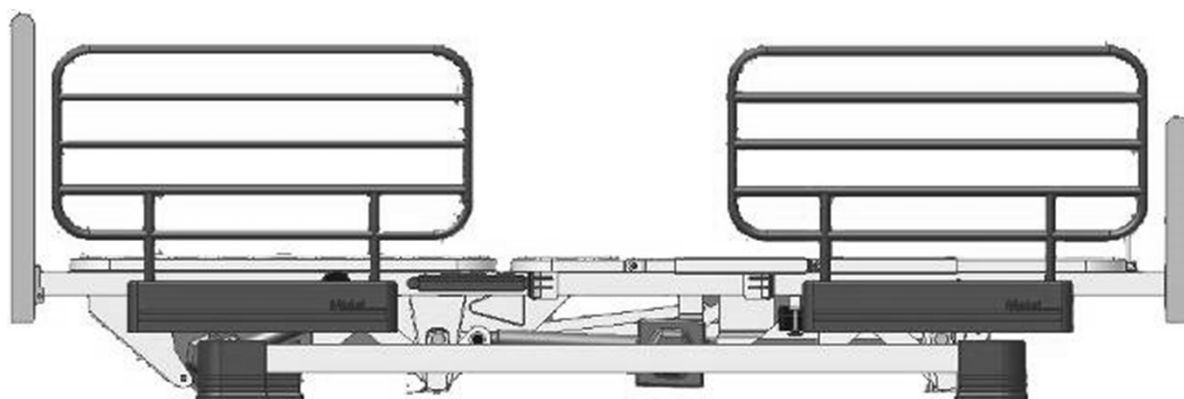

※ミオレットに装着したとき(BG-75J、2本装着)

備考

・サイドフレームの左右どちらにも取り付け可能です。


## 各種サイドレールとの組み合わせについて

●本商品と各種サイドレールとの組み合わせを行う場合は、危険な隙間が発生しないように組み合わせてください。


※組み合わせの詳細につきましては、各ベッド本体の取扱説明書をご参照ください。

### 重要なお知らせと注意事項

本商品と組み合わせ不適合なサイドレール、ベッド用グリップを使用されますと、「危険な隙間」「干渉」が発生します。サイドレール、ベッド用グリップと組み合わせで使用される場合は、各ベッド本体の取扱説明書をご参照ください。**不適合商品との組み合わせは怪我や重大事故の原因になりますのでご注意ください。**

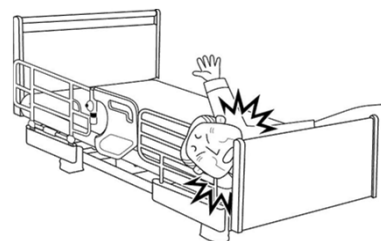

## 商品の仕様

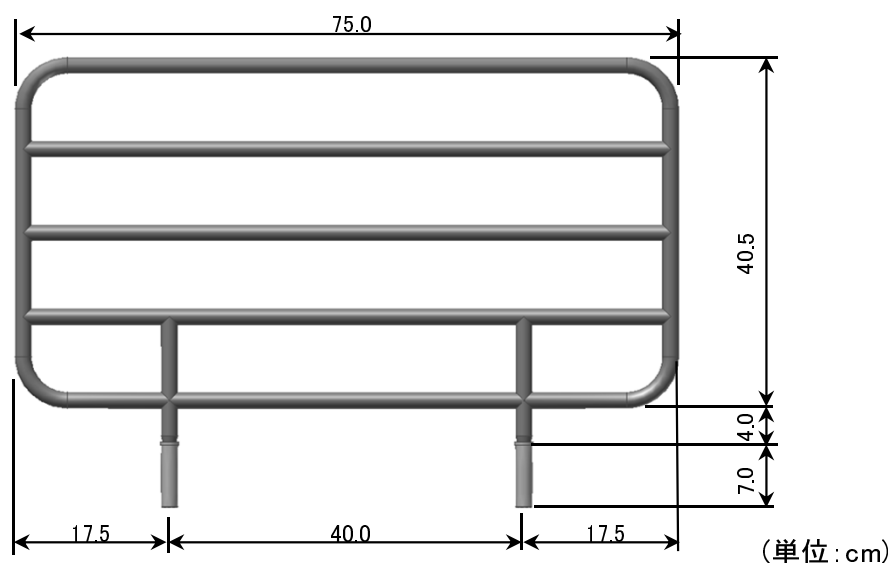型式	BG-75J
商品名	レギュラーサイドレール(2本組)
寸法	 <p>(単位: cm)</p>
梱包サイズ	78.0 × 53.0 × 5.5 ( cm )
梱包重量 (本体重量)	約 6.6kg ( 約 5.4kg /1set)
原産国	ベトナム

## お手入れ

### ●お手入れ

- ・乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・清拭する場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って残った洗剤を拭き取ってください。最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- ・ベンジン・シンナー・アセトン・磨き粉等は使用しないでください。塗装が剥がれたり、樹脂部品が破損する恐れがあります。
- ・シールが剥がれないようご注意ください。





## 保証とアフターサービス

- サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読みください。  
それでも異常がある場合は、お買い上げの販売店か下記フリーアクセスまでご連絡ください。

**0120-77-3433**  
フリーアクセス  
携帯・PHS・OK  
《平日 午前9時～午後5時30分》  
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

ご連絡いただきたい内容

- ・ 商品名及び型式
- ・ 故障内容（できるだけ詳しく）
- ・ ご住所 / お名前 / お電話番号
- ・ お買い上げ日
- ・ お買い上げの販売店

- 保証書（別添付）** お買い上げ日/販売店/お名前を必ず記入し、保証書の内容をよくお読みになって大切に保管してください。（※保証書の再発行は致しません。）
- 保証期間について** 保証期間はお買い上げ日から1年間です。  
保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理致します。但し、保証期間内でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。
- 保証期間を過ぎている場合** 修理及び部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理致します。
- 修理代について** 修理代は、部品代、出張費、技術料で構成されます。
  - 部品代…修理で使用した部品代です。
  - 出張費…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生する費用です。
  - 技術料…商品の診断・故障箇所の修理等の作業にかかる費用です。

※注：お買い上げ時の送り状等を保管いただくことをおすすめします

### プラッツネットワーク

■本社	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目3-17	TEL:092-584-3434
■関東支店	〒105-0014 東京都港区芝2丁目16-9	TEL:03-5427-8033
■東海支店	〒465-0093 愛知県名古屋市中区一社3丁目108	TEL:052-704-2700
■関西支店	〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4-2F	TEL:06-6233-2105
■九州支店	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目3-17（本社内）	TEL:092-584-3433
●東北営業所	〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29	TEL:022-781-7072
●中四国営業所	〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6	TEL:084-946-6000
●北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102	TEL:011-807-4750







株式会社 **プラッツ**

〒816-0921  
福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

'16.11月 作成

NP0158-Z