

停電時の背下げ操作方法

停電時に背ボトムを手動で下げる方法です。



※作業時は、ご利用様は必ずベッドから降りていただき、作業を行ってください。

※電源プラグはコンセントから抜いてください。

※安全のため、作業は2人以上で行ってください。


①ご利用様と寝具を
ベッドから降ろします

②背ボトムを手で上げて
ください
作業は背ボトムを手で
支えて行ってください

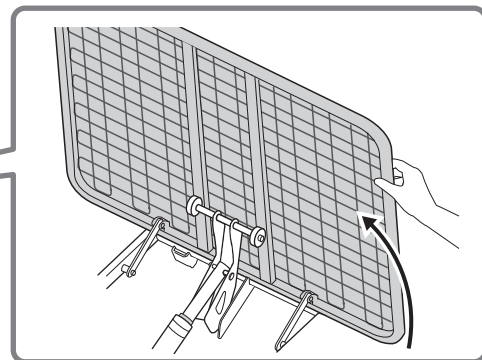
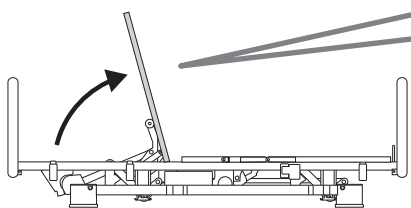


③背上げモーター先端の
割りピンとピンを
外してください

ピン先端の穴から
割りピンを抜きます

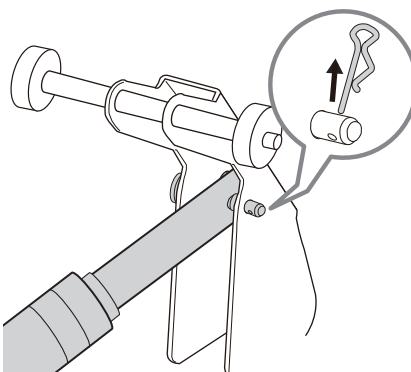

モーターから
ピンを抜きます

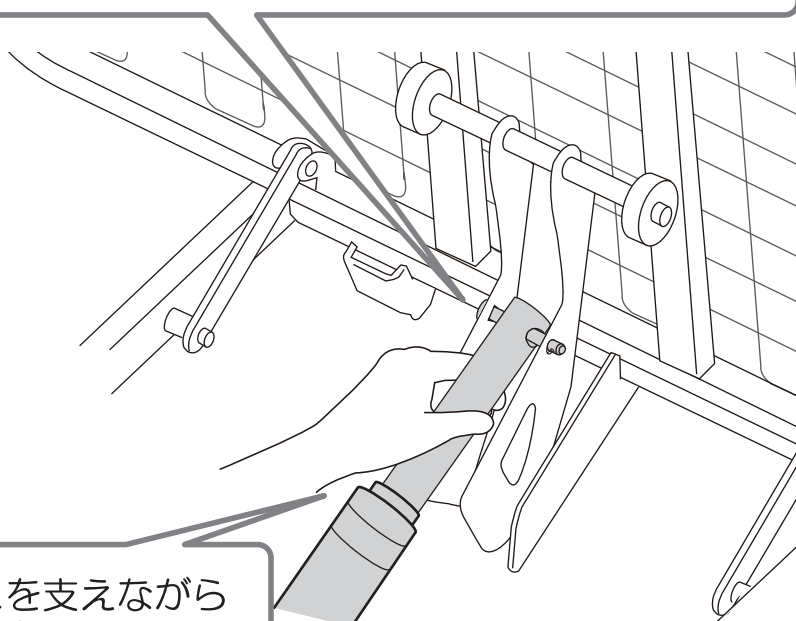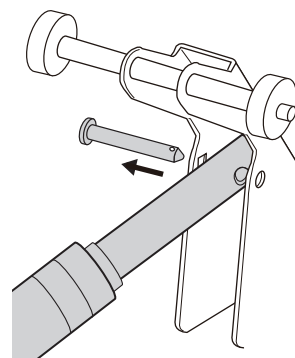



ここを支えながら
ピンを
外してください

警告

安全のため
作業は2人以上で
行ってください


停電時の背下げ操作方法

- ④ 背上げモーター根元側のピンと割りピンを抜いてください

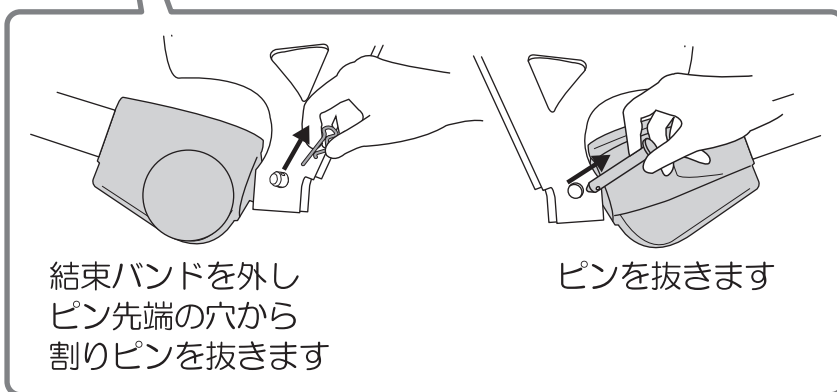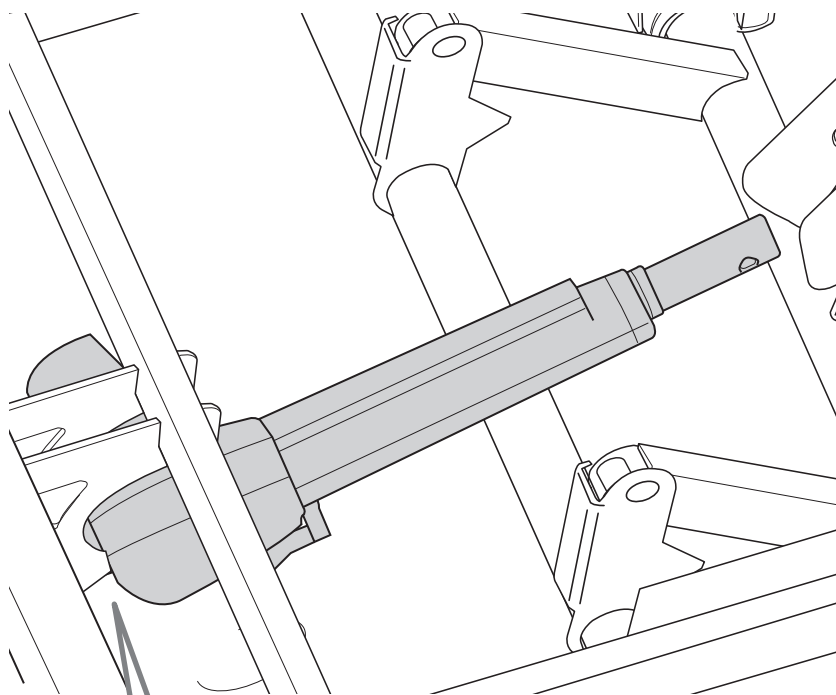


- ⑤ 背上げモーターを
ヘッドフレームから
外します

- ⑥ 背ボトムを下ろします

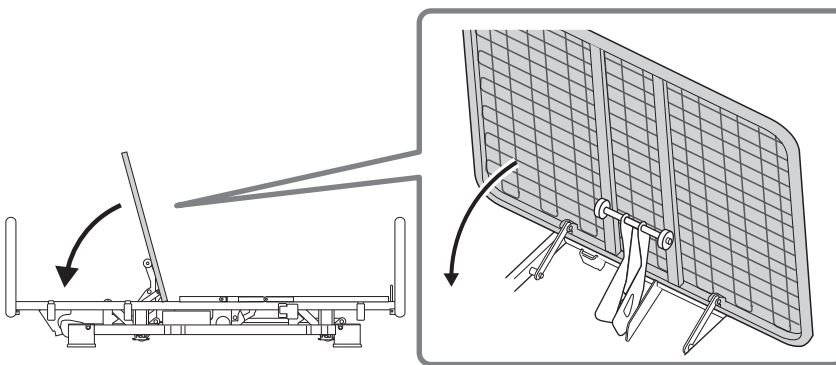

⚠ 警告

安全のため
作業は2人以上で
行ってください

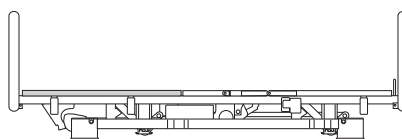

電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください
外した割りピンとピンは、背ボトムを元に戻す際に使用しますので保管しておいてください

停電時の注意②

背下げ操作方法