
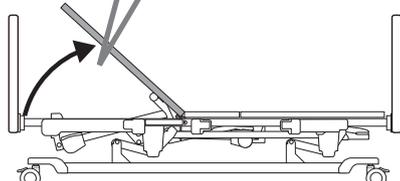


停電時の背下げ方法

※作業時は、必ずご利用様はベッドから降りていただき作業を行ってください。
 ※電源プラグはコンセントから抜いてください。※危険防止のため、作業は2人以上で行ってください。

①ご利用様と寝具をベッドから降ろし、作業は背ボトムを手で支えて行ってください。

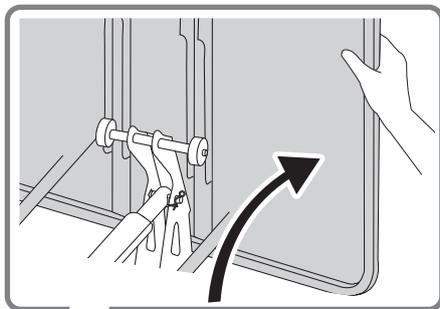


警告



安全のため作業は2人以上で行ってください

②背上げモーター先端のピンを外してください。

ピン先端の穴から抜け止めピンを抜きます。


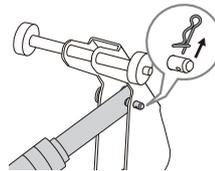


モーターからピンを抜きます。

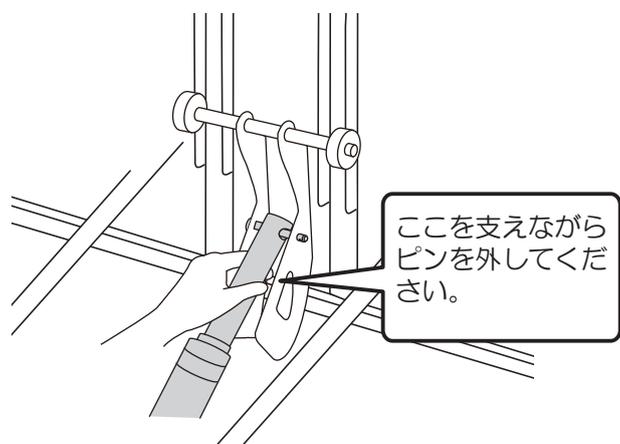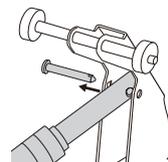


ここを支えながらピンを外してください。

③背上げモーター根元側のピンと割りピンを外してください。


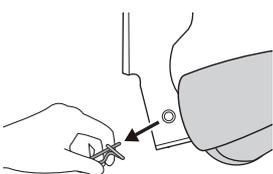
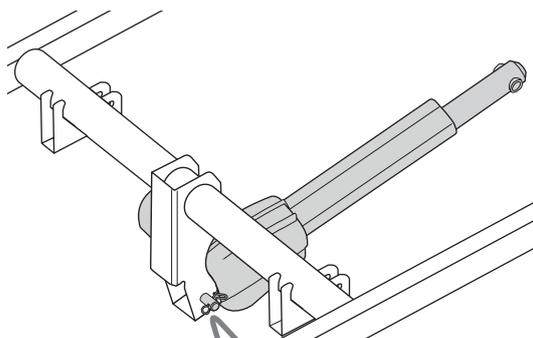


ピン先端の穴から抜け止めピンを抜きます。

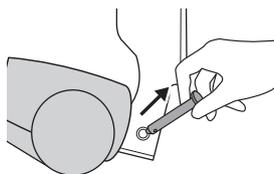

ピンを抜きます。

④背上げモーターをヘッドフレームから外します。
 ⑤背ボトムを下ろします。

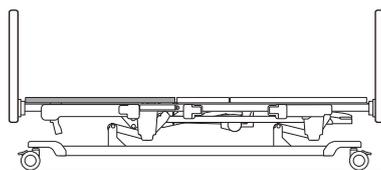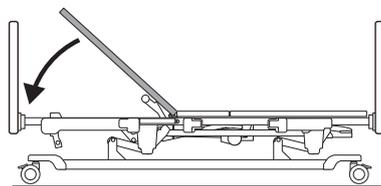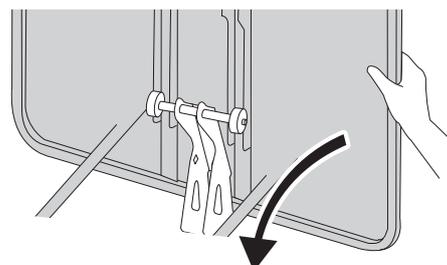

電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください。
 外したピンと抜け止めピンは背ボトムを元に戻す際に使用しますので、保管しておいてください。
 ※停電時はオプションのバッテリーを使用して、背下げをおこなうことができます。