


ケアレットシリーズ/停電時の背下げ操作方法


※作業時は、必ずご利用様はベッドから降りていただき、作業を行ってください。
※プラグはコンセントから抜いてください。
※危険防止のため、作業は2人で行ってください。

1モーター仕様の場合


- ①ご利用様と寝具をベッドから降ろし、作業は背ボトムと背上げローラー部を手で支えて行ってください。

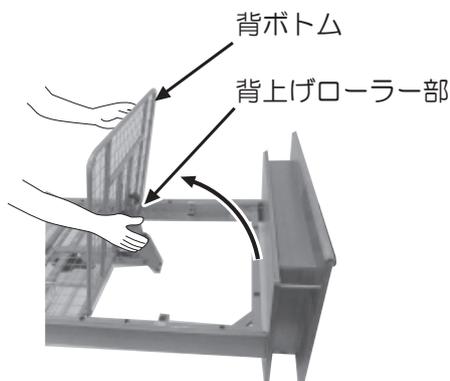



- ②モーターの先端のナットをスパナで緩め、ボルトを外してください。

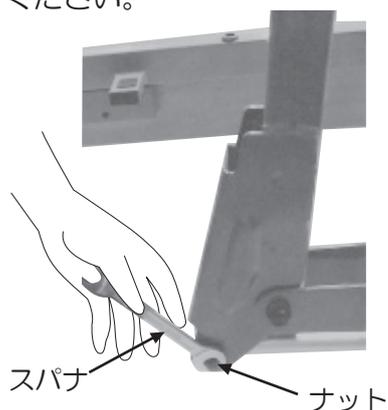

ボルトを抜く際は、モーター先端で床を傷つけない様に手で支えて作業してください

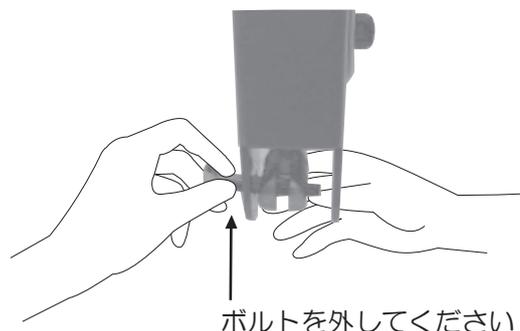

- ③下図のように背上げローラー部が降りることを確認して、背ボトムを水平にしてご使用ください

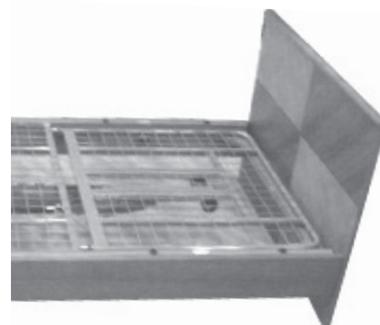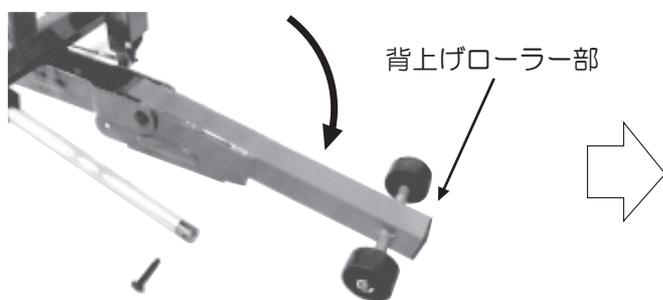



電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください。
外したボルトとナットは背ボトムを元に戻す際に使用しますので、保管しておいてください。

ケアレットシリーズ/停電時の背下げ操作方法


1+1モーターの場合

停電時に備え、本体ユニットのモーターに乾電池取り付け用コードが付いています。停電時、手元スイッチのボタン操作で背・脚部を下げることができます（上げることはできません）。必要とされる場合は、市販のアルカリ乾電池9V形をご購入のうえ、下図のように取り付けてください。

■乾電池取り付け方法

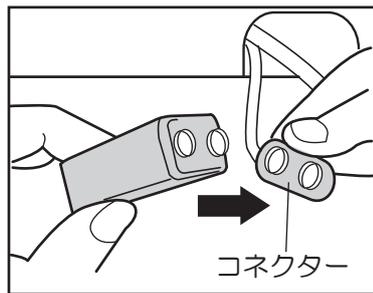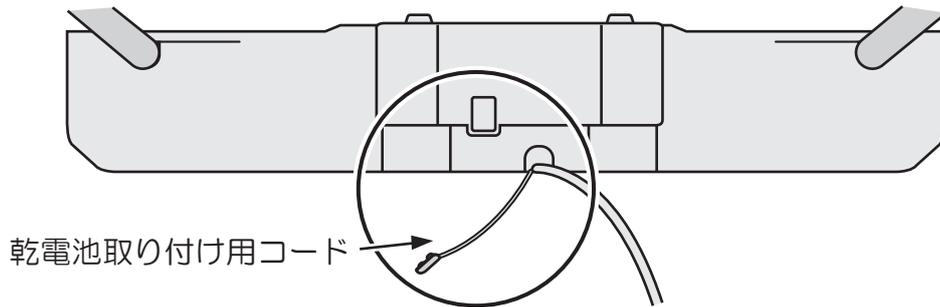

①非常用乾電池（市販のアルカリ乾電池9V形）の＋と－を正しくセットします。

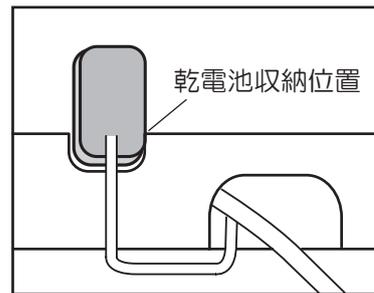

②非常用乾電池（市販のアルカリ乾電池9V形）をモーターユニットの乾電池収納位置に収納します。

注意

非常用乾電池（市販のアルカリ乾電池9V形）は1回の使用となります。乾電池は使用後に取り外してください。一般的に長時間取り付けたままにしておくと発熱、液もれ、破裂の恐れがあります。大変危険ですので、取り付けたままにしないでください。なお、乾電池の使用推奨期間は必ず守ってください。

お問い合わせ先

株式会社プラッツ お客様相談室 電話：092-584-3433