

医療・介護ベッド安全普及協議会の安全パンフレットの補足資料

新聞やTV報道でもありましたが、医療・介護ベッドにおいて2002年以降37名の方がお亡くなりになられており、消費者庁、厚労省より注意喚起が出され、医療介護ベッド安全普及協議会より安全パンフレットが配布されています。

この資料は、過去に販売した弊社製ベッドの「危険なすき間」に関する資料で、上記の「安全パンフレット」の補足資料として作成致しましたので、現在ご利用のベッドの確認をお願いします。

ご不明な点がございましたら、販売店もしくは弊社宛ご連絡下さい。
安全対策へのご協力をお願い申し上げます。

電話問い合わせ先:0120-77-3433 担当:野中



株式会社プラッツ
品質管理部長 宮崎孝憲

●隙間対策

①逆付け厳禁(全機種)


下図の様に逆に取り付けて使用する場合、危険な隙間が発生しやすくなります。

図1の様にベッド用グリップ(介助バー)のグリップ部をヘッド・フットボード側に設置しないで下さい。
図2の様にボード側にすき間を作らないようにして下さい。

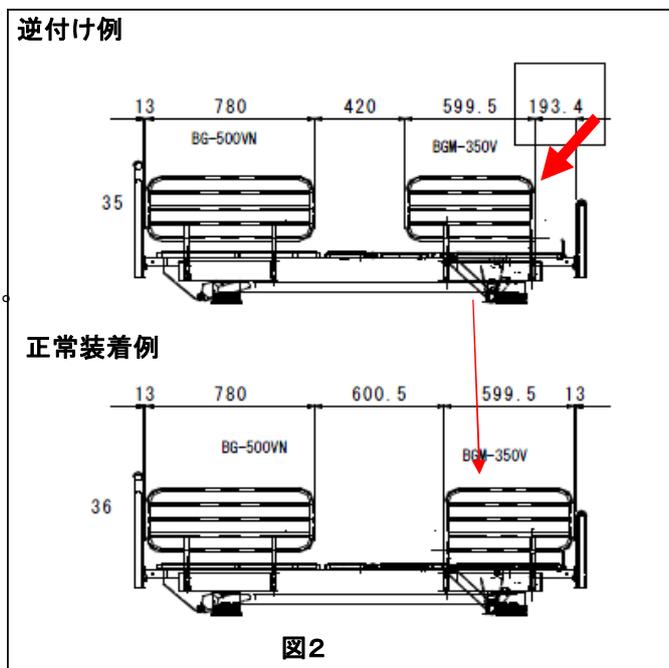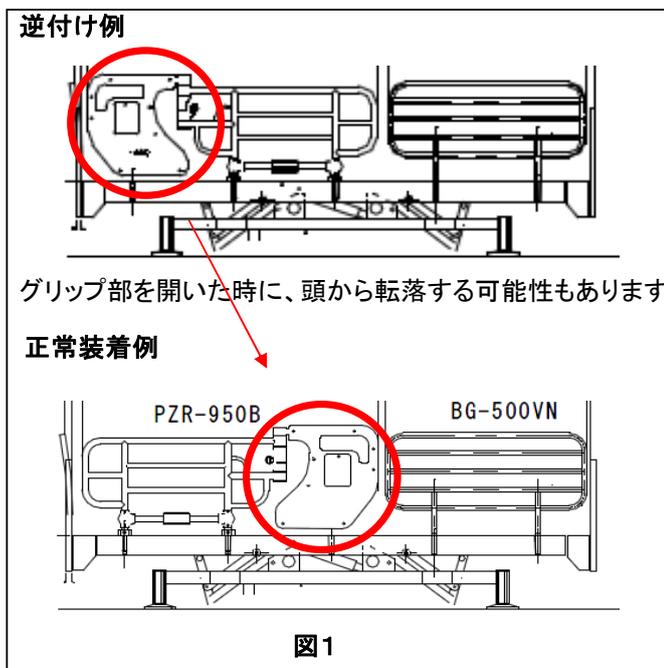

②レギュラーサイズのベッドにショートサイズのサイドレールを組み合わせないで下さい。(ピカムJrを除く全機種)

図3のように首を挟む危険な隙間が発生します。また、上記の逆付けにもご注意下さい。

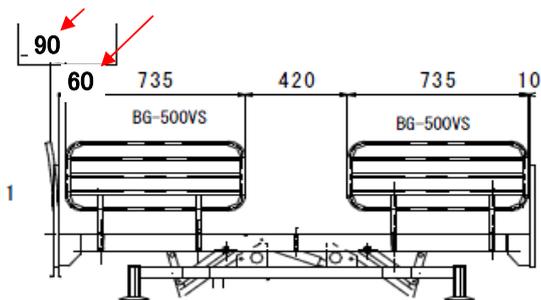

対策
●レギュラーサイズのサイドレールに交換して下さい。

③旧ベッド用グリップ(介助バー)の注意事項

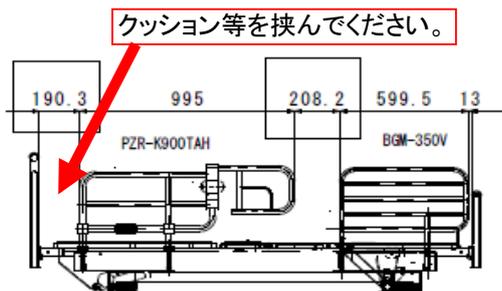


図4

旧タイプのPZR-K900からPZR-K900TAHについては、図4の様に、ボードとの間に体を挟み込むすき間が発生しますので、下記のいずれかの対策をお願いします。


- クッションを挟み込む。

もしくは

- PZR-116(J)、AT116J(ニーパロ)に交換する。
PZR-AT116Jは12月発売予定です。
メーカー希望小売価格:51,450円

④ベッド全機種

④-1.首挟みを懸念される組み合わせ(ピカムJrを除く)

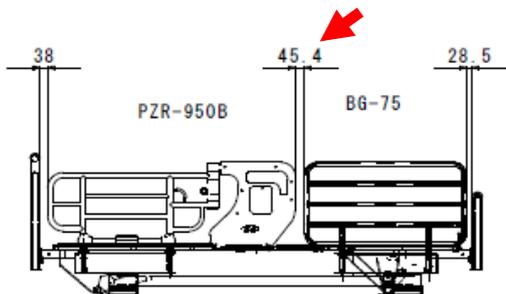


対策

- PZR-950Bを、PZR-950V、PZR-116J、PZRAT116J(ニーパロ)へ交換して下さい。

もしくは


- BG-75(J)を、BG-500VNへ交換して下さい。

④-2.身体の挟み込みを懸念する組み合わせ

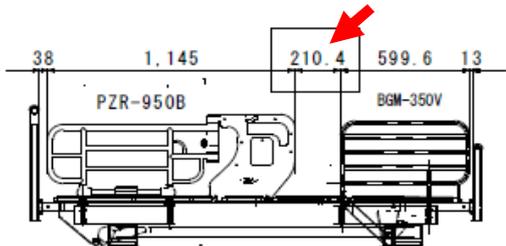

対策

- BG-350VをBG-53Jへ交換して下さい。

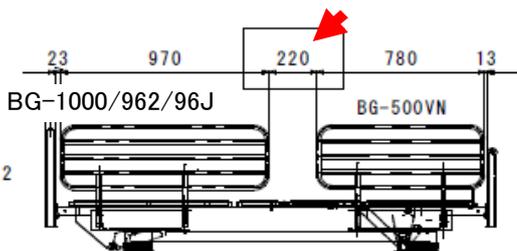



対策

下記のいずれかの対策をお願いします。

- BG-1000V/962/96Jを、BG-500VN/BG-350V/BG-75(J)/BG-53(J)へ

もしくは

- BG-500VNを、BG-350V/BG-53(J)へ交換して下さい。

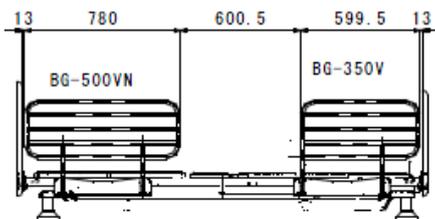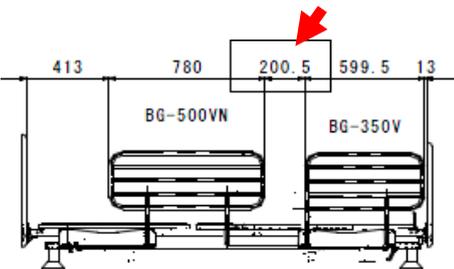


対策

- 上図の様に頭側に移動して下さい。
ベッドからの転落を懸念される場合は、BG-500VNをBG-1000V/BG-96(J)へ交換して下さい。


⑤アルティレット、PKB-7/8/9、GHBの場合

⑤-1.首挟みを懸念される組み合わせ

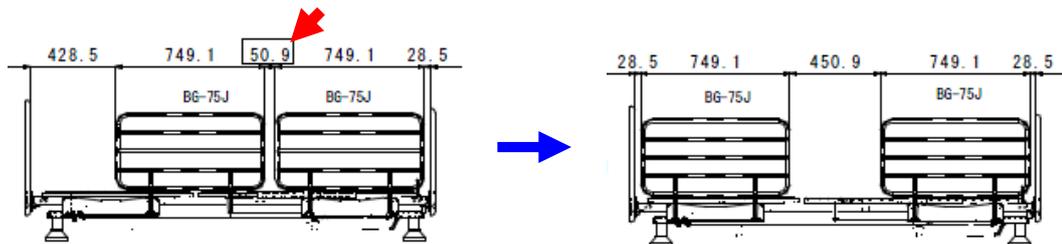

対策


●上図の様に、レールをボード側へ移動して下さい。
 ベッドからの転落を懸念される場合は、BG-75JをBG-96(J)へ交換して下さい。

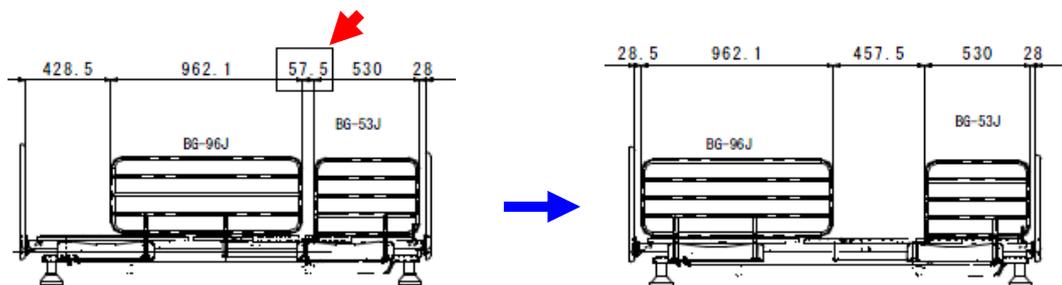

対策

●上図の様に、レールをボード側へ移動して下さい。
 ベッドからの転落を懸念される場合は、BG-53JをBG-75(J)へ交換して下さい。

⑤-2.身体の挟み込みを懸念する組み合わせ

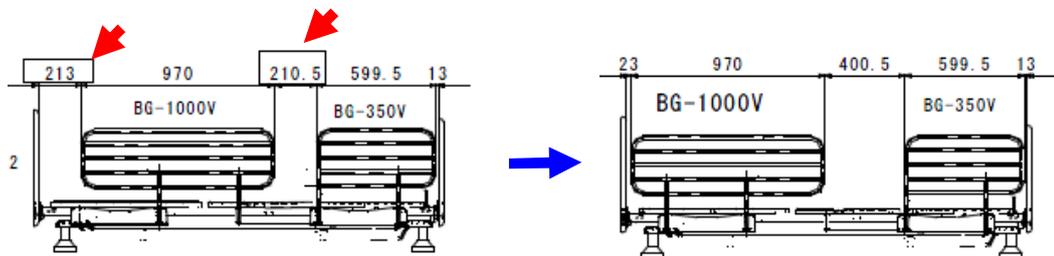


対策

●上図の様に、レールを移動して下さい。
 ベッドからの転落を懸念される場合は、BG-350VをBG-1000V/BG-96(J)へ交換して下さい。

⑥ビカムシリーズの場合


⑥-1.首挟みを懸念される組み合わせ

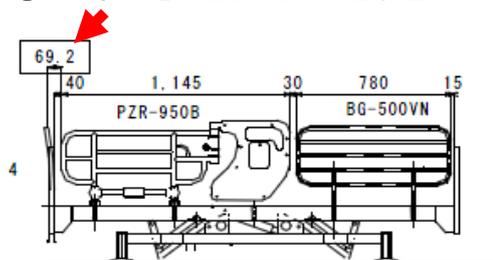

対策

- クッション等ですき間を埋めて下さい。

PZR-AT116Jでも約60mmのすき間が発生します。

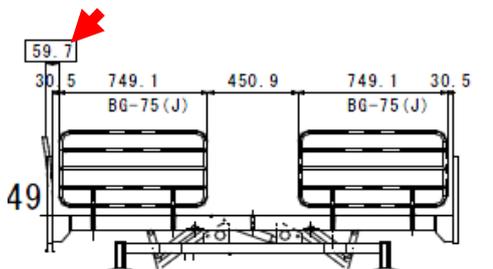

対策

- ビカムシリーズの頭側にJIS対応のレール(全種)を挿すと左図のようなすき間が発生しますので、ビカムと同時期に発売してました下記レールと交換をお願いします。

BG-53J > BG-350V


BG-75J > BG-500VN

BG-96J > BG-1000V

- もしくは、クッション等ですき間を埋めて下さい。

⑦ビカムJrの場合

⑦-1.首の挟みこみ、身体を挟み込む組み合わせ

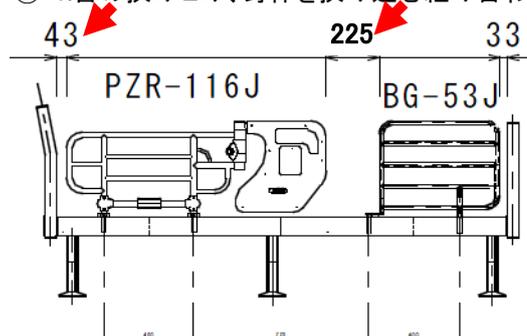

対策

- ビカムJrに合うベッド用グリップは、PZR-AT116J(ニーパロ)のみです。


PZR-K950B/116(J)をPZR-AT116J(ニーパロ)に交換して下さい。

もしくは、クッション等ですき間を埋めて下さい。

- JIS規格(235mm以上)よりも10mm狭くなってます。体を挟み込む懸念がありますのでBG-53Jを抜いて下さい。

もしくは、常にベッド用グリップを開いた状態にして下さい。

⑦-2.

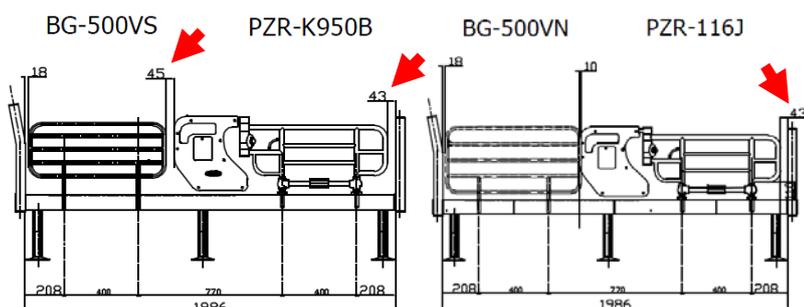


対策

- ⑦-1の対応後、BG-500VS か BG-75(J)をご利用下さい。

●レールに頭や手足を挿し込んだ骨折事故への対応策


⑧旧ベッド用グリップの頭挿入対策

[対象型式]
 PZR-K900-G
 PZR-K900-W
 PZR-K900T-G
 PZR-K900T-W
 PZR-K900TA-G
 PZR-K900TA-W
 (P7参照)

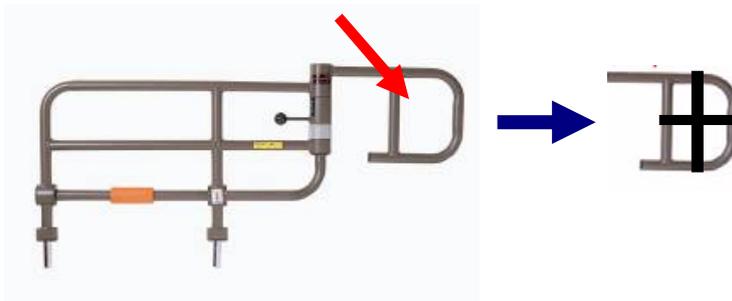

上図の矢印部分に頭が入る可能性がありますので、対象商品をお使いの方は、無償配布しております「十字ベルト」の装着をお願いします。

⑨手足の挿入対策

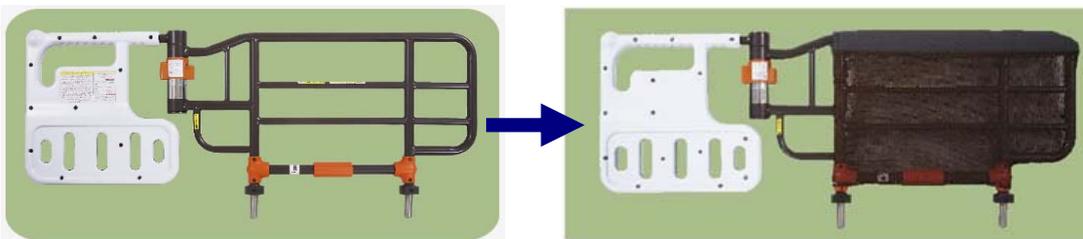

右図のような手足の挿入時の事故対策のための安全カバーを各種ご用意しております。

【対応機種】(P7参照)

サイドレール類: 500VN、1000V、350V、75(J)、53(J)、96(J) 定価13650円(2枚組み)

ベッド用グリップ類: 950B、116(J)、AT116J 定価7875円




●衣服の絡みつき対策

⑩ロックレバー突起対策樹脂

PZR-K900T~K900TAH(P8参照)において、グリップのロック用レバーに衣服が絡みつき死亡する事故が発生しています。

これに対して、下記のような円形樹脂を無償配布していますので未装着の方は取り付けをお願いします。

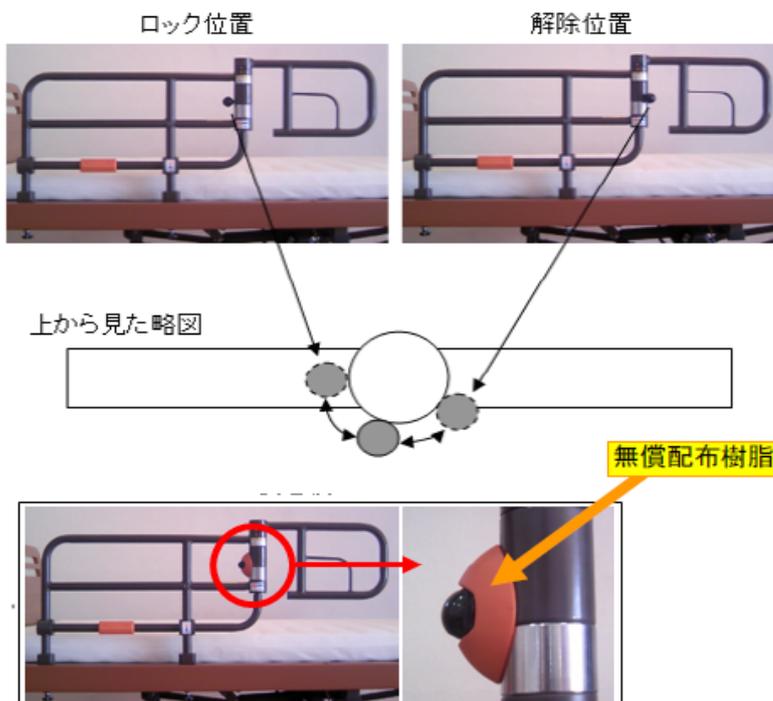

●ベッド用グリップのグリップ部の固定忘れによる転倒対策

⑪回転ロックレバーのダブルロック樹脂


回転ロックをし忘れて立ち上がろうとすると固定されていない為、転倒の原因になります。

回転ロック後にこの樹脂でカバーすることでロック忘れを予防します。⑩ロックレバー突起対策樹脂と合わせて対策をお願いします。

有償配布品：メーカー希望小売価格1260円(税込み)




自動ロック式ベッド用グリップ PZR-AT116Jは、上記の事故対策として開発されました。
自動ロックによりロック忘れによる手挟み・転倒事故を予防します。
発売時期：2010年12月
メーカー希望小売価格：51,450円

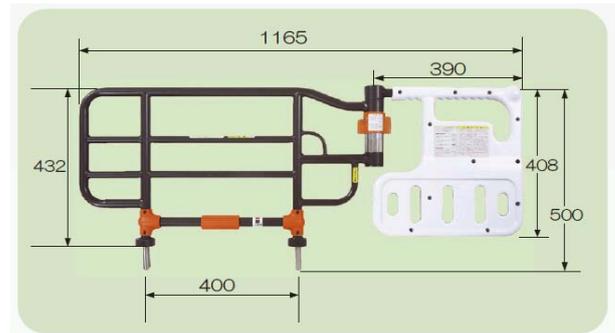

自動ロック式ベッド用グリップ PZR-AT116J/ニーパロ



機種別寸法表

サイドレール類

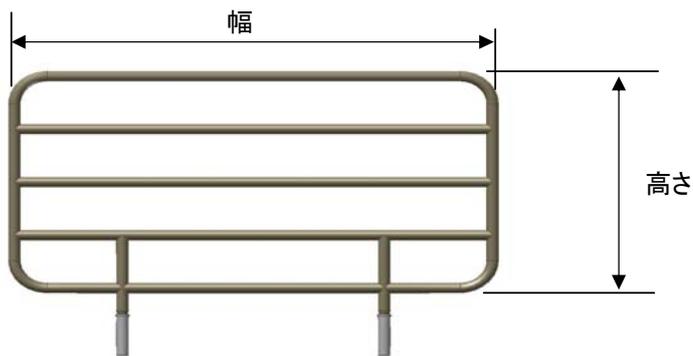


型式	幅	高さ
BG-500	780	310
BG-1000	970	310
BG-500VN	780	310
BG-1000V	970	310
BG-350V	599.5	310
BG-75(J)	749.2	403
BG-96(J)	962.1	403
BG-53(J)	530	403


ベッド用グリップ類

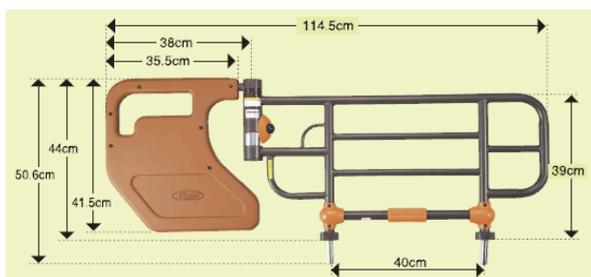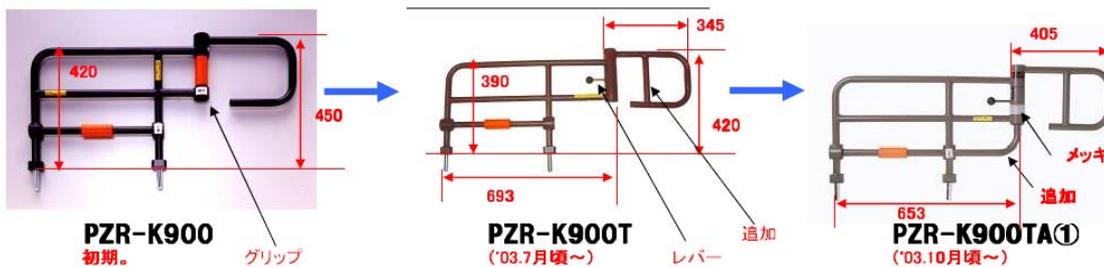

PZR-K950B

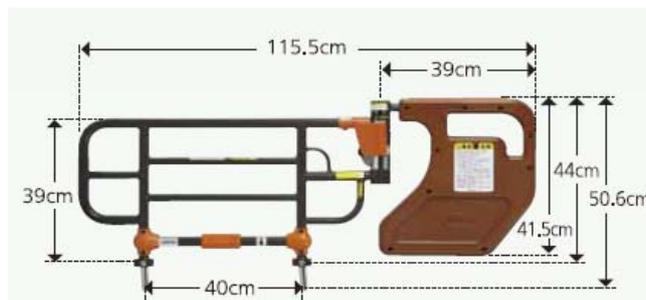

PZR-116(J)

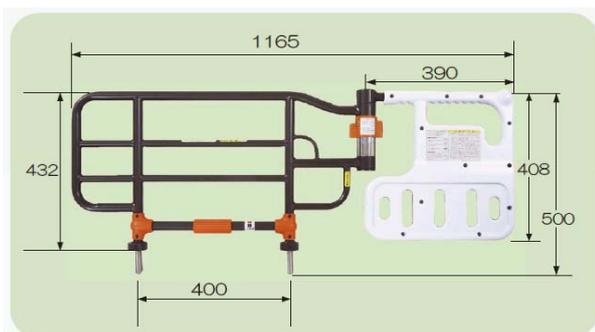

自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」2010/12発売予定