

停電時の背下げ操作方法

対応機種

ビカムシリーズ


PZB-H3R, PZB-H3S, PZB-H3R/M, PZB-H3S/M

PZB-H2R, PZB-H2S, PZB-H2R/M, PZB-H2S/M



PZB-B1R, PZB-B1S, PZB-B1R/M, PZB-B1S/M

※作業時は必ずご利用様はベッドから降りていただき、作業を行ってください。
※プラグはコンセントから抜いてください。
※危険防止のため、作業は2人で行なってください。

①ご利用者様と寝具をベッドから降ろし、作業は背ボトムを手で支えて行ってください。

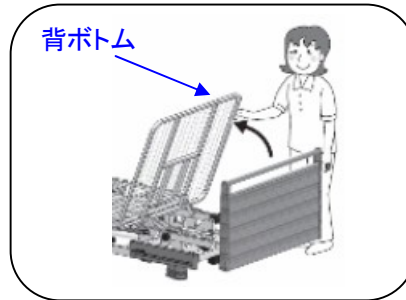

②背上げモーター先端のインシュロックを切って、Rピン及びピンを抜いてください。

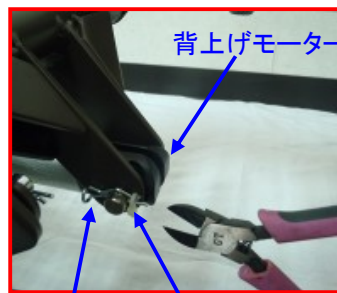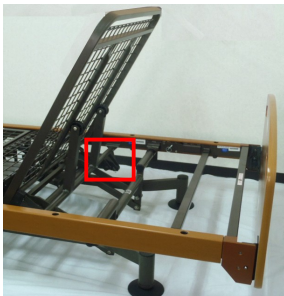

Rピン

インシュロック

アーム

ピンを抜く際は、上の写真のようにアーム部を支えながら、モーター先端で床を傷つけない様に、モーターを持って作業してください。

③下図のようにアームが降りることを確認して、背ボトムを水平にご使用ください。



電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください。
外したRピンとピンは背ボトムを元に戻す際に使用しますので、保管しておいてください。