

停電時の背下げ操作方法

対応機種

ケアレット

1モーター仕様

PSB-FS1FAWS, PSB-FS1FA-CS, PSB-FS1FA-PS, PSB-FS1FAWLS
PSB-FS1MAWS, PSB-FS1MA-CS, PSB-FS1MA-PS, PSB-FS1MAWLS

1+1モーター仕様

PSB-FS2FAWS, PSB-FS2FA-CS, PSB-FS2FA-PS, PSB-FS2FAWLS
PSB-FS2MAWS, PSB-FS2MA-CS, PSB-FS2MA-PS, PSB-FS2MAWLS

ケアレット ネオ

1モーター仕様

PSB-KS1FA-ES, PSB-KS1FA-CS, PSB-KS1FA-PS
PSB-KS1MA-ES, PSB-KS1MA-CS, PSB-KS1MA-PS


1+1モーター仕様

PSB-KS2FA-ES, PSB-KS2FA-CS, PSB-KS2FA-PS
PSB-KS2MA-ES, PSB-KS2MA-CS, PSB-KS2MA-PS

※作業時は必ずご利用様はベッドから降りていただき、作業を行ってください。
※プラグはコンセントから抜いてください。
※危険防止のため、作業は2人で行なってください。



1モーター仕様の場合

①ご利用様と寝具をベッドから降ろし、作業は背ボトムを手で支えて行ってください。


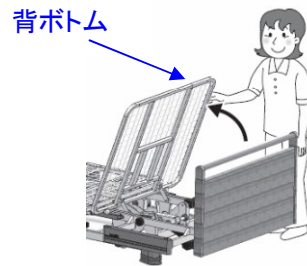


ボルトを抜く際は、モーター先端で床を傷つけない様に、手で支えて作業してください。

②モーター先端のナットをスパナで緩め、ボルトをはずしてください。

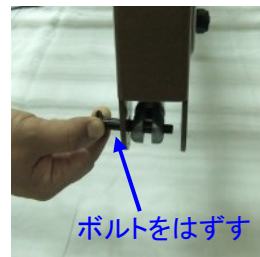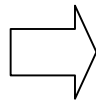

③下図のように背上げローラー部が降りることを確認して、背ボトムを水平にご使用ください。

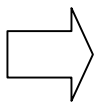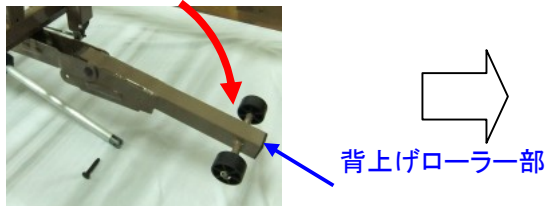

電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください。
外したボルトとナットは背ボトムを元に戻す際に使用しますので、保管しておいてください。


1+1モーター仕様の場合

①ご利用者様と寝具をベッドから降ろしてください。


②下記の様にコードに9V乾電池を取付け、手元スイッチで背ボトム及び脚ボトムを下げてください。



バッテリー取り付け用コード

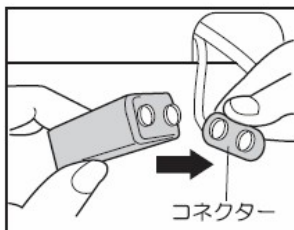

①非常用乾電池(市販のアルカリ乾電池9V)の十とーを正しくセットします。

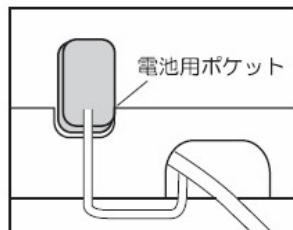

②非常用乾電池(アルカリ乾電池9V)をモーターユニットの電池用ポケットに収納します。

注意

非常用乾電池(市販のアルカリ乾電池9V)は1回のみ使用となります。
乾電池は使用後に取り外してください。