

停電時の背下げ操作方法

対応機種

ミオレット

- ・背上げ1モーターベッド
PZB-M1RJB,PZB-M1RJB/M,PZB-M1SJB
PZB-M1RJB-HH,PZB-M1RJB/M-MH,PZB-M1SJB-HH
- ・2モーターベッド
PZB-M2RJ,PZB-M2RJ/M,PZB-M2SJ
PZB-M2RJ-HH,PZB-M2RJ/M-MH,PZB-M2SJ-HH
- ・3モーターベッド
PZB-M3RJ,PZB-M3RJ/M,PZB-M3SJ
PZB-M3RJ-HH,PZB-M3RJ/M-MH,PZB-M3SJ-HH


アルティレット

- ・背上げ1モーターベッド
PKB-AS1FA,PKB-AS1FB
- ・2モーターベッド
PKB-AS2FA,PKB-AS2FB
- ・3モーターベッド
PKB-AS3FA,PKB-AS3FB

背ボトムの角度によっては、モーター先端のピンを取るだけでは背ボトムが下がらない場合があります。(特に35度以上)
その際は、下記の手順で作業を行ってください。

※作業時は必ずご利用様はベッドから降りていただき、作業を行ってください。
※プラグはコンセントから抜いてください。
※危険防止のため、作業は2人で行ってください。

①ご利用様と寝具をベッドから降ろし、作業は背ボトムを手で支えて行ってください。

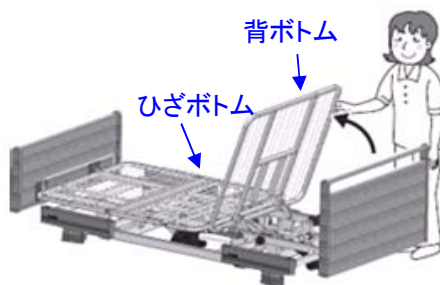

②背ひざ連結バー先端のRピン及びピンをはずしてください。

・背ひざ連結バーは連結バー受けに下ろしてください。





Rピン ピン



連結バー受け 背ひざ連結バー

※ひざボトムを持ち上げることで、スムーズにピンを外せます。

③背ボトムを片手で押さえ、下図に示したRピン及びバックオフバーをはずしてください。(左右 各1箇所)

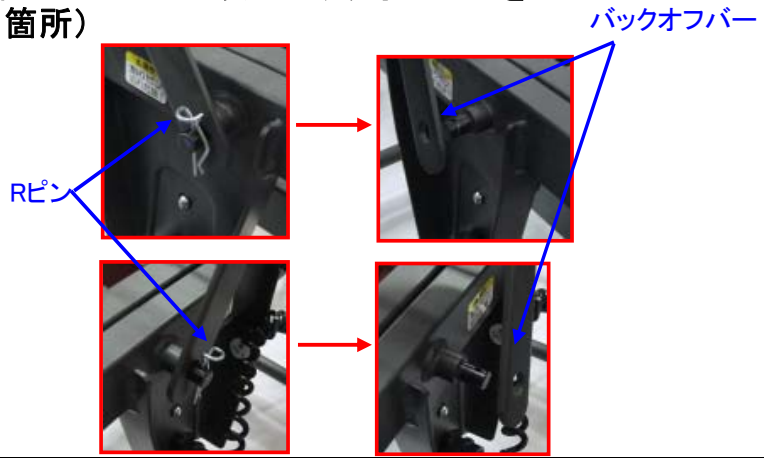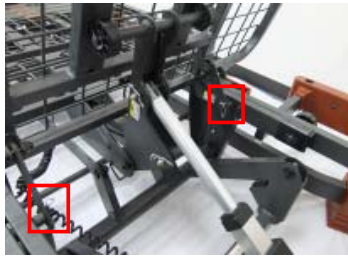

④背ボトムを腰ボトム側へ止まるまで移動させてください。



※矢印の方向にボトムを移動してください。

⑤背上げモーター先端のRピンとピンをはずしてください。

・背上げモーターの先端を下げてください。



アルティレットはインシュロックを切って、Rピンを外してください。



⑥下図のように背上げローラー部分が降りることを確認して、③ではずしたバックオフバーとRピンを再び取付け、背ボトムを水平にしてご使用ください。



電力が回復しましたら、逆の手順で元に戻してご使用ください。
外したRピンとピンは背ボトムを元に戻す際に使用しますので、保管しておいてください。