


症状・身体状況・環境	選定理由例
部屋の広さ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●垂直昇降機能で省スペースでの設置ができるベッドを選定。</li> </ul>
体格	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート、レギュラー、ロングサイズを選択できるベッドを選定。</li> <li>●ご利用者の体格に合わせ膝の屈曲位置が調節できるベッドを選定。</li> </ul>
足腰の筋力の低下	<ul style="list-style-type: none"> <li>●負担の少ない立ち上がりのために、安定した立ち上がりをサポートするニーパ口を取付けできるベッドを選定。</li> <li>●夜間の居室における事故を防ぐため、ベッドの電力で「人感センサー付フットライト」を取付けできるベッドを選定。</li> </ul>
車いすの使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●すべてのサイドレールホルダーが収納できてベッドに車いすを近づけることができるベッドを選定。</li> <li>●負担の少ない立ち上がりのために、安定した立ち上がりをサポートするニーパ口を取付できるベッドを選定。</li> </ul>
認知症	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ベッドからの転落の恐れがあるので、サイドレールやベッド用グリップが取付けできる機種を選定。</li> <li>●手元スイッチの誤操作を防ぐため、ロック機能があるベッドを選定。</li> </ul>
高血圧	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ボトムの屈曲位置を調節でき、背上げ時の腹圧を軽減できるベッドを選定。</li> <li>●負担の少ない立ち上がりのために、安定した立ち上がりをサポートするニーパ口を取付できるベッドを選定。</li> </ul>
リウマチ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●操作のメモリー機能があり、1ボタンで指定したリクライニングができるベッドを選定。</li> </ul>
円背・拘縮・変形	<ul style="list-style-type: none"> <li>●立つ動作でリハビリを行う場合、安定した立ち上がりをサポートするニーパ口を取付できるベッドを選定。</li> </ul>
脳血管疾患	<ul style="list-style-type: none"> <li>●負担の少ない立ち上がりのために、安定した立ち上がりと移乗をサポートするニーパ口を取付できるベッドを選定。</li> <li>●褥瘡のリスクが高いと判断される場合は、背上げ時のズレを抑制し、体圧を分散することができるベッドを選定。</li> </ul>
起立性低血圧	<ul style="list-style-type: none"> <li>●負担の少ない立ち上がりのために、安定した立ち上がりと移乗をサポートするニーパ口を取付できるベッドを選定。</li> </ul>
呼吸器疾患	<ul style="list-style-type: none"> <li>●膝位置のフィッティング機能やリクライニング機構により、背上げ時ズレによる背圧・腹圧軽減をサポートできるベッドを選定。</li> <li>●睡眠時無呼吸症候群の場合、背の角度を調節できるベッドを選定。</li> </ul>

症状・身体状況・環境	選定理由例
浮腫・むくみ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脚上げ機能で中枢への血液やリンパ液の流れを促すことが必要になるため、脚上げ単独動作および足先上げ機能があるベッドを選定。</li> </ul>
歯周疾患	<ul style="list-style-type: none"> <li>●口腔ケアをおこなうため、背上げ機能があるベッドを選定。</li> <li>●睡眠中の唾液誤嚥による肺炎を防ぐため、背の角度を調整できるベッドを選定。</li> </ul>
摂食嚥下障害	<ul style="list-style-type: none"> <li>●姿勢管理のため、角度の確認がしやすい表示パネル付き手元スイッチのベッドを選定。</li> <li>●食事介助や口腔ケア時、オプション受けが収納できてベッドサイドでケアがしやすいベッドを選定。</li> </ul>
褥瘡(床ずれ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●姿勢管理のため、角度の確認がしやすい表示パネル付き手元スイッチのベッドを選定。</li> </ul>


さらに進化したスタンダードベッド  
「ミオレットⅢネクスト」



操作ロック機能を搭載、防水性能も向上した  
表示パネル付き手元スイッチ

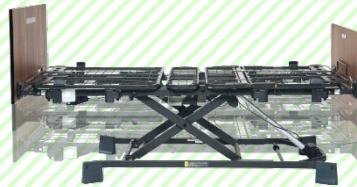

省スペース設置を実現する  
垂直昇降

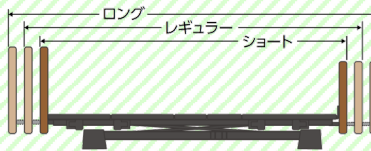

小柄な方から高身長の方まで  
対応できるベッド1台でのサイ  
ズ切替え



サイドテーブルや、ハイトスペー  
サー仕様ではリフト・お掃除ロ  
ボットも使用できる

医療・介護ベッドメーカー  
**株式会社プラッツ**

<https://www.platz-ltd.co.jp/>

■本社/ショールーム  
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17 TEL 092-584-3434 FAX 092-584-3436  
 ■北海道支店: TEL 011-807-4750 ■東北支店: TEL 022-781-7072  
 ■関東支店: TEL 03-5763-5425 ■東海支店: TEL 052-737-2230  
 ■関西支店: TEL 072-943-2723 ■中四国支店: TEL 084-946-6000  
 ■九州支店(本社内): TEL 092-584-3433

