

生活のあらゆるシーンで



立ち上がりや歩行をしっかりサポートします

据え置き型手すり

よかレール

置くだけで、
起き上がりや
立ち上がり
をしっかりサポート



株式会社プラッツ <https://www.platz-ltd.co.jp>

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL: 092-584-3434 FAX: 092-584-3436

■北海道支店

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102
TEL: 011-807-4750 FAX: 011-807-4751

■東北支店

〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15
TEL: 022-781-7072 FAX: 022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル7階
TEL: 03-5763-5425 FAX: 03-5763-5426

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社1-402
TEL: 052-737-2230 FAX: 052-737-2231

■関西支店・関西ショールーム

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12
TEL: 072-943-2723 FAX: 072-943-2724

■中四国支店

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-8-37
TEL: 084-946-6000 FAX: 084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL: 092-584-3433 FAX: 092-502-3810

[お問い合わせ]

26.03 CZZ00043



株式会社プラッツ

「立ち上がり」や「移動」が不安なところに“置くだけ”

いつもの動作に安心感を。

取り付け工事が不要で、置き場所を選びません。

起き上がりや立ち上がりをサポートする、据え置き型手すりです。

細かな高さ調節と4本の手すりで、幅広い身長の方に、様々な姿勢でお使いいただけます。

特長 1. 使う人や場所にフィット!

5段階の高さ調節で、幅広い使い方に対応

手すりの高さは70~86cm。横手すりを4本配置し、4cm刻み(70/74/78/82/86cm)の5段階で高さ調節ができるので、幅広い体格の方や様々な使い方に対応できます。



手すり同士を連結することで、より広い動線をサポート

手すりは3台まで連結できます。ベッドから出入り口、廊下から居室など、より広い動線を切れ間なくサポートします。



※連結方法の詳細はP6へ

PJ01-AS
センタータイプ

特長 2. しっかり支える!

握りやすい手すり


スチール芯材に樹脂をコーティングした、公共施設などでも採用されている材質で、強度と握り心地を両立させています。太さは握りやすく力が入れやすい直径3.2cmです。



特長 3. 安全に使える!

暗くても手すりの位置を把握できる

夜間でも手すりの場所がわかりやすい蓄光リング付き。寝ている時に眩しすぎないように、取付位置に配慮しています。

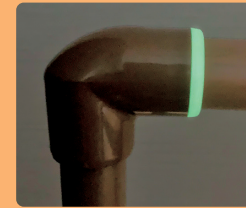

手すりの揺れを軽減

手すり部分の固定には貫通式のピンを2本使用し、揺れを軽減しています。



つまずきにくく、しっかり安定

ベースの厚みは薄型の13mm。緑のゴムをスロープ状に取り付け、つまずきにくさに配慮しています。また、ベースに使用するマットは裏面が吸着面になっており、ずれにくく、ベースの冷たさを軽減します。



特長 4.

メンテナンスが簡単!

専用補修スプレーをご用意

ベース・支柱・縦手すり部分は、共通の補修スプレー1色でメンテナンスできます。


マットが洗濯でき衛生的

汚れた場合は洗濯機の弱水流で洗うことができます。洗濯後は日陰でつり干してください。

手すりコラム

転倒のメカニズムとは?

姿勢が傾き重心が支持基底面(しじきていめん)から外れると、身体を支えることができず、転倒してしまいます。「立ち上がり」「方向転換」「歩き出し」は重心が変わり転倒が発生しやすい動作です。適切な位置に手すりを設置することで、転倒を予防しましょう。

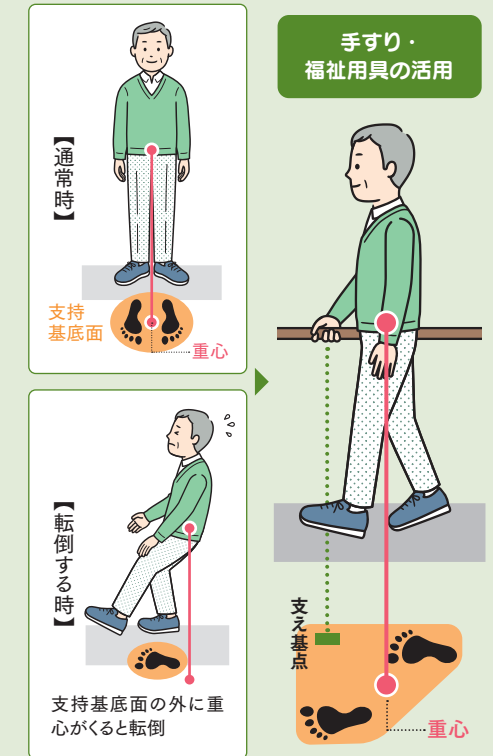

手すりの望ましい高さとは?

手すりの適切な高さは75cm~85cmと言われており、目安は腕をまっすぐ降ろした時の尺骨茎突点(しゃっこつけいとつてん)付近です。日本人の平均身長は年々伸びてきています。使用する方の体格に合わせて、適切な高さを確認した上で手すりを設置しましょう。

尺骨茎突点とは

手首にある骨の突起部分。この高さを目安にすると前かがみならず、自然な姿勢で手すりを握ることができます。



よかレール

コストパフォーマンスに優れた
据え置き型手すり

(全てのタイプ)
高さ5段階調節可

70cm


74cm

78cm

82cm

86cm

ベースがコンパクトで
置き場所をとりません

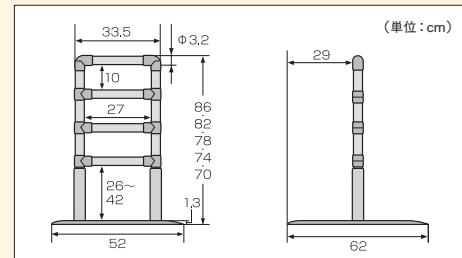


PJ01-AS センタータイプ

メーカー希望
小売価格 **45,000円**(税込49,500円)

■TAISコード/00631-000722 ■JANコード/4539940180054

■質量/13.0kg

布団やベッドからの
起き上がり・立ち上がりに

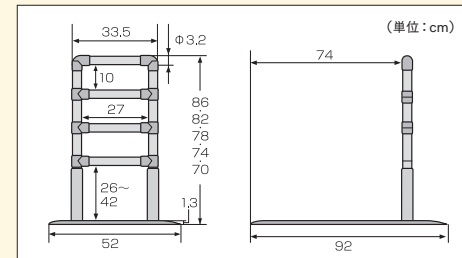


PJ01-AL サイドタイプ

メーカー希望
小売価格 **50,000円**(税込55,000円)

■TAISコード/00631-000723 ■JANコード/4539940180078

■質量/17.0kg

両手で身体を支え、
安心感のある立位へ

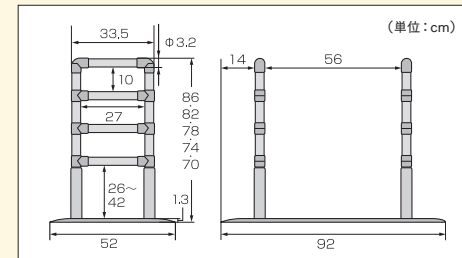

PJ01-AAL ウィングタイプ


メーカー希望
小売価格 **75,000円**(税込82,500円)

■TAISコード/00631-000975 ■JANコード/4539940110440

■質量/22.5kg

居室や廊下、
玄関などでの
歩行の補助に

支柱位置
変更可

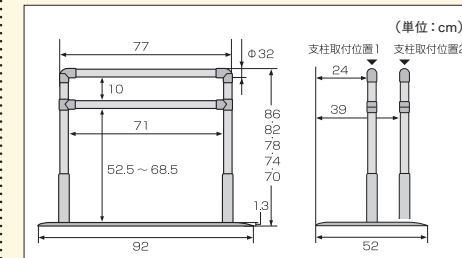


PJ01-BL ロングタイプ

メーカー希望
小売価格 **50,000円**(税込55,000円)

■TAISコード/00631-000724 ■JANコード/4539940180092

■質量/17.5kg

起き上がりから
歩き出しまでをサポート

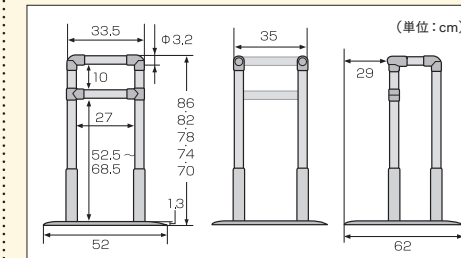

PJ01-CS コーナータイプ


メーカー希望
小売価格 **60,000円**(税込66,000円)

■TAISコード/00631-000725 ■JANコード/4539940180115

■質量/13.5kg

立ち上がりから進行方向への
動線をサポート

支柱位置
変更可

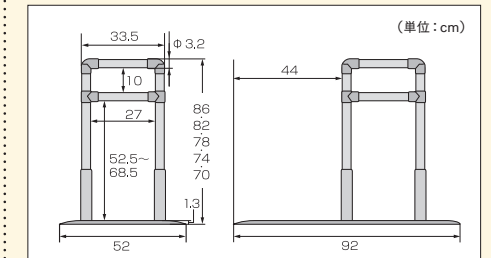

PJ01-DL エルタイプ

メーカー希望
小売価格 **63,000円**(税込69,300円)

■TAISコード/00631-000961 ■JANコード/4539940110433

■質量/19.0kg

(全タイプ共通) ■材質/手すり: スチール・樹脂・PVC、支柱: スチール、ベース: スチール・樹脂・PVC ■最大使用者体重/100kg ■原産国/中国

専用オプション



PJ01M-S1-BE



PJ01-L2-BE

■材質/表面: ポリエステル、裏面: アクリル樹脂 ■原産国/日本

よかレール マット

センター・
コーナータイプ用

PJ01M-S1-BE
メーカー希望小売価格
■JANコード/
4539940180252 **2,500円**(税込2,750円)

サイド・ウィング・ロング・
エルタイプ用

PJ01M-L2-BE
メーカー希望小売価格
■JANコード/
4539940110419 **3,500円**(税込3,850円)

取り付け例



よかレール ストッパー

PJ01-T1
メーカー希望小売価格
9,000円(税込9,900円)

■TAISコード/00631-000758
■JANコード/4539940180139

■材質/アルミ合金・ゴム・鉄・樹脂
■質量/0.7kg ■原産国/ベトナム

取り付け例



よかレール よかオモン

PJ01W-5Z
メーカー希望小売価格
11,000円(税込12,100円)


■TAISコード/00631-000764
■JANコード/4539940180412

■材質/おもし: 鉄、底面: 合成ゴム
■質量/5.0kg ■原産国/ベトナム


後付けできます

手すり同士をつなぐことで、動線を切れ間なくサポートします。


レギュラータイプ

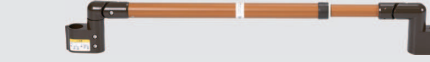

ロングタイプ

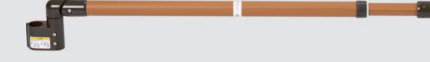

●設置する場所に合わせて、長さや上下・左右の角度を調整できます。

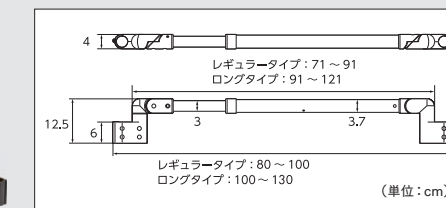

取り付け例

※連結できる手すりは3台までです
※連結バーの詳細はP6へ

よかレール 連結バー

レギュラー
タイプ

PJ01E-R1
メーカー希望小売価格
27,000円(税込29,700円)

■TAISコード/00631-000798 ■JANコード/4539940180429

ロング
タイプ

PJ01E-L1
メーカー希望小売価格
30,000円(税込33,000円)

■TAISコード/00631-000799 ■JANコード/4539940180436

■材質/アルミ合金・樹脂・合成ゴム ■質量/レギュラー: 2.0kg、ロング: 2.4kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/ベトナム

よかレール オプション組み合わせコード一覧

オプション 組み合わせ		手すりのみ	手すり + ストッパー	手すり + おもし	手すり + 連結バー(R)	手すり + 連結バー(L)	手すり + 連結バー(L) + おもし
センタータイプ	マットなし	型式 PJ01-AS TAISコード 00631-000722	型式 PJ01-AS-T TAISコード 00631-000731	型式 PJ01-AS-5Z TAISコード 00631-000765	型式 PJ01-AS-R1 TAISコード 00631-000800	型式 PJ01-AS-5Z-R1 TAISコード 00631-000804	型式 PJ01-AS-L1 TAISコード 00631-000801
	マット付き	型式 PJ01-ASM1 TAISコード 00631-000726	型式 PJ01-ASM1-T TAISコード 00631-000735	型式 PJ01-ASM1-5Z TAISコード 00631-000766	型式 PJ01-ASM1-R1 TAISコード 00631-000802	型式 PJ01-ASM1-5Z-R1 TAISコード 00631-000806	型式 PJ01-ASM1-L1 TAISコード 00631-000803
サイドタイプ	マットなし	型式 PJ01-AL TAISコード 00631-000723	型式 PJ01-AL-T TAISコード 00631-000732	型式 PJ01-AL-5Z TAISコード 00631-000767	型式 PJ01-AL-R1 TAISコード 00631-000808	型式 PJ01-AL-5Z-R1 TAISコード 00631-000812	型式 PJ01-AL-L1 TAISコード 00631-000809
	マット付き	型式 PJ01-ALM1 TAISコード 00631-000727	型式 PJ01-ALM1-T TAISコード 00631-000736	型式 PJ01-ALM1-5Z TAISコード 00631-000768	型式 PJ01-ALM1-R1 TAISコード 00631-000810	型式 PJ01-ALM1-5Z-R1 TAISコード 00631-000814	型式 PJ01-ALM1-L1 TAISコード 00631-000811
ウィングタイプ	マットなし	型式 PJ01-AAL TAISコード 00631-000975	型式 PJ01-AAL-T TAISコード 00631-000977	型式 PJ01-AAL-5Z TAISコード 00631-000978	型式 PJ01-AAL-R1 TAISコード 00631-000981	型式 PJ01-AAL-5Z-R1 TAISコード 00631-000985	型式 PJ01-AAL-L1 TAISコード 00631-000982
	マット付き	型式 PJ01-AALM1 TAISコード 00631-000976	型式 PJ01-AALM1-T TAISコード 00631-000979	型式 PJ01-AALM1-5Z TAISコード 00631-000980	型式 PJ01-AALM1-R1 TAISコード 00631-000983	型式 PJ01-AALM1-5Z-R1 TAISコード 00631-000987	型式 PJ01-AALM1-L1 TAISコード 00631-000984
ロングタイプ	マットなし	型式 PJ01-BL TAISコード 00631-000724	型式 PJ01-BL-T TAISコード 00631-000733	型式 PJ01-BL-5Z TAISコード 00631-000769	型式 PJ01-BL-R1 TAISコード 00631-000816	型式 PJ01-BL-5Z-R1 TAISコード 00631-000820	型式 PJ01-BL-L1 TAISコード 00631-000817
	マット付き	型式 PJ01-BLM1 TAISコード 00631-000728	型式 PJ01-BLM1-T TAISコード 00631-000737	型式 PJ01-BLM1-5Z TAISコード 00631-000770	型式 PJ01-BLM1-R1 TAISコード 00631-000818	型式 PJ01-BLM1-5Z-R1 TAISコード 00631-000822	型式 PJ01-BLM1-L1 TAISコード 00631-000819
コーナータイプ	マットなし	型式 PJ01-CS TAISコード 00631-000725	型式 PJ01-CS-T TAISコード 00631-000734	型式 PJ01-CS-5Z TAISコード 00631-000771	型式 PJ01-CS-R1 TAISコード 00631-000824	型式 PJ01-CS-5Z-R1 TAISコード 00631-000828	型式 PJ01-CS-L1 TAISコード 00631-000825
	マット付き	型式 PJ01-CSM1 TAISコード 00631-000730	型式 PJ01-CSM1-T TAISコード 00631-000739	型式 PJ01-CSM1-5Z TAISコード 00631-000772	型式 PJ01-CSM1-R1 TAISコード 00631-000826	型式 PJ01-CSM1-5Z-R1 TAISコード 00631-000830	型式 PJ01-CSM1-L1 TAISコード 00631-000827
エルタイプ	マットなし	型式 PJ01-DL TAISコード 00631-000961	型式 PJ01-DL-T TAISコード 00631-000963	型式 PJ01-DL-5Z TAISコード 00631-000964	型式 PJ01-DL-R1 TAISコード 00631-000967	型式 PJ01-DL-5Z-R1 TAISコード 00631-000971	型式 PJ01-DL-L1 TAISコード 00631-000968
	マット付き	型式 PJ01-DLM1 TAISコード 00631-000962	型式 PJ01-DLM1-T TAISコード 00631-000965	型式 PJ01-DLM1-5Z TAISコード 00631-000966	型式 PJ01-DLM1-R1 TAISコード 00631-000969	型式 PJ01-DLM1-5Z-R1 TAISコード 00631-000973	型式 PJ01-DLM1-L1 TAISコード 00631-000970


※連結バー(R)=連結バー レギュラータイプ、連結バー(L)=連結バー ロングタイプ

連結バーのご使用について

■安全のため、指定の位置に必ず「よかレールストッパー」もしくは「よかレールよかおもし」を設置してください。


※おもしは支柱の左右どちらでも設置可能です。
※下の図以外の位置におもしを追加しても問題ありません。

[よかレールストッパーを使用する場合]

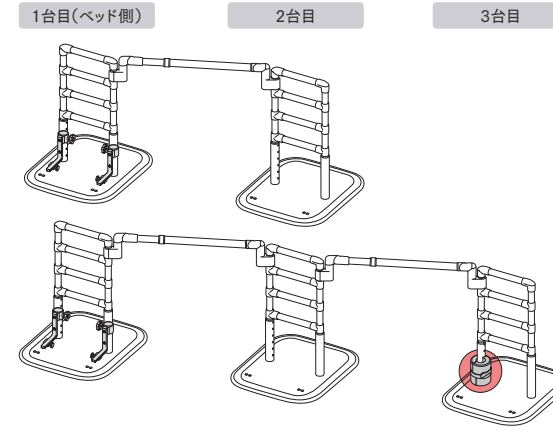

※3台連結する場合、中央にコーナー・エルタイプは連結できません。

[よかレールストッパーを使用しない場合]

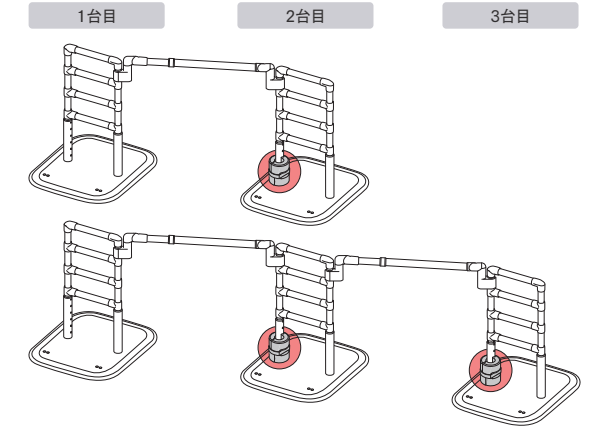

※3台連結する場合、中央にコーナー・エルタイプは連結できません。


❗ 連結バー設置の際の注意 | 安全にご利用いただくために、設置の際は以下の点を必ずご確認ください。

連結時の角度の注意


◎よかレールと連結バーの手すり部は、下図の角度では設置しないでください。下図中の●部分に、身体の一部が挟まり怪我をする恐れがあります。また、連結バー同士の間隔は50cm以下で使用しないでください。

よかレール センター/サイド/ロングタイプ (PJ01-AS/AL/BL)の場合


よかレール コーナータイプ(PJ01-CS)の場合

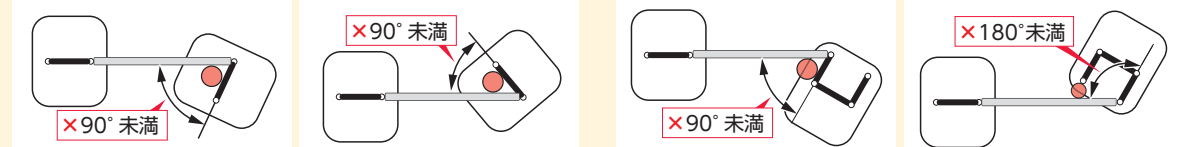

よかレール エルタイプ(PJ01-DL)の場合

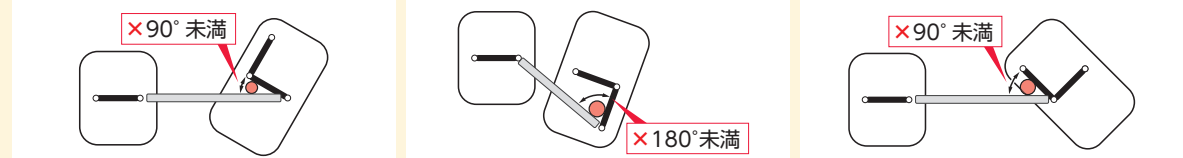

よかレールウィングタイプ(PJ01-AAL)の場合

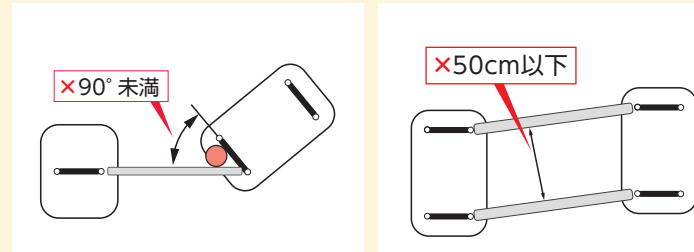

段差がある場所への設置の注意

◎10cmを超える段差がある場所では使用しないでください。

◎よかレールのベースが段差からはみ出ないように設置してください。