

Rafio



MioletⅢ



MioletⅡ



Home Care Bed

プラッツはいつも「一生懸命」です。

介護が必要な多くの方々は、若い頃より大変なご苦労を経験されながら、弛まぬ努力で現代社会の発展に貢献されてこられた方々です。我々の使命は、ご利用者様には常に感謝の気持ちを持ち、介護ベッドを「安全」に、「快適」に利用していただく事と考えます。プラッツは常にお客様の声に耳を傾け、より「高品質」でより「高機能」、そして「低価格」の介護ベッドを「一生懸命」作り続けます。介護ベッドを通じて社会に貢献する。プラッツはいつも「一生懸命」です。

index

● 介護用電動ベッド

ラフィオ	2
ミオレットⅢ	14
ミオレットⅡ	22
プリモレット	30

● マットレス

アミカルサポートマットレス	34
ニューポイントマットレス	36
スタンダードマットレス	36
ユービーポイントマットレス	37
エミーネ 3Dゾーンケアマットレス	38
エミーネ ポジショニングクッション	39
エミーネ 車椅子クッション	39
オーバーレイウレタンマットレス	40
延長マットレス	40

● 周辺機器

サイドレール	42
ハンドグリップ	43
ベッド用グリップ	44
人感センサー付フットライト	48
スイッチ接続キット	48
テーブル・カーペット・酸素ボンベホルダー・点滴棒・点滴棒ホルダー	49

ベッドオプション適合表	50
会社概要	52

介護用電動ベッド

低介護の方の自立支援から
重度の方の在宅医療まで幅広くサポート

ラフィオ	2
ミオレットⅢ	14
ミオレットⅡ	22
プリモレット	30



適合するマットレス幅：90cm幅

- 特許第5089786号 手元スイッチ形状
- 特許出願中 ハイバックサポート機能
- 特許出願中 リクライニング制御

詳しい説明や動画は
こちらから



<http://www.platz-ltd.co.jp/product/rafiio/rafiio/>

自然なリクライニング姿勢により
誤嚥・床ずれのリスクを低減。
ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。



樹脂ボード(木目調)
「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ
90cm幅



木製フラットボード
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅



木製宮付ボード
「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅

専門家のアドバイスのもと、
リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました

ポジショニングベッド

ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用して身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢(体位)を安全で快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。この考えのもと、ポジショニングベッドは「ハイバックサポート機能」と背と膝の「フィッティング機能」を搭載、背上げ時のズレ力の軽減とリラックスできる快適な姿勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、在宅医療もサポートする新しい超低床介護用ベッドです。



佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門

共同開発 松尾 清美 准教授

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通事故で車いす生活となるも、多くの福祉機器メーカーと研究開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗機器、移動用具などの特許は30を超える。また、1750軒を超える障がい者のための住環境設計を行うなど、30年に渡り障がい者や高齢者の自立(律)生活をサポート。日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター協会、日本障がい者スポーツ学会などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。著書:「障害受容はいのちの受容」など。



株式会社ふつものくらし研究所 代表取締役
一般社団法人福祉用具活用相談センター 理事長

共同開発 吉川 和徳 先生

理学療法士、シーティング・コンサルタント。2004年NPO法人日本シーティング・コンサルタント協会設立、座位姿勢の重要性を広めるなどシーティング、ポジショニングに関して多方面で活躍中。著書:「シーティング入門」など。




コネクトリハビリテーション
代表

共同開発 山形 茂生 先生


作業療法士。福祉用具プランナーやリフトリーダー研修会、移乗・移動に関する研修会等 数多くの研修会で福祉用具の活用に関して講師を務める。元別府リハビリテーションセンターリハ支援課 課長。NPO福祉用具ネット理事、日本リハビリテーション工学協会理事。

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

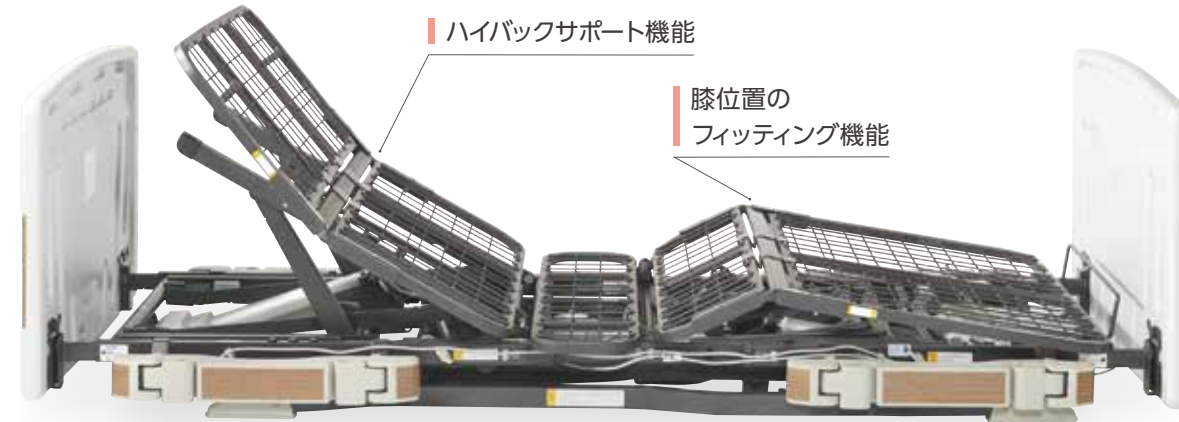

ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック：頭・背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。
1モーター、2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。
3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することが出来ます。

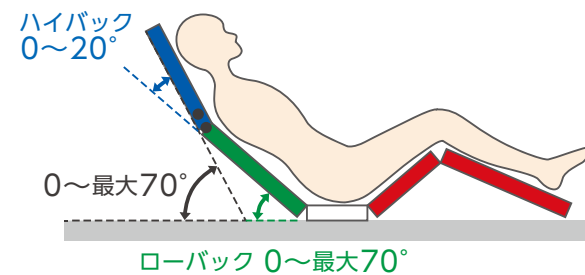


背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。


ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!



「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

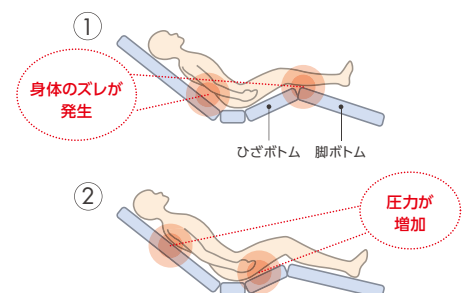

⚠ 褥瘡（床ずれ）の原因になります

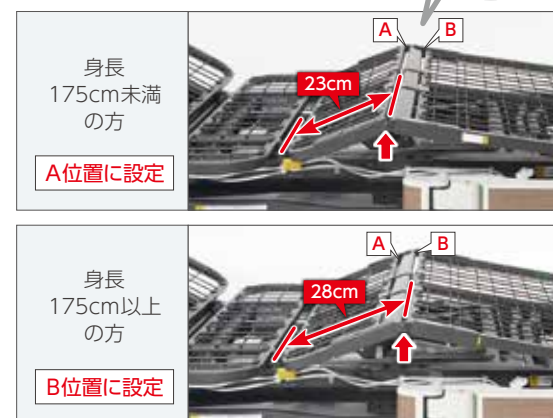

ポジショニングベッドに期待できる効果


誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



褥瘡（床ずれ）リスクの低減（ズレカ、圧力の軽減）

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷（DTI）のリスクを低減。褥瘡（床ずれ）対策のポジショニングをサポートします。

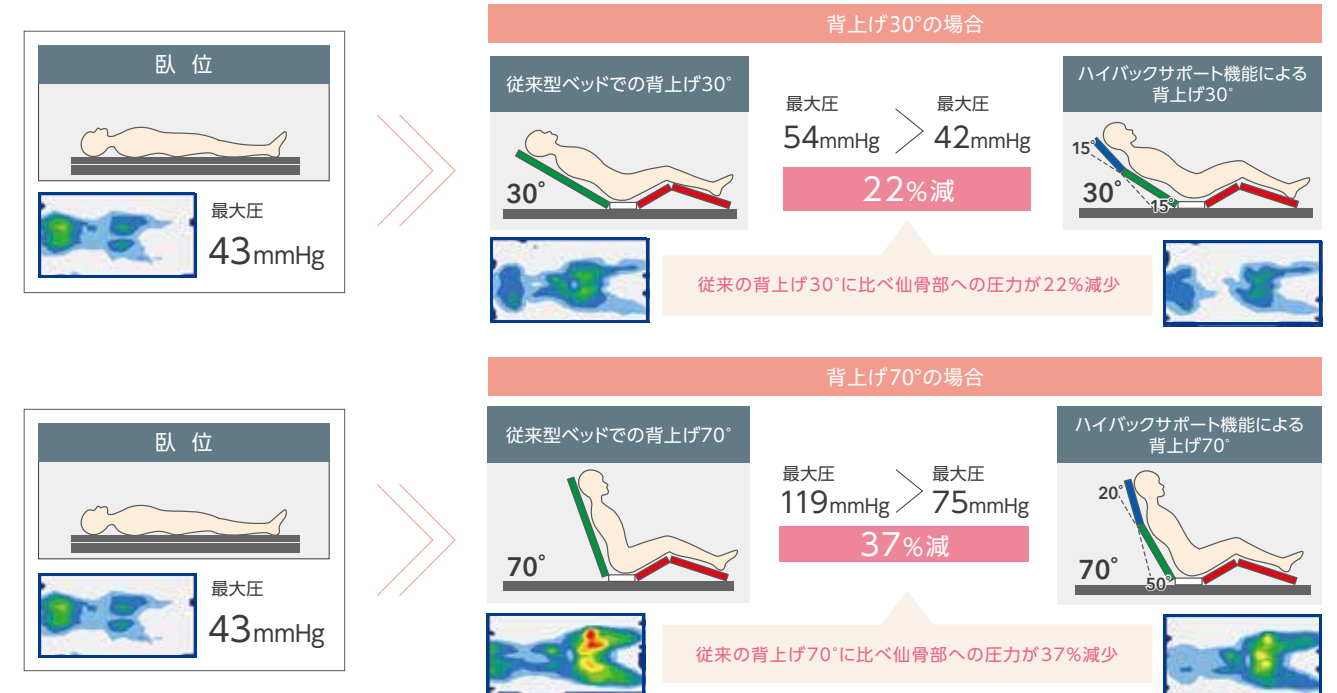

被験者:身長165cm 体重60kg 男性 計測機器:FSA(タカノ社製) アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

呼吸がしやすい姿勢に

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。
また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。




円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします


円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることが出来る場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げを提供します。

身体ズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。身体ズレや腹部の圧迫を抑制します。

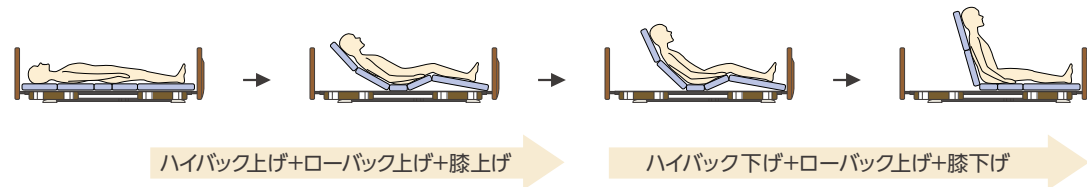

ハイバックは0°から最大20°、ローバックは0°から最大70°まで上がります。ハイバックとローバックの角度は合わせて最大70°を超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。

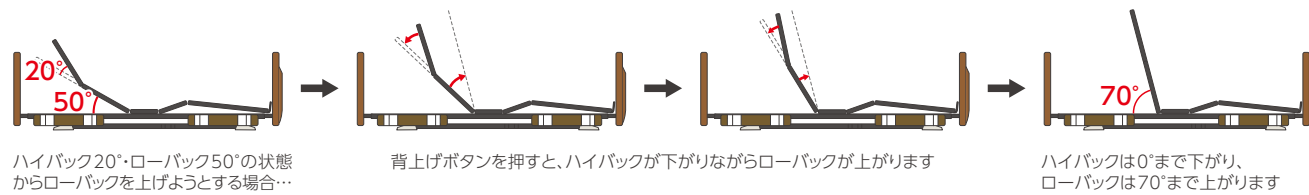

足先上げと足先下げの簡単切替え


足先の角度をワンタッチで切替えます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。



足先上げ



足先下げ

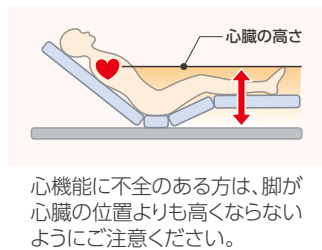

収納式サイドレールホルダー

全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。



使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間に引っかけて保持することができます。手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。

手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。ベッドを下げる際は床面高が24cmになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。




省スペースに設置可能な垂直昇降機構

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。
※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。



身長に合わせて選べるベッドサイズ

ボトムのみの変更でベッドのサイズをショート・レギュラー・ロングに変更できます。

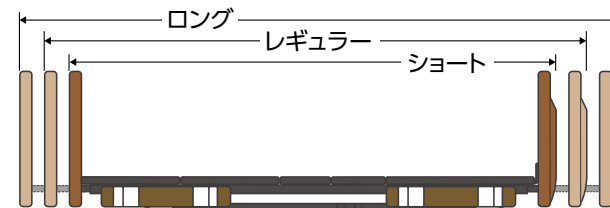

角度計

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。



モータータイプ



背上げ1モーター
連動ハイバックサポート
機能付



※組立時に2段階の高さに設定できます。



2モーター
連動ハイバックサポート
機能付



3モーター
電動ハイバックサポート
機能付



ポジショニングベッドシリーズ 型式

※価格はオープン価格です。**非課税**

■ 樹脂ボード(木目調)

	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11ACR ■TAIS/00631-000321 ■JAN/4539940004763	P110-21ACR ■TAIS/00631-000331 ■JAN/4539940005067	P110-71ACR ■TAIS/00631-000341 ■JAN/4539940005364
ショートタイプ	P110-11ACS ■TAIS/00631-000321 ■JAN/4539940004756	P110-21ACS ■TAIS/00631-000331 ■JAN/4539940005050	P110-71ACS ■TAIS/00631-000341 ■JAN/4539940005357
ロングタイプ	P110-11ACL ■TAIS/00631-000321 ■JAN/4539940004770	P110-21ACL ■TAIS/00631-000331 ■JAN/4539940005074	P110-71ACL ■TAIS/00631-000341 ■JAN/4539940005371

■ 木製フラットボード

	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11BAR ■TAIS/00631-000322 ■JAN/4539940004794	P110-21BAR ■TAIS/00631-000332 ■JAN/4539940005098	P110-71BAR ■TAIS/00631-000342 ■JAN/4539940005395
ショートタイプ	P110-11BAS ■TAIS/00631-000322 ■JAN/4539940004787	P110-21BAS ■TAIS/00631-000332 ■JAN/4539940005081	P110-71BAS ■TAIS/00631-000342 ■JAN/4539940005388
ロングタイプ	P110-11BAL ■TAIS/00631-000322 ■JAN/4539940004800	P110-21BAL ■TAIS/00631-000332 ■JAN/4539940005104	P110-71BAL ■TAIS/00631-000342 ■JAN/4539940005401

■ 木製宮付ボード


	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11BBR ■TAIS/00631-000324 ■JAN/4539940004855	P110-21BBR ■TAIS/00631-000334 ■JAN/4539940005159	P110-71BBR ■TAIS/00631-000344 ■JAN/4539940005456
ショートタイプ	P110-11BBS ■TAIS/00631-000324 ■JAN/4539940004848	P110-21BBS ■TAIS/00631-000334 ■JAN/4539940005142	P110-71BBS ■TAIS/00631-000344 ■JAN/4539940005449
ロングタイプ	P110-11BBL ■TAIS/00631-000324 ■JAN/4539940004862	P110-21BBL ■TAIS/00631-000334 ■JAN/4539940005166	P110-71BBL ■TAIS/00631-000344 ■JAN/4539940005463

ポジショニングベッドシリーズ 仕様

背上げ1モーター


■ 樹脂ボード(木目調)

(単位:cm)

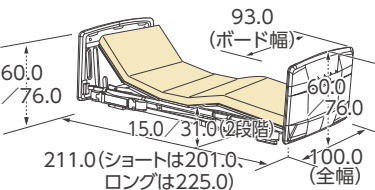


■ 木製フラットボード

(単位:cm)

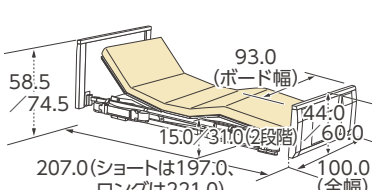

■ 木製宮付ボード


(単位:cm)

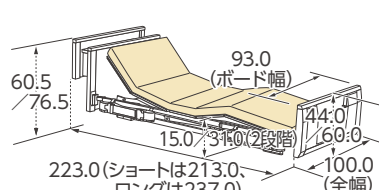

2モーター／3モーター


■ 樹脂ボード(木目調)

(単位:cm)

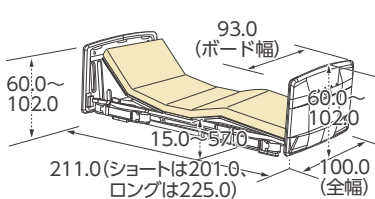


■ 木製フラットボード

(単位:cm)

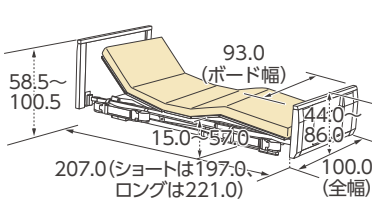

■ 木製宮付ボード

(単位:cm)

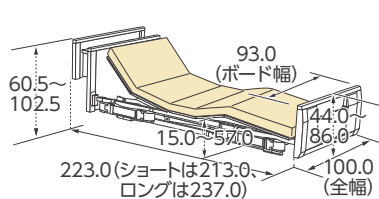

※床からベースフレームの間は0.2cmとなります。

			背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
マットレス適合寸法			全長190.0～192.0cm(ショートタイプ182cm)、幅88.0～91.0cm		
質量	樹脂ボード(木目調)	レギュラータイプ	93.4kg	94.9kg	96.9kg
		ショートタイプ	92.9kg	94.4kg	96.4kg
		ロングタイプ	94.4kg	95.9kg	97.9kg
	木製フラットボード	レギュラータイプ	98.4kg	99.9kg	101.9kg
		ショートタイプ	97.9kg	99.4kg	101.4kg
		ロングタイプ	99.4kg	100.9kg	102.9kg
	木製宮付ボード	レギュラータイプ	104.4kg	105.9kg	107.9kg
		ショートタイプ	103.9kg	105.4kg	107.4kg
		ロングタイプ	105.4kg	106.9kg	108.9kg
梱包		7梱包(バッテリー付の場合:8梱包)			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂タイプ)PE樹脂 (木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装			
電動機能	ハイバック角度	0～20度(背上げ連動)		0～20度	
	背上げ角度	0～70度			
	膝上げ角度	0～22度(背上げ連動)		0～22度	
床面高		15.0／31.0cm(2段階)	15.0～57.0cm		
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		105W	165W		
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

専用オプション

超低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+0.5cm(最低床面高15.5cm)になります。

PC01-5CK

■メーカー希望小売価格

23,000円(税別)

■TAISコード/00631-000461

■JANコード/4539940083157

■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂

■原産国/ベトナム

※人感センサー付フットライト、サイドテーブル、DC電源タイプの離床センサーはご使用できません。

低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PC02-8CK

■メーカー希望小売価格

19,500円(税別)

■TAISコード/00631-000462

■JANコード/4539940083164

■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂

■原産国/ベトナム

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PH04-80

■メーカー希望小売価格

6,900円(税別)

■TAISコード/00631-000463

■JANコード/4539940083171

■材質/ABS樹脂

■原産国/ベトナム

※キャスターとの併用はできません。

ラフィオ用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式)

PE06-BA19

■メーカー希望小売価格

20,000円(税別)

■TAISコード/00631-000564

■JANコード/4539940083195

■質量/1.7kg

■原産国/デンマーク

ベッド高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド ラフィオ ベーシックベッドシリーズ



高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。
ベッドを下げる際は床面高が24cmになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。



省スペースに設置可能な垂直昇降機構


昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。

※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。




身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながら理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

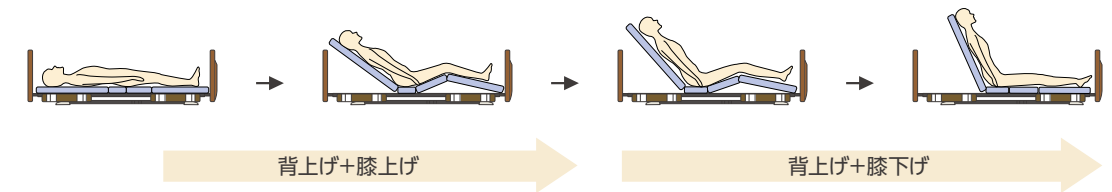

収納式サイドレールホルダー

全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。

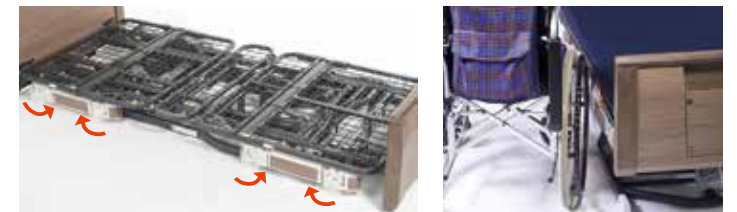

使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。
手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。
手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



モータータイプ



※組立時に2段階の高さに設定できます。

ベーシックベッドシリーズ 型式

※価格はオープン価格です。**非課税**

■樹脂ボード(木目調)

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12ACR ■TAIS/00631-000326 ■JAN/4539940004916	P110-22ACR ■TAIS/00631-000336 ■JAN/4539940005210	P110-32ACR ■TAIS/00631-000346 ■JAN/4539940005517
ショートタイプ	P110-12ACS ■TAIS/00631-000326 ■JAN/4539940004909	P110-22ACS ■TAIS/00631-000336 ■JAN/4539940005203	P110-32ACS ■TAIS/00631-000346 ■JAN/4539940005500
ロングタイプ	P110-12ACL ■TAIS/00631-000326 ■JAN/4539940004923	P110-22ACL ■TAIS/00631-000336 ■JAN/4539940005227	P110-32ACL ■TAIS/00631-000346 ■JAN/4539940005524

■木製フラットボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12BAR ■TAIS/00631-000327 ■JAN/4539940004947	P110-22BAR ■TAIS/00631-000337 ■JAN/4539940005241	P110-32BAR ■TAIS/00631-000347 ■JAN/4539940005548
ショートタイプ	P110-12BAS ■TAIS/00631-000327 ■JAN/4539940004930	P110-22BAS ■TAIS/00631-000337 ■JAN/4539940005234	P110-32BAS ■TAIS/00631-000347 ■JAN/4539940005531
ロングタイプ	P110-12BAL ■TAIS/00631-000327 ■JAN/4539940004954	P110-22BAL ■TAIS/00631-000337 ■JAN/4539940005258	P110-32BAL ■TAIS/00631-000347 ■JAN/4539940005555

■木製宮付ボード


	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12BBR ■TAIS/00631-000329 ■JAN/4539940005005	P110-22BBR ■TAIS/00631-000339 ■JAN/4539940005302	P110-32BBR ■TAIS/00631-000349 ■JAN/4539940005609
ショートタイプ	P110-12BBS ■TAIS/00631-000329 ■JAN/4539940004992	P110-22BBS ■TAIS/00631-000339 ■JAN/4539940005296	P110-32BBS ■TAIS/00631-000349 ■JAN/4539940005593
ロングタイプ	P110-12BBL ■TAIS/00631-000329 ■JAN/4539940005012	P110-22BBL ■TAIS/00631-000339 ■JAN/4539940005319	P110-32BBL ■TAIS/00631-000349 ■JAN/4539940005616

ベーシックベッドシリーズ 仕様

背上げ1モーター


■樹脂ボード(木目調)

(単位:cm)

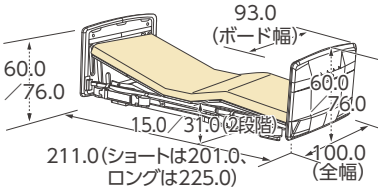


■木製フラットボード

(単位:cm)

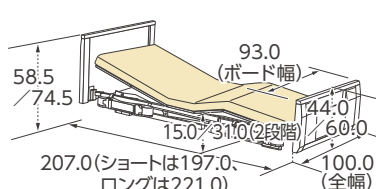

■木製宮付ボード


(単位:cm)

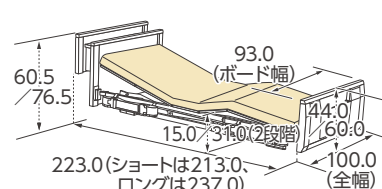

2モーター／3モーター


■樹脂ボード(木目調)

(単位:cm)

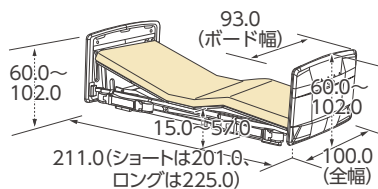


■木製フラットボード

(単位:cm)

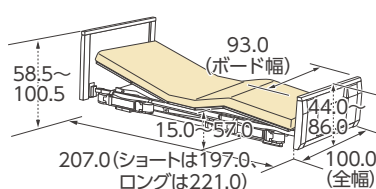

■木製宮付ボード

(単位:cm)

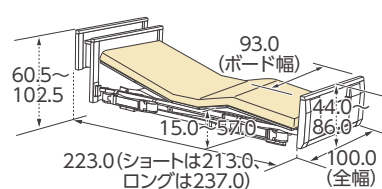

※床からベースフレームの間は0.2cmとなります。

			背上げ1モーター	2モーター	3モーター
マットレス適合寸法			全長190.0～192.0cm(ショートタイプ182cm)、幅88.0～91.0cm		
質量	樹脂ボード(木目調)	レギュラータイプ	88.4kg	89.9kg	91.4kg
		ショートタイプ	87.9kg	89.4kg	90.9kg
		ロングタイプ	89.4kg	90.9kg	92.4kg
	木製フラットボード	レギュラータイプ	93.4kg	94.9kg	96.4kg
		ショートタイプ	92.9kg	94.4kg	95.9kg
		ロングタイプ	94.4kg	95.9kg	97.4kg
	木製宮付ボード	レギュラータイプ	99.4kg	100.9kg	102.4kg
		ショートタイプ	98.9kg	100.4kg	101.9kg
		ロングタイプ	100.4kg	101.9kg	103.4kg
梱包		7梱包(バッテリー付の場合:8梱包)			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂タイプ)PE樹脂 (木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装			
電動機能	背上げ角度	0～70度			
	膝上げ角度	0～22度(背上げ連動)		0～22度	
床面高		15.0／31.0cm(2段階)	15.0～57.0cm		
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		105W	165W		
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

専用オプション

超低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+0.5cm(最低床面高15.5cm)になります。

PC01-5CK

■メーカー希望小売価格

23,000円(税別)

■TAISコード/00631-000461

■JANコード/4539940083157

■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂

■原産国/ベトナム

※人感センサー付フットライト、サイドテーブル、DC電源タイプの離床センサーはご使用できません。

低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PC02-8CK

■メーカー希望小売価格

19,500円(税別)

■TAISコード/00631-000462

■JANコード/4539940083164

■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂

■原産国/ベトナム

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PH04-80

■メーカー希望小売価格

6,900円(税別)

■TAISコード/00631-000463

■JANコード/4539940083171

■材質/ABS樹脂

■原産国/ベトナム

※キャスターとの併用はできません。

ラフィオ用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式)

PE06-BA19

■メーカー希望小売価格

20,000円(税別)

■TAISコード/00631-000564

■JANコード/4539940083195

■質量/1.7kg

■原産国/デンマーク

ミオレットシリーズ MioletⅢ

適合するマットレス幅：90cm幅
83cm幅

●特許第5089786号 手元スイッチ形状



利用者にも事業者にも優しい
新しい時代に対応するマルチなスタンダードベッド



樹脂ボード
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅 83cm幅



木製フラットボード
「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ
90cm幅 83cm幅



木製宮付ボード
「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅

利用者に優しいポイント


Point 1

車いすへ移乗しやすい




Point 2

背上げ時のズレ軽減

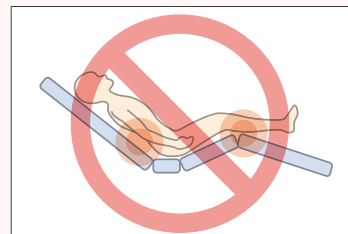

Point 3

省スペース設置

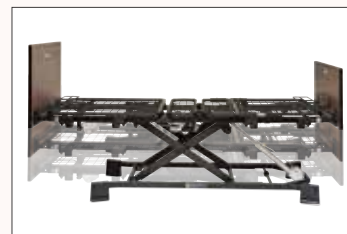

事業者にも優しいポイント

Point 1

1台6役で在庫負担を軽減

	2M	3M
ショート	サイズ切替	モーター 取付 + 手元 スイッチ 交換
レギュラー	サイズ切替	
ロング	サイズ切替	


Point 2

組み立てやすい・パーツの軽量化



13kg
以下

垂直昇降で省スペース設置を実現 移乗のしやすさ、身体のスレ抑制機能も充実

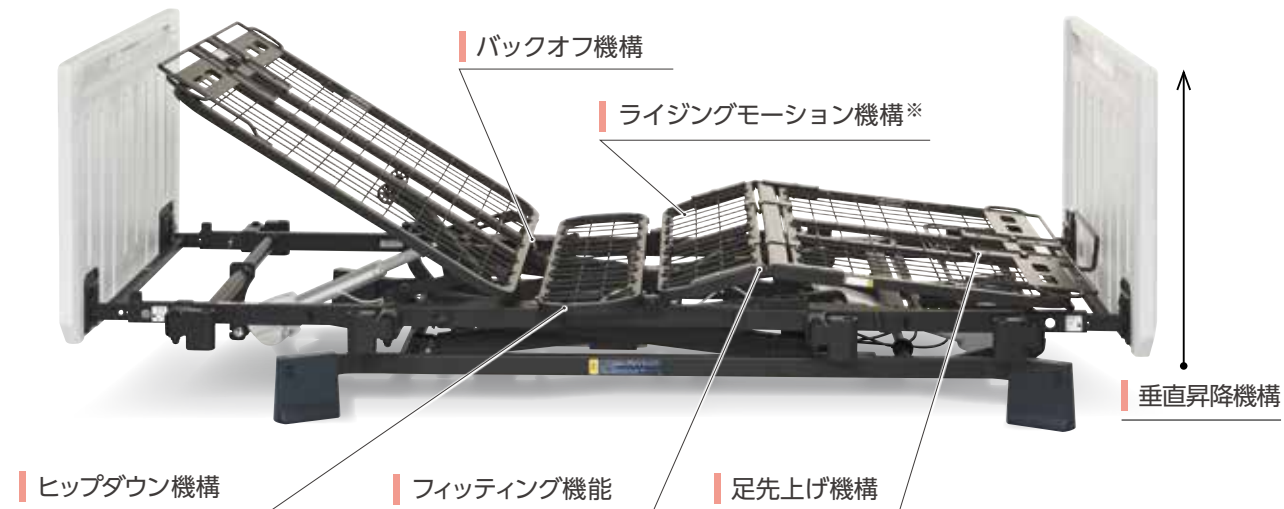

※……背上げ1モーターおよび2モーターのみの機構となります。


省スペースに設置可能な垂直昇降機構

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
全長は業界トップクラスの省スペース設計を実現しました。



身長に合わせて選べるベッドサイズ

身長やお部屋のスペースに合わせてサイズをお選びいただけます。ロング・レギュラー・ショートのパーツは共通のため、サイズ変更に別部品は必要ありません。

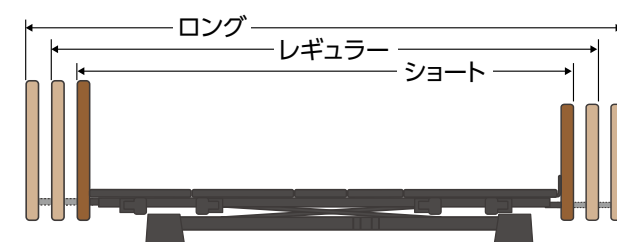



背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!




「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

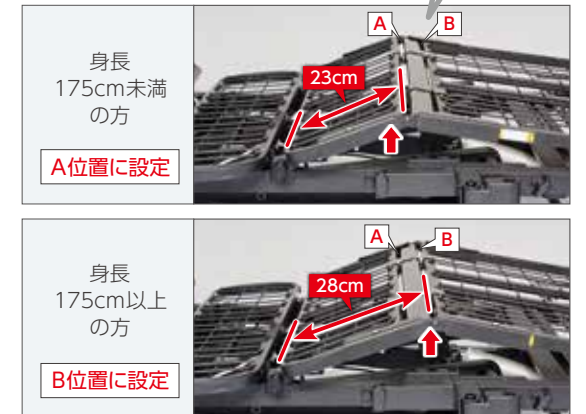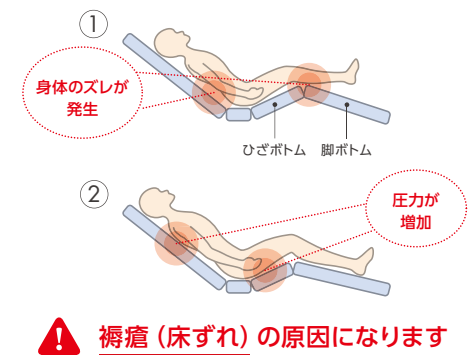

背上げ時のズレを抑える1ボタン操作の ライジングモーション機構


背上げボタンを押すと、背と膝の角度を自動的に調整しながらリクライニングをおこなうことにより、足方向へのズレを抑制します。背を上げ続けると膝は下がることで腹部の圧迫を抑え、背を上げきると膝はフラットになり端座位も取りやすくなります。

※背上げ単独動作への切り替えもワンタッチで可能です。

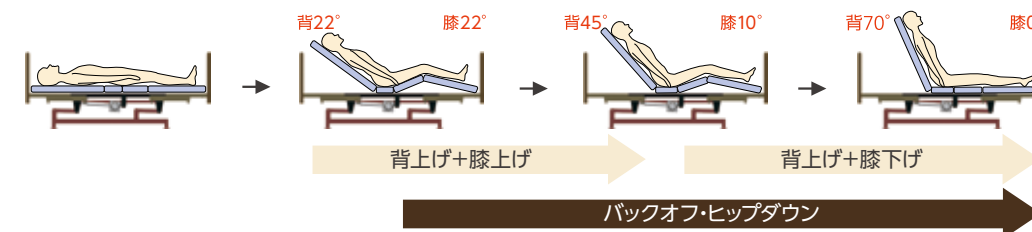

ヒップダウン機構

背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起こし、ズレを抑制します。

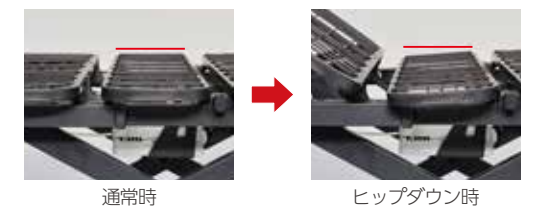


背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。



足先上げと足先下げの簡単切替え


足先の角度をワンタッチで切替
えできます。脚の浮腫（むくみ）軽
減にも対応できます。

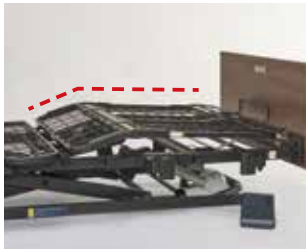

足先上げ



足先下げ

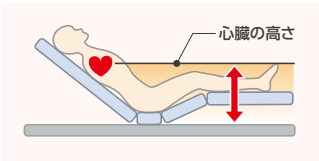

心機能に不全のある方は、脚が
心臓の位置よりも高くない
ようご注意ください。

収納式サイドレールホルダー

全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に
移乗できます。



使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の
間にひっかけて保持することができます。手が動かしにくい
方でも握りやすく、使いやすいデザインです。



背上げと高さの位置確認

樹脂ボードには背角度の目安となるマーク、ベースには昇降高
さの目安となるローラーガイドがあり、適切な位置を確認しな
がらベッドを操作することができます。



さまざまなオプションの使用にも対応

低床ながら、床とベースとのすき間は7.5cmを確保。
サイドテーブルを使用でき、お掃除もしやすい設計です。
別売のハイトスペーサーを装着するとベース下は12cmとなり、
リフトの使用にも対応します。



モータータイプ



背上げ1モーター



2モーター



3モーター



※組立時に2段階の高さに設定できます。

型式

■ 樹脂ボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-11AC ■TAIS/00631-000549 ■JAN/4539940010573	P113-21AC ■TAIS/00631-000553 ■JAN/4539940010627	P113-31AC ■TAIS/00631-000557 ■JAN/4539940010672
83cm幅	P113-12CC ■TAIS/00631-000549 ■JAN/4539940010726	P113-22CC ■TAIS/00631-000553 ■JAN/4539940010757	P113-32CC ■TAIS/00631-000557 ■JAN/4539940010788

■ 木製フラットボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-11BA ■TAIS/00631-000550 ■JAN/4539940010580	P113-21BA ■TAIS/00631-000554 ■JAN/4539940010634	P113-31BA ■TAIS/00631-000558 ■JAN/4539940010689
83cm幅	P113-12DA ■TAIS/00631-000550 ■JAN/4539940010733	P113-22DA ■TAIS/00631-000554 ■JAN/4539940010764	P113-32DA ■TAIS/00631-000558 ■JAN/4539940010795


■ 木製宮付ボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-11BB ■TAIS/00631-000551 ■JAN/4539940010597	P113-21BB ■TAIS/00631-000555 ■JAN/4539940010641	P113-31BB ■TAIS/00631-000559 ■JAN/4539940010696


仕様

背上げ1モーター


■樹脂ボード(90cm幅)

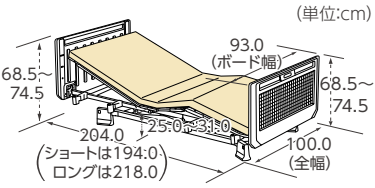


■木製フラットボード(90cm幅)

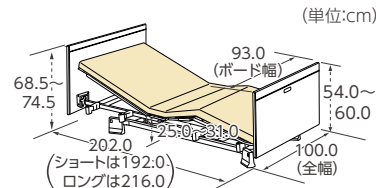


■木製宮付ボード(90cm幅)

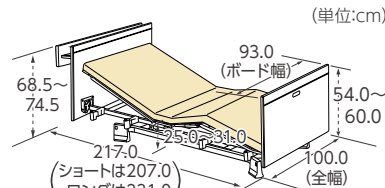

■樹脂ボード(83cm幅)

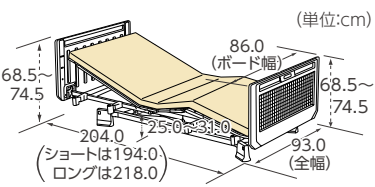


■木製フラットボード(83cm幅)

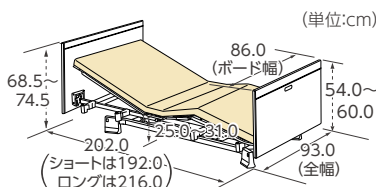


※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。

2モーター／3モーター


■樹脂ボード(90cm幅)

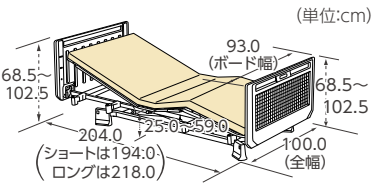


■木製フラットボード(90cm幅)

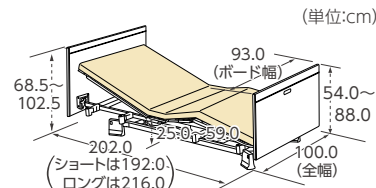


■木製宮付ボード(90cm幅)

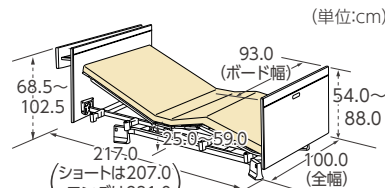

■樹脂ボード(83cm幅)

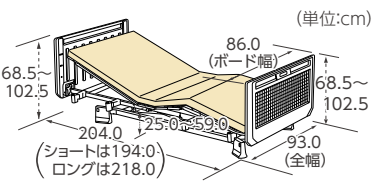

■木製フラットボード(83cm幅)

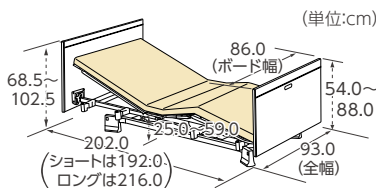

※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。

		背上げ1 モーター	2 モーター	3 モーター	
マットレス適合寸法		90cm 幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅:88.0~91.0cm		
		83cm 幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅:83.0cm		
質量	90cm 幅	樹脂ボード	84.0kg	85.5kg	86.5kg
		木製フラットボード	86.0kg	87.5kg	88.5kg
		木製宮付ボード	90.0kg	91.5kg	92.5kg
	83cm 幅	樹脂ボード	81.5kg	83.0kg	84.0kg
		木製フラットボード	83.0kg	84.5kg	85.5kg
梱包		5 梱包(木製宮付ボードは6 梱包)			
材質		本体部: スチール、ABS 樹脂 ヘッド・フットボード: (樹脂ボード)PE 樹脂 (木製ボード)MDF、オレフィン系シート			
電動機能	背上げ角度	0~70 度			
	膝上げ角度	0~22 度(背上げ連動)		0~18 度	
床面高		25.0/31.0cm(2 段階)	25.0~59.0cm		
定格電圧		AC100V~240V			
定格消費電力		100W	150W		
モーター部		LINAK 社製			
最大利用者体重		138kg/安全動作荷重: 174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

専用オプション

ミオレットⅢ専用ハイトスペーサー(4個組)



装着時の床面高は+4.5cmになります。

PH05-45

■メーカー希望小売価格

6,900円(税別)

■TAISコード/00631-000562

■JANコード/4539940010825

■材質/ABS樹脂

■原産国/ベトナム

※キャスターとの併用はできません。

ミオレットⅢ専用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+1.5cmになります。

PC03-8CK

■メーカー希望小売価格

23,000円(税別)

■TAISコード/00631-000561

■JANコード/4539940010818

■材質/ナイロン、ポリウレタン、

スチール、ABS樹脂

■原産国/キャスター:台湾

カバー:ベトナム

3モーター変換キット(2モーター → 3モーター)



2モーターから3モーターへ変換できます。

BS-001

■メーカー希望小売価格

オープン価格

■TAISコード/00631-000563

■JANコード/4539940010832

2モーター変換キット(3モーター → 2モーター)



3モーターから2モーターへ変換できます。

BS-002

■メーカー希望小売価格

オープン価格

■JANコード/4539940010849

ミオレット MioLet II

適合するマットレス幅：90cm幅
83cm幅

●特許第5089786号 手元スイッチ形状



対象疾患を広げ、使いやすさと安全性が
さらに向上したスタンダードモデル



木製宮付ボード
「アミカルサポートマットレス」とのセット例
90cm幅




木製フラットボード
「ニューポイントマットレス」とのセット例
90cm幅

ボード

高級感のある木デザイン




木製タイプ

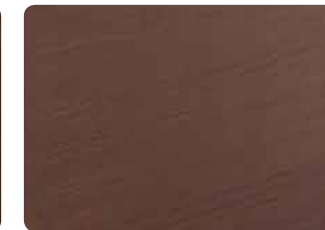

樹脂タイプ

EBコーティング

擦り傷、汚れ、日光に強いEBコーティングを施しています。

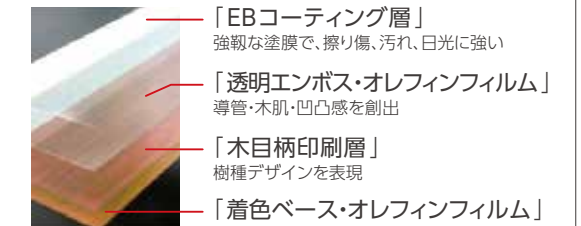


樹脂ボード ホワイティBR
「ユービーポイントマットレス」とのセット例
90cm幅 83cm幅



樹脂ボード ウッディBR
90cm幅 83cm幅

「身体のズレ軽減」に配慮した 4つのポイント機構

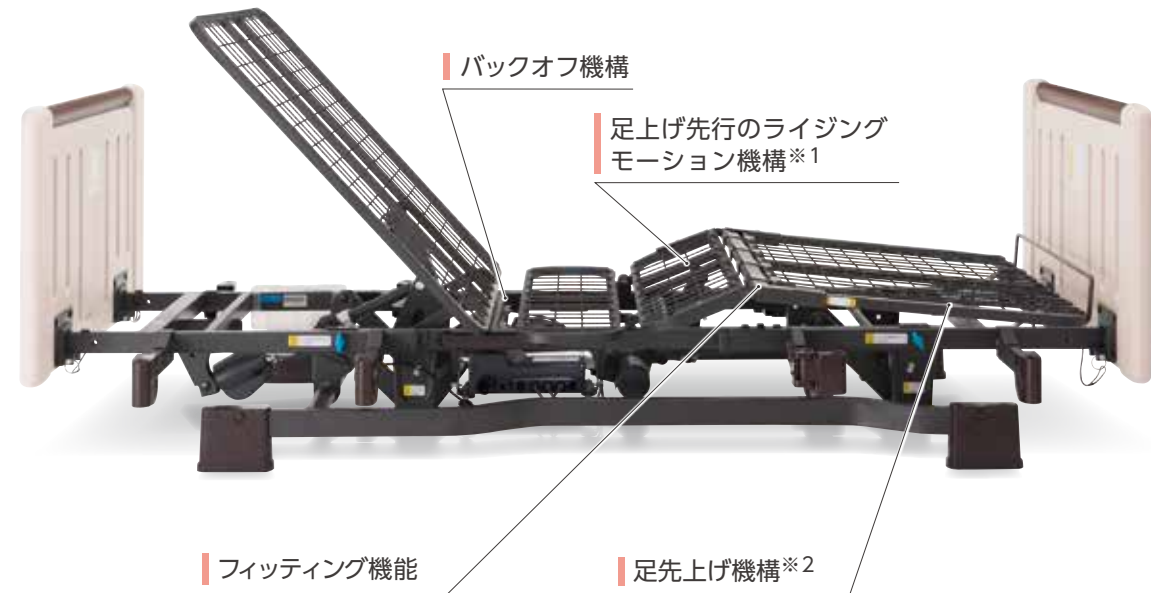


※1…背上げ1モーターおよび2モーターのみの機構となります。
※2…昇降1モーターではご利用になれません。


背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

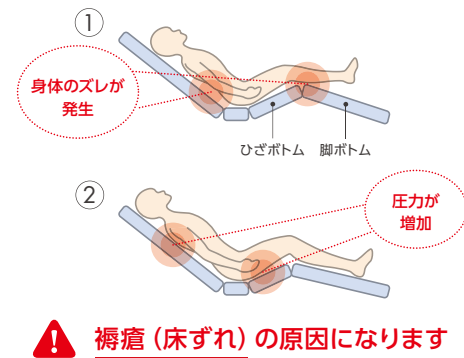


ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!

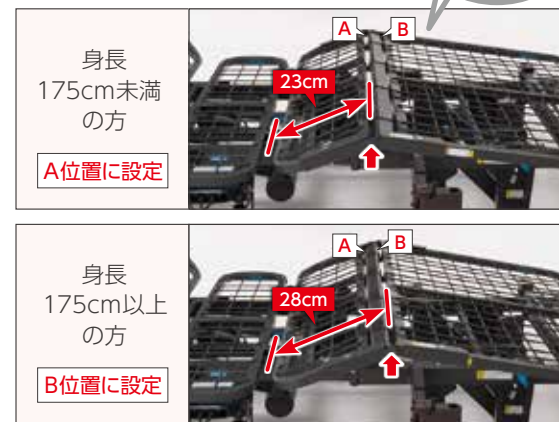

背上げ時のズレを抑える1ボタン操作のライジングモーション機構

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後に背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。 ※背上げ単独動作への切り替えもワンタッチで可能です。

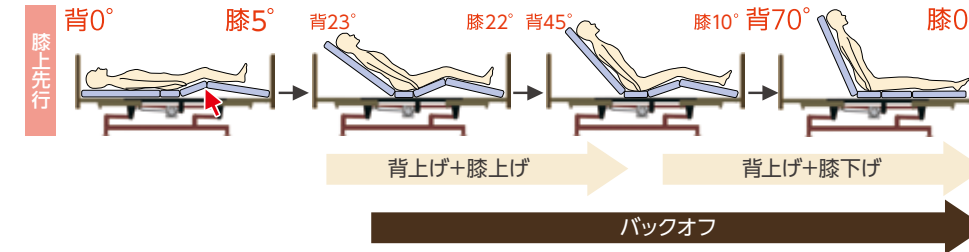


端座位をとりやすい膝0度



背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。

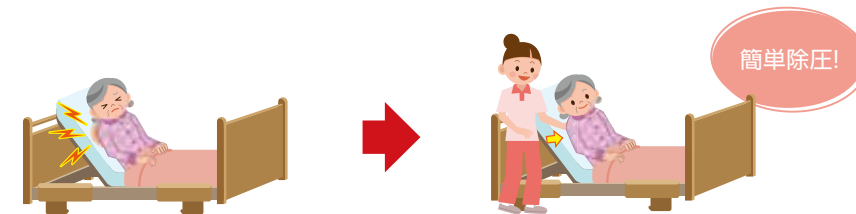


※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。
背上げ中に発生する背圧を放置すると呼吸困難になる恐れもあります。




足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切替えます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。

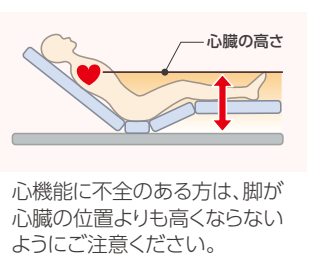

ひとくちメモ

寝た状態になると内臓が横に広がり、肺を圧迫し容積が小さくなります。結果、息苦しさを感ずることがあります。背上げ機能を使うことで、内臓が下がり肺の圧迫が無くなります。

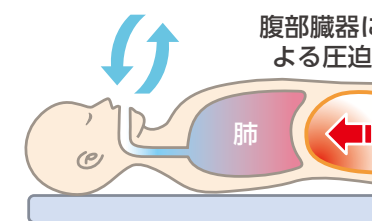

機能

車いすとの移乗もすき間がなく安心な収納式サイドレールホルダー

脚側1箇所のサイドレールホルダーは簡単に収納できます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗をおこなうことができます。

※収納式サイドレールホルダーは、左右それぞれ写真の1箇所のみとなります。他の箇所は固定式となります。



静音性・防水性にも優れたデンマーク LINAK社製モーターを搭載

静音性・防水性 (IPX4) に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。
さらにお手入れがしやすくなりました。
※IPX4とは、全方向からの水の飛沫に対応した防水規格です。



モータータイプ

背1
モーター

背上げ70°
背膝連動70°/22°
高さ調節 (手動)

昇1
モーター

高さ調節

※手動によるベッドの昇降が可能です。

2
モーター

背上げ70°
背膝連動70°/22°
高さ調節

3
モーター

背上げ70°
背膝連動70°/18°
膝上げ18°
高さ調節

型式

■ 樹脂ボード ウッディBR※価格はオープン価格です。

		背上げ1モーター 非課税	昇降1モーター	2モーター 非課税	3モーター 非課税
90cm幅	レギュラー タイプ	P106-11AA ■TAIS/00631-000238 ■JAN/4539940075565	P106-41AA ■TAIS/00631-000244 ■JAN/4539940075626	P106-21AA ■TAIS/00631-000240 ■JAN/4539940075589	P106-31AA ■TAIS/00631-000242 ■JAN/4539940075602
	ショート タイプ	P106-12AA ■TAIS/00631-000238 ■JAN/4539940075640	P106-42AA ■TAIS/00631-000244 ■JAN/4539940075701	P106-22AA ■TAIS/00631-000240 ■JAN/4539940075664	P106-32AA ■TAIS/00631-000242 ■JAN/4539940075688
83cm幅	レギュラー タイプ	P106-13AC ■TAIS/00631-000238 ■JAN/4539940075909	P106-43AC ■TAIS/00631-000244 ■JAN/4539940075961	P106-23AC ■TAIS/00631-000240 ■JAN/4539940075923	P106-33AC ■TAIS/00631-000242 ■JAN/4539940075947
	ショート タイプ	P106-14AC ■TAIS/00631-000238 ■JAN/4539940075985	P106-44AC ■TAIS/00631-000244 ■JAN/4539940001052	P106-24AC ■TAIS/00631-000240 ■JAN/4539940001014	P106-34AC ■TAIS/00631-000242 ■JAN/4539940001038

■ 樹脂ボード ホワイトBR

		背上げ1モーター 非課税	昇降1モーター	2モーター 非課税	3モーター 非課税
90cm幅	レギュラー タイプ	P106-11AB ■TAIS/00631-000239 ■JAN/4539940075572	P106-41AB ■TAIS/00631-000237 ■JAN/4539940075633	P106-21AB ■TAIS/00631-000241 ■JAN/4539940075596	P106-31AB ■TAIS/00631-000243 ■JAN/4539940075619
	ショート タイプ	P106-12AB ■TAIS/00631-000239 ■JAN/4539940075657	P106-42AB ■TAIS/00631-000237 ■JAN/4539940075718	P106-22AB ■TAIS/00631-000241 ■JAN/4539940075671	P106-32AB ■TAIS/00631-000243 ■JAN/4539940075695
83cm幅	レギュラー タイプ	P106-13AD ■TAIS/00631-000239 ■JAN/4539940075916	P106-43AD ■TAIS/00631-000237 ■JAN/4539940075978	P106-23AD ■TAIS/00631-000241 ■JAN/4539940075930	P106-33AD ■TAIS/00631-000243 ■JAN/4539940075954
	ショート タイプ	P106-14AD ■TAIS/00631-000239 ■JAN/4539940075992	P106-44AD ■TAIS/00631-000237 ■JAN/4539940001069	P106-24AD ■TAIS/00631-000241 ■JAN/4539940001021	P106-34AD ■TAIS/00631-000243 ■JAN/4539940001045

■ 木製フラットボード

		背上げ1モーター 非課税	昇降1モーター	2モーター 非課税	3モーター 非課税
90cm幅	レギュラー タイプ	P106-11BE ■TAIS/00631-000256 ■JAN/4539940001649	P106-41BE ■TAIS/00631-000268 ■JAN/4539940001687	P106-21BE ■TAIS/00631-000260 ■JAN/4539940001724	P106-31BE ■TAIS/00631-000264 ■JAN/4539940001762
	ショート タイプ	P106-12BE ■TAIS/00631-000256 ■JAN/4539940001809	P106-42BE ■TAIS/00631-000268 ■JAN/4539940001847	P106-22BE ■TAIS/00631-000260 ■JAN/4539940001885	P106-32BE ■TAIS/00631-000264 ■JAN/4539940001922

■ 木製宮付ボード

		背上げ1モーター 非課税	昇降1モーター	2モーター 非課税	3モーター 非課税
90cm幅	レギュラー タイプ	P106-11BF ■TAIS/00631-000257 ■JAN/4539940001656	P106-41BF ■TAIS/00631-000269 ■JAN/4539940001694	P106-21BF ■TAIS/00631-000261 ■JAN/4539940001731	P106-31BF ■TAIS/00631-000265 ■JAN/4539940001779
	ショート タイプ	P106-12BF ■TAIS/00631-000257 ■JAN/4539940001816	P106-42BF ■TAIS/00631-000269 ■JAN/4539940001854	P106-22BF ■TAIS/00631-000261 ■JAN/4539940001892	P106-32BF ■TAIS/00631-000265 ■JAN/4539940001939

介護用電動ベッド





マットレス

周辺機器

26

27

仕様

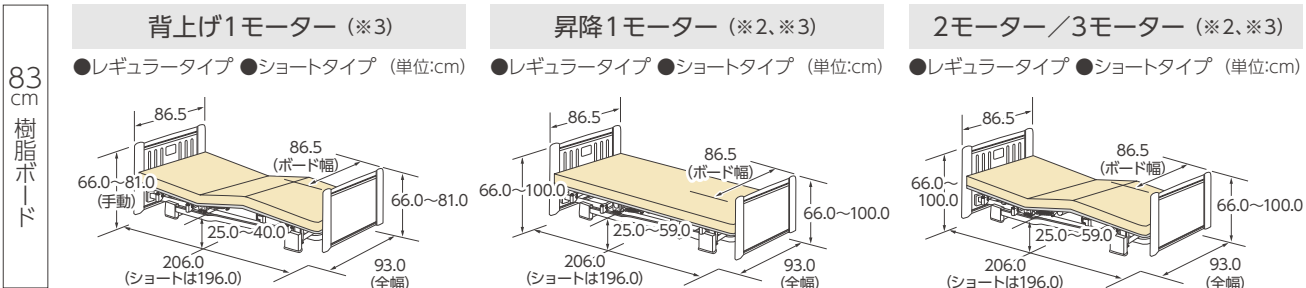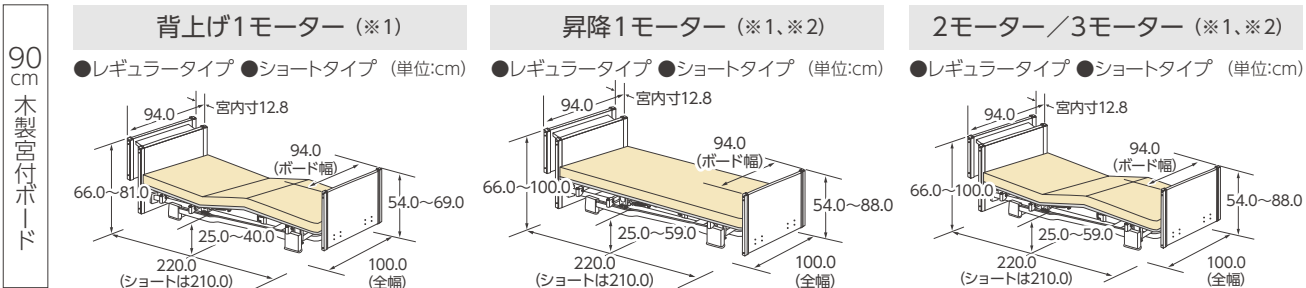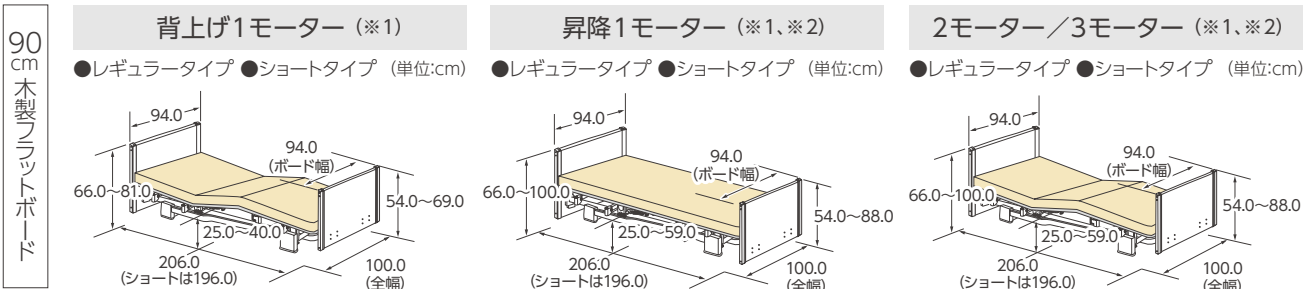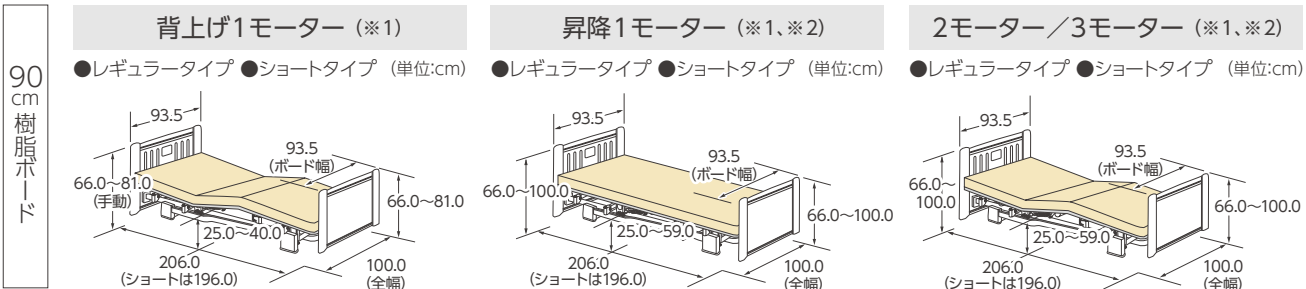

※床からベースフレームの間は6.0cmとなります。
※昇降時はスイングしながら昇降する為、脚側は8cm以上、頭側は1cm以上のスペースが必要です。
※サイドレールホルダー使用時は90cm幅の場合は全幅100.0cm、83cm幅の場合は全幅93.0cmとなります。

			背上げ1モーター	昇降1モーター	2モーター	3モーター
マットレス適合寸法		90cm 幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm)、 幅:88.0~91.0cm			
		83cm 幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm)、 幅:83.0cm			
質量	90cm 幅 樹脂ボード	レギュラータイプ	76.5kg	72.5kg	77.0kg	78.0kg
		ショートタイプ				
	90cm 幅 木製フラットボード	レギュラータイプ	80.5kg	76.5kg	81.0kg	82.0kg
		ショートタイプ				
	90cm 幅 木製宮付ボード	レギュラータイプ	89.0kg	85.0kg	89.5kg	90.5kg
		ショートタイプ				
	83cm 幅 樹脂ボード	レギュラータイプ	75.0kg	71.0kg	75.5kg	76.5kg
		ショートタイプ				
梱包			5梱包			
材質			本体ユニット: スチール、ABS樹脂、PP樹脂 樹脂ボード: PE樹脂 木ボード: MDF オレフィン化粧合板、天然木			
電動機能	背上げ角度	0~70度	0度	0~70度		
	膝上げ角度	0~22度(背上げ連動)	0度	0~22度(背上げ連動)	0~18度	
床面高		25.0~40.0cm(手動)	25.0~59.0cm			
		専用ハイトスペーサー(PC501-FU45)装着時: +4.5cm 専用キャスター(PC503-8CK1)装着時: +3.5cm				
定格電圧			AC100V			
定格消費電力			70W	100W		
モーター部			LINAK 社製			
最大利用者体重			138kg/安全動作荷重: 174kg(1700N)			
原産国			ベトナム			

専用オプション

4.5cmハイトスペーサー (4個組)

装着時の床面高は+4.5cmになります。

PC501-FU45
■メーカー希望小売価格
6,900円(税別)
■TAISコード/00631-000205
■JANコード/4539940081726
■材質/PP樹脂
■原産国/ベトナム
※固定脚仕様でガス圧式昇降ベッドテーブルをご使用の際は、当該商品が必要となります。
※キャスターとの併用はできません。

キャスター (4個組)

装着時の床面高は+3.5cmになります。

PC503-8CK1
■メーカー希望小売価格
19,500円(税別)
■TAISコード/00631-000236
■JANコード/4539940082143
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国/キャスター:台湾
カバー:ベトナム
※ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組

手元スイッチホルダー

手元スイッチを掛けることができます。

PE501-D40
■メーカー希望小売価格
1,100円(税別)
■JANコード/4539940081801
■寸法/長さ21.7×幅7.6×高さ5.3cm
■質量/60g
■材質/PP樹脂
■原産国/ベトナム

エアマット用ハンガー

エアマットのポンプやリモコンを設置できます。

PE500-A4050
■メーカー希望小売価格
1,700円(税別)
■JANコード/4539940081795
■寸法/長さ33.5×幅10.5×高さ12.5cm
■質量/420g ■材質/バー部:POM樹脂、フック部:ABS樹脂 ■耐荷重/10kg
■原産国/ベトナム

Primolet
プリモレット

適合するマットレス幅：90cm幅

2分割構造で簡単組立
ベッド用グリップも装着できるベーシックモデル



「ニューポイントマットレス」と
「サイドレール PA505-75」との組み合わせ例

機能

- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造
- 床面高さは、24.0cmと31.0cmの2段階に調整可能
(専用オプション使用で20.5～38.0cmに調整可能)
- ベッド用グリップなどの周辺機器を使用可能
- ワイヤーの装着で背膝連動も可能
- 本体は搬入性を考慮した2分割構造
- 通気性に優れたワイヤーメッシュの床面構造



立ち上がりや移乗をサポートする
ベッド用グリップも取り付けできます。



ベッド用グリップ「ニーパロ+」の装着例

モータータイプ



背上げ1モーター



背上げ70°



背膝連動70°/19°



自立支援介護用1モーターベッド

PZB-ES1JFA


■メーカー希望小売価格

138,000円 **非課税**

■TAISコード/00631-000183

■JANコード/4539940073547

仕様

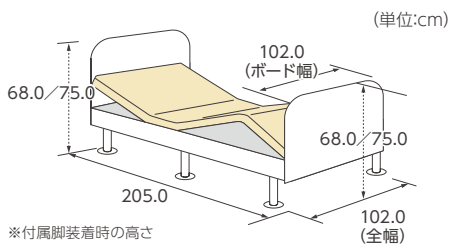

マットレス適合寸法		全長190.0～193.0cm、幅88.0～90.0cm
質量		62.5kg
梱包		3梱包
材質		本体部:スチール ヘッド・フットボード部:プリント紙化粧繊維板、PU塗装 サイドパネル:天然木、PU塗装
電動機能	背上げ角度	0～70度
	膝上げ角度	0～19度(背上げ連動)
定格電圧		AC100V
定格消費電力		50W
モーター部		LIMOSS社製
最大利用者体重		120kg/安全動作荷重:174kg(1700N)
原産国		ベトナム

延長脚の組み合わせ、キャスターと延長脚の組み合わせと床面高さ

	標準付属		別売延長脚追加時			キャスターと延長脚の組み合わせ					
延長脚	14.0	14.0+7.0	3.5+7.0	14.0+3.5	14.0+14.0	7.0	14.0	14.0+7.0	3.5+7.0	14.0+3.5	14.0+14.0
床面高	24.0	31.0	20.5	27.5	38.0	21.0	28.0	35.0	24.5	31.5	42.0

※安全のため、プリモレットに装着できる延長脚は2本までとなっております。 ※7cm延長脚1本のみでの設置はできません。

専用オプション

延長脚



写真は7cm延長脚です

装着時の床面高は+14cmになります。

PDP-140G(6pcs) 14cm延長脚(6個組)

- メーカー希望小売価格 **5,500円(税別)**
- JANコード/4539940081559
- 材質/スチール、ABS樹脂
- 原産国/ベトナム

装着時の床面高は+7cmになります。

PDP-70G(6pcs) 7cm延長脚(6個組)

- メーカー希望小売価格 **5,500円(税別)**
- JANコード/4539940081566
- 材質/スチール、ABS樹脂
- 原産国/ベトナム

装着時の床面高は+3.5cmになります。

PDP-35G(6pcs) 3.5cm延長脚(6個組)

- メーカー希望小売価格 **5,500円(税別)**
- JANコード/4539940081573
- 材質/スチール、ABS樹脂
- 原産国/ベトナム

キャスター(6個組)



装着時の床面高は+4cmになります。

PPL-8CK6S(6pcs)

- メーカー希望小売価格 **27,600円(税別)**
- TAISコード/00631-000160
- JANコード/4539940081474
- 材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
- 原産国/ベトナム

ストッパー付×2個
ストッパー無し×4個


※このベッドに装着できるオーバーテーブルはご用意しておりません。

在宅用電動介護用ベッドの
JIS規格での隙間の基準 (抜粋)

事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格 (JIS T 9254) では下記の通り規定されました。

- ①レール周りのAにおいて図1の様な直径6cmの円柱形の物を50N (約5.1kgf) で押さえても図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは31.8cm以上の隙間があること。
- ②ベッド用グリップ周りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N (約5.1kgf) で押しても通過しないこと。
- ③レール周りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。

JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご使用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う必要があります。

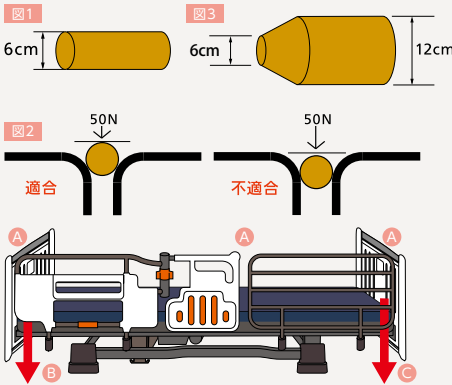

レギュラータイプの場合

	PF500-116	PA505-75
ラフィオ	3.0cm	3.5cm
ミオレットⅢ	1.5cm	3.5cm
ミオレットⅡ	3.0cm	3.0cm
プリモレット	2.0cm	2.0cm

	PF500-116	PA505-44
ラフィオ	3.0cm	34.5cm
ミオレットⅢ	1.5cm	34.5cm
ミオレットⅡ	3.0cm	34.5cm
プリモレット	2.0cm	2.0cm



	PF500-116	PA505-44
ラフィオ	3.0cm	32.5cm
ミオレットⅢ	1.5cm	31.0cm
ミオレットⅡ	3.0cm	32.5cm
プリモレット	2.0cm	32.5cm

※ミオレットⅢでは、この組み合わせはご使用いただけません。

	PA505-96	PA505-96
ラフィオ	3.0cm	3.0cm
ミオレットⅢ	1.5cm	3.0cm
ミオレットⅡ	3.0cm	3.0cm
プリモレット	2.0cm	2.0cm

	PA505-96	PA505-44
ラフィオ	3.0cm	55.0cm
ミオレットⅢ	1.5cm	55.0cm
ミオレットⅡ	3.0cm	55.0cm
プリモレット	2.0cm	2.0cm

	PA505-75	PA505-75
ラフィオ	3.0cm	45.0cm
ミオレットⅢ	1.5cm	45.0cm
ミオレットⅡ	3.0cm	45.0cm
プリモレット	2.0cm	2.0cm

	PA505-75	PA505-44
ラフィオ	3.0cm	76.0cm
ミオレットⅢ	1.5cm	76.0cm
ミオレットⅡ	3.0cm	76.0cm
プリモレット	2.0cm	2.0cm




	PA505-75	PA505-44
ラフィオ	3.0cm	45.0cm
ミオレットⅢ	1.5cm	31.0cm
ミオレットⅡ	3.0cm	32.5cm
プリモレット	2.0cm	32.5cm

※ミオレットⅢでは、この組み合わせはご使用いただけません。

ロングタイプの場合

ボード側に必ず「ロングタイプ対応スペーサー」を取り付けてください。

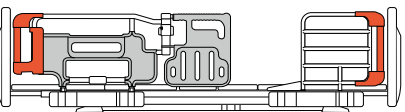

取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です！

ベッドの安全性に関することは、「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページを参照ください。

マットレス

ベッドを使う方の環境を考えて
開発されたマットレス

マットレス	
アミカルサポートマットレス	34
ニューポイントマットレス	36
スタンダードマットレス	36
ユービーポイントマットレス	37
エミーネ 3Dゾーンケアマットレス	38
エミーネ ポジショニングクッション	39
エミーネ 車椅子クッション	39
オーバーレイウレタンマットレス	40
延長マットレス	40

アミカルサポートマットレス

リクライニングへの追従性と体圧分散性を高めたハイグレードウレタンマットレス



通気タイプ

■メーカー希望小売価格 オープン価格

90cm幅	レギュラータイプ	PM11-9009
	■TAISコード/00631-000506	■JANコード/4539940061094
	ショートタイプ	PM11-9009S
	■TAISコード/00631-000507	■JANコード/4539940061100

■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.5kg(ショート5.0kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

83cm幅	レギュラータイプ	PM11-8309
	■TAISコード/00631-000508	■JANコード/4539940061117
	ショートタイプ	PM11-8309S
	■TAISコード/00631-000509	■JANコード/4539940061124

■寸法/幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.0kg(ショート4.5kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 オープン価格

90cm幅	レギュラータイプ	PM12-9009
	■TAISコード/00631-000510	■JANコード/4539940061131
	ショートタイプ	PM12-9009S
	■TAISコード/00631-000511	■JANコード/4539940061148

■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.5kg(ショート5.0kg)
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

83cm幅	レギュラータイプ	PM12-8309
	■TAISコード/00631-000512	■JANコード/4539940061155
	ショートタイプ	PM12-8309S
	■TAISコード/00631-000513	■JANコード/4539940061162


■寸法/幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.0kg(ショート4.5kg)
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

ハイバック・背・膝のリクライニングに対応する高い追従性

中材の表面・裏面および屈曲位置に高伸縮ウレタンを採用。高い追従性により様々なベッドのリクライニングに対応でき、背上げ時のズレを抑制します。外カバーには伸縮性の高い生地を使用することで、リクライニングとの追従性をさらに高めます。

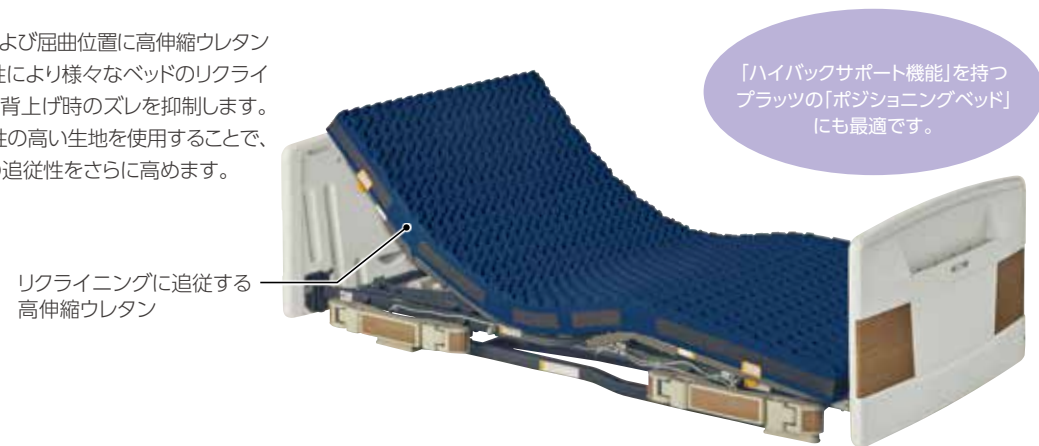


外カバー特殊加工

外カバーには難燃性の高い生地を使用。院内感染でのリスクが高いMRSAに対し、増殖を抑制する抗菌加工を施しています。吸湿性・伸縮性に優れた通気タイプとお手入れしやすい清拭タイプの2タイプをラインナップしています。



高いメンテナンス性

無膜加工によりウレタンでありながら洗浄・乾燥が可能です。通気性にも優れています。

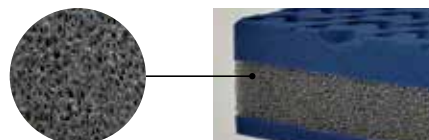


身体の部位にあわせた独自加工による高い体圧分散性

表面には身体の部位にあわせ、3タイプのプロファイル加工を採用。高い体圧分散効果を発揮します。頭、胸、腰、足の身体を支える部位には硬めのウレタンを中層に配置し、沈み込みを軽減します。

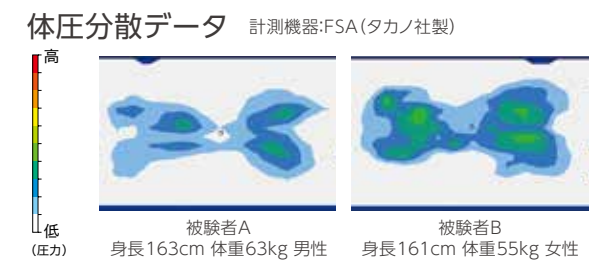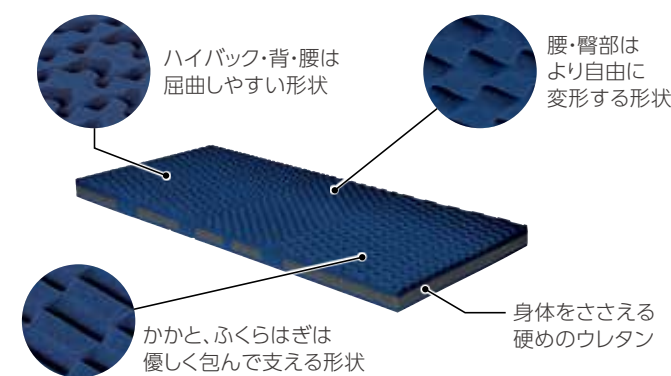

硬さが選べるリバーシブルタイプ

身体状況や好みに応じて、ノーマル面(表)とハード面(裏)を使い分けられます。
※ハード面にはプロファイル加工はございません。

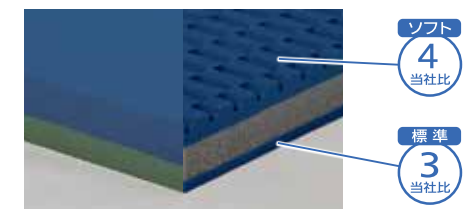

ニューポイントマットレス

通気性を考慮したスタンダードタイプのポリエステルマットレス

芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。

難燃 抗菌 防臭 防ダニ



硬さが選べて背圧を軽減する2層構造



背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと身体との摩擦により発生しますが、背上げ時に2層のマットがずれることで背圧を軽減します。

■メーカー希望小売価格 50,000円(税別)

90cm幅 レギュラータイプ PKM-9080
■TAISコード/00631-000161 ■JANコード/4539940060684
ショートタイプ PD504-A9008S
■TAISコード/00631-000226 ■JANコード/4539940060837

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/7.5kg(ショート7.4kg) ■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

83cm幅 レギュラータイプ PD504-A8308
■TAISコード/00631-000249 ■JANコード/4539940060899
ショートタイプ PD504-A8308S
■TAISコード/00631-000250 ■JANコード/4539940060905

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/7.2kg(ショート6.7kg) ■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。


スタンダードマットレス

背圧の軽減を考えた介護用マットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ



背圧を軽減する2層構造

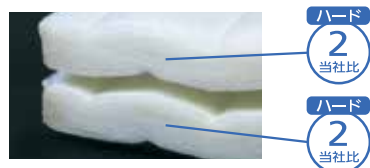

■メーカー希望小売価格 36,000円(税別)

90cm幅 レギュラータイプ PKM-E80BR

■TAISコード/00631-000163 ■JANコード/4539940060721
■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量/6.2kg
■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

ユービーポイントマットレス

コストパフォーマンスに優れたウレタンフォームマットレス

防水



UBpoint
PLATZ

通気タイプ

■メーカー希望小売価格 36,000円(税別)

90cm幅 レギュラータイプ PM09-A9008
■TAISコード/00631-000464 ■JANコード/4539940061056
ショートタイプ PM09-A9008S
■TAISコード/00631-000467 ■JANコード/4539940061063

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.1kg(ショート5.9kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム

83cm幅 レギュラータイプ PM09-A8308
■TAISコード/00631-000468 ■JANコード/4539940061070
ショートタイプ PM09-A8308S
■TAISコード/00631-000469 ■JANコード/4539940061087

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.7kg(ショート5.4kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

防水タイプ

■メーカー希望小売価格 36,000円(税別)

90cm幅 レギュラータイプ PD503-A9008
■TAISコード/00631-000247 ■JANコード/4539940060851
ショートタイプ PD503-A9008S
■TAISコード/00631-000253 ■JANコード/4539940060868

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.1kg(ショート5.9kg)
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム


83cm幅 レギュラータイプ PD503-A8308
■TAISコード/00631-000254 ■JANコード/4539940060875
ショートタイプ PD503-A8308S
■TAISコード/00631-000255 ■JANコード/4539940060882

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.7kg(ショート5.4kg)
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム


外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

硬さが選べるリバーシブルタイプ

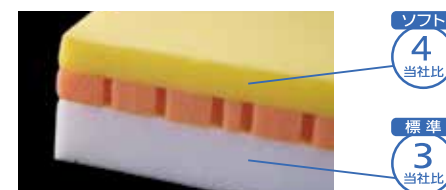

体圧分散データ 計測機器:FSA(タカノ社製)

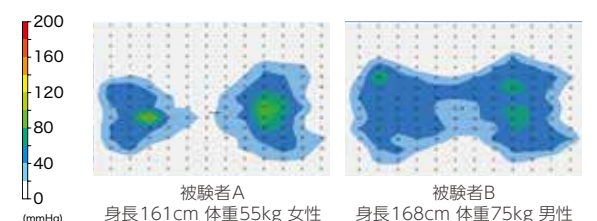

エミーネ 3Dゾーンケアマットレス

高反発ラテックスフォームを使用し、理想的な寝姿勢を実現する床ずれ防止マットレス

- MRSA
抗菌
- 抗菌
- 防 水
- 防ダニ



■メーカー希望小売価格 118,000円(税別)

90cm幅 EM-3DZCM10ST/B91

■寸法／幅91.0×厚さ10.0×長さ191.0cm ■質量／12.0kg
■材質／外カバー:ポリウレタンフィルム、ポリエステル
中材:ラテックスフォーム
■原産国／日本

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

■メーカー希望小売価格 118,000円(税別)


83cm幅 EM-3DZCM10ST/B83

■寸法／幅83.0×厚さ10.0×長さ191.0cm ■質量／11.0kg
■材質／外カバー:ポリウレタンフィルム、ポリエステル
中材:ラテックスフォーム
■原産国／日本

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

理想的な寝姿勢と体圧分散

ラテックスの最大の特長である自然な柔らかさと、
下から押し上げる弾力性により、身体の中心線を一定に保ちます。
変形関節症やリウマチ、骨が突出した状態でも、
包み込むように除圧するため痛みの軽減が期待できます。

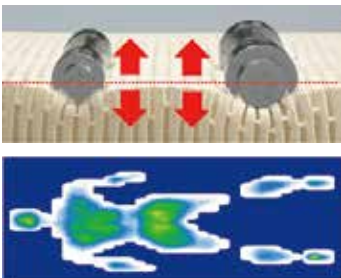

長時間維持できる体圧分散効果

就寝時にかかる圧力で引きのばされるマットレスが、
伸縮性の少ない内カバーに押し戻されることで、体圧分散
効果を長時間維持することが可能となりました。
仰臥位1分後と2時間後の仙骨部の圧力の最大値を
比較しても、ほぼ変わらない測定結果を得ています。

■体圧分散データ 最大値(仙骨部) データ:mmHg

性別	体重 (kg)	体型	BMI	1分後	5分後	15分 後	1時間 後	2時間 後	平均値
女性	43	普通	21.94	27	26	26	26	25	26
女性	50	普通	23.14	25	24	24	25	25	24.6
男性	51	やせ	17.93	38	36	38	38	39	37.8
女性	60	やや太	29.34	29	29	30	31	32	30.2
男性	63	筋肉質	23.71	29	28	27	27	28	27.8
男性	70	普通	22.86	32	32	31	32	33	32
男性	83	太	30.49	34	33	33	34	35	33.8
平均値				30.6	29.7	29.9	30.4	31	30.3

自然由来の抗菌性と防虫効果

ラテックスフォームの原料となるゴムの樹液には防虫効果の高い成分が多く含まれて
おり、ダニなどの害虫に対しての忌避性があります。
また、エミーネにはMRSAをはじめとする一般細菌類を24時間以内にほぼ全滅させる
抗菌性があり、その効果は10年以上が経過しても低下しません。

エミーネ ポジショニングクッション

体位変換クッション(背用)

使用時の違和感が少なく、長時間の
使用でも快適に過ごせます。



EM-PCT

■メーカー希望小売価格 20,000円(税別)

■寸法／80.0×33.0×12.0cm
■質量／1.6kg
■材質／外カバー:綿、レーヨン 中材:ラテックスフォーム
■原産国／日本

フリークッション

自由に折り曲げができ、ポジショ
ニングやシーティング等、様々な場面
でお使いいただけます。



EM-FCT

■メーカー希望小売価格 24,000円(税別)

■寸法／φ15.0×195.0cm
■質量／2.3kg
■材質／外カバー:綿、レーヨン 中材:ラテックスフォーム
■原産国／日本

体位変換クッション(脚用)

背用クッションとセットで使用する
ことで、腰から下肢にかけてのねじ
れを防ぎます。



EM-PCK

■メーカー希望小売価格 13,000円(税別)

■寸法／60.0×30.0×8.0cm
■質量／1.5kg
■材質／外カバー:綿、レーヨン 中材:ラテックスフォーム
■原産国／日本

コンティニュースクッション

チップの量を調整することで、使用
状況に応じてフィット性を変えるこ
とができます。




EM-CNC

■メーカー希望小売価格 12,500円(税別)

■寸法／48.0×35.0×12.0cm
■質量／1.0kg
■材質／外カバー:綿、レーヨン 中材:ラテックスフォーム
■原産国／日本

■左右体位変換(仙骨)

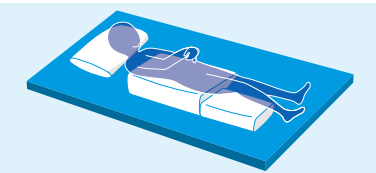


背用 + 脚用 使用

■下肢のサポート(かかと)



背用 + コンティニュース 使用

■上肢サポート(円背)

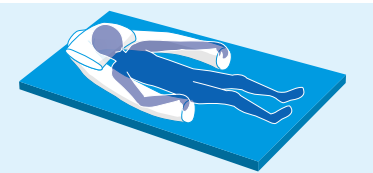

フリー+ コンティニュース 使用

エミーネ 車椅子クッション

車椅子シート

底つきしにくく、身体にかかる
圧力を分散しながら支えます。



EM-SRWCS/B

■メーカー希望小売価格 11,000円(税別)

■寸法／40.0×40.0×5.0cm
■質量／0.9kg
■材質／外カバー:ポリウレタン、ポリエステル 中材:ラテックスフォーム
■原産国／日本

車椅子クッション

衝撃吸収性に優れており、痛み
や疲労を軽減し長時間の使用
でも快適に過ごせます。



EM-WCS/LGB

■メーカー希望小売価格 14,800円(税別)

■寸法／40.0×40.0×6.0cm
■質量／1.0kg
■材質／外カバー:ポリウレタン、ポリエステル 中材:ラテックスフォーム
■原産国／日本



オーバーレイウレタンマットレス

マットレスの上に敷くことで寝心地をより良くするマットレス
四隅にはマットレス固定用のゴムバンドがついています。



■メーカー希望小売価格 **22,000円(税別)**

90cm幅 **PM06-9003**

■JANコード／4539940060998
■寸法／幅90.0×厚さ3.0×長さ191.0cm
■適合マットレスサイズ／幅90.0×長さ191.0cm (厚さ4.0cm～14.0cmまで)
■質量／2.8kg
■材質／外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／韓国

カバー (取り外し可能)とウレタンは水洗い可能です。



センサーマットを収納できるポケット付

マットレスの裏側にはポケットがあり、離床センサーのセンサーマットなどを入れて使用することができます。
センサーマットの幅は25cmまで対応できます。

延長マットレス

マットレスの長さを延長します。

延長マットレス (固綿タイプ)



■メーカー希望小売価格 **10,000円(税別)**

90cm幅 **PM08-90A**

■TAISコード／00631-000465
■JANコード／4539940061032
■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
■質量／0.6kg
■材質／外カバー・中材:ポリエステル
■原産国／韓国

83cm幅 **PM08-83A**

■JANコード／4539940061018
■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
■質量／0.5kg
■材質／外カバー・中材:ポリエステル
■原産国／韓国

延長マットレス (防水ウレタンタイプ)



■メーカー希望小売価格 **10,000円(税別)**

90cm幅 **PM08-90B**

■TAISコード／00631-000466
■JANコード／4539940061049
■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
■質量／0.5kg
■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／ベトナム

83cm幅 **PM08-83B**


■JANコード／4539940061025
■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
■質量／0.4kg
■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／ベトナム

周辺機器

より良い介護環境のための
豊富なオプション類

周辺機器	
サイドレール	42
ハンドグリップ	43
ベッド用グリップ	44
人感センサー付フットライト	48
スイッチ接続キット	48
テーブル・カーペット他	49


サイドレール

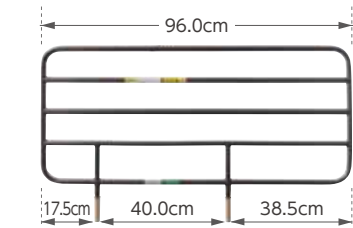

ロングサイドレール(2本組)
PA505-96
■メーカー希望小売価格 **16,100円(税別)**
■TAISコード/00631-000232
■JANコード/4539940082051
■質量/6.8kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム




ロングサイドレール(2本組) 安全カバー付
PA505-96S
■メーカー希望小売価格 **31,000円(税別)**
■TAISコード/00631-000233
■JANコード/4539940082075
■質量/7.4kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ(1枚入) PA505S-96 ¥7,400(税別)

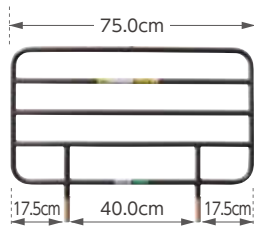

レギュラーサイドレール(2本組)
PA505-75
■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**
■TAISコード/00631-000230
■JANコード/4539940082020
■質量/5.4kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム



レギュラーサイドレール(2本組) 安全カバー付
PA505-75S
■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**
■TAISコード/00631-000231
■JANコード/4539940082044
■質量/5.9kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ(1枚入) PA505S-75 ¥7,400(税別)

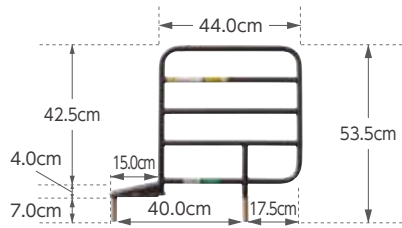



ショートサイドレール(2本組)
PA505-44
■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**
■TAISコード/00631-000228
■JANコード/4539940081986
■質量/4.5kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂 ■原産国/ベトナム




ショートサイドレール(2本組) 安全カバー付
PA505-44S
■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**
■TAISコード/00631-000229
■JANコード/4539940082013
■質量/4.8kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ(1枚入) PA505S-44 ¥7,400(税別)

ロングタイプのベッドをご使用される場合には、
下記のオプションが必要です。
スペーサーは必ずボード側に取り付けてください。


サイドレールの長さを+7cm延長するスペーサーがセットになったサイドレールです。

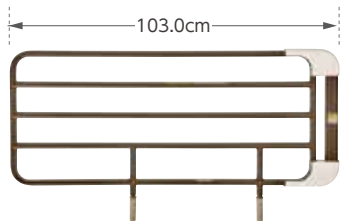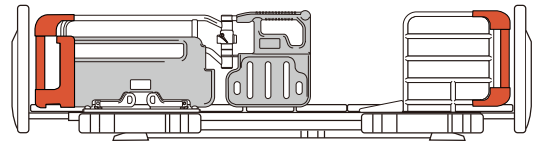

ロングサイドレール(2本組)
ロングタイプ対応スペーサー付
PA505-96L
■メーカー希望小売価格 **21,100円(税別)**
■TAISコード/00631-000444
■JANコード/4539940082884
■材質/サイドレール:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
スペーサー:PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム
※安全カバー(1枚入) PA505LS-96 ¥10,000(税別)
※スペーサーのみ(1個入) PS02-PA505 ¥2,500(税別)

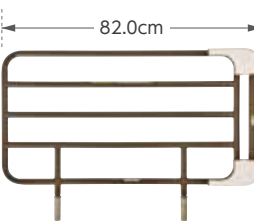




レギュラーサイドレール(2本組)
ロングタイプ対応スペーサー付
PA505-75L
■メーカー希望小売価格 **16,500円(税別)**
■TAISコード/00631-000445
■JANコード/4539940082891
■材質/サイドレール:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
スペーサー:PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム
※安全カバー(1枚入) PA505LS-75 ¥10,000(税別)

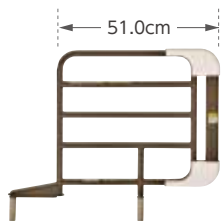

ショートサイドレール(2本組)
ロングタイプ対応スペーサー付
PA505-44L
■メーカー希望小売価格 **16,500円(税別)**
■TAISコード/00631-000446
■JANコード/4539940082907
■材質/サイドレール:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
スペーサー:PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム
※安全カバー(1枚入) PA505LS-44 ¥10,000(税別)


組み合わせ例

[ベッドはラフィオ]

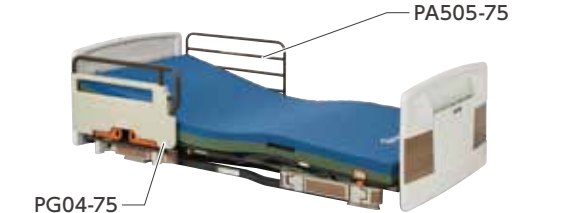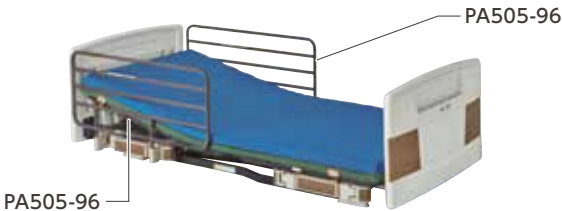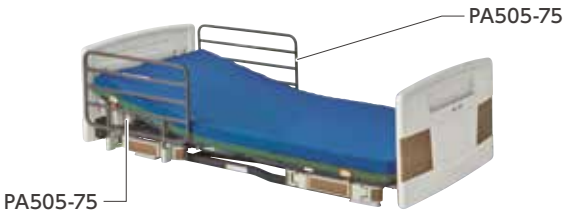


※非課税のベッドと同時に購入の場合、サイドレールは2セット(4本)まで非課税となります。

ハンドグリップ

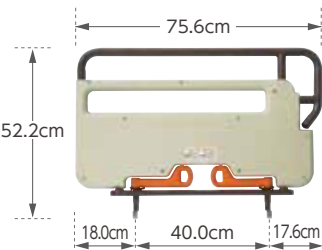


ハンドグリップ
PG04-75
■メーカー希望小売価格 **29,000円(税別)**
■TAISコード/00631-000545
■JANコード/4539940083492
■質量/5.1kg ■材質/スチール、ABS樹脂
■原産国/ベトナム
※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 ¥11,000(税別)

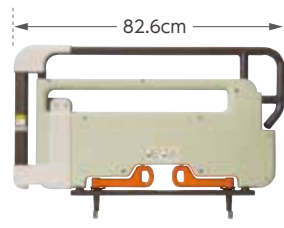


ハンドグリップ ロングタイプ対応スペーサー付
PG04-75L
■メーカー希望小売価格 **31,500円(税別)**
■TAISコード/00631-000547
■JANコード/4539940083515
■質量/5.5kg ■材質/スチール、ABS樹脂、PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム
※スペーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 ¥2,500(税別)

ニーパロ+ (プラス) ニーパロL (エル)

抱え上げない介護・看護を実現
安心・安全な移乗と
腰痛予防をサポートします

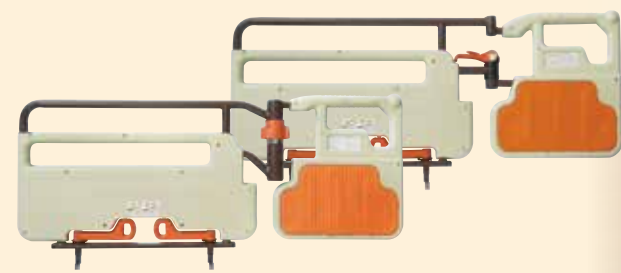

膝折れを防ぎ、
安全な立ち上がり・移乗を実現する「ニーパロひざパッド」

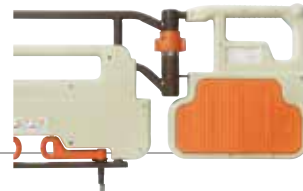

従来のベッド用グリップでは・・・

写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



ニーパロひざパッドがあると・・・



端座位時のずり落ちを防止



楽な立ち上がり



立位を安定させます



車いすからのずり落ちを防止

ベッド用グリップ「ニーパロ」の使い方

後方介助移乗

●【使い方(A)】ベッドから車いすへの介助移乗(トランスファーボードを使った場合)

抱え上げない移乗を実現



1 ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすよりもやや高く設定し、グリップ部を45度にセットします。車いすのブレーキをかけ、車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。



2 グリップ部を握り、後ろに倒れないように注意しながら、ボードを左臀部の下に敷き、ボードの端を車いすの中心位置に置きます。



3 車いすの手すりを握り、引くように促します。介助者の右足はベッドの上に乗せます。



4 左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させます。移乗中に車いすが動かないように左足で固定します。



5 右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車いすの奥まで移乗させます。



6 ボードを抜きやすいように身体を左に傾けてボードを上げ、前後に動かしながら引き抜きます。

自立移乗

●【使い方(B)】ベッドから車いすへの自立移乗(90度の場合)



1 グリップ部を90度を開き、膝をパッドにあてます。ベッドの高さは車いすよりもやや高くします。車いすを寄せ、ブレーキをかけます。



2 車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。(45度の場合も同じ)



3 膝をパッドにあてながら立ち上がり、あるいは腰を浮かして・・・



4 車いすへ移ります。

「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

ポイント

移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整する」ことです。ベッドから車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車いすの座面と水平かやや高くします。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下げ、車いすの座面と水平かやや低く設定します。






自動ロック式ベッド用グリップ ニーパロ+ (プラス)

ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式 (業界初)

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、「ニーパロ+」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。(特許第4921535号)

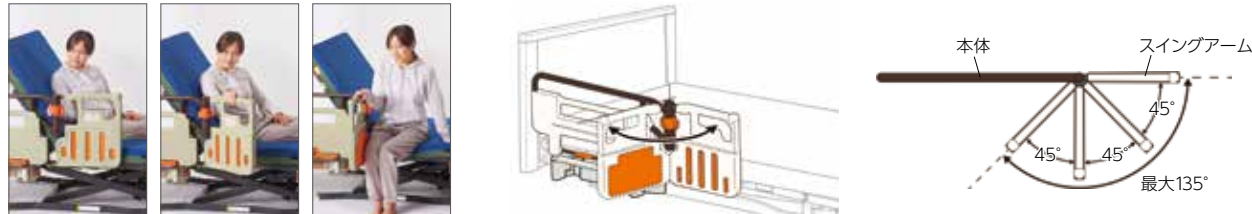


握力の弱った方でも簡単にロック操作できるユニバーサルデザインの解除ハンドル

握力が弱った方やマヒがある方でも
指や手のひらで楽に解除できる形状です。

従来品から形状を改良し、よりスムーズな
操作ができるようになりました。



仕様

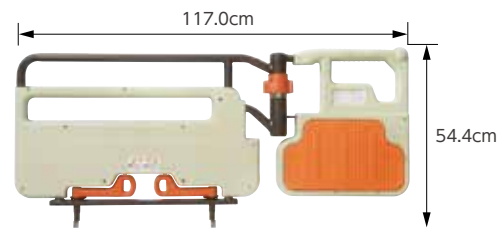

ニーパロ+ ニーパロひざパッド付

PG02-116ATP ■メーカー希望小売価格 60,000円(税別)

■TAISコード/00631-000532 ■JANコード/4539940083430
■寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/9.2kg
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国/ベトナム

ニーパロ+ ニーパロひざパッド付
ロングタイプ対応スパーサー付

PG02-116ATPL ■メーカー希望小売価格 62,500円(税別)

■TAISコード/00631-000530 ■JANコード/4539940083454
■寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/9.6kg
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
■原産国/ベトナム



ニーパロ+

PG02-116AT ■メーカー希望小売価格 56,000円(税別)

■TAISコード/00631-000531 ■JANコード/4539940083409
■寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/8.9kg
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂
■原産国/ベトナム

ニーパロ+
ロングタイプ対応スパーサー付

PG02-116ATL ■メーカー希望小売価格 58,500円(税別)

■TAISコード/00631-000529 ■JANコード/4539940083447
■寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/9.3kg
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
■原産国/ベトナム

※ニーパロ ひざパッドのみ PF500P-116 ¥4,000(税別) ※ロングタイプ対応スパーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 ¥2,500(税別)
※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 ¥11,000(税別)



レバーロック式ベッド用グリップ ニーパロL (エル)

簡単操作のレバーロック式

思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティロック
の操作が必要です。
スイングアームは22.5度毎に固定できます。




ベッドへの簡単取り付け

サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。
工具などを使わず簡単に取り付けすることができます(ニーパロ+も同様です)。



仕様

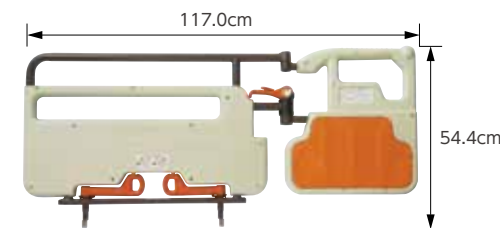

ニーパロL ニーパロひざパッド付

PG03-116MP ■メーカー希望小売価格 56,000円(税別)

■TAISコード/00631-000536 ■JANコード/4539940083461
■寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/8.0kg
■材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国/ベトナム

ニーパロL ニーパロひざパッド付
ロングタイプ対応スパーサー付

PG03-116MPL ■メーカー希望小売価格 58,500円(税別)

■TAISコード/00631-000534 ■JANコード/4539940083485
■寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/8.4kg
■材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
■原産国/ベトナム

※ニーパロ ひざパッドのみ PF500P-116 ¥4,000(税別) ※ロングタイプ対応スパーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 ¥2,500(税別)
※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 ¥11,000(税別)



ニーパロL

PG03-116M ■メーカー希望小売価格 52,000円(税別)

■TAISコード/00631-000535 ■JANコード/4539940083416
■寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/7.7kg
■材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂
■原産国/ベトナム

ニーパロL
ロングタイプ対応スパーサー付

PG03-116ML ■メーカー希望小売価格 54,500円(税別)

■TAISコード/00631-000533 ■JANコード/4539940083478
■寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/8.1kg
■材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
■原産国/ベトナム

人感センサー付フットライト

ベッドにおける起居動作や、介護の際の動線の把握など、夜間の居室における事故を予防します。



PL01-5VS ■メーカー希望小売価格 オープン価格

- 寸法／幅9.0×高さ6.0×奥行5.0cm
- 材質／PC樹脂
- 原産国／中国
- ※ラフィオは超低床用キャスター装着時にはご使用できません。

- 即時点灯性が高く、寿命が長いLEDライトを採用。
- 電源ON-OFF切り替えスイッチ付き。
- 点灯時間は1分／3分／5分／10分の4段階。ご希望の時間に合わせて点灯します。
- 明るさの調整は3段階に切り替え可能です。
- 電源はベッドの電力を使用するため、電池や別のコンセントは必要ありません。

スイッチ接続キット

意思伝達装置によるベッド操作を可能にするための接続キットです。



ミオレットⅢ・ミオレットⅡ用

PE07-S1 ■メーカー希望小売価格 オープン価格

- 寸法／幅11.0×高さ7.0×奥行5.0cm
- 材質／ABS樹脂
- 原産国／日本
- 対応する接続方法／φ3.5mmモノラルプラグによる接続

- 環境制御装置の取り付けが可能になり、手元スイッチの操作が困難な方でもベッドの昇降やリクライニングができるようになります。
- 環境制御装置を取り付ける際のベッドの改造が不要になります。改造の手間や費用、また、改造によるベッドの不具合・故障のリスクを減らします。

※意思伝達装置、環境制御装置は別売りです。当社でのお取り扱いはありませんので、販売店様へお問い合わせください。

その他

オーバーテーブル



90cm幅 PGT-400LM
83cm幅 PGT-400LM83 ■メーカー希望小売価格 11,500円(税別)

- TAISコード／90cm幅:00631-000121
83cm幅:00631-000248
- JANコード／90cm幅:4539940081245
83cm幅:4539940082174
- 寸法／90cm幅:幅100.3×奥行35.8×高さ4.1cm
83cm幅:幅93.3×奥行35.8×高さ4.1cm
- 質量／90cm幅:3.2kg 83cm幅:3.0kg
- 材質／甲板:プリント紙化粧繊維板 取っ手:ABS樹脂
- 最大使用荷重／15kg
- 原産国／台湾


床キズ防止カーペット(4枚組)



PSC-1216SC ■メーカー希望小売価格 3,400円(税別)

- 寸法／16.5×12.5cm×厚さ5mm
- 材質／ナイロン
- 原産国／日本

点滴棒

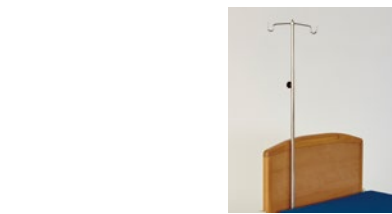

PE03-T1 ■メーカー希望小売価格 12,000円(税別)

- TAISコード／00631-000514
- JANコード／4539940082785
- 寸法／高さ103.0～183.0cm
- 質量／0.9kg
- 材質／ステンレス
- 原産国／日本

ガス圧式昇降ベッドテーブル



PZT-840 ■メーカー希望小売価格 43,700円(税別)

- TAISコード／00631-000178
- JANコード／4539940081627
- 寸法／幅84.0×奥行47.0×高さ60.0～84.0cm
(天板)幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm
- 質量／15.5kg
- 材質／ベースフレーム部:スチール
木部:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
キャスターカバー:PP樹脂
- 最大使用荷重／10kg
- 原産国／ベトナム

酸素ボンベホルダー



PE02-S1 ■メーカー希望小売価格 オープン価格

- 寸法／幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm
- 質量／2.2kg
- 材質／スチール
- 原産国／日本
- ※木製宮付ボードおよび木製フットボード、ミオレットⅢ、ミオレットⅡの木製フラットボードにはご使用できません。

点滴棒ホルダー



PE05-T1 ■メーカー希望小売価格 8,000円(税別)

- TAISコード／00631-000515
- JANコード／4539940083270
- 寸法／幅3.0×奥行8.1×高さ31.1～33.5cm
- 質量／0.9kg
- 材質／スチール、ゴム
- 原産国／ベトナム

ベッドオプション適合表			ラフィオ				ミオレットⅢ						ミオレットⅡ				プリモレット	
			90cm幅				90cm幅			83cm幅			90cm幅		83cm幅		90cm幅	
			レギュラー	ショート	ロング		レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	レギュラー	ショート	レギュラー	
No.	頁	製品名	型式	P2				P14						P22				P30
マットレス、マットレスカバー、ベッドパッド																		
1	P35	アミカルサポートマットレス(90cm幅・レギュラータイプ)	PM11-9009・PM12-9009	●		●※1		●		●※1				●				●
2	P35	アミカルサポートマットレス(90cm幅・ショートタイプ)	PM11-9009S・PM12-9009S		●				●						●			
3	P35	アミカルサポートマットレス(83cm幅・レギュラータイプ)	PM11-8309・PM12-8309								●		●※2			●		
4	P35	アミカルサポートマットレス(83cm幅・ショートタイプ)	PM11-8309S・PM12-8309S									●				●		
5	P36	ニューポイントマットレス(90cm幅・レギュラータイプ)	PKM-9080	●		●※1		●		●※1				●				●
6	P36	ニューポイントマットレス(90cm幅・ショートタイプ)	PD504-A9008S		●				●						●			
7	P36	ニューポイントマットレス(83cm幅・レギュラータイプ)	PD504-A8308								●		●※2			●		
8	P36	ニューポイントマットレス(83cm幅・ショートタイプ)	PD504-A8308S									●				●		
9	P36	スタンダードマットレス(90cm幅・レギュラータイプ)	PKM-E80BR	●		●※1		●		●※1				●				●
10	P37	ユービーポイントマットレス(90cm幅・レギュラータイプ)	PM09-A9008・PD503-A9008	●		●※1		●		●※1				●				●
11	P37	ユービーポイントマットレス(90cm幅・ショートタイプ)	PM09-A9008S・PD503-A9008S		●				●						●			
12	P37	ユービーポイントマットレス(83cm幅・レギュラータイプ)	PM09-A8308・PD503-A8308								●		●※2			●		
13	P37	ユービーポイントマットレス(83cm幅・ショートタイプ)	PM09-A8308S・PD503-A8308S									●				●		
14	P40	オーバーレイウレタンマットレス(90cm幅・レギュラータイプ)	PM06-9003	●				●						●				●
15	P40	延長マットレス(固綿タイプ)90cm幅	PM08-90A			●※3				●※3								
16	P40	延長マットレス(防水ウレタンタイプ)90cm幅	PM08-90B			●※3				●※3								
17	P40	延長マットレス(固綿タイプ)83cm幅	PM08-83A										●※3					
18	P40	延長マットレス(防水ウレタンタイプ)83cm幅	PM08-83B										●※3					
19	P38	エミーネ3Dゾーンケアマットレス(90cm幅)	EM-3DZCM10ST/B91	●				●						●				●
20	P38	エミーネ3Dゾーンケアマットレス(83cm幅)	EM-3DZCM10ST/B83								●					●		
サイドレール、ベッド用グリップ																		
21	P42	サイドレール	PA505-96(・75・44)	●	●			●	●		●	●		●	●	●	●	●
22	P42	サイドレール ロングタイプ対応スペーサー付	PA505-96(・75・44)L			●				●			●					
23	P43	ハンドグリップ	PG04-75	●	●			●	●		●	●		●	●	●	●	●
24	P43	ハンドグリップ ロングタイプ対応スペーサー付	PG04-75L			●				●			●					
25	P46	ニーパロ+	PG02-116AT(P)	●	●			●	●		●	●		●	●	●	●	●
26	P46	ニーパロ+ ロングタイプ対応スペーサー付	PG02-116AT(P)L			●				●			●					
27	P47	ニーパロL	PG03-116M(P)	●	●			●	●		●	●		●	●	●	●	●
28	P47	ニーパロL ロングタイプ対応スペーサー付	PG03-116M(P)L			●				●			●					
ハイトスペーサー、キャスター																		
29	P9・13	ラフィオ専用8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組)	PH04-80	●	●	●												
30	P9・13	ラフィオ専用超低床用キャスター(4個組)	PC01-5CK	●	●	●												
31	P9・13	ラフィオ専用低床用キャスター(4個組)	PC02-8CK	●	●	●												
32	P21	ミオレットⅢ専用4.5cmハイトスペーサー(4個組)	PH05-45					●	●	●	●	●	●					
33	P21	ミオレットⅢ専用キャスター(4個組)	PC03-8CK					●	●	●	●	●	●					
34	P29	ミオレットⅡ専用4.5cmハイトスペーサー(4個組)	PC501-FU45											●	●	●	●	
35	P29	ミオレットⅡ専用キャスター(4個組)	PC503-8CK1											●	●	●	●	
36	P31	プリモレット専用延長脚(6個組)	PDP-140(・70・35)G(6pcs)															●※4
37	P31	プリモレット専用キャスター(6個組)	PPL-8CK6S(6pcs)															●
テーブル																		
38	P49	オーバーテーブル90cm幅	PGT-400LM	●	●	●		●	●	●				●	●			
39	P49	オーバーテーブル83cm幅	PGT-400LM83								●	●	●			●	●	
40	P49	ガス圧式昇降ベッドテーブル	PZT-840	●※5	●※5	●※5		●	●	●	●	●	●	●※6	●※6	●※6	●※6	●
その他																		
41	P48	人感センサー付フットライト(短)	PL01-5VS	●※7	●※7	●※7		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
42	P48	スイッチ接続キット(ミオレットⅢ・ミオレットⅡ用)	PE07-S1					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

※1 「延長マットレス PM08-90A・PM08-90B」とあわせてご使用ください。
※2 「延長マットレス PM08-83A・PM08-83B」とあわせてご使用ください。
※3 レギュラータイプのマットレスとあわせてご使用ください。
※4 安全のため、1ヶ所に装着できる延長脚は2本までです。

※5 ご使用の際は「ラフィオ専用8cmハイトスペーサー固定脚タイプ PH04-80」または「ラフィオ専用低床用キャスター PC02-8CK」が必要です。
超低床固定脚・超低床用キャスター装着時は、ガス圧式昇降ベッドテーブルはご使用できません。
※6 ご使用の際は「ミオレットⅡ専用4.5cmハイトスペーサー PC501-FU45」が必要です。
※7 「超低床用キャスター PC01-5CK」との併用はできません。

会社概要

(2018年6月30日現在)


名称	株式会社プラッツ 英文名(PLATZ Co.,Ltd.)
設立	1992年7月3日
社員数	94名(単独)、232名(連結)
資本金	5億8,205万円 (東証マザーズ、福証Q-Board上場 証券コード:7813)
営業品目	介護用ベッド、マットレス等 ベッド周辺機器の製造販売
主販売先	医療機器・施設設備販売会社、家具販売店

- 参加団体
- 医療・介護ベッド安全普及協議会
 - (公社)関西シルバーサービス協会
 - (一社)全国福祉用具専門相談員協会
 - (一社)日本ノーリフト協会
 - (一社)日本福祉用具供給協会
 - (一社)日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)
 - ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク

物流拠点	● 北海道札幌市 ● 宮城県仙台市 ● 千葉県野田市 ● 愛知県海部郡 ● 大阪府大東市 ● 福岡県福岡市
関連会社	● 富若慈(上海)貿易有限公司 ● PLATZ VIETNAM CO.,LTD

拠点マップ

本 社／九州支店／ショールーム

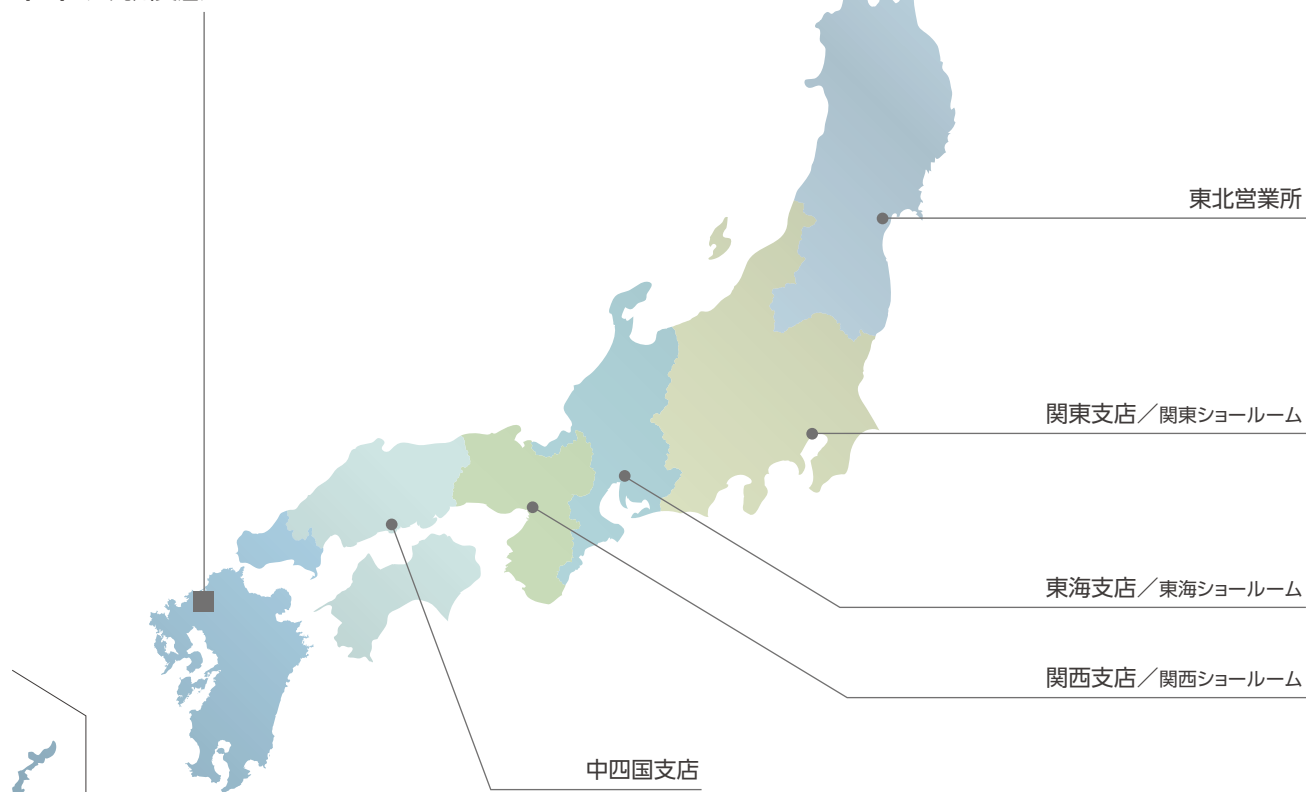

プラッツの企業理念

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、「高品質」「高機能」「低価格」をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じてもらうことを最大の目標に、恒久的に社会に貢献するものである。

プラッツを支える4つの柱

プラッツはお客様・ご利用者様・工場・製品の4つの柱によって成り立っています。

すべての柱を円滑につなげ、お客様に満足と喜びを届ける事を最大限の目標にまいります。



一. プラッツ経営の基本姿勢

常に「公正」であるか。
常に「創造」しているか。
常に「改革」しているか。

一. プラッツ社員の行動規範

プラッツ社員は常に謙虚であり、個性に秀で常に新しいものを創造する人間の集団であれ。

品質への取組

品質管理体制強化のため、製造委託先と連携し、より高いレベルの製品品質を実現しています。

私たちは、製品に対する全行程に責任を持っています。

- ①設計・開発
- ②調達部品検査指導
- ③生産工程指導
- ④工程／製品の検査や要員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。


ISO 9001 の規格に基づき、実直に品質の向上に努めています。

◎2007年5月11日取得

◎2016年5月11日更新

◎2017年5月11日 2015年版移行

品質概略図

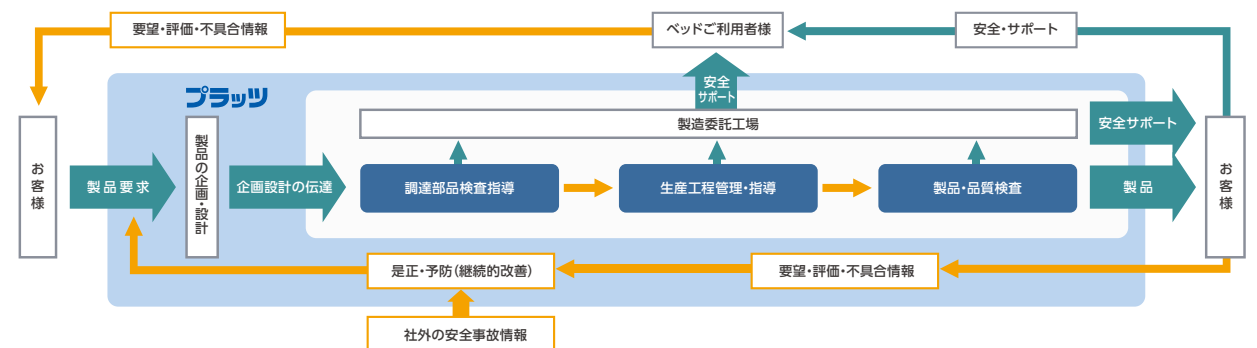

ベッドに関する **非課税** の扱いについては以下の通りに定められています。

【消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障がい者用物品及びその修理】(平成24年改正)より


- 特殊寝台**
- 身体に障がいをする者が家庭において使用する寝台であって、身体に障がいをする者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。
- ・イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100センチメートル以下のもの
 - ・ロ サイドレールが取り付けにあるもの又は取り付け可能なもの
 - ・ハ キャスターを装置していないもの

図では101cmと記載していますが、これはヘッド・フットボードの幅を表しています。

非課税 マークのある商品の本体幅は全て100cm以下です。

※ **非課税** 対象のベッド本体と同時にキャスターを購入される場合は、ベッド本体も課税となります。

※ **非課税** のベッド1台と同時にサイドレール及びマットレスを購入される場合は、サイドレールは2セットまで、マットレスは1枚まで **非課税** となります。

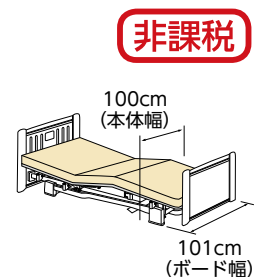



安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

PLATZ(プラッツ)製品カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- 発売予定時期は開発・製造の都合上、予告なく変更する場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
- 製品の価格に「非課税」の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故(例:当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ)
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元

株式会社 **プラッツ**



挑戦します!
お客様の笑顔のために。

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL:092-584-3434/FAX:092-584-3436

●北海道営業所

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102

TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

●東北営業所

〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在3-6-1
ホワイトアーバンシティ102

TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル3F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108
オフィス・クロンビル1F

TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701

■関西支店・関西ショールーム

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアパードビルディング2F

TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107

■中四国支店

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

■ご意見・ご質問等は

iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは