


昇降式ベッドサイド テーブル

取扱説明書

PT04 シリーズ

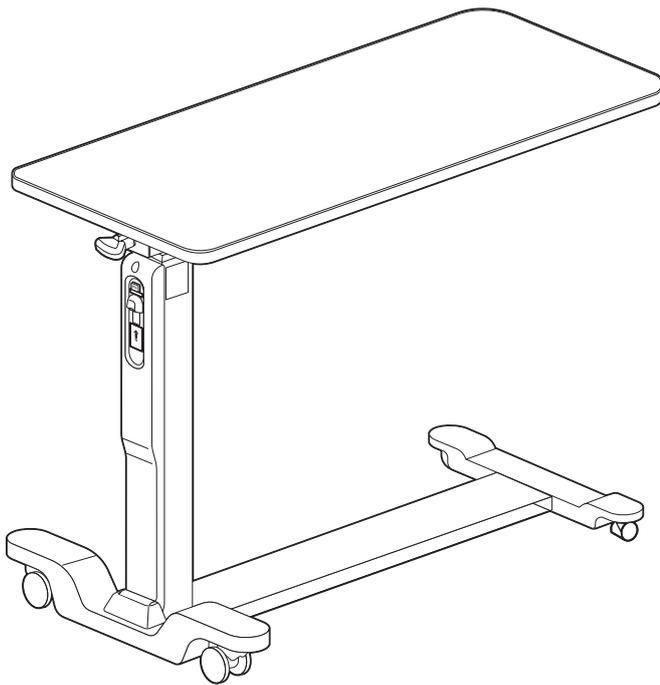

この度は「昇降式ベッドサイドテーブル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」は、組み立て・ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- 介助が必要な方がお使いになる場合は、介助する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、弊社までお問い合わせください。

目次

ページ

安全にご使用いただくために……	1～3
各部の名称……	3
開梱と部品の確認……	4
組み立てかた……	5～6
キャスターロックについて……	7
テーブルの高さ調整方法……	8
安全機構について……	9
お手入れについて……	9
商品の仕様……	10
保証とアフターサービス……	11

商品の特長

- ワンタッチの昇降レバーで、テーブルの高さを変えることができます。
- テーブルの高さは66～98cmまで、無段階に調整できます。
- ワイヤロックキャスター付なので、しゃがむことなく、手元での操作でキャスターロックの一括ON/OFFが切替できます。
- 安全機構により、テーブルを下側から押す力で天板高さが上がります。
- ウレタンエッジ付天板で、天板のフチが少し高くなっているため、天板上に置いてあるものが落ちにくくなっています。

株式会社プラッツ

安全にご使用いただくために ※必ずお守りください。

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や他の人々への危害や財産への阻害を未然に防止するために、色々な絵表示をしております。
下記をよくお読みいただき、内容をよく理解してから正しくお使いください。

 警告	この表示の欄は、「生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容」を記載しています。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容」を記載しています。

●絵表示の例

 禁止	この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
 注	この記号は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

ご使用前・ご使用上の警告と注意



禁止

物を載せた状態で、操作をしないでください。


・怪我や破損の原因になります。



禁止

やかん・ポット類などの高温の物を置かないでください。


・破損や変形の原因になります。

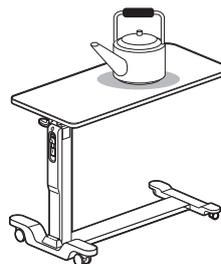

禁止

テーブルをベッドに設置しているときは、ベッドの動作をしないでください。


・破損や事故の原因になります。

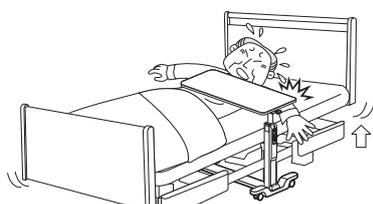

禁止

天板やベースフレームの上に乗らないでください。

・怪我や破損の原因になります。

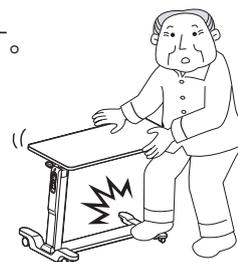


⚠️ ご使用前・ご使用上の警告と注意



禁止

テーブルに寄りかかったり、腰掛けたりしないでください。

- ・怪我や事故、破損の原因になります。

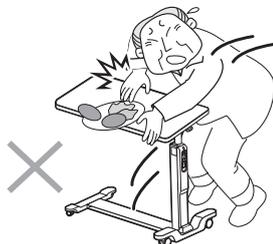

禁止

テーブルを支えにして歩かないでください。


- ・怪我や事故、破損の原因になります。



禁止

分解・改造はしないでください。


- ・破損や事故の原因になります。

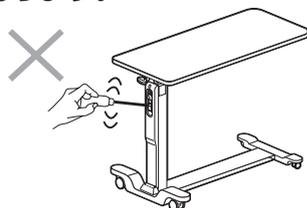

禁止

ストーブなどの火気類をテーブルに近づけ過ぎないでください。

- ・変形や火災の原因になります。

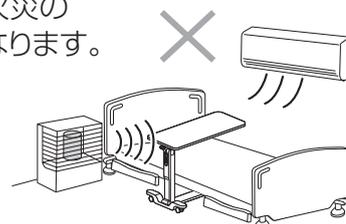

注

ご使用前には、天板がしっかり固定されているか確認してください。


- ・不完全な固定のまま使用すると、事故の原因になります。



注


耐荷重 (30kg) を必ず守ってください。

- ・耐荷重以上の物を載せて使用すると、破損や事故の原因になります。

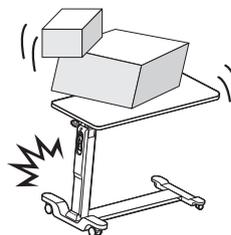


注

テーブルを使用するときは、安全機構 ON/OFF レバーの位置を「ON」にしてご使用ください。

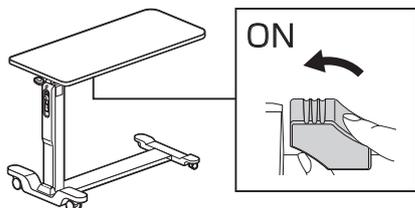

注

テーブルを持ち上げて運ぶときは、安全機構 ON/OFF レバーの位置を「OFF」にしてご使用ください。

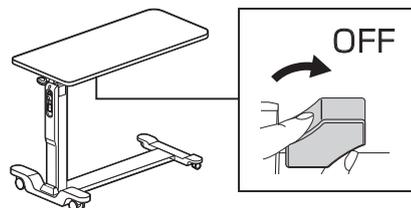


注

定期的に点検をおこなってください。各部の緩み、ガタツキ、異音の有無など。

⚠️ ご使用前・ご使用上の警告と注意

下記のシール類は特に注意していただきたい項目を記載しています。
剥がしたり傷付けたりしないでください。

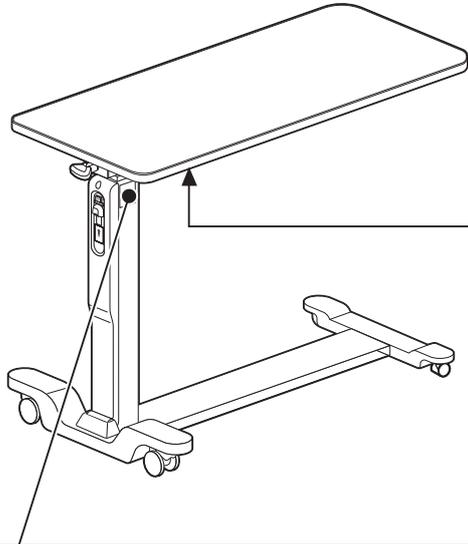


⚠️ 注意

耐荷重は
30kgです

耐荷重以上の物を載せて使用すると破損や事故の原因になりますので必ず守ってください ST1324

● 耐荷重ラベル

耐荷重 (30kg) を必ず守ってください。耐荷重以上の物を載せて使用すると、破損や事故の原因になります。

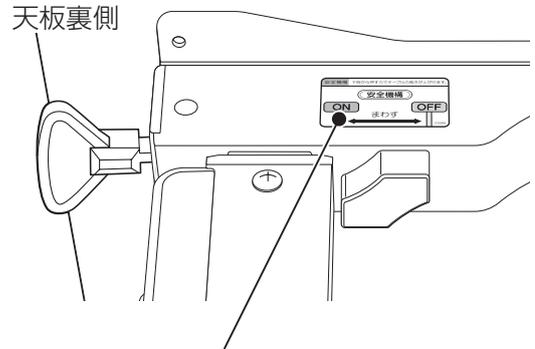


● 安全機構 ON/OFF ラベル

安全機構 下側から押す力でテーブルの高さが上がります。



ご使用時はレバーを「ON」にしてからご使用ください。

各部の名称

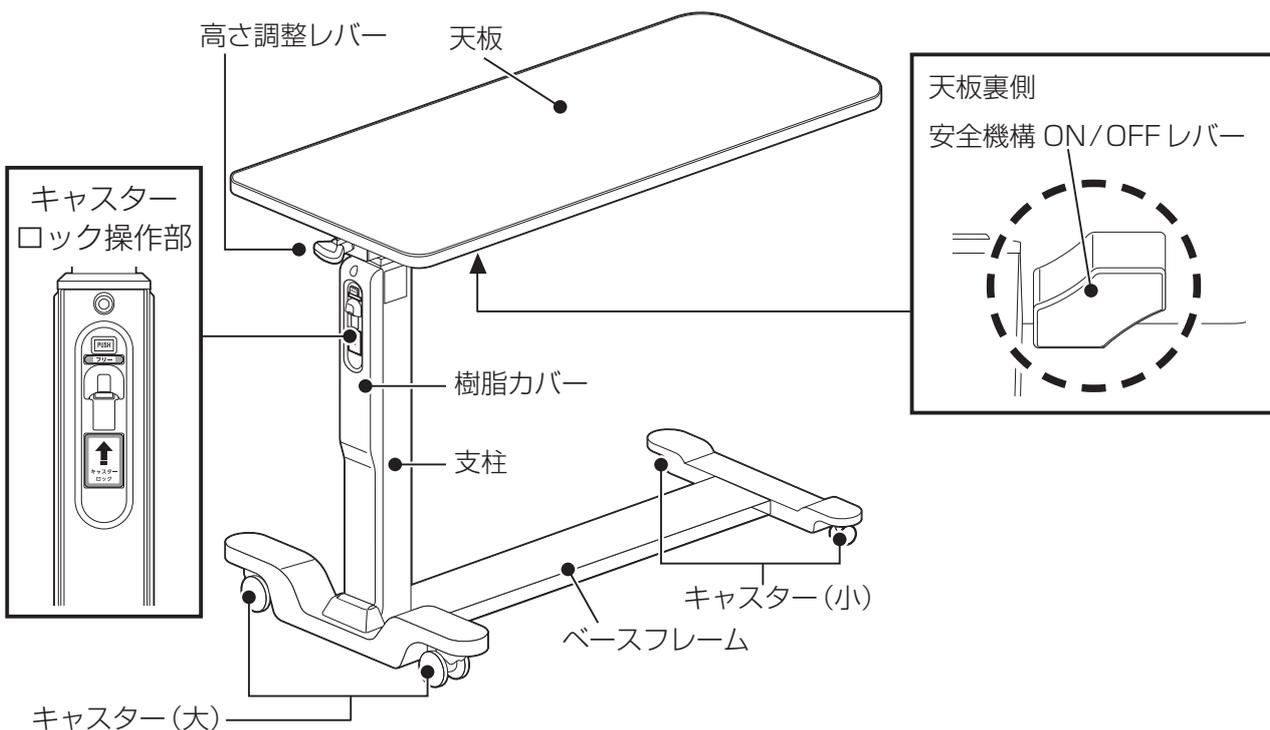


開梱と部品の確認

商品が到着いたしましたら、下記の部品が全て同梱されているか、また破損の有無をご確認ください。

万一、部品の不足や破損があった場合は、レンタル会社や販売店、または弊社までご連絡ください。

PT04-MB/LB/WH PT04 用天板 (ミディアムブラウン色、ライトブラウン色、ホワイト色)

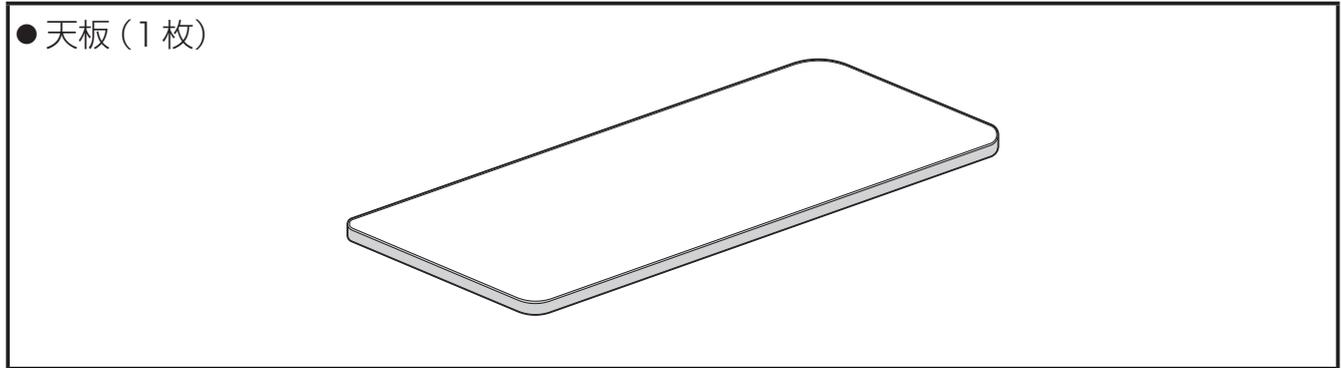

PT04-F1 PT04 用フレーム

● 支柱 (1 個)

● 取扱説明書のご案内〈保証書付〉

● 取り扱い方法と使用上の注意

取扱説明書のご案内
〈保証書付〉

取り扱い方法と
使用上の注意

● 組み立て用部品

- ・ 六角穴付ボルト (黒) (M8×15) 2本 (ベースフレーム取り付け用)
- ・ 六角穴付ボルト (銀) (M6×15) 5本 天板取付用4本
樹脂カバー固定用1本
- ・ 六角レンチ (5mm) 1本

組み立てかた



⚠ 注意

組み立ての際に、床や天板を傷付けないように保護シートなどを敷いておこなってください。

1 天板と支柱の取り付け

支柱を天板に載せ、六角穴付ボルト（銀）M6×15で4箇所をしっかりと締めてください。

ネジを締めるときは、4箇所を仮締めた後にしっかりと締め付けてください。

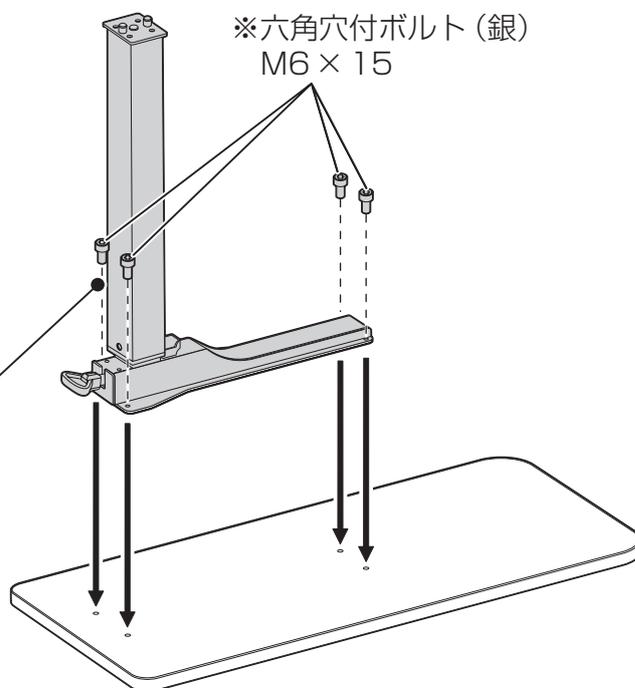
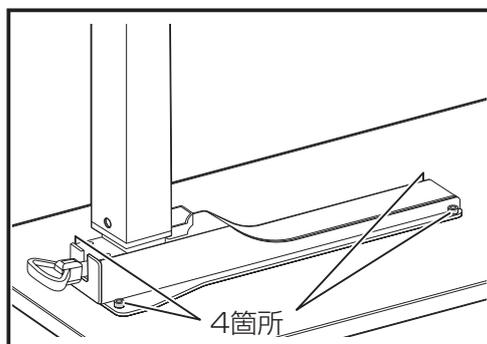


2 ベースフレームの取り付け

フィルムをはさみなどでカットします。

樹脂カバーが可動するようになるので、樹脂カバーを起こして、ベースフレームを裏返します。


樹脂カバーが動くので、裏返す際には、指挟みにご注意ください。

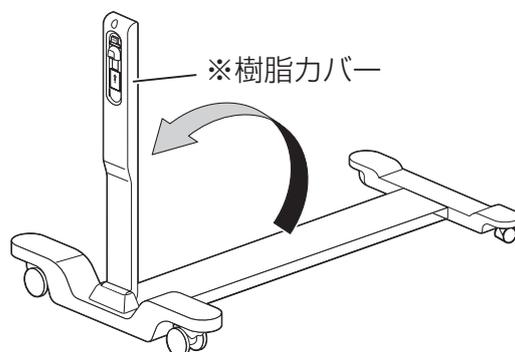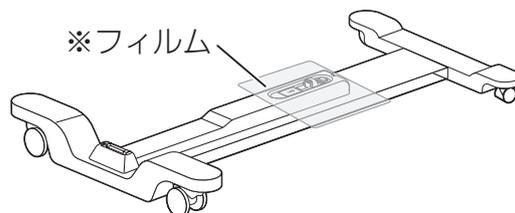

ベースフレームを支柱の裏側に載せ、水平を保ちながら六角穴付ボルト（黒）M8×15で2箇所をしっかりと締めてください。


ネジを締めるときは、2箇所を仮締めした後にしっかりと締め付けてください。

最後に、六角穴付ボルト（銀）M6×15で1ヶ所を締めてください。
強く締めすぎると樹脂が破損するため、ご注意ください。

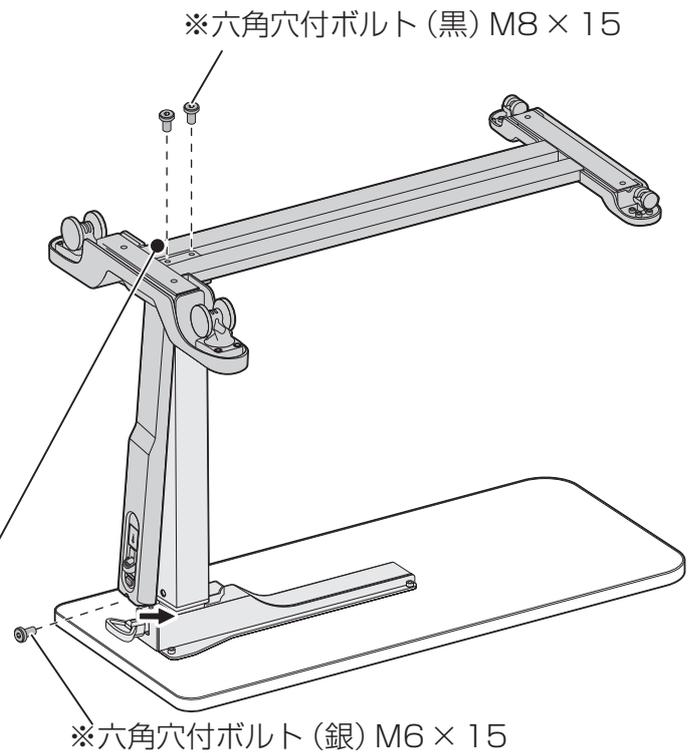


- レバーを「ON」の側に回すと安全機構が作動します。

「ON」の状態

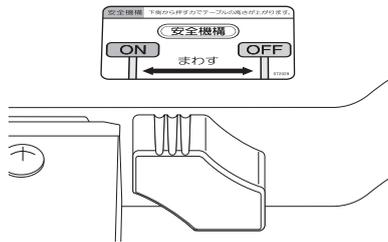

「OFF」の状態

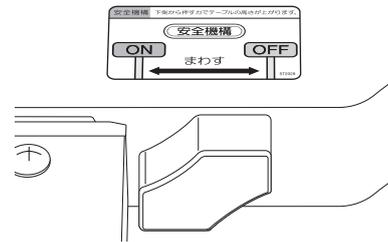

※分解は、組み立てと逆の手順でおこなってください。



⚠ 注意

- ・天板を上向きにする際、安全機構 ON/OFF レバーを「ON」にしないでください。意図せずテーブルが伸びてしまい、天板にダメージを与える恐れがあります。
- ・ご使用になる前に、天板がぐらついたり、上下に動かないことを確認してください。不安定な状態で使用されますと破損や事故、怪我の原因になります。

キャスターロックについて

天板を上向きにして置き、キャスターロックをフリー状態にして使用される場所へ移動してください。
使用される場所で、キャスターロックをロック状態にします。
安全機構 ON/OFFレバーを「ON」の位置にしてご使用ください。

※キャスター（小）はロックされません。ロックされるのはキャスター（大）のみです。

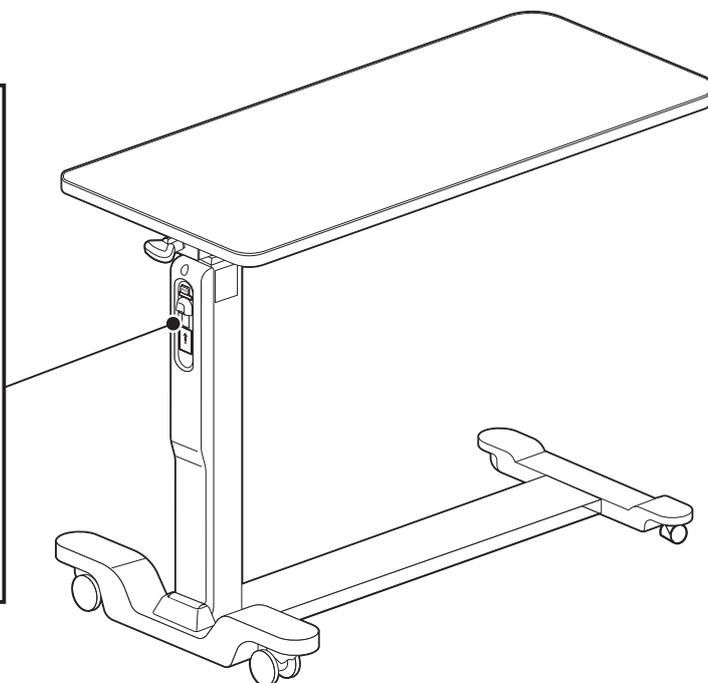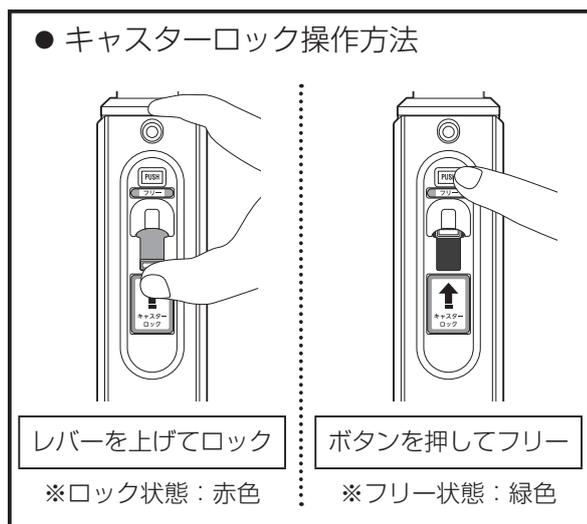

※商品出荷時は、ストッパーはフリー状態になっています。


テーブルの高さ調整方法

※物を載せた状態で、テーブルの上げ/下げをしないでください。

※テーブルの高さを調整する際は、天板に手を添えて操作してください。
高さ調整レバーだけを操作すると急にテーブルが上がり怪我をする恐れがあります。

テーブルの上げかた


高さ調整レバーを上げると、テーブルが上に上がります。
任意の位置で、レバーから手を離してください。(天板を軽く押さえながら上げてください。)

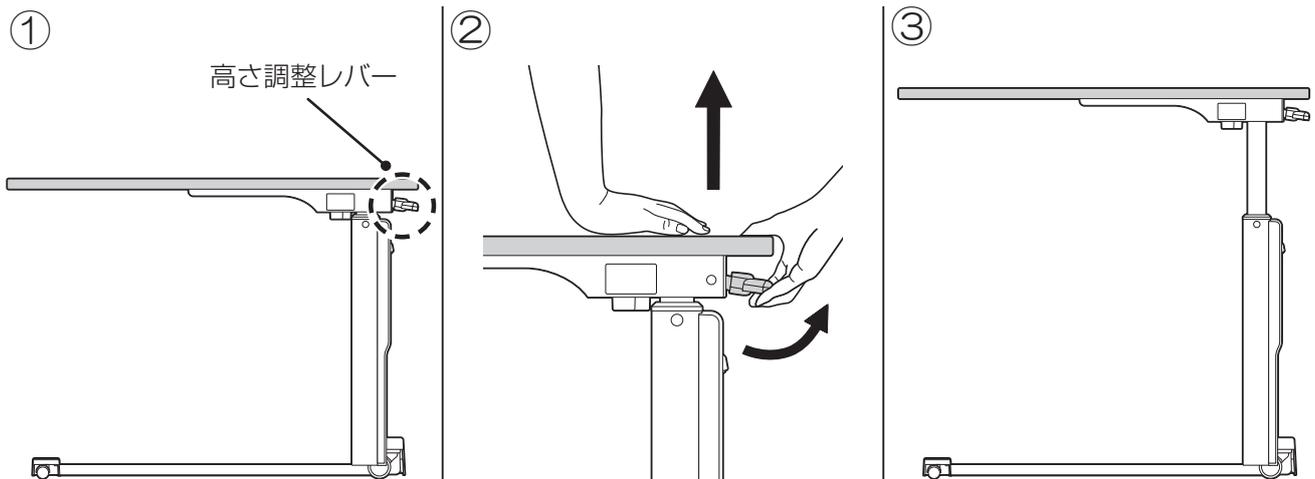

テーブルの下げかた

片手を天板の上に軽く置き、もう片方の手でレバーを上げながら、天板を下に押し下げます。
任意の位置で、レバーから手を離してください。

※テーブルが下げにくい場合は、天板に体重を掛けて押し下げてください。
(天板を押さえるときは、天板上の支柱に近い箇所を押さえてください。)


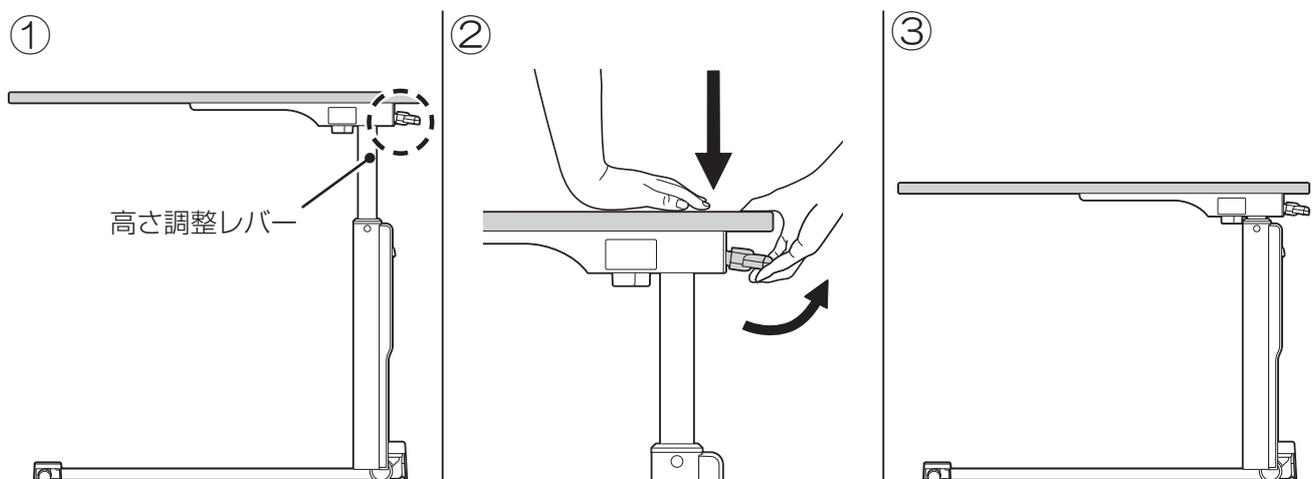


安全機構について

- ご利用者様が意図せずベッドとテーブルに挟まった際など、テーブルの下から荷重が掛かったとき、その力でテーブルが上がり重篤な怪我を回避する安全機構を搭載しています。

※上記安全機構の動作範囲は、660～980mm（床からテーブル上面までの高さ）に限ります。

- 安全機構は、安全機構 ON/OFF レバーの操作によって、使用・不使用の選択ができます。
- 商品出荷時はレバーが「OFF」の位置にあります。テーブル使用時は「ON」にしてご使用ください。テーブルを持って持ち運びをおこなう場合は「OFF」にすることで、テーブルが運びやすくなります。

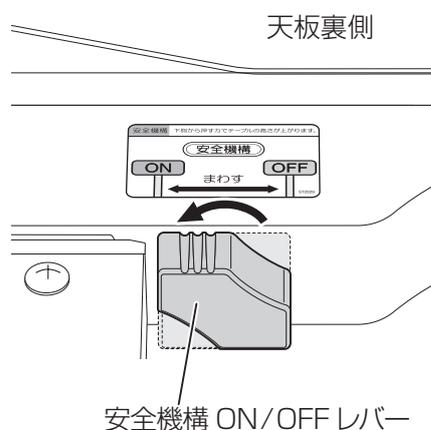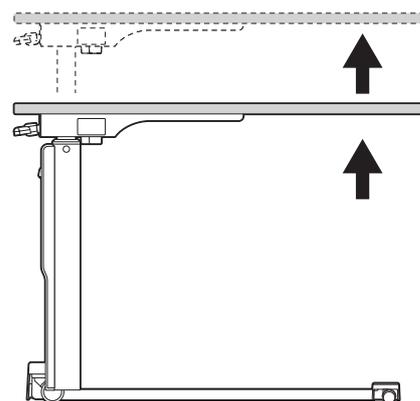

お手入れについて


●お手入れ

- ・商品が汚れた場合は、石鹼水や中性洗剤を少し含んだ湿らせた布で拭いてください。
- ・商品を水で濡らしたり、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤などで磨いたりしないでください。殺虫剤をかけたりしないでください。ひび割れの危険があります。





●点検

- ・各部分のボルトの締め具合を確認し、常に硬く締めてください。

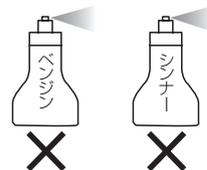

商品の仕様

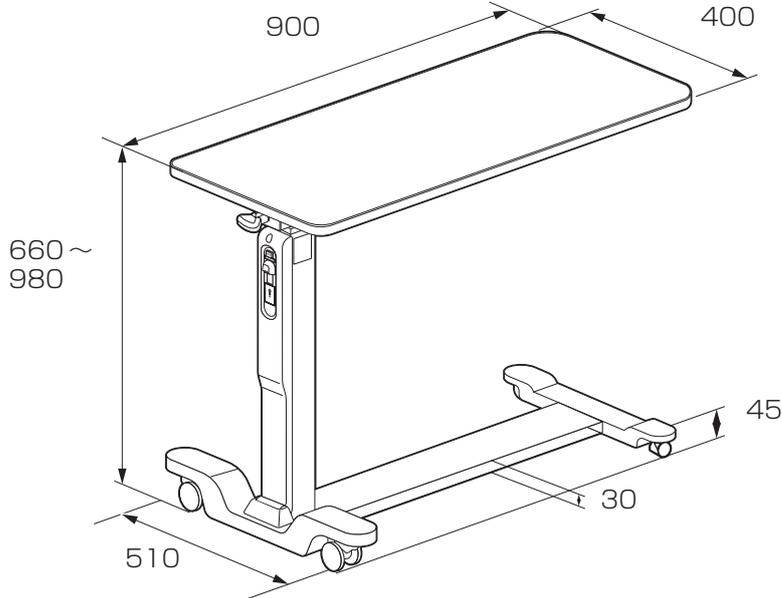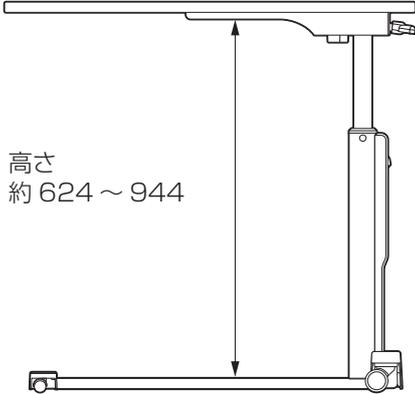型 式	PT04-900MB、PT04-900LB、PT04-900WH
商品名	昇降式ベッドサイドテーブル
テーブル 寸 法	<p>(単位: mm)</p>  <p>900 400</p> <p>660 ~ 980</p> <p>510 30 45</p> <hr/>  <p>高さ 約 624 ~ 944</p>
梱包サイズ 梱包質量 (商品質量)	天板: 915×435×35mm/5.7kg(4.9kg) 本体: 890×555×175mm/14.7kg(12.3kg)
材 質	ベースフレーム、支柱部: スチール、樹脂 木部: 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) 天板エッジ: ウレタン
耐荷重	30kg
原産国	中国

保証とアフターサービス ※よくお読みください。

保証書について

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、型式・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、お買い上げ時の送り状などを保管してください。

修理を依頼されるとき

●修理される前に

今一度この取扱説明書をよくお読みください。

それでも直らない場合は、お買い上げの販売店、またはフリーアクセスまでご連絡ください。

※修理・お取り扱い、お手入れのご相談は、お買い上げの販売店（保証書記載）へご連絡ください。


●ご連絡いただきたい内容

- ①商品名および型式（表紙記載）
- ②お買い上げ日（保証書記載）
- ③お買い上げの販売店（保証書記載）
- ④商品のシリアル番号（S/Nで始まる番号）



※各パーツに貼ってあるシールに記載されています。

- ⑤故障内容（できるだけ詳しく）
- ⑥ご住所 / お名前 / お電話番号

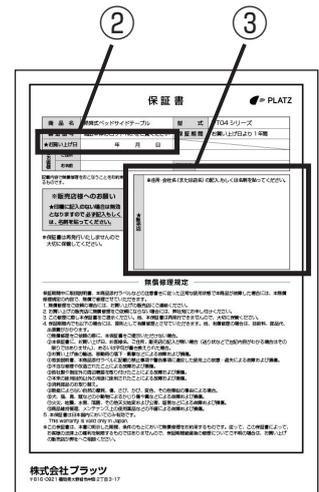

●保証期間について

保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。

●保証期間を過ぎている場合

修理および部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理いたします。

●修理代について

修理代は、部品料、基本出張費、技術料で構成されます。

【部品料】…修理で使用した部品代です。

【基本出張料】…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生する費用です。

【技術料】…商品の診断・故障箇所修理などの作業にかかる費用です。

フリーアクセス
1120-77-3433

アフターサービスのお問い合わせ

平日 午前9時～午後5時（土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く）

株式会社 プラッツ

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 2丁目 3-17

'25.03月作成

NP0380-Z