

取扱説明書

エルダーサポートワイドマットレス

PSB-FS(4/4)
PSB-FSL(4/4)

この度は、エルダーサポートワイドマットレスPSB-FS(4/4)・PSB-FSL(4/4)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- この製品は、改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。




警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用グリップと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

レールの位置が体の中心より高い事を確認ください。

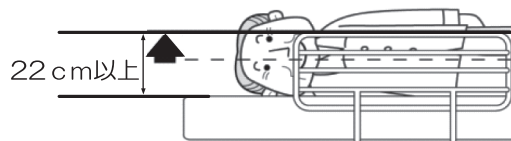

注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています


- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・中身やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転倒事故の恐れがあります。
- ケアレットシリーズ以外の組み合わせはしないでください。
 - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。
- 直射日光に当てると変色する可能性があります。
- 外力カバーは取り外しできません。

特徴

- 普通のウレタンと低反発ウレタンによる、やや柔らかめのマットレスです。
- 軽量タイプで取り扱いも簡単です。

使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。
- マットレスの上には、ベッドパッドやシーツを敷いてお使いください。
- タグが脚側（フットボード側）に来るようにマットレスを敷いてお使いください。

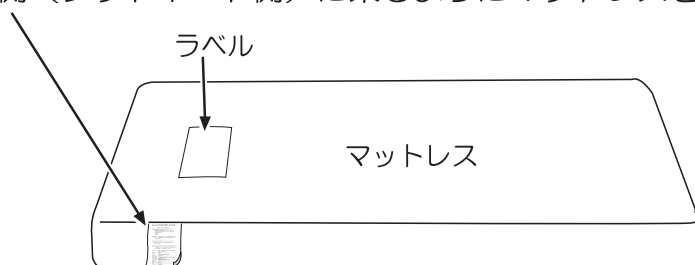

- ラベルがある方が表面です。裏返して使用しないでください。

お手入れ

- マットレスを清潔にご使用いただくために
 - ・定期的に通気や換気を行ってください。
 - ・定期的に日陰干しを行ってください。
 - ・定期的にマットレス全面に掃除機をかけ、チリやホコリを吸引してください。
- ※日陰干し⇒掃除機でのマット全面の吸引⇒日陰干しを行っていただくと、より効果的です。

仕様

商品名	エルダーサポートワイドマットレス
型 式	PSB-FS(4/4)・PSB-FSL(4/4)
寸 法 長さ×幅×高さ	長さ196.0×幅97.0×高さ13.0cm：PSB-FS(4/4) 長さ206.0×幅97.0×高さ13.0cm：PSB-FSL(4/4)
重さ	7.8kg：PSB-FS(4/4) 8.8kg：PSB-FSL(4/4)
材料	低反発ウレタン、ウレタン
外装生地組成	ポリエステル
原産国	ベトナム

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目8-39

製品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



フリーアクセス
携帯・PHS・OK

0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

11.06月作成

TS110603