









この度は、Miolet キャスターセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用いただきますよう、よろしくお願いたします。
 なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。
 不足部品が無いか、梱包内容をお確かめください。

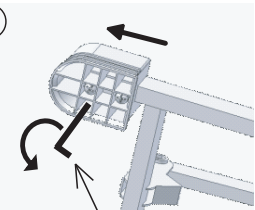
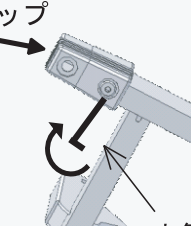
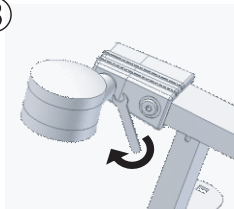
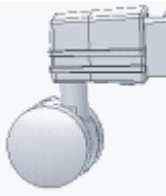
●梱包内容

 キャスター ストッパー付き：2個	 キャスター ストッパー無し：2個	 キャップ：4個	 ネジ：4本
 スパナ：1本	 六角レンチ：1本	 保証書：1枚	 本書：1枚

●昇降ユニットへのキャップとキャスターの取り付け方

※必ず、昇降ユニットのみの状態で取り付けをおこなってください。

ストッパー付きキャスターとストッパー無しキャスターは、昇降ユニットにそれぞれ対角側にて取り付けてください。

 ① 六角レンチ	六角レンチでネジを2本外した後、カバーをスライドさせて外してください。	 ② キャップ 六角レンチ	キャップを横からはめて、内側の穴を付属のネジを使用し、六角レンチで締めてください。
 ③	付属のスパナで外側の穴に、キャスターを取り付けてください。	 ④	同様にして、4箇所に取り付けをおこなってください。

⚠ 警告

キャップとキャスターを取り付けの際は、ベッドを組み立てた状態でおこなわないでください。また、昇降ユニットを立てて取り付ける場合は昇降ユニットが倒れないように注意してください。

ストッパー付きのキャスターが対角線になるように取り付けてください。


キャスターの取り付け完了後、昇降ユニットを正常な状態に戻しキャスターをロックしてください。

ベッドを移動するとき以外は、ストッパーを踏み込んでロックしてください。

キャップ、キャスター、ネジの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検してください。

○点検 / お手入れ

- ・キャップ、キャスター、ネジの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検をしてください。
- ・乾いた柔らかい布で拭いてください。
著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- ・製品に水を散らしたり、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、ご使用しないでください。

— 商品に関するお問合せは下記へ —
 **0120-77-3433**
《平日 午前9時～午後5時30分》
 (土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
 福岡県大野城市仲畑 2 丁目 8-39