

# 取扱説明書

Miolet専用ハイツスペーサー

**M2RJ-H35-A**

この度は、Miolet専用ハイツスペーサーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用いただきますよう、よろしくお願ひいたします。なお、この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。組立前に不足部品が無いか、梱包内容をお確かめください。

## ●梱包内容





## ●ハイツスペーサーの取り付け方

①固定脚の前方からハイツスペーサーをスライドさせます。（ハイツスペーサーのツメがかかるまで奥に入れてください。）

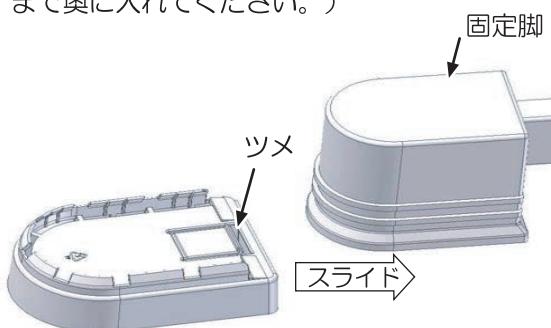


②同様に、すべての固定脚に取り付けをおこなってください。

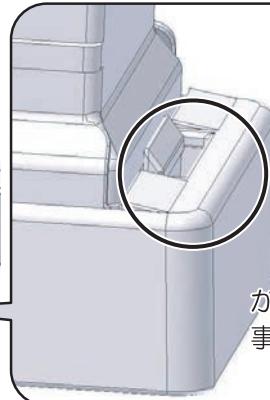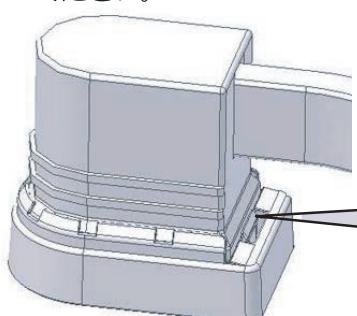

ツメが  
かかっている  
事を確認して  
ください

## ●ハイツスペーサーの取り外し方

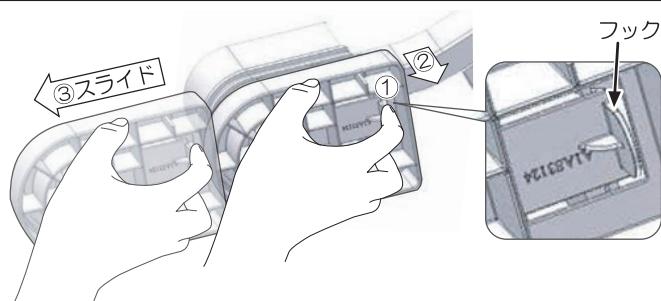

①ハイツスペーサーの裏側からフックを引き、固定脚にかかっているツメを外します。

②フックを引きながら、固定脚からハイツスペーサーを②矢印方向に引き離します。

③②の状態を維持したまま、ハイツスペーサーを③矢印方向へスライドさせ、固定脚から取り外します。

## 警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- ハイツスペーサーを奥まで挿しこみ、ツメが固定脚にかかっている事を確認してください。
- ハイツスペーサーを取り付けた後、ベッドを水平などに置き、ぐらつきがないことを確認したうえでご使用ください。

## 点検・お手入れ

- ハイツスペーサーの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検してください。
- 乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 製品に、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、ご使用にならないでください。

**株式会社プラッツ**

〒816-0921  
福岡県大野城市仲畑2丁目8-39

**F**  
フリーアクセス  
携帯・PHS・OK

—商品についてのお問い合わせは下記へ—

**0120-77-3433**

《平日 午前9時～午後5時30分》  
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

12.12月作成  
TS1121232