

取扱説明書

(ニーパロⅡ用)
安全カバー

PF500S-116


この度は、安全カバーPF500S-116をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。


特徴

- 上部握り部には、内側に滑りにくい加工を施しています。
- 圧迫感の少ないメッシュ加工、色も茶色で木目にマッチします。
- ファスナーで閉めるため、しっかりフィットシダブツキが少ない安全設計です。


■ 自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロⅡ」 PF500-116

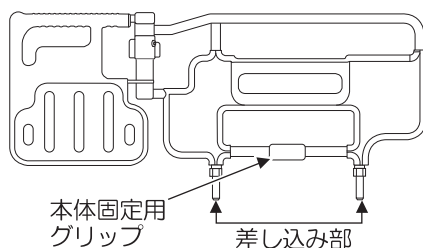


■ 安全カバー 各部の名称

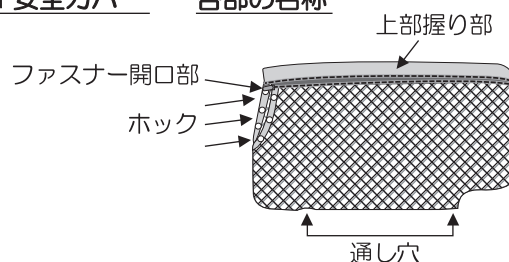

■ 装着手順

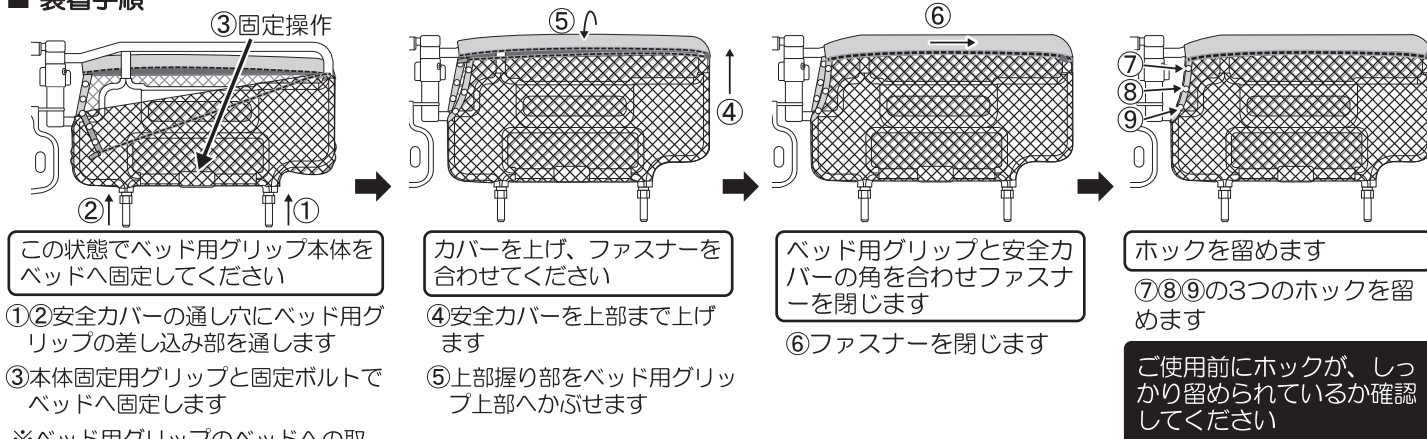

■ 装着後のベッドからの取り外し手順

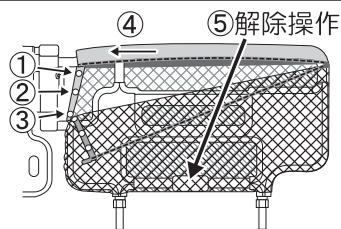

ホックとファスナーを外してください

- ①②③のホックを外します
- ④ファスナーを開きます

この状態でベッド用グリップを取り外してください

- ⑤本体固定用グリップを解除してベッドから取り外
してください

仕様

商品名	安全カバー
型 式	PF500S-116 (適合機種: PF500-116)
長さ×幅×厚さ	長さ415×幅720mm (厚さ 上部握り部: 9.5mm/メッシュ部: 0.9mm)
材料	上部握り部: ポリエステル/ポリウレタン/合成ゴム メッシュ部: ポリエステル
原産国	日本

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目8-39

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



フリーアクセス
携帯・PHS・OK

0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

’14.09月 作成

NP0022