

取扱説明書

スタンダードマットレス

PKM-E80BR


この度は、スタンダードマットレスPKM-E80BRをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

警告 この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用グリップと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。
- 火気類にマットレスを近づけ過ぎないでください。
 - ・火災や変色、変形の原因になります。

サイドレールの上部高さが体の中心より高い事をご確認ください。

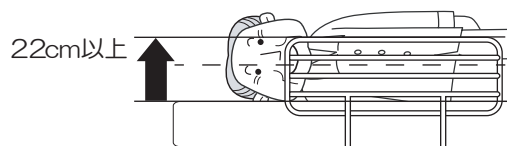

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・中材やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転倒事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
 - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

特徴

- 通気性、通水性に優れたポリエステルマットレスです。
- 外カバーは抗菌・防臭・難燃処理をしています。
- 外カバーは取り外しができ洗濯が可能です。

使用方法

- マットレスの上には、ベッドパッドやシーツを敷いてお使いください。
- 定期的に頭足方向を変えることで、硬化を抑え長持ちさせることができます。

お手入れ

●マットレスを清潔にご使用いただくために

- ・定期的に通気や換気を行ってください。
- ・定期的に日陰干しを行ってください。
- ・定期的にマットレス全面に掃除機をかけ、チリやホコリを吸引してください。

●外カバーは家庭用洗濯機で洗濯可能です。

●外カバーの洗濯時の注意（マットタグの説明）



液温は40℃までで、洗濯機の弱水流による洗濯ができます。



漂白処理はできません。



洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。



弱く絞る

日陰でつり干ししてください。
2分以下の短時間で絞ってください。



アイロンは使わないでください。



ドライクリーニングには対応していません。



弱いウエットクリーニング処理ができます。

●中身は2層構造になっていますので、汚れた場合、それぞれをご家庭のシャワーなどで洗浄してください。

水切れの良いポリエステルを採用してありますが、日陰で干し乾いた後にカバーに入れてください。

仕様

| | |
|---------------|---------------------------|
| 商品名 | スタンダードマットレス |
| 型式 | PKM-E80BR |
| 寸法 長さ×幅×高さ | 幅90.0cm×長さ191.0cm×高さ8.0cm |
| 重さ | 6.2kg |
| 材料 | ポリエステル |
| 外装生地組成 | 外カバー：ポリエステル |
| 原産国 | 韓国 |

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

製品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



0120-77-3433

フリーアクセス
携帯・PHS・OK

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

16.11月作成

NPO042-A