



# 取扱説明書

オーバーレイウレタンマットレス/96cm幅

PM06-9603

この度は、オーバーレイウレタンマットレス/96cm幅 PM06-9603をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。
- 弊社商品のP108シリーズ（マットレス型式PSB-FS(4/4)、またはPSB-FW14(4/4)との組み合わせに限る）、もしくはP200シリーズ以降のベッドでお使いください。

## 特徴

- 外カバーの裏面にポケットを作り、ベッドセンサーなどを定位置に固定することができます。
- 外カバー、中材ともに洗濯可能です。

## 使用方法

- 四隅のゴムバンドでマットレスに固定してお使いください。

## お手入れ

- 外カバー ポリエステル 100%



液温は40°C以下の湯で  
手洗いができます。



漂白処理は  
できません。



洗濯処理後のタングル  
乾燥処理はできません。



日陰でのぬれつり干し  
乾燥が適しています。  
※絞らないでください。



アイロンは使わない  
でください。



ドライクリーニングには  
対応していません。



ウェットクリーニングには  
対応していません。

- 中材 ウレタンフォーム

手洗いによる水洗いが可能です。

乾燥の際は形を整えて、日陰に平干ししてください。

## 仕様

商品名	オーバーレイウレタンマットレス/96cm幅
型 式	PM06-9603
適合マットレスサイズ 幅×長さ (厚さ)	幅96.0cm×長さ196.0cm (厚さ18.0cmまで)
外装生地の組成	ポリエステル
中材の種類	ウレタンフォーム
原産国	韓国

株式会社 **プラツ**

〒816-0921  
福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください  
**0120-77-3433**  
フリーアクセス 《平日 午前9時～午後5時30分》  
携帯・PHS・OK (土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

'16.11月作成  
NP0099-A