

非常用バッテリーユニット(P110シリーズ/P400シリーズ用)

PE06-BA19

この度は、非常用バッテリーユニットPE06-BA19をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- この商品は改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。


使用目的

停電時（電源供給が途絶えた際）、背下げやベッドの高さを下げるためにご使用ください。

特徴

停電時（電源供給が途絶えた際）、自動的にバッテリーからの電力供給に切り変わり、背下げやベッドの高さを下げることが出来ます。

梱包内容

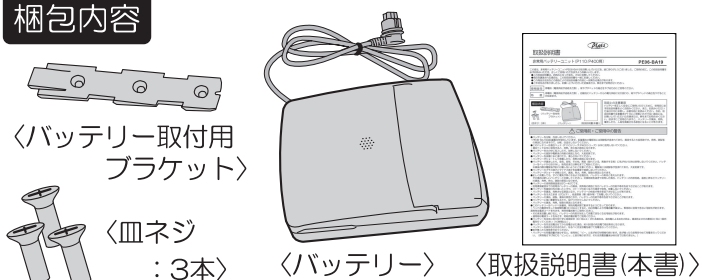

取扱上の注意事項

バッテリーを正しく安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時にお読みください。なお、取扱説明書や注意書きが十分にご理解いただけない場合には、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。読まずにご使用されますと、バッテリーが漏液、発熱、爆発したり、人身を損傷させる原因となることがあります。


⚠ ご使用前・ご使用中の警告

- バッテリーを分解、改造しないでください。
- PE06-BA19は鉛蓄電池を使用しています。鉛蓄電池の電解液には硫酸等が含まれており、漏液すると大変危険です。発熱、破裂等の原因になりますので、分解、改造はしないでください。
- このバッテリーは適合ベッド（P110シリーズ/P400シリーズ）以外に使用しないでください。
- 適合ベッド以外に使用すると、発熱、発火等の原因になります。
- バッテリーを火の中に投入したり、加熱しないでください。
- バッテリーの破裂や電解液の飛散の原因となり、大変危険です。
- バッテリーを故意に水に浸けたり、濡らさないでください。
- バッテリーがショートして感電したり、発熱の原因になります。
- バッテリーが漏液したり、変色、変形、その他、異変（膨れている、異臭がする等）に気が付いた時は使用しないでください。バッテリーをベッドから取り外し、販売店または弊社までご相談ください。
※漏液の際は電解液が肌に付着しないようにご注意ください。電解液には硫酸等が含まれており、大変危険です。
- バッテリーのプラス端子とマイナス端子を金属等で接続しないでください。
- バッテリーがショート状態となり、漏液、発火、発熱、破裂の原因となります。
- 正しく充電しても、すぐに電気が無くなるような場合は、バッテリーの寿命と考えられます。
その場合は新しいバッテリーと交換してください。交換時期を過ぎて使用した場合、バッテリーの内部短絡、温度上昇などバッテリーの漏液、発熱、発火、破裂の原因となります。
- バッテリーの使用環境温度は5℃～40℃です。
- 使用環境範囲外での使用はバッテリーの漏液、発熱等の原因となりバッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリーを直射日光の強いところや、ストーブの近くなどの場所で使用、放置しないでください。
- バッテリーを漏液、発熱させる原因となり、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリーを冷えたまま（0℃以下）、低温環境（寒い屋外等）で充電しないでください。
- バッテリーの凍結、破裂、漏液の原因となり、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因となります。
- このバッテリーはベッドへ装着時、常時充電状態で動作するようになっております。
- ベッドの電源を外して長期間放置（6ヶ月以上）すると、自己放電により充電容量が減少し、緊急時に使用できない可能性があります。通常時は電源コードを外さず、常時充電状態でご使用ください。
- そのまま放置し続けると、バッテリーの内部が劣化して充電できなくなる可能性があります。
- 通常時は電源コードを外さず、常時充電状態でご使用ください。
- バッテリーを本体に取り付けずに長期保存（6ヶ月以上）される場合は、過放電による劣化の防止、漏液防止のため最低3ヶ月に1回充電を行ってください（10時間以上）。
- バッテリーを完全放電させてから充電させた場合、約180回の充放電で商品寿命となります。
- バッテリーを長持ちさせるために、なるべく完全放電を避けて充電を行ってください。
- 音が鳴ったら使用をやめてください。
- バッテリーの充電容量が減少すると、使用時に「ピー」と音が約5秒間鳴り続けます。音が鳴ったら使用をやめて充電を行ってください。（昇降高さ下げ時にも「ピッピッ」と音が鳴りますが、それは充電容量減少時の音ではありません。）

バッテリー取り付け用ブラケットの取り付け方

- ①ベッドの電源コードを抜きます。
- ②ベッドの取扱説明書を参照し、マットレス・腰ボトム・ひざ脚ボトムを取り外します。
- ④ブラケットにバッテリーを取り付けます。

- ③センターフレームにブラケットを取り付けます。付属の3本の皿ネジでしっかり取り付けてください。

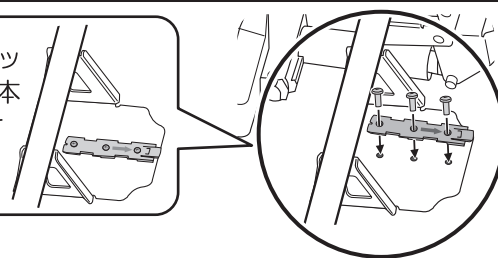

P110シリーズへの非常用バッテリー取り付け方

背上げ1モーター・2モーターの場合

頭側

足側

- ①頭側からバッテリーを入れます。

- ②バッテリーを軽くブラケットにはめ、「カチッ」という音がするまで足側にスライドさせます。

3モーターの場合

頭側

足側

- ※コードを先に通します。

- ①足側からバッテリーを入れます。

- ②バッテリーを軽くブラケットにはめ、「カチッ」という音がするまで足側にスライドさせます。

下図のようにバッテリーコードを取り廻します。

このパイプの上を通します

このパイプの下を通して①に取り付けます

背脚連動バー

背脚連動バーの下を通します

開始

このパイプの上を通します


このパイプの下を通して①に取り付けます

開始

コードクリップ

このパイプに沿って②に取り付けます


- ①～④のコードクリップに取り付けてください

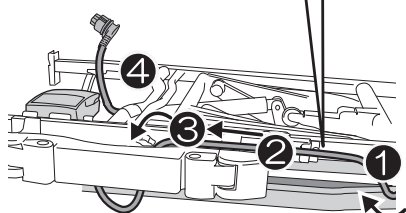

終了


このパイプの下を通します

- このパイプの下のコードクリップに取り付けてください

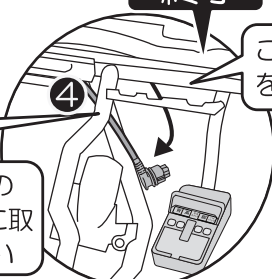

確認


バッテリーが、しっかり取り付けられているか確認してください。

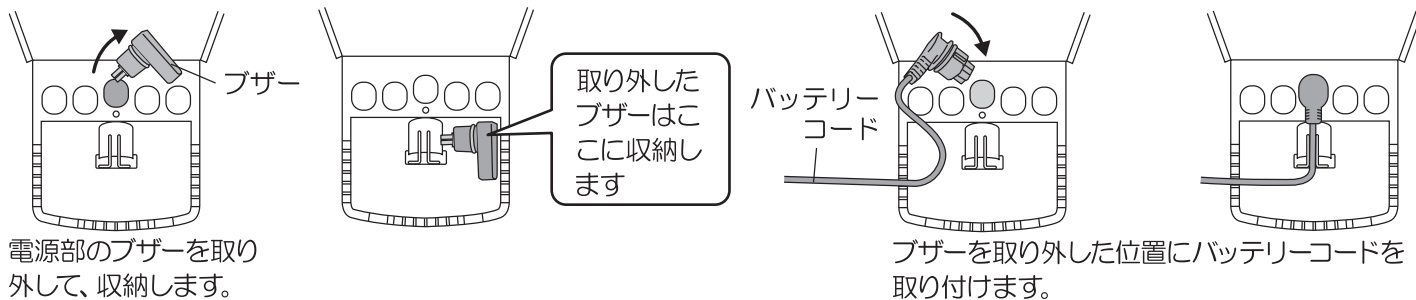


- ひざ脚ボトム・腰ボトムを取り付け、元通りに組み立てます。
- 組み立て完了後、手元スイッチのボタンを押して、正しく操作出来ることを確認してください。その際に、コードのはさみ込みが無いか確認してください。

P400シリーズへの非常用バッテリー取り付け方

左ページ①～④を参照し、ブラケットにバッテリーを取り付けます。
⑥下図のようにバッテリーコードを取り廻します。

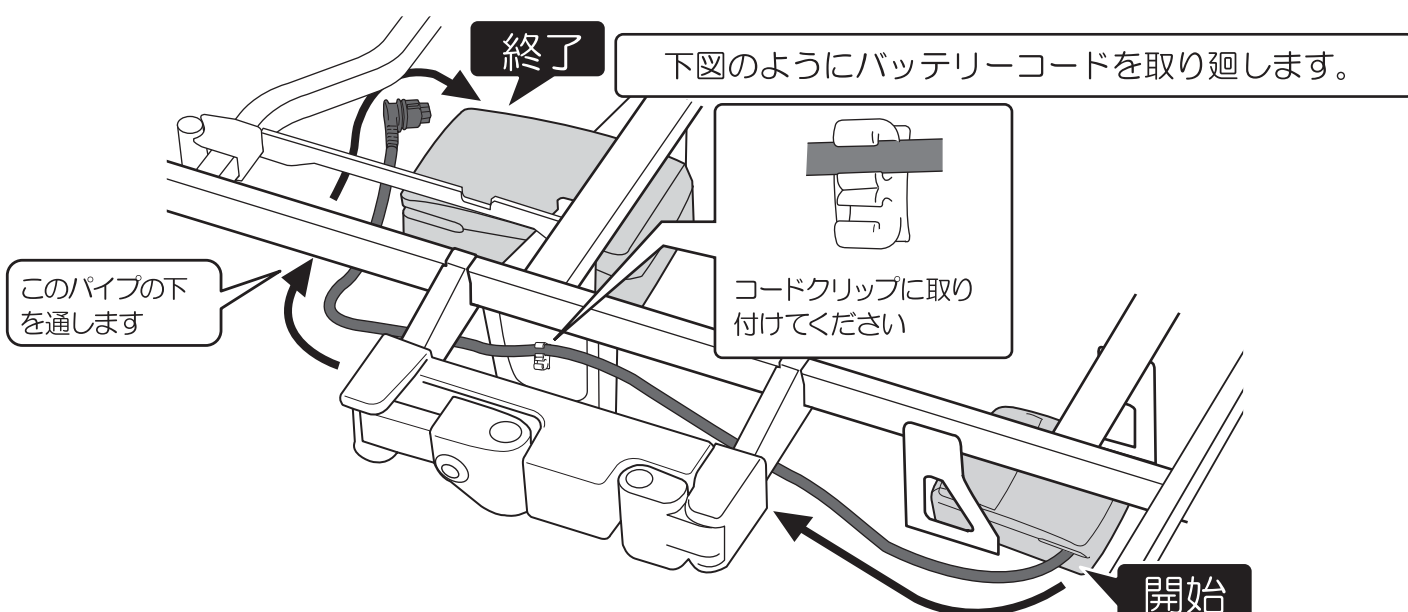


⑦電源部にバッテリーコードを取り付けます。

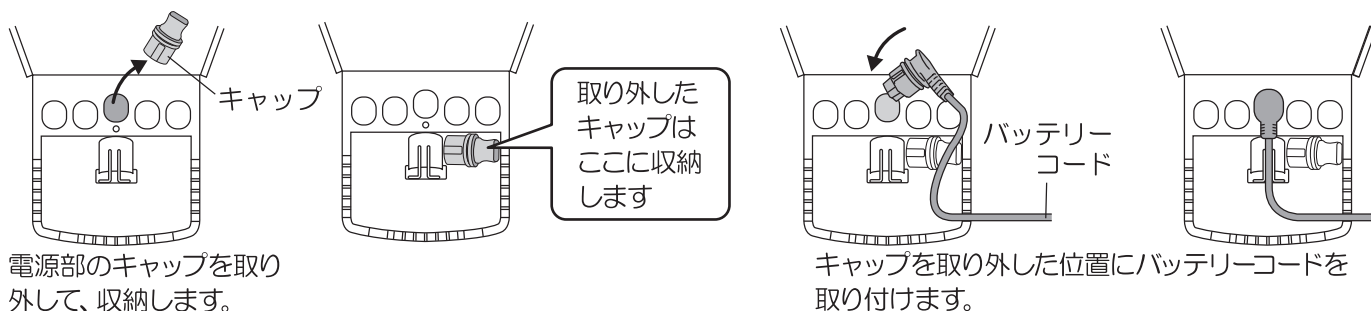

- ひざ脚ボトム・腰ボトムを取り付け、元通りに組み立てます。
- 組み立て完了後、手元スイッチのボタンを押して、正しく操作出来ることを確認してください。その際に、コードのはさみ込みが無いか確認してください。

バッテリーの取り外し方

②バッテリーを頭側に少しスライドさせます

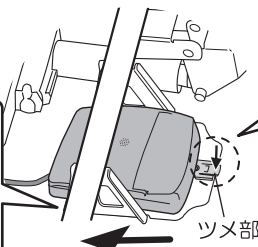

音が鳴ったら使用をやめてください。

- バッテリーの充電容量が減少すると、使用時に「ピー」と5秒間音が鳴り続けます。音が鳴ったら使用をやめて充電を行ってください。

バッテリーの廃棄について

本バッテリーは商品の中に、鉛・希硫酸を含んでおります。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。



Pb

鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
鉛蓄電池の交換および使用済み商品の廃棄に関しては、リサイクルへご協力ください。

型 式	PE06-BA19	質 量	1.5kg
サイズ	19.5×13.0×6.5cm	防水規格	IPX6等
使用環境	5℃～40℃	定格電圧	24V
充電容量	1,300mA		
停電時の 使用回数 の目安	背上げ・下げ 約12往復 ※ラフィオ：P110の場合 ※使用者体重、バッテリーの使用環境、経年劣化等により使用 回数は異なります。		

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



フリーアクセス
携帯・PHS・OK

0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

'17.08月 作成

NP0142-A