

スイッチ接続キット(P106シリーズ用)

PE07-S1

この度は、スイッチ接続キット(P106シリーズ用)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 本商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた販売店または、弊社までお問い合わせください。

使用目的・特徴


- 環境制御装置(ECS)または、対応する意思伝達装置用スイッチを本商品に接続することで、リクライニング、昇降動作の操作を可能にします。
- ベッド付属の手元スイッチの操作ができない人を対象にしたスイッチ接続キットです。

商品内容・各部名称

右記の部品が全て同梱されているか、また、破損していないか確認をしてください。万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社までご連絡ください。



取扱説明書(本書)

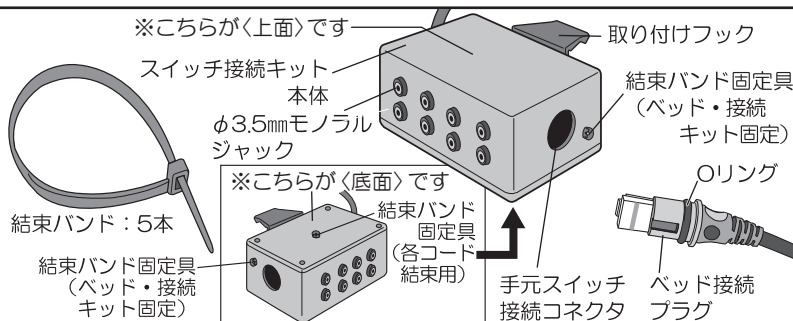


ベッドへの取り付けの前に

- ①ご利用者様はベッドから降りていただき、マットレスを降ろします。
- ②ベッドの高さを上げ、ベッドの電源プラグを抜きます。
- ③背ボトム、腰ボトムを取り外します。


取り付け方法

- ①【ベッドの左側に取り付ける場合】
ベッドに取り付けられている部品パックを取り外し反対位置に取り付けてください。「部品パック取付位置」シールのところにスイッチ接続キット本体を取り付けます。結束バンドでスイッチ接続キット本体とベッドのヘッドフレームとをしっかりと固定します。下図を参照し、スイッチ接続キットのコードをコードクリップに取り付けて取り廻ししてください。

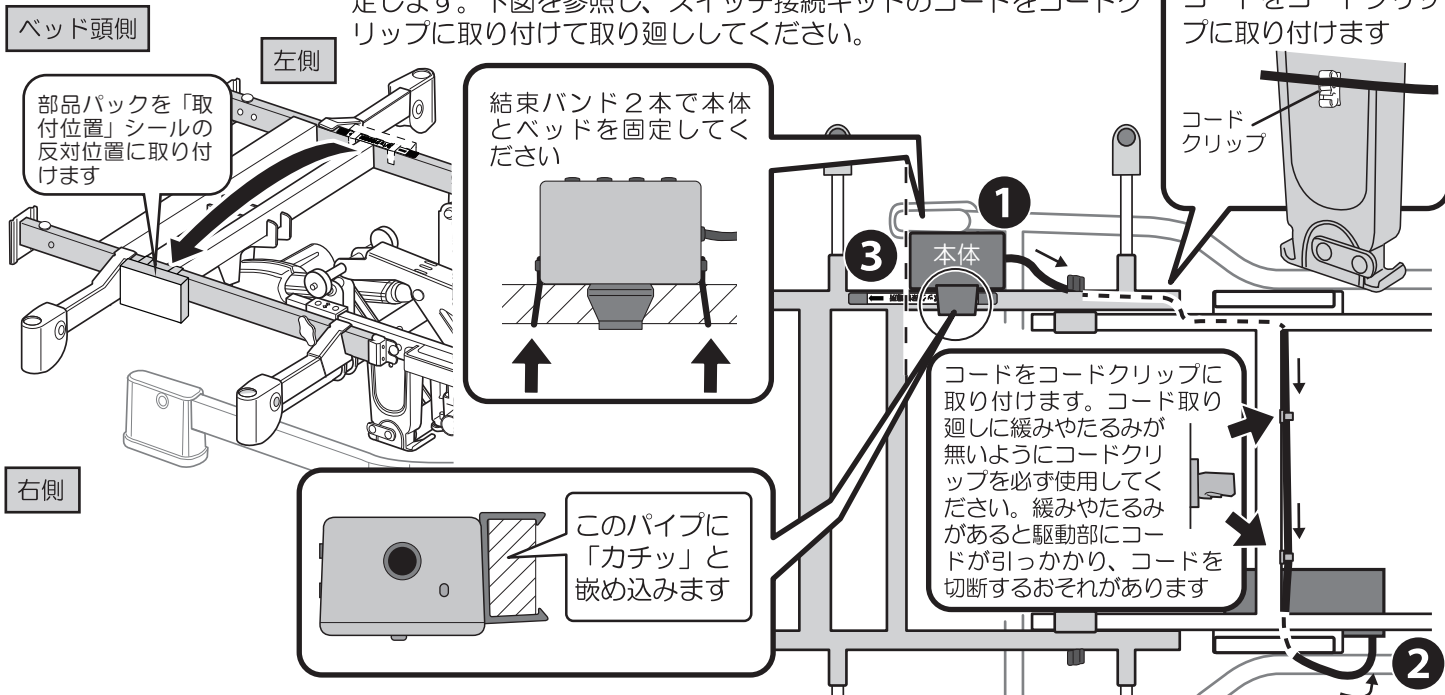


- ② ベッド電源部の手元スイッチコードをスイッチ接続キットのベッド接続プラグに入れ替えます。

- ③ 手元スイッチコードをスイッチ接続キット本体の手元スイッチ接続コネクタに挿し込みます。φ3.5mmモノラルジャックにECSまたは意思伝達装置用スイッチをφ3.5mmモノラルプラグで接続してご使用ください。

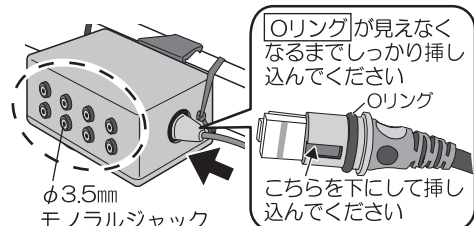

ベッド右側に取り付ける場合は下図を参照にして本体を取り付け、コードを取り回してください。

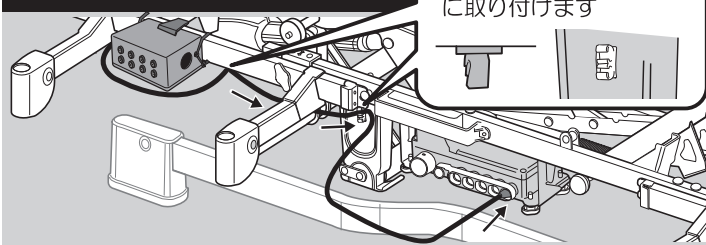


コードをコードクリップに取り付けます



注意

ベッド操作時にコードが駆動部に巻き込まれないように注意して、コードの配線をしてください。コードの余分な長さ部分は結束バンドで束ねる等の対応をお願い致します。

〈底面〉

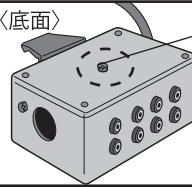

スイッチ接続キット本体底面の結束バンド固定具(各コード結束用)に付属の結束バンドを通し、コード類を束ねてください。手元スイッチや ECS、意思伝達装置用スイッチのコードの抜け防止としてもご使用ください。

安全にご使用いただくために (必ずお守りください)

この取扱説明書では、本商品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や他の方への危害や財産への阻害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしております。次の内容をよくご理解の上、正しくお使いください。



注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■絵表示の例



この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



この記号は、必ず守っていただきたい「注意喚起」の内容です。



警告



ケースを開けたり、分解や改造は絶対にしないでください。・火災や事故の原因になります。



本商品は防水ではありません。本商品を水に浸けないでください。・火災や感電の原因になります。



本商品及びコード類を傷つけないでください。・断線や絶縁不良による故障の原因となります。



部品が破損した場合、破損したまま使用しないでください。・怪我や事故の原因になります。



φ3.5 mmモノラルジャックや手元スイッチ接続コネクタの穴に異物を挿し込まないでください。・故障や火災、事故の原因となります。



接続した意思伝達装置用スイッチや、手元スイッチの複数のボタンを同時に押さないでください。・誤作動の原因になる事があります



注意



操作時にコードがベッドの駆動部に巻き込まれないように注意して取り付けてください。・破損や事故の原因になります。



経年劣化により変色などの変化が起こることがあります。・保管する場合は、直射日光や高温、多湿、低温、乾燥、ほこりの多い場所を避けてください。



ベッド下部の掃除やサイドテーブルをご利用の際は、本商品を傷つけないようご注意ください。・破損や故障の原因になります。



濡れた手で使用しないでください。また、唾液などの付着にご注意ください。唾液などが付着した場合には、直ちに乾いた布で拭きとってください。・感電や、故障の原因になります。



本商品を落としたり、強い力や衝撃を与えないでください。



本商品に接続した意思伝達装置用スイッチや ECS の不具合による本商品及びベッドの動作保証はしかねます。



本商品及び、本商品に接続するスイッチや ECS の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

本商品を意思伝達装置用スイッチや ECS と接続しても、ベッドが正常に動作しない場合、以下の確認をお願い致します。

- ・本商品のベッド接続プラグが、ベッドの電源部に正しく接続されていますか？
- ・本商品のベッド接続プラグは、破損していませんか？
- ・意思伝達装置用スイッチや ECS 等のコードは、本商品のφ3.5 mmモノラルジャックに正しく接続されていますか？
- ・意思伝達装置用スイッチや ECS 等のコードは破損していませんか？

点検・お手入れ

○点検

- ・ベッドの手元スイッチ挿込口に本商品のベッド接続プラグが正しく接続されているか必ず定期的に点検してください。
- ・本商品に接続するコード類が正しく接続されているか必ず定期的に点検をしてください。

○お手入れ

- ・乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・清拭する場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って残った洗剤分を拭き取ってください。
- ・ベンジン、シンナー、オイル類、磨き粉等は使用しないでください。樹脂部品が破損する恐れがあります。
- ・シールが剥がれないようにご注意ください。

商品の仕様

型 式	PE07-S1
商 品 名	スイッチ接続キット (P106シリーズ用)
適合ベッド	P106シリーズ
商品サイズ 幅 × 高さ × 奥行	11.0 cm × 7.0 cm × 5.0 cm
質 量	190g
原 産 国	日本

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市
仲畑2丁目3-17



0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》

(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

'17.03月作成

NP0179-Z