

非常用バッテリーユニット (P300/P301/P302 シリーズ用) PE08-BA19

この度は、非常用バッテリーユニット PE08-BA19 をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- この商品は改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問い合わせください。


使用目的 停電時(電源供給が途絶えた際)、背下げやベッドの高さを下げるときにご使用ください。

特徴 停電時(電源供給が途絶えた際)、自動的にバッテリーからの電力供給に切り替わり、背下げやベッドの高さを下げることができます。


梱包内容

〈バッテリーコード〉

〈皿ネジ：3本〉

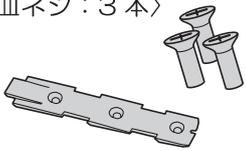

〈バッテリー取り付け用
ブラケット〉

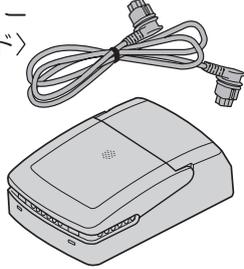

〈バッテリー〉



取扱説明書
〈保証書付〉(本書)

取扱上の注意事項

バッテリーを正しく安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時にお読みください。なお、取扱説明書や注意書きが十分にご理解いただけない場合には、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問い合わせください。読まずにご使用されますと、バッテリーが漏液、発熱、爆発したり、人身を損傷させる原因となることがあります。


⚠️ ご使用前・ご使用中の警告

- バッテリーを分解、改造しないでください。
 - ・PE08-BA19 は鉛蓄電池を使用しています。鉛蓄電池の電解液には硫酸などが含まれており、漏液すると大変危険です。発熱、破裂などの原因になりますので、分解、改造はしないでください。
- このバッテリーは適合ベッド (P300/P301/P302 シリーズ) 以外に使用しないでください。
 - ・適合ベッド以外に使用すると、発熱、発火などの原因になります。
- バッテリーを火の中に投入したり、加熱しないでください。
 - ・バッテリーの破裂や電解液の飛散の原因となり、大変危険です。
- バッテリーを故意に水に浸けたり、濡らさないでください。
 - ・バッテリーがショートして感電したり、発熱の原因になります。
- バッテリーが漏液したり、変色、変形、その他、異変(膨れている、異臭がするなど)に気が付いた時は使用しないでください。
 - ・バッテリーをベッドから取り外し、販売店または弊社までご相談ください。
 - ※漏液の際は電解液が肌に付着しないようご注意ください。電解液には硫酸などが含まれており、大変危険です。
- バッテリーのプラス端子とマイナス端子を金属などで接続しないでください。
 - ・バッテリーがショート状態となり、漏液、発火、発熱、破裂の原因となります。
- 正しく充電しても、すぐに電気が無くなるような場合は、バッテリーの寿命と考えられます。
 - ・その場合は新しいバッテリーと交換してください。交換時期を過ぎて使用した場合、バッテリーの内部短絡、温度上昇などバッテリーの漏液、発熱、発火、破裂の原因となります。
- バッテリーの使用環境温度は 5℃～40℃です。
 - ・使用環境範囲外での使用はバッテリーの漏液、発熱などの原因となりバッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリーを直射日光の強いところや、ストーブの近くなどの場所で使用、放置しないでください。
 - ・バッテリーを漏液、発熱させる原因となり、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリーを冷えたまま(0℃以下)、低温環境(寒い屋外など)で充電しないでください。
 - ・バッテリーの凍結、破裂、漏液の原因となり、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
 - ・バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因となります。
- このバッテリーはベッドへ装着時、常時充電状態で動作するようになっております。
 - ・ベッドの電源を外して長期間放置(6ヶ月以上)すると、自己放電により充電容量が減少し、緊急時に使用できない可能性があります。通常時は電源コードを外さず、常時充電状態でご使用ください。
 - ・そのまま放置し続けると、バッテリーの内部が劣化して充電できなくなる可能性があります。
 - ・通常時は電源コードを外さず、常時充電状態でご使用ください。
- バッテリーを本体に取り付けずに長期保存(6ヶ月以上)される場合は、過放電による劣化の防止、漏液防止のため最低3ヶ月に1回充電をおこなってください(10時間以上)。
- バッテリーを完全放電させてから充電させた場合、約180回の充放電で商品寿命となります。
 - ・バッテリーを長持ちさせるために、なるべく完全放電を避けて充電をおこなってください。
- 音が鳴ったら使用をやめてください。
 - ・バッテリーの充電容量が減少すると、使用時に「ピー」と音が鳴り続けます。音が鳴ったら使用をやめて充電をおこなってください。

P300 シリーズへの非常用バッテリーの取り付けかた


- ①ベッドの電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②ベッドの取扱説明書を参照し、マットレス・ひざ脚ボトムを取り外します。

- ③センターフレームにブラケットを取り付けます。付属の3本の皿ネジでしっかり取り付けてください。

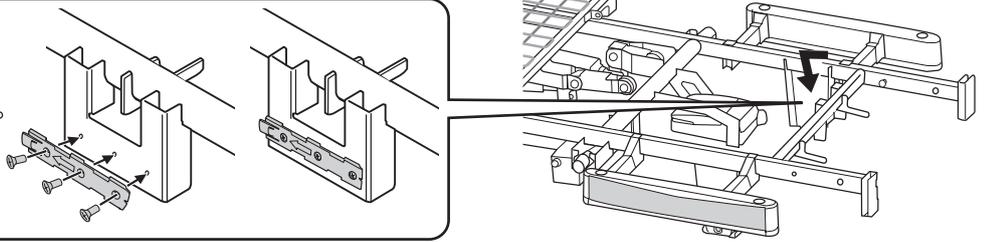


- ④バッテリーにバッテリーコードを取り付けます。

カバーの爪部を押しながらか上に押し上げてカバーを開いてください。

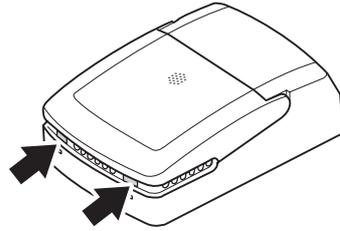

左側一番奥の切り欠きにコードを固定してください。


バッテリーコードを挿し込んで、カバーを閉じてください。

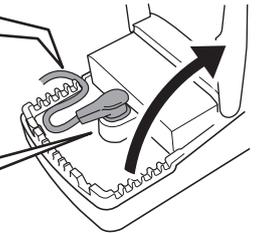

- ⑤ブラケットにバッテリーを取り付けます。

中心の取り付け突起


バッテリー底部に取り付け突起があります。

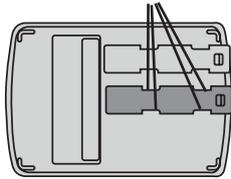

ブラケットの切り欠きに、中心の取り付け突起を合わせて嵌め込んでください。

カチッ


『カチッ』と音がするまで左側にスライドさせます。

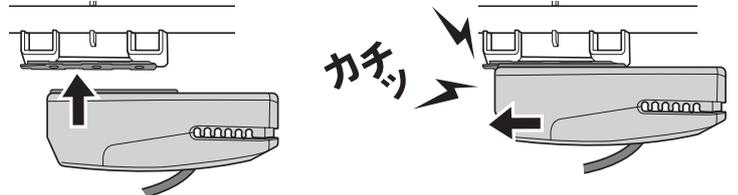

確認



バッテリーが、しっかり取り付けられているか確認してください。

- ⑥下図のようにバッテリーコードを取り廻します。

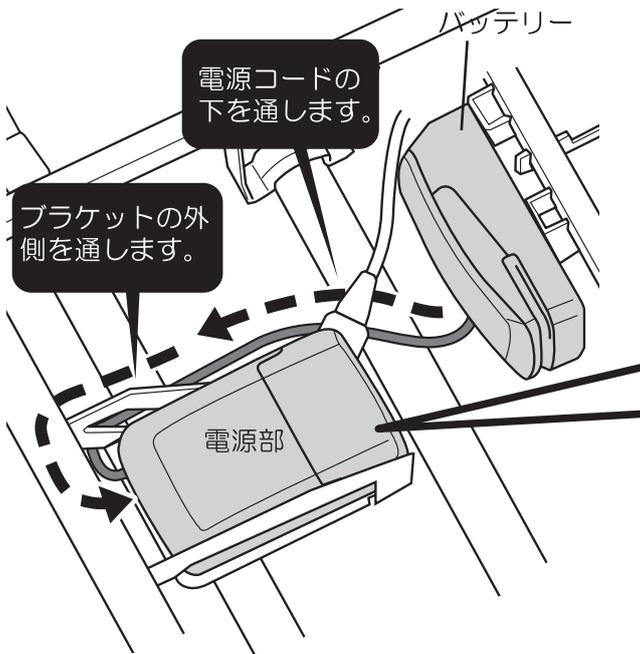


- ⑦電源部にバッテリーコードを取り付けます。

取り外したキャップはここに収納してください。

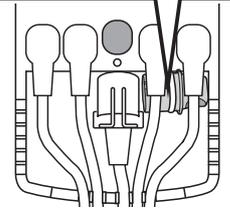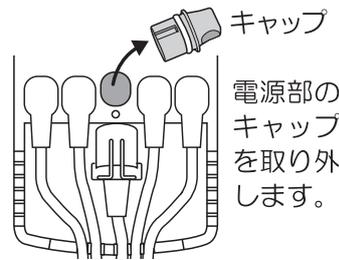

キャップを取り外した位置にバッテリーコードを取り付けてください。

コードはここに固定してください。

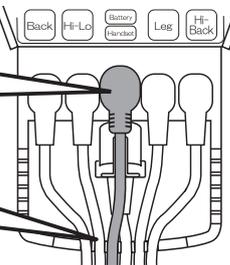


- ⑧ひざ脚ボトムを取り付け、元通りに組み立てます。
- ⑨組み立て完了後、手元スイッチのボタンを押して正しく操作できることを確認してください。その際にコードのはさみ込みが無いか確認してください。確認後にベッドの電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

バッテリーの取り外しかた

- ①ブラケットのツメ部を奥に向かって押しします。

- ②バッテリーを右側に少しスライドさせます。



- ③バッテリーを取り外します。

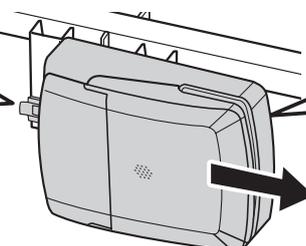

P301/P302 シリーズへの非常用バッテリーの取り付けかた


- ①ベッドの電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②ベッドの取扱説明書を参照し、マットレス・ひざ脚ボトムを取り外します。

③センターフレームに
ブラケットを取り付
けます。付属の3本
の皿ネジでしっかり
取り付けてください。

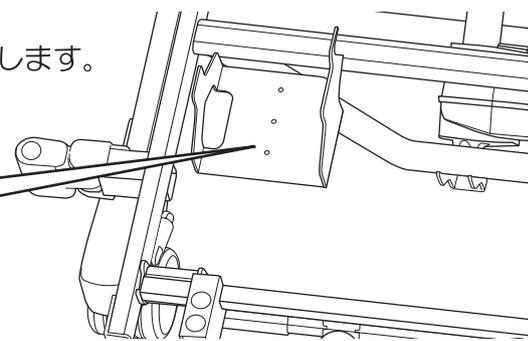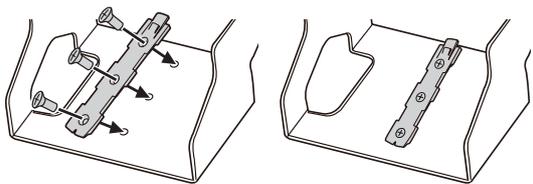


④バッテリーにバッテリーコードを取り付けます。

カバーの爪部を押し
ながら上に押し上げ
てカバーを開いてく
ださい。

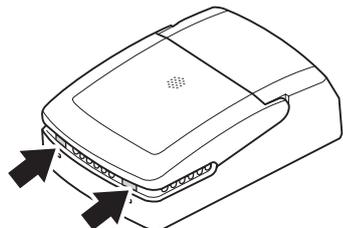

右図位置の切り欠
きにコードを固定
してください。


バッテリーコード
を押し込んで、カ
バーを閉じてくだ
さい。

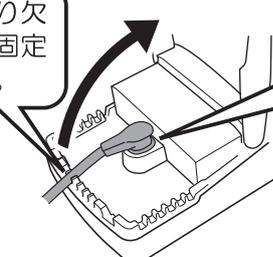



⑤ブラケットにバッテリーを取り付けます。

中心の取り付け突起

バッテリー底部に取り
付け突起があります。

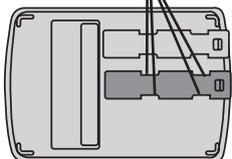

ブラケットの切り欠きに、中心の取り
付け突起を合わせて嵌め込んでください。

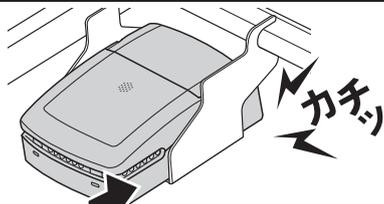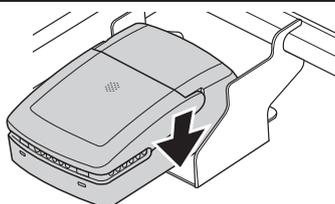


『カチッ』と音がする
までスライドさせます。



確認


バッテリーが、しっかり取り付けられているか確認してください。

⑥下図のようにバッテリーコードを取り廻します。

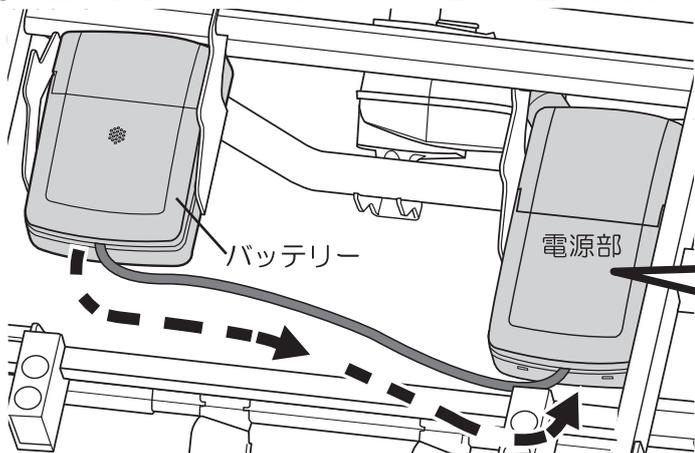


⑦電源部にバッテリー
コードを取り付けます。

取り外したキャップは
ここに収納してください。

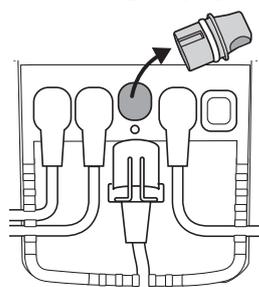


電源部の
キャップ
を取り外
します。

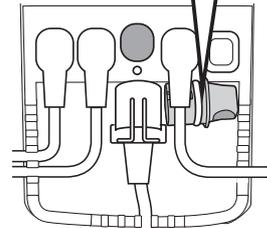


キャップを取り外した位
置にバッテリーコードを
取り付けてください。

コードはここに固定
してください。

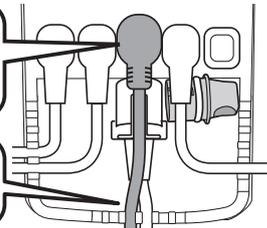

- ⑧ひざ脚ボトムを取り付け、元通りに組み立てます。
- ⑨組み立て完了後、手元スイッチのボタンを押して正しく操作できることを確認してください。その際にコードのはさみ込みが無いか確認してください。確認後にベッドの電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

バッテリーの取り外しかた

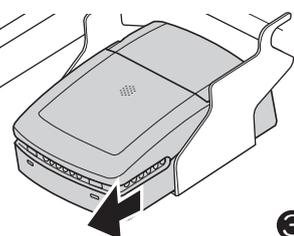

- ①ブラケット
のツメ部を押し
ます。
- ②バッテリーを図の様に少
しスライドさせます。
- ③バッテリーを取り外します。

ツメ部



警告



音が鳴ったら使用をやめてくだ
さい。

- ・バッテリーの充電容量が減少
すると、使用時に「ピー」と
5秒間音が鳴り続けます。
音が鳴ったら 使用をやめて
充電をおこなってください。

バッテリーの廃棄について

本バッテリーは商品の中に、鉛・希硫酸を含んでおります。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。



Pb

鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。鉛蓄電池の交換および使用済み商品の廃棄に関しては、リサイクルへご協力ください。

型式	PE08-BA19	質量	1.5 kg
サイズ	19.5 × 13.0 × 6.5 cm	防水規格	IPX6
使用環境	5℃～40℃	定格電圧	24 V
充電容量	1,200mAh		
停電時の使用回数の目安	背上げ・下げ 約 12 回 ※ベッド利用者体重、バッテリーの使用環境、経年劣化などにより使用回数は異なります。		

保証とアフターサービス ※よくお読みください。

保証書について

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、型式・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、お買い上げ時の送り状などを保管してください。

修理を依頼されるとき

●修理される前に

今一度この取扱説明書をよくお読みください。

それでも直らない場合は、お買い上げの販売店、またはフリーアクセスまでご連絡ください。

※修理・お取り扱い、お手入れのご相談は、お買い上げの販売店（裏表紙保証書記載）へご連絡ください。

●ご連絡いただきたい内容

- ①商品名および型式（表紙記載）
- ②お買い上げ日（裏表紙保証書記載）
- ③お買い上げの販売店（裏表紙保証書記載）
- ④故障内容（できるだけ詳しく）
- ⑤ご住所 / お名前 / お電話番号



●保証期間について

保証期間はご購入日から 1 年間です。保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。

●保証期間を過ぎている場合

修理および部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理いたします。

●修理代について

修理代は、部品料、基本出張費、技術料で構成されます。

【部品料】…修理で使用した部品代です。【基本出張料】…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生する費用です。【技術料】…商品の診断・故障箇所の修理などの作業にかかる費用です。



アフターサービスのお問い合わせ

携帯・PHS・OK

0120-77-3433

平日 午前9時～午後5時30分（土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く）

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 2 丁目 3-17

'20.11月作成

NPO227-B