


この度は、ポータブルバッテリー PE10-BA19 をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- この商品は改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

使用目的 停電時（電源供給が途絶えた際）、背下げやベッドの高さを下げるためにご使用ください。

特徴 停電時（電源供給が途絶えた際）、バッテリーをベッドに接続することで、背下げやベッドの高さを下げる
ことができます。

梱包内容

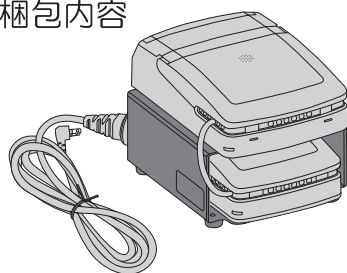


ポータブルバッテリー本体



取扱説明書
(本書) <保証書付>

※ベッドにバッテリーを
接続するには、ベッ
ド用のバッテリーコード
が必要になります。

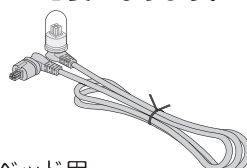

ベッド用
バッテリーコード(別売)

●取扱上の注意事項

バッテリーを正しく安全にご使用いただくため
に、使用前に必ず取扱説明書をよくお読みく
ださい。また、お読みいただいた後は大切に保
管し、必要な時にお読みください。なお、取扱説
明書や注意書きが十分にご理解いただけない場
合には、お買い上げいただいた店舗または、弊
社までお問合せください。読まずにご使用され
ますと、バッテリーが漏液、発熱、爆発したり、
人身を損傷させる原因となることがあります。

⚠ ご使用前・ご使用中の警告

- バッテリーを分解、改造しないでください。
- PE10-BA19は鉛蓄電池を使用しています。鉛蓄電池の電解液には硫酸等が含まれており、漏液すると大変危険です。発熱、破裂等の原因になりますので、分解、改造はしないでください。
- このバッテリーは適合ベッド以外に使用しないでください。
- 適合ベッド以外に使用すると、発熱、発火等の原因になります。
- バッテリーを火の中に投入したり、加熱しないでください。
- バッテリーの破裂や電解液の飛散の原因となり、大変危険です。
- バッテリーを故意に水に浸けたり、濡らさないでください。
- バッテリーがショートして感電したり、発熱の原因になります。
- バッテリーが漏液したり、変色、変形、その他、異変（膨れている、異臭がする等）に気が付いた時は使用しないでください。販売店または弊社までご相談ください。
- ※漏液の際は電解液が肌に付着しないようにご注意ください。電解液には硫酸等が含まれており、大変危険です。
- バッテリーのプラス端子とマイナス端子を金属等で接続しないでください。
- バッテリーがショート状態となり、漏液、発火、発熱、破裂の原因となります。
- 正しく充電しても、すぐに電気が無くなるような場合は、バッテリーの寿命と考えられます。その場合は新しいバッテリーと交換してください。交換時期を過ぎて使用した場合、バッテリーの内部短絡、温度上昇などバッテリーの漏液、発熱、発火、破裂の原因となります。
- バッテリーの使用環境温度は5℃～40℃です。
- 使用環境範囲外での使用はバッテリーの漏液、発熱等の原因となりバッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリーを直射日光の強いところや、ストーブの近くなどの場所で使用、放置しないでください。
- バッテリーを漏液、発熱させる原因となり、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリーを冷えたまま(0℃以下)、低温環境（寒い屋外等）で充電しないでください。
- バッテリーの凍結、破裂、漏液の原因となり、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因となります。
- バッテリーを充電しない状態で、長期間放置(6ヶ月以上)すると、自己放電により充電容量が減少し、緊急時に使用できない可能性があります。通常時は電源コードを外さず、常に充電してください。
- そのまま放置し続けると、バッテリーの内部が劣化して充電できなくなる可能性があります。
- 通常時は電源コードを外さず、常時充電状態でご使用ください。
- バッテリーを充電せずに長期保存(6ヶ月以上)される場合は、過放電による劣化の防止、漏液防止のため最低3ヶ月に1回充電をおこなってください(10時間以上)。
- バッテリーを完全放電させてから充電させた場合、約180回の充放電で商品寿命となります。
- バッテリーを長持ちさせるために、なるべく完全放電を避けて充電をおこなってください。
- 音が鳴ったら使用をやめてください。
- バッテリーの充電容量が減少すると、使用時に「ピー」と音が鳴り続けます。音が鳴ったら使用をやめて充電をおこなってください。

通常時

- 緊急時に備えて、バッテリーは常に充電してください。充電時はLEDランプが点灯します。


AC電源コードをコンセントに挿して充電します。
充電時は、バッテリーが「黄色」、
コントロールボックスは「緑色」に点灯します。

※点灯していないときは、充電されていません。
ケーブルが奥まで挿まっているか確認してください。
※他の色に点灯、点滅はエラーの可能性があるので、
使用しないでください。



警告


バッテリーを充電しない状態で、長期間放置（6ヶ月以上）すると、自己放電により充電容量が減少し、緊急時に使用できない可能性があります。通常時は電源コードを外さず、常に充電してください。

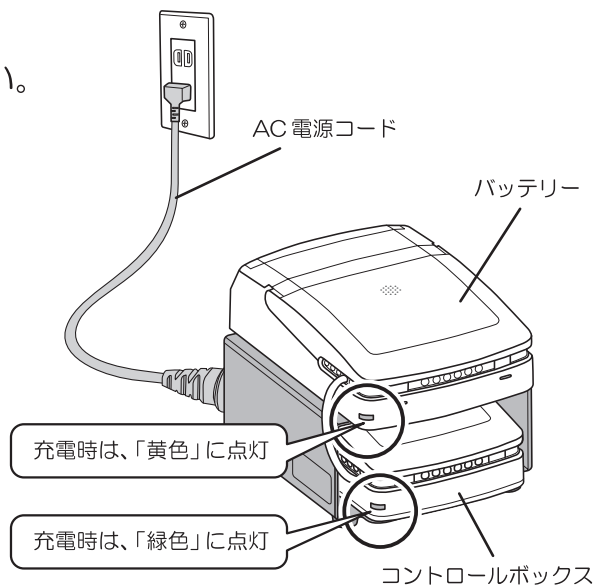


緊急時に、すぐにベッドにバッテリーを接続できるよう、あらかじめバッテリーコード（別売）をベッドに取り付けておいてください。

P300シリーズへのバッテリーコードの取り付けかた


- 1 ベッドの電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 ベッドの取扱説明書を参照し、マットレス・ひざ脚ボトムを取り外します。
- 3 電源部にバッテリーコードを取り付けます。

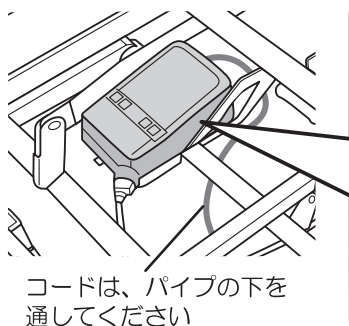


- ① 電源部キャップを取り外します。

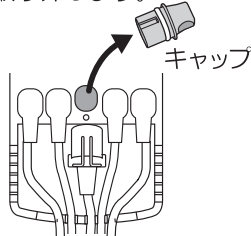



- ② 取り外したキャップはここに収納してください。

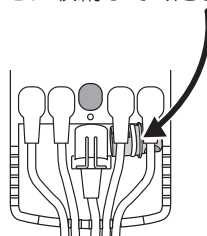

- ③ キャップを取り外した位置にバッテリーコードを取り付けてください。

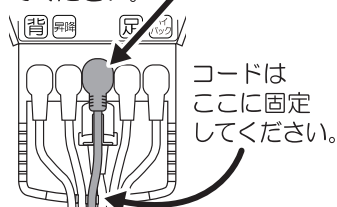


- 4 コードクリップにバッテリーコードを取り付け、付近で束ねてください。

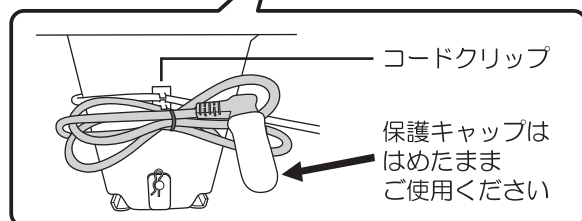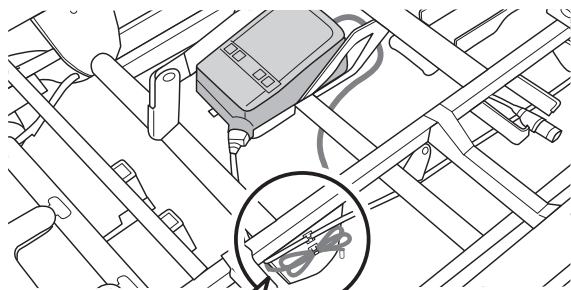

- 5 ひざ脚ボトムを取り付け、元通りに組み立てます。


- 6 組み立て完了後にコードのはさみ込みが無いか確認してください。

確認後に、ベッドの電源プラグをコンセントに挿し込み、手元スイッチのボタンを押して正しく操作できることを確認してください。

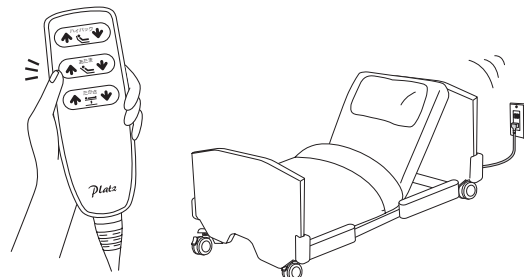


P301 シリーズへのバッテリーコードの取り付けかた

- 1 ベッドの電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 ベッドの取扱説明書を参照し、マットレス・ひざ脚ボトムを取り外します。
- 3 電源部にバッテリーコードを取り付けます。

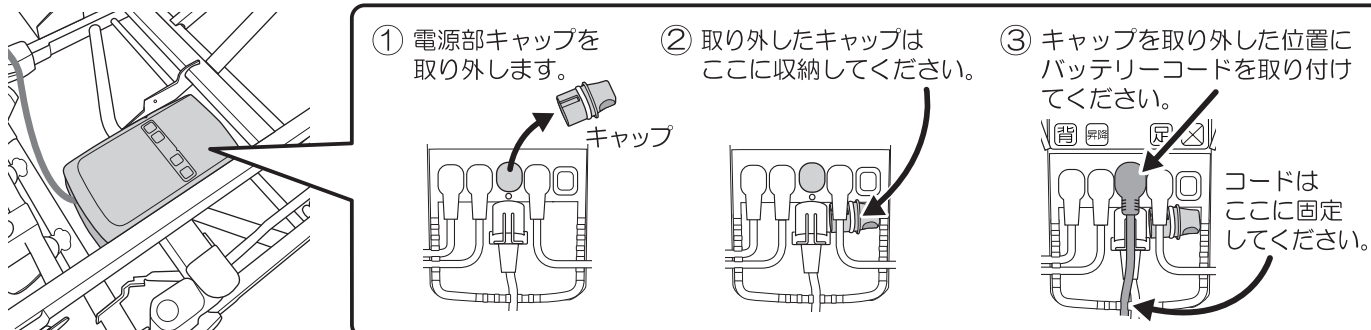


- 4 バッテリーコードを取り付け、付近で束ねてください。

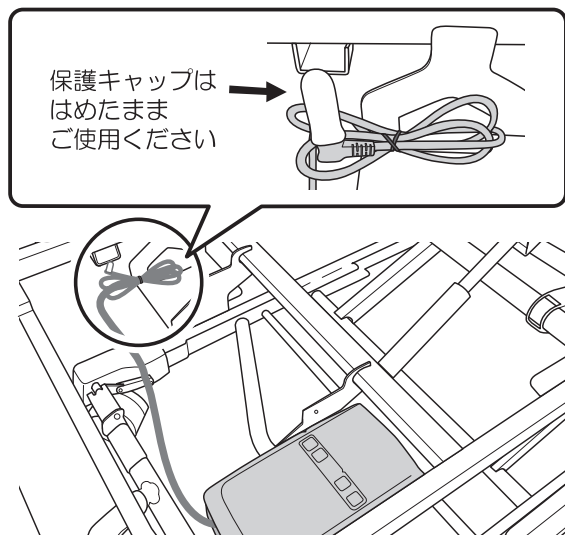

- 5 ひざ脚ボトムを取り付け、元通りに組み立てます。

- 6 組み立て完了後にコードのはさみ込みが無いか確認してください。

確認後に、ベッドの電源プラグをコンセントに挿し込み、手元スイッチのボタンを押して正しく操作できることを確認してください。

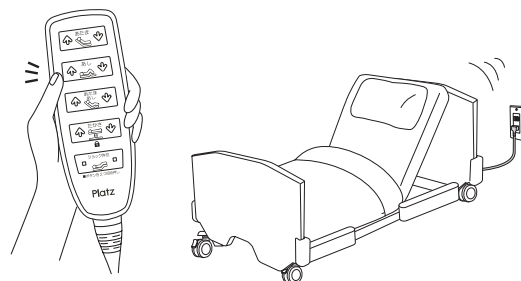

緊急時


- ① バッテリーを開けて、ケーブルを取り外してください。
- ② ベッドのコードクリップに取り付けておいたバッテリーコードを伸ばして、保護キャップを外してください。
- ③ ①のケーブルを取り外した位置にバッテリーコードを取り付けてください。
- ④ 通常通りベッドの手元スイッチで操作してください。



警告



音が鳴ったら使用をやめてください。
・バッテリーの充電容量が減少すると、使用時に「ピー」と5秒間音が鳴り続けます。音が鳴ったら使用をやめて充電をおこなってください。

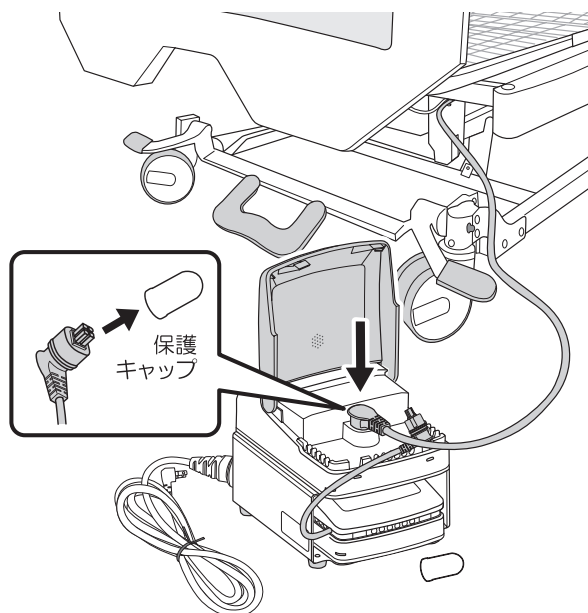

バッテリーの廃棄について

本バッテリーは商品の中に、鉛・希硫酸を含んでおります。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。



鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
鉛蓄電池の交換および使用済み商品の廃棄に関しては、リサイクルへご協力ください。

型 式	PE10-BA19	質 量	3.5 kg
サイズ	20.5 × 14.5 × 15.5 cm ※ケーブルは含まれません	防水規格	IPX6
使用環境	5℃～ 40℃	定格電圧	24 V
充電容量	1,200mAh		
停電時の 使用回数 の目安	背上げ・下げ 約12往復 ※使用者体重、バッテリーの使用環境、経年劣化等により 使用回数は異なります。		