


ヨカロ専用 2モーター変換キット (3モーター → 2モーター) PP116-BS2

この度は、ヨカロ専用 2モーター変換キット (3モーター → 2モーター) PP116-BS2 をご購入いただき、誠にありがとうございます。取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

梱包内容

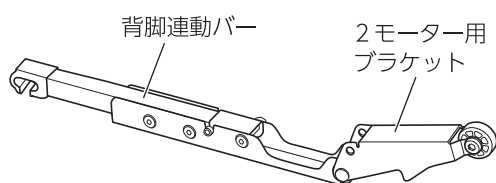

※組み上がった状態で梱包されています。



※別梱包





2モーターベッド用液晶手元スイッチ


3モーター → 2モーター変換方法

- ① 背ボトムと昇降高さを、完全に下げてください。
- ② ベッドの取扱説明書を参照し、背ボトムと腰ボトム、ひざ脚ボトムを取り外してください。
- ③ 電源部の「足」に挿し込まれている、ひざ上げモーターコードを取り外し、キャップを挿し込んでください。
- ④ 下図を参照し **A** と **B** 2箇所のピンと割りピンを外し、「3モーター用ブラケット」「ひざ上げモーター」を取り外してください。

＜ひざ上げモーターのプラグを外します＞

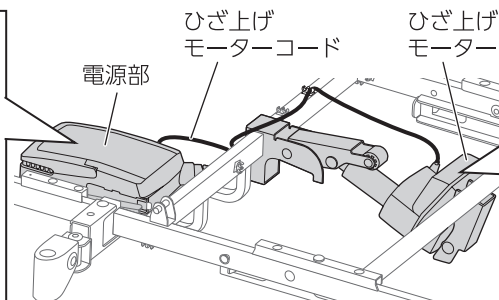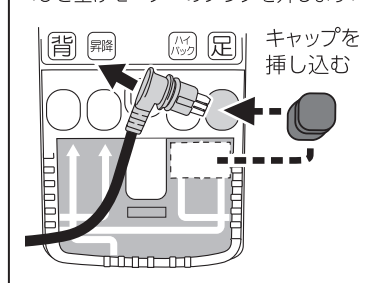


＜ブラケットとひざ上げモーターを外します＞

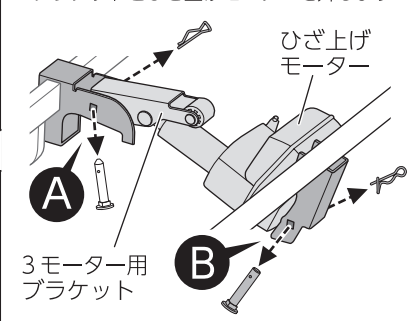


- ⑤ センターフレームに、2モーター用ブラケットと背脚連動バーを取り付けます。


組み上がった背脚連動バーと2モーター用ブラケットを分解します。

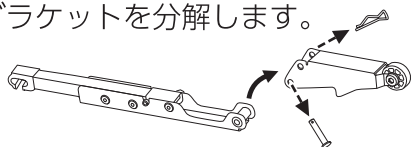


2モーター用ブラケットを、同梱された根角ピンと割りピンを使用して、センターフレームに取り付けます。

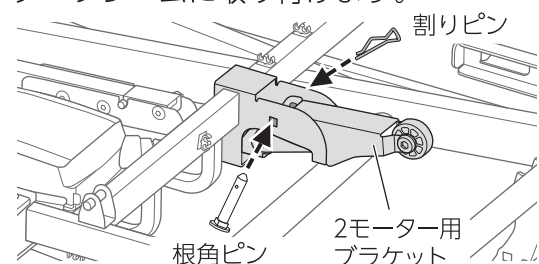


下図を参照し、ピンと割りピンを使用して背脚連動バーを取り付けます。

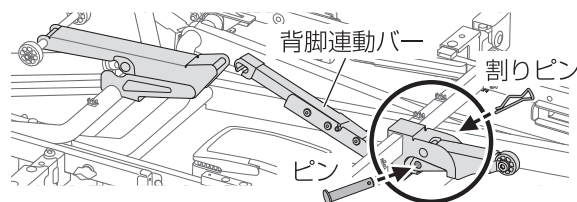


その後、背脚連動バーの先端を、ヘッドフレームのピンに上から引っ掛けてください。

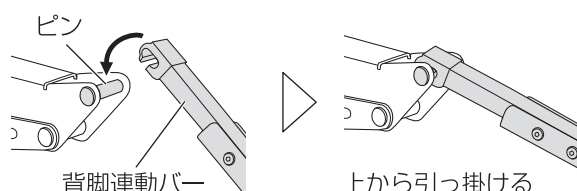


- ⑥ 電源部に挿し込まれている 3 モーター用液晶手元スイッチを取り外し、2 モーター用の液晶手元スイッチを取り付けてください。（※必ず対応した液晶手元スイッチをお使いください。）

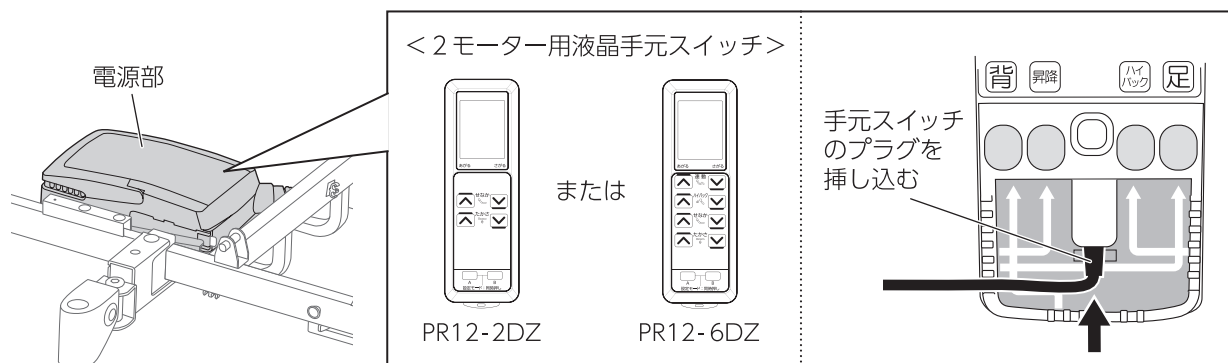

- ⑦ 手元スイッチコードは、下図のコードクリップに留めてください。反対方向に取り回す場合は、**— — —** の方向へコードを取り回してください。

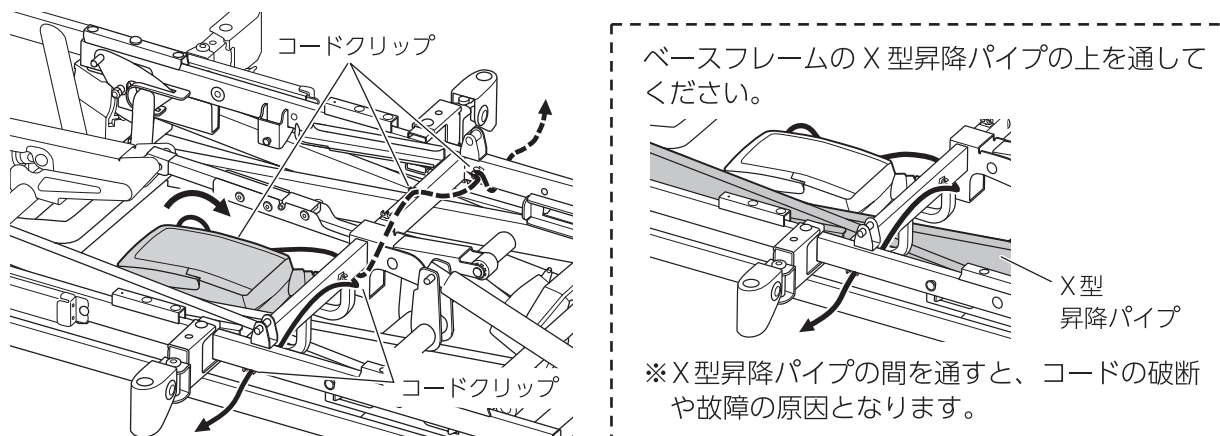

- ⑧ 下図部分は、コードクリップに U の字にして留めてください。

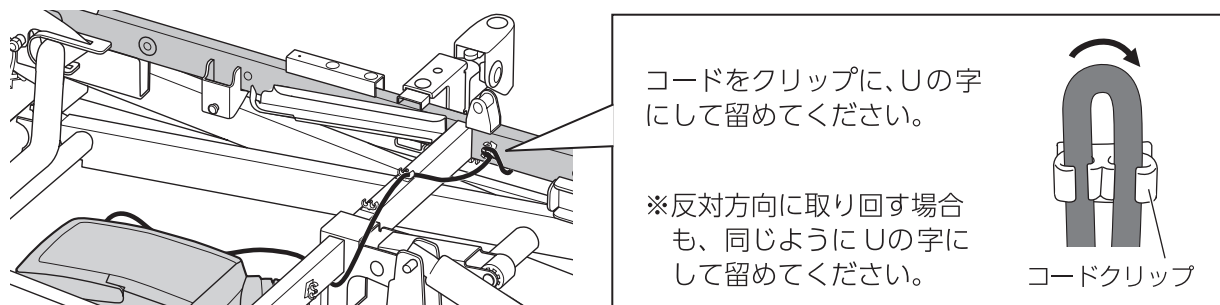

点検 / お手入れについて

- 取り付けが確実かどうか、必ず定期的に点検をおこなってください。しっかり取り付けられていない状態で使用を続けると破損や事故、故障の原因になります。
- 乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 商品にベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、使用しないでください。

⚠ 警告・注意

- 安全のため、作業は 2 人以上でおこなってください。
- 取り付けの際に、手や指をはさまないようにご注意ください。
- この商品は P116 用です。他のベッドに取り付けしないでください。
- コードのはさみ込みがないように、取り付けてください。