

取扱説明書

よかレールマット

PJ01M-S1 シリーズ PJ01M-L1 シリーズ

目次

ページ



商品の仕様	表紙
安全にご使用いただくために	1
取り付け方法	2
お手入れについて	裏表紙

この度は 据え置き型手すり用「よかレールマット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」は、取り付け・ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- 介助が必要な方がお使いになる場合は、介助する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

商品の特長	<ul style="list-style-type: none"> ● マットの裏面が吸着面になっており、ベース面に吸着してご利用時のマットのずれを防ぎます。 ● ベース面に貼ることで、素足で乗っても冷たくありません。 ● 洗濯が可能です。
-------	--

商品の仕様

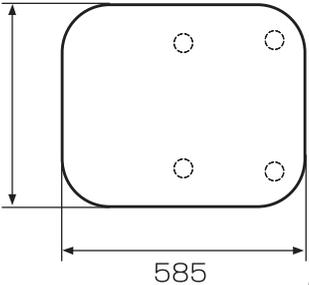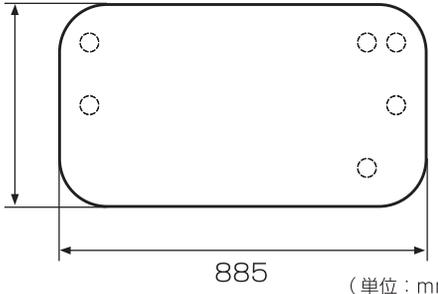商品サイズ	 <p>485 585 (単位: mm)</p>	 <p>485 885 (単位: mm)</p>
型 式	PJ01M-S1 シリーズ	PJ01M-L1 シリーズ
商品名	よかレールマット ショートサイズ用	よかレールマット ロングサイズ用
材 質	表面: ポリエステル 100% 裏面: アクリル樹脂	表面: ポリエステル 100% 裏面: アクリル樹脂
適合する よかレール	PJ シリーズ-AS (センタータイプ) PJ シリーズ-CS (コーナータイプ)	PJ シリーズ-AL (サイドタイプ) PJ シリーズ-BL (ロングタイプ)
原産国	日本	日本

安全にご使用いただくために ※必ずお守りください。

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、利用者や他の方への危害や財産への被害を未然に防止するために、色々な絵表示をしております。

下記をよくお読みいただき、内容をよく理解してから正しくお使いください。

 警告	この表示の欄は、「生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容」を記載しています。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容」を記載しています。

 警告	
●	「よかレール」以外と組み合わせて使用しないでください。 ・破損や事故の原因になります。また、他社商品と組み合わせたものは保証できません。
●	「よかレール」のベースに貼る以外の用途で使用しないでください。 ・怪我や事故の原因になります。
●	ストーブや火気のある物などを近づけないでください。 ・火災や火傷の原因になります。
●	濡れた状態での使用や、ベース面が濡れた状態で貼らないでください。 ・滑って怪我をする恐れがあります。
●	吸着面をベース面に貼ってください。(表裏を間違えないでください。) ・滑って怪我をする恐れがあります。
●	吸着面やベース面に、異物が付いた状態で使用しないでください。 ・吸着が弱まり、滑って怪我をする恐れがあります。
●	ご使用前に、保護フィルムを剥がしてからベース面に貼ってください。 ・保護フィルムを剥がさないと、マットが吸着せず滑って怪我をする恐れがあります。

 注意	
●	ベース面に貼り付けるとき、シワができないように手で押さえながら貼り付けてください。 ・マットに段差ができ、転倒の原因になります。
●	定期的にベース面から剥がして、お手入れをしてください。 ・吸着面がベース面に固着する可能性があります。
●	吸着が弱まってきたら新しいマットに交換してください。 ・マットが吸着せず滑って怪我をする恐れがあります。
●	直射日光の当たる場所や屋外、高温多湿の場所で使用しないでください。 ・吸着面の劣化や変質の原因となります。
●	各商品は各タイプの「よかレール」専用となっております。他のタイプに使用しないでください。 ・取り付けができない、または不要な穴が空いた状態になります。
●	各商品のお手入れは、本取扱説明書に記載の内容に従っておこなってください。 ・変形、変色、変質の原因となります。

取り付け方法

下図の<マット切り取り位置>を確認し、「よかレール」のタイプに合わせてマットの支柱部分を切り取ってください。

※マットの支柱部分にはミシン目が入っているため、手で簡単に切り取ることができます。


<マット切り取り位置> ※支柱部分(●黒丸)を切り取ってください。

PJシリーズ-AS (センタータイプ)	PJ01M-S1シリーズ (ショートサイズ用)	PJシリーズ-CS (コーナータイプ)	PJ01M-S1シリーズ (ショートサイズ用)	<p>ミシン目に沿って、円形に切り取ってください。マット</p> <p>ミシン目</p>	
	<p>黒丸2箇所を切り取ってください。</p>		<p>黒丸4箇所を切り取ってください。</p>		
PJシリーズ-AL (サイドタイプ)	PJ01M-L1シリーズ (ロングサイズ用)	PJシリーズ-BL (ロングタイプ)	PJ01M-L1シリーズ (ロングサイズ用)	PJシリーズ-BL (ロングタイプ)	PJ01M-L1シリーズ (ロングサイズ用)
	<p>黒丸2箇所を切り取ってください。</p>	<p><支柱取付位置1></p>	<p>黒丸2箇所を切り取ってください。</p>	<p><支柱取付位置2></p>	<p>黒丸2箇所を切り取ってください。</p>


<貼り付け方法>

1 マット裏面についている吸着面保護フィルムをきれいに剥がします。


マット吸着面
保護フィルム

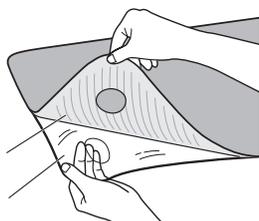

2 支柱を取り付けた「よかレール」の上から、マットの吸着面をベース面に向けて、支柱と穴位置を合わせて通してください。

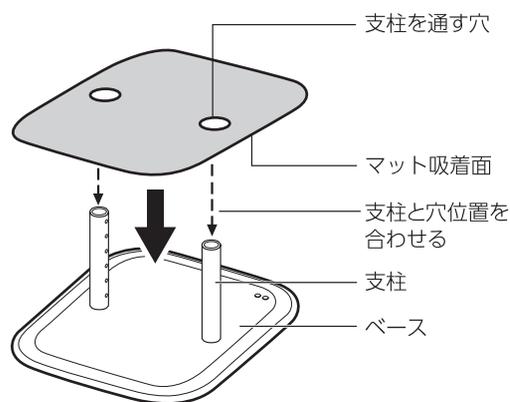

3 ベース面に貼り付ける際は、支柱とベースゴムに被らないように配置し、マットにシワができないように、手で軽く押さえながら貼り付けてください。

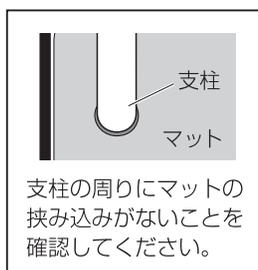


お手入れについて

⚠ 注意

- お手入れの際は、以下のものは使用しないでください。
酸性・アルカリ性の洗剤、シンナーやベンジンなどの有機溶剤、柔軟剤や漂白剤（塩素系・酸素系）
・変形、変色、変質の原因となります。
- 洗濯後にマットのミシン目が破れたときは、新しいマットに交換してください。
・破れた穴につまづき、怪我をする恐れがあります。
- 乾燥機を使用しないでください。
・変形、変色、変質の原因となります。
- 乾燥時に直射日光に当てないでください。
・変形、変色、変質の原因となります。
- マット吸着面に異物が付着したときは、粘着テープなどを用いて異物を除去する、または洗濯してください。
・滑って怪我をする恐れがあります。
- お手入れでマットを取り外すときは、ゆっくり取り外してください。
・ベース面に吸着材が付着する場合があります。
付着したときはぬるま湯で湿らせた布で拭き取ってください。

ベース面に貼って使用している時のお手入れ方法

- ・マット表面の汚れは、掃除機や粘着テープなどで異物を除去し、水で湿らせた布で拭き取ってから乾燥した布で水気を拭き取り、自然乾燥させてください。
- ・汚れがひどいときは、石鹼水や中性洗剤を少し含んだ湿らせた布で拭き取り、乾燥した布で水気を拭き取って自然乾燥させてください。

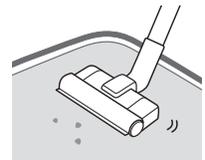

マットの洗濯方法

- ・洗濯は下記の表示の内容に従ってください。



液温は30℃までで、洗濯機の弱水流による洗濯ができます。



漂白処理はできません。



洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。



日陰でつり干してください。



アイロンは使わないでください。



ドライクリーニングには対応していません。

廃棄方法

- ・廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

株式会社プラッツ

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 2丁目3-17



アフターサービスのお問い合わせ

0120-77-3433

平日：午前9時～午後5時30分（土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く）

'23.06月作成

NP0302-D