

取扱説明書

安全カバー（清拭タイプ）

PS01SW-79 / PS01SW-99 / PS01SW-119
PA505SW-75 / PA505SW-96

この度は、安全カバー（清拭タイプ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。


- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書もお渡しください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

特徴


- クッション性の高いウレタン入りカバーです。
- 耐薬品の防水カバーを採用しており、清拭でのお手入れが可能です。
- ホックで簡単に取り付け、取り外しができます。

装着手順

①適合サイズの安全カバーであることを確認し、サイドレールの上から被せます。

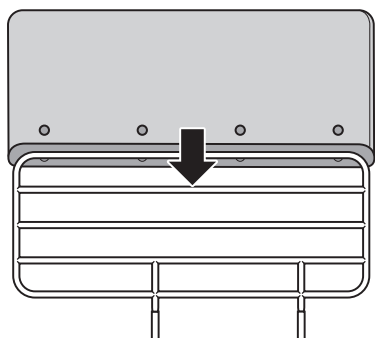

②安全カバーのホックを留めます。

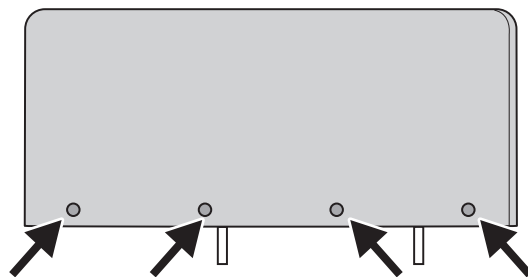

仕様

商品名・型式	安全カバー（清拭タイプ） PS01SW-79 / PS01SW-99 / PS01SW-119 PA505SW-75 / PA505SW-96	
寸法： 幅×長さ×厚さ 適合機種	PS01SW-79 : 幅 83.0×長さ47.5×厚さ2.0cm PS01SW-99 : 幅103.0×長さ47.5×厚さ2.0cm PS01SW-119 : 幅123.0×長さ47.5×厚さ2.0cm PA505SW-75 : 幅 79.0×長さ47.5×厚さ2.0cm PA505SW-96 : 幅100.0×長さ47.5×厚さ2.0cm	適合機種：PS01-79 適合機種：PS01-99 適合機種：PS01-119、PA505-119 適合機種：PA505-75 適合機種：PA505-96
材料	PVCレザー/ウレタンフォーム	
原産国	日本	

株式会社 プラッツ

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



フリーアクセス
携帯・PHS・OK

0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
（土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く）

’19.12月作成

NP0226-B