


取扱説明書

ロングサイドレール(2 本組)

PA505-96

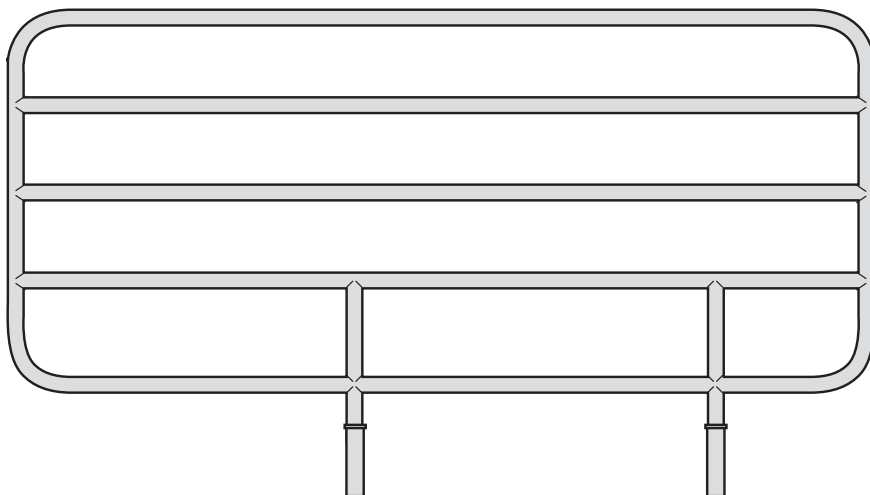

この度は、当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この「取扱説明書」は、取り付け・ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願い致します。

- 介護が必要な方がお使いになる場合は、介護する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

〈保証書付〉

目次・適合ベッド・使用目的

目次	ページ
■目次・適合ベッド・使用目的……………	1
■安全にご使用いただくための注意事項……………	2～3
■各部の名称・商品の確認……………	4
■ベッドへの取り付け方法……………	5
■各種サイドレールとの組み合わせについて……………	6
■商品の仕様、お手入れ……………	7
■保証とアフターサービス……………	8
■メモ……………	9～10

適合ベッド

PZB-M(1・2・3)Jシリーズ
PZB-ES1JFA
P100 シリーズ
P106 シリーズ
P110 シリーズ

使用目的

サイドレールは、ベッドからの転落防止および、マット等の落下防止を目的としております。
それ以外の用途ではご使用にならないようお願い致します。

安全にご使用いただくための注意事項

安全にご使用いただくために（必ずお守りください）

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や他の人々への危害や財産への阻害を未然に防止するために、色々な絵表示をしております。下記をよくお読みいただき、内容をよく理解してから正しくお使いください。



警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。



注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■絵表示の例



禁 止

この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。


ご使用前・ご使用上の警告と注意



禁 止

ご自身での操作が困難な方がベッドを使われる場合、付添いの方が取り付けてください。


●取り付けミスは、怪我や事故の原因となります。

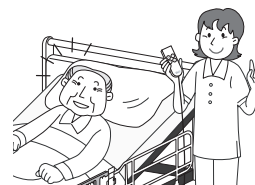

禁 止

商品の上に腰掛けたり、ぶら下がったり、商品を持ってベッドを移動させたりするなどの無理な力を加えるような使い方はしないでください。


●破損や事故の原因になります。

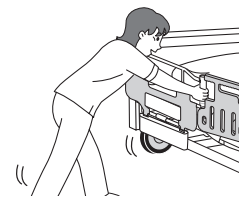

禁 止

当社商品以外のベッドに取り付けて使用をしないでください。当社が指定する適合品以外の商品とは組み合わせないでください。

●破損や事故の原因になります。

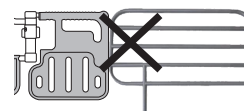

禁 止

分解や改造はしないでください。

●破損や事故の原因になります。




⚠️ ご使用上の警告と注意



禁止

ストーブなどの火気類に商品を近づけ過ぎないでください。

●火災や変色・変形の原因になります。

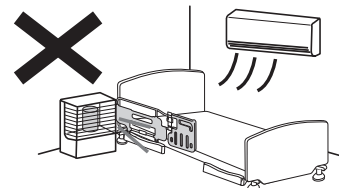


禁止

体の一部（頭、腕、足）をサイドレールから出さないでください。また出した状態でベッドの背・ひざ上げ操作をしないでください。

●骨折など、怪我をする恐れがあります。

安全に使用していただくためにサイドレール用安全カバーを別売りにてご用意しております。

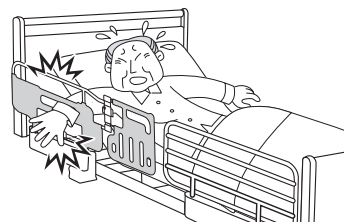

禁止


本体の「指はさみ注意」シールを貼ってある周囲に手を置かないでください。

●骨折など、怪我の原因になります。



体位変換（寝返り等）の際に転落の危険性があるのでマット面からレールの上まで22 cm以上を確保してください。

●怪我や事故の原因になります。

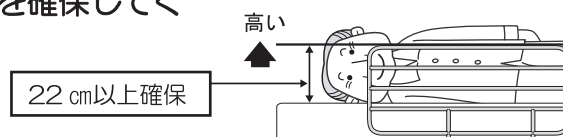


ベッドの背上げ・ひざ上げ操作時は、商品に体の一部や手元スイッチコードをはさまないように注意してください。


●破損や事故の原因になります。

重要なお知らせと注意事項

本商品と組み合わせ不適合なサイドレール、ベッド用グリップを使用されますと、「危険な隙間」「干渉」が発生します。サイドレール、ベッド用グリップと組み合わせて使用される場合は各ベッド本体の取扱説明書をご参照ください。不適合商品との組み合わせは怪我や重大事故の原因になりますのでご注意ください。

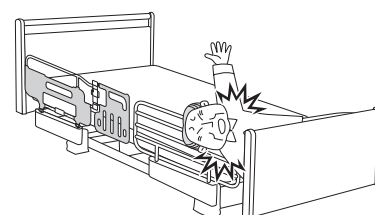


各部の名称

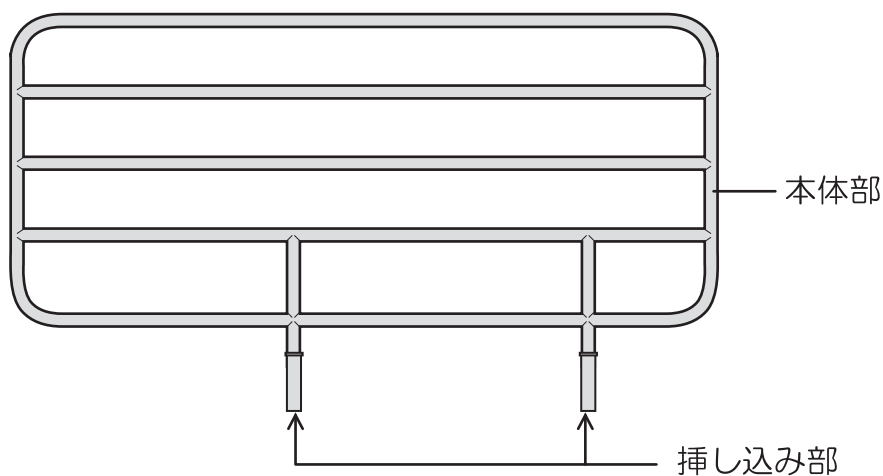


商品の確認

- 開梱した時点で、商品がすべて同梱されているか、また、破損していないか確認してください。
万一、不足や破損があった場合は、販売店、または弊社までご連絡ください。

■取扱説明書〈保証書付〉……1冊

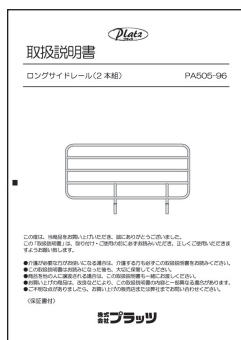


■本商品………2本

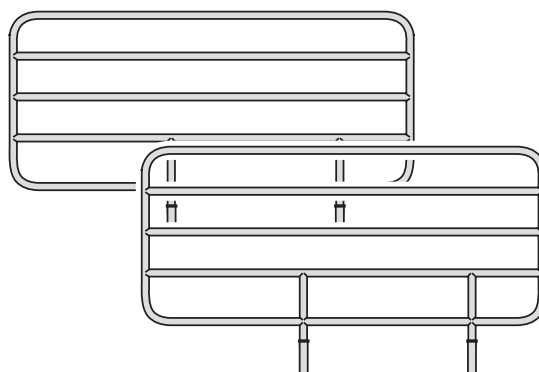


ベッドへの取り付け方法



サイドレール挿し込み部をサイドレール取り付け穴に挿し込みます。

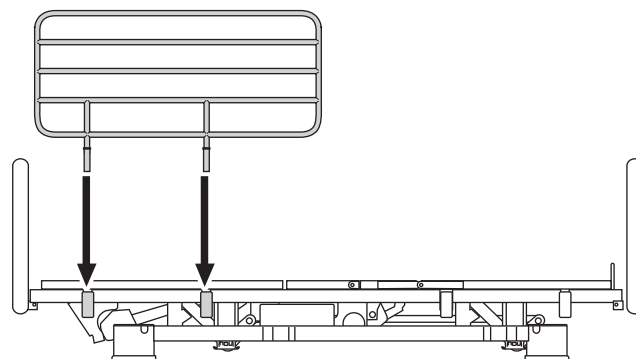

●頭側への取り付け

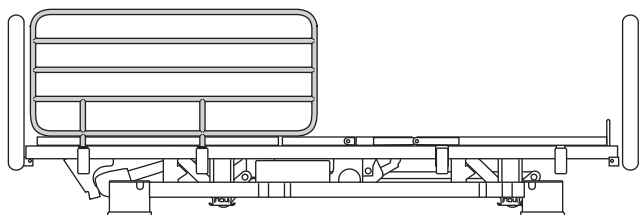

●脚側への取り付け

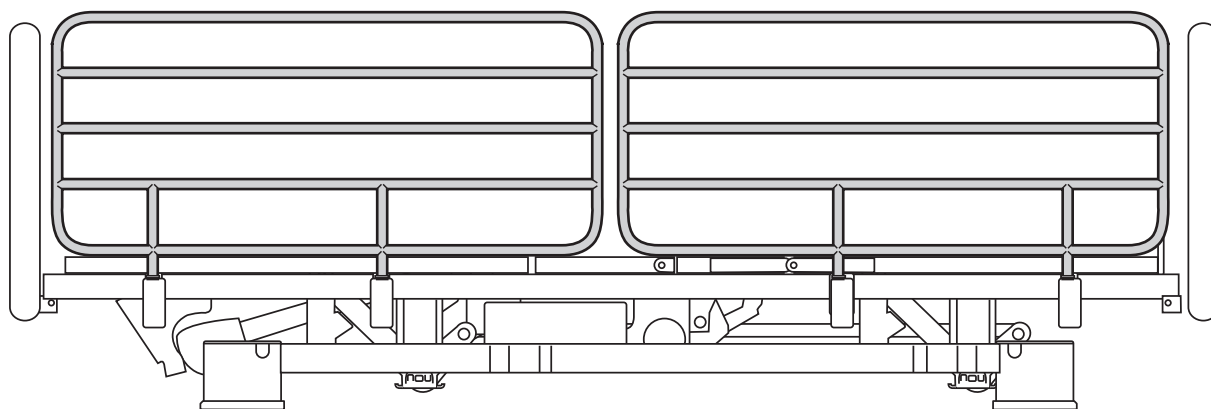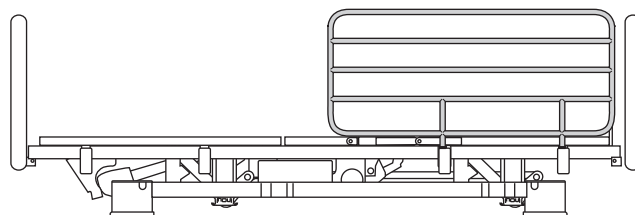

P106-2 シリーズに取り付けた場合（PA505-96、2 本取り付け）


※サイドレールはベッドの左右どちらにも取り付け可能です。
適合ベッド以外に取り付けないでください。

各種サイドレールとの組み合わせについて


本商品と各種サイドレールとの組み合わせを行う場合は、危険な隙間が発生しないように組み合わせてください。組み合わせの詳細につきましては、各ベッド本体の取扱説明書をご参照ください。

重要なお知らせと注意事項

本商品と組み合わせ不適合なサイドレール、ベッド用グリップを使用されますと、「危険な隙間」「干渉」が発生します。サイドレール、ベッド用グリップと組み合わせで使用される場合は各ベッド本体の取扱説明書をご参照ください。不適合商品との組み合わせは怪我や重大事故の原因になりますのでご注意ください。

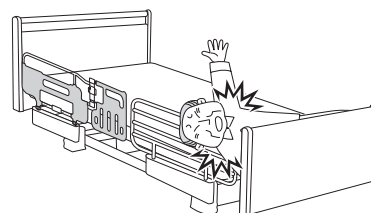


商品の仕様

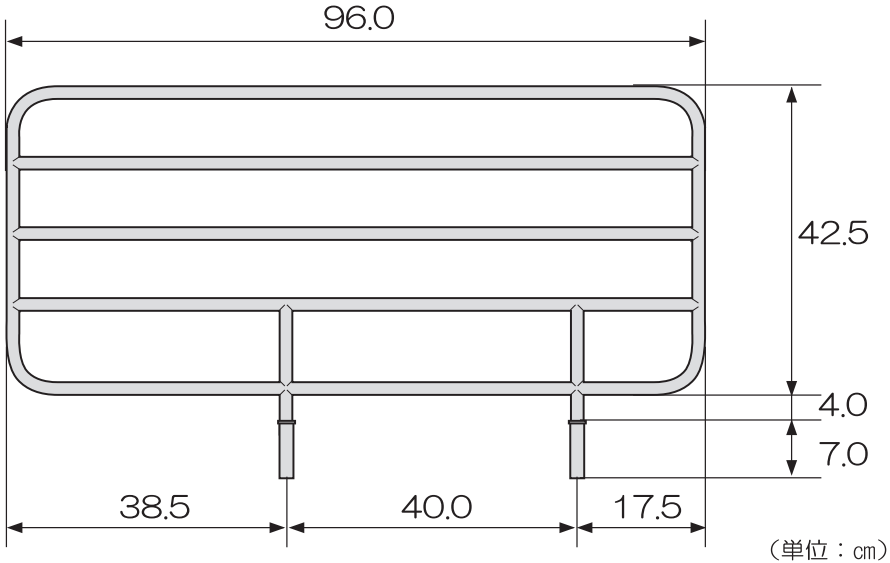型 式	PA505-96	
商品名	ロングサイドレール(2 本組)	
寸 法	 (単位：cm)	
梱包サイズ 梱包質量 (本体質量)	99.0 cm × 55.0 cm × 6.0 cm	8.0 kg (6.8 kg / 1 set)
原産国	ベトナム	

お手入れについて

○お手入れ

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 清拭する場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って残った洗剤を拭き取ってください。
最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。
- ベンジン・シンナー・アセトン・磨き粉等は使用しないでください。
塗装が剥がれたり、樹脂部品が破損する恐れがあります。
- シールが剥がれないようご注意ください。

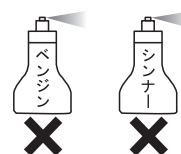

保証とアフターサービス

よくお読みください

- サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読みください。
それでも異常がある場合は、お買い上げの販売店か下記フリーアクセスまでご連絡ください。



0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

フリーアクセス
携帯・PHS・OK

ご連絡いただきたい内容

- ・ 商品名及び型式
- ・ 故障内容（出来るだけ詳しく）
- ・ ご住所/お名前/お電話番号
- ・ お買い上げ日
- ・ お買い上げの販売店

商品名

型式



保証書

お買い上げ日/販売店/お名前を必ず記入し、保証書の内容をよくお読みになって大切に保管してください。（※保証書の再発行は致しません。）

保証期間について

保証期間はお買い上げ日から1年間です。
保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理致します。但し、保証期間内でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。

保証期間を 過ぎている場合

修理及び部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理致します。

修理代について

- 修理代は、部品代、出張費、技術料で構成されます。
- 部品代…修理で使用した部品代です。
 - 出張費…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生する費用です。
 - 技術料…商品の診断・故障箇所の修理等の作業にかかる費用です。

※注：お買い上げ時の送り状等を保管いただくことをおすすめします

プラッツネットワーク

■本 社	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目3-17	TEL:092-584-3434
■関東支店	〒105-0014 東京都港区芝2丁目16-9	TEL:03-5427-8033
■東海支店	〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社 3丁目108	TEL:052-704-2700
■関西支店	〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4-2F	TEL:06-6233-2105
■九州支店	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目3-17（本社内）	TEL:092-584-3433
●東北営業所	〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29	TEL:022-781-7072
●中四国営業所	〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6	TEL:084-946-6000
●北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102	TEL:011-807-4750

●MEMO●

[illegible]

●MEMO●

[illegible]

保証書



商品名	ロングサイドレール（2本組）	型式	PA505-96
製造番号	商品本体のロットNo.をご覧ください	保証期間	お買い上げ日より1年間
★お買い上げ日	年 月 日		
★お客様	ご住所		
	お名前	電話番号	

記載内容で無償修理を行なうことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合には、弊社までご連絡ください。

※★販売店様へ
★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ず記入の有無
をご確認ください。
※保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

★販売店	住所・会社名（または店名）
------	---------------

【無償修理規定】

保証期間中に取扱説明書、本商品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本商品が故障した場合には、本無償修理規定の内容で、無償で修理させていただきます。

- 1.無償修理をご依頼の場合には、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。
- 2.お買い上げの販売店に無償修理をご依頼にならない場合には、弊社宛にお申し付けください。
- 3.この修理に際し本保証書をご提示ください。尚、本保証書は再発行できませんので、大切に保管ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には、原則として有償修理とさせていただきます。尚、有償修理の場合は、技術料、部品代、出張費がかかります。
 - ①無償修理ご依頼の際、本保証書をご提示いただけない場合。
 - ②本保証書に、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店の記入が無い場合（送り状等で左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句が書き換えられた場合。
 - ③お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などによる故障及び損傷。
 - ④取扱説明書、本商品添付ラベルに記載の禁止事項や警告事項に違反した使用上の故意・過失による故障及び損傷。
 - ⑤不当な修理や改造されたことによる故障及び損傷。
 - ⑥他社製や指定外の周辺機器を取り付けたことによる故障及び損傷。
 - ⑦本来の使用目的以外の用途に使用されたことによる故障及び損傷。
 - ⑧消耗部品のお取り替え。
 - ⑨瑕疵によらない自然の磨耗、傷、さび、かび、変色、その他類似の事由による場合。
 - ⑩犬、猫、鳥、鼠などの小動物によるかじりや糞などによる故障及び損傷。
 - ⑪火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害等による故障及び損傷。
 - ⑫商品維持管理、メンテナンス上の使用薬品等の不備による故障及び損傷。
- 5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社へご相談ください。

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

’16.12月 作成

NPOO11-C