


# 取扱説明書

折りたたみサイドレール  
(1本入り)

ショートタイプ PS05-112  
 ロングタイプ PS05-151  
 セパレートタイプ PS05-90、PS05-114

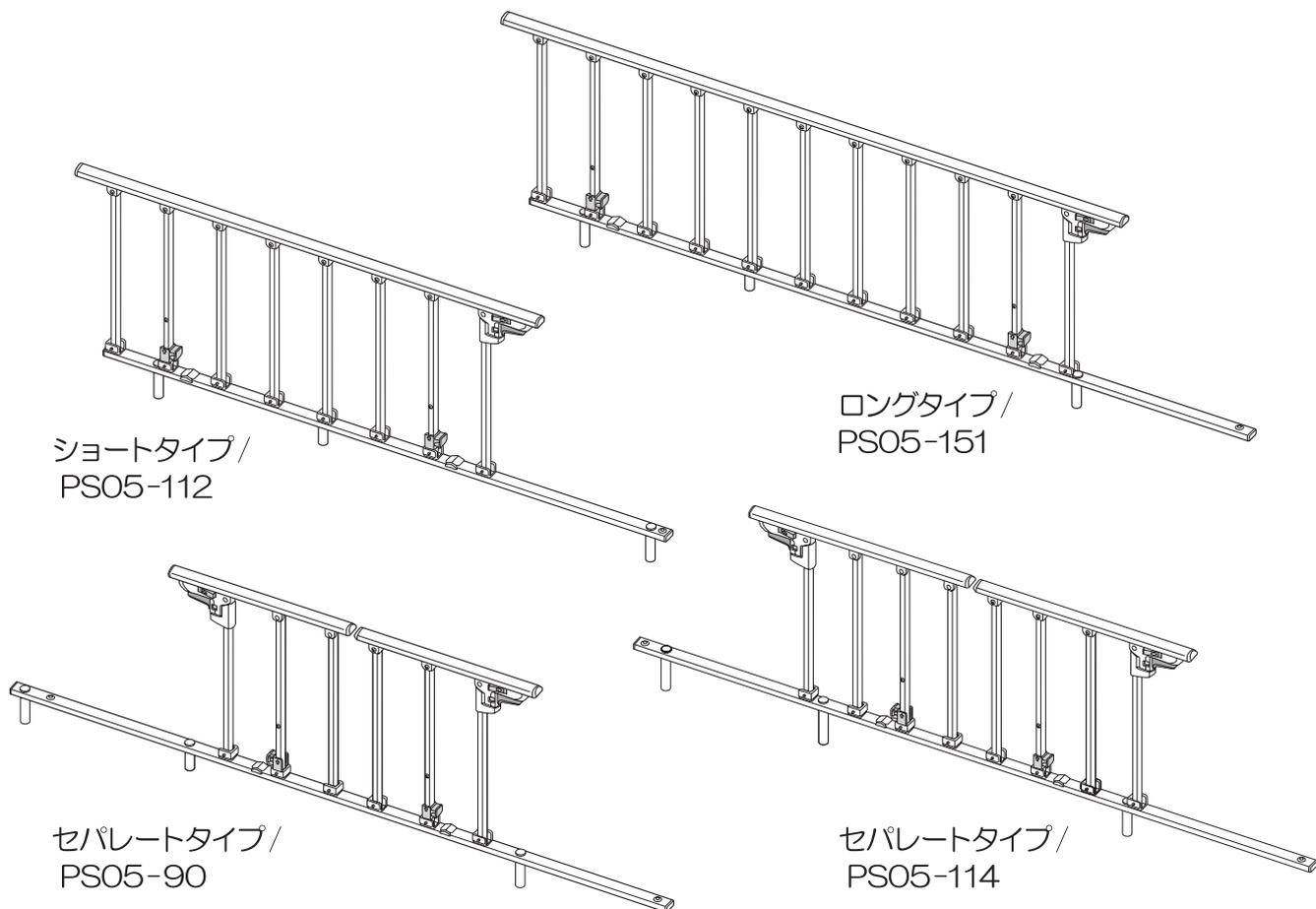

この度は、折りたたみサイドレール「PS05 シリーズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この「取扱説明書」は、取り付け・ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

- 介護が必要な方がご使用になる場合は、介護する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

保証書付

# 目次

目次	ページ
■目次・使用目的 .....	1
■安全にご使用いただくために .....	2～7
■各部の名称 .....	8
■商品の確認 .....	8～10
■取り付け方法 .....	11
■折りたたみサイドレールの使用方法 .....	12
■指はさみ防止ストッパーの操作方法 .....	13
■商品の仕様 .....	14～15
■お手入れ・点検 .....	16
■保障とアフターサービス .....	17

## 使用目的

折りたたみサイドレールは、ベッドからの転落防止および、マットレスなどの落下防止を目的としております。それ以外の用途ではご使用にならないようお願いいたします。

## 安全にご使用いただくために（必ずお守りください）

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や他の人々への危害や財産への阻害を未然に防止する為に、各種の絵表示を記載しております。下記をよくお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

 **警告** この表示の欄は、生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。

 **注意** この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

### ■絵表示の例



禁止

この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



この記号は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

## 警告



禁止

ご自身での操作が困難な方がベッドを使われる場合、付添いの方がベッド操作をしてください。  
●操作ミスは、怪我や事故の原因となります。



禁止

商品の上に腰掛けたり、ぶら下がったり、商品を持ってベッドを移動させたりするなどの無理な力を加えるような使い方はしないでください。  
●破損や事故の原因になります。



禁止

当社商品以外のベッドに取り付けての使用をしないでください。  
●破損や事故の原因になります。



禁止

頭や体の一部を折りたたみサイドレールの隙間に入れないでください。  
●ベッドの操作時に怪我や事故の原因になります。




禁止

分解や改造はしないでください。  
●破損や事故の原因になります。




禁止

ストーブなどの火気類に商品を近付け過ぎないでください。  
●火災や変色・変形の原因になります。

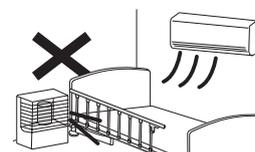


禁止

12歳以下のお子様や操作が困難な方のおひとりでの操作はさせないでください。  
●誤操作による怪我の原因になります。  
●故障の原因になります。

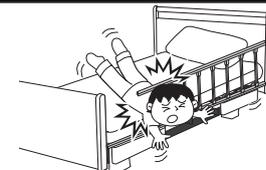

禁止

頭や体の一部をヘッド・フットボードとの隙間に入れないでください。  
●怪我の原因になります。  
●ご自身で体位維持できない方は特に注意してください。

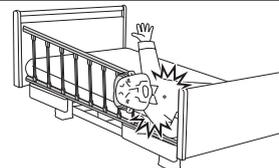


## ⚠️ ご使用上の警告




禁止

動く部分に手などをはさまないでください。  
衣類が引っ掛からないようご注意ください。  
●ベッドを降る際にパジャマなど衣類が引っ掛かり怪我や事故の原因になります。

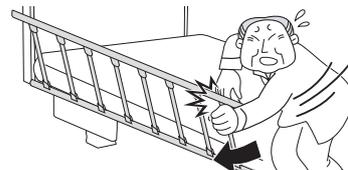

禁止

折りたたみサイドレールは確実に固定してください。  
●固定が不完全だと転倒し、怪我や骨折を起こす恐れがあります。

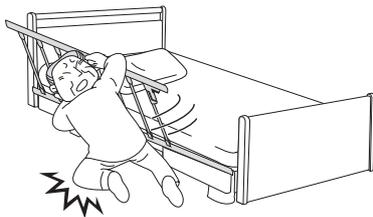

禁止

ベッドの上で折りたたみサイドレールを操作する場合はベッドから転落しないよう注意してください。  
●移動時の転落などで怪我をする恐れがあります。



禁止

折りたたみサイドレールの上に乗ったり、グリップ代わりに使用しないでください。  
●怪我や事故の原因になります。



禁止

本体の「指はさみ注意」シールを貼ってある周囲に手を置かないでください。  
●骨折など、怪我の原因になります。



禁止

サイドレールは正しい位置・向きに取り付け、確実に固定してください。  
●取り付け向きの詳細につきましては、各種ベッドの取扱説明書「レール類の組み合わせ」を参照ください。




禁止

サイドレールを折りたたんでベッドの乗り降りをするときは、指はさみ防止ストッパーを倒して完全に折りたたんだ状態でご使用ください。  
●サイドレールに足などが引っ掛かって転落したり、支柱の間に手や指などがはさまれて、怪我をする恐れがあります。




禁止

サイドレールを折りたたむときは手元スイッチコード・チューブ（ドレーン）・寝具などをはさまないように注意してください。  
●破損の原因や、怪我をする恐れがあります。

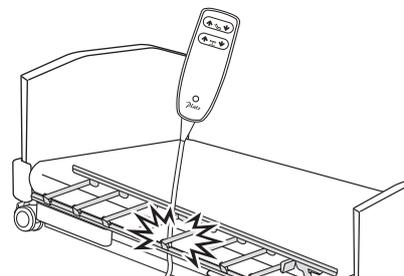


禁止

IV ポールを使用するときは、チューブ（ドレーン）などがはさまれないように取り廻しに注意してください。  
●チューブ（ドレーン）が抜けたりつぶれたりして、思わぬ怪我をする恐れがあります。

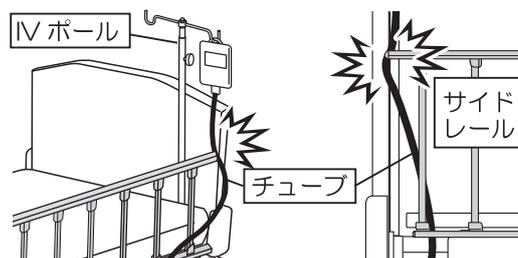

## ⚠️ ご使用上の注意

**注** ネジ類の取り付けが完全であるか、定期的に点検してください。

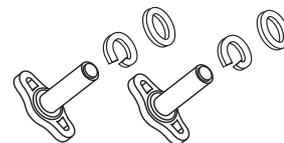


**注** ベッドの背上げ・ひざ上げ操作時は、商品に体の一部や手元スイッチコードをはさまないように注意してください。  
●破損や事故の原因になります。

**注** 使用方法（P12）を参照し、折りたたみ時などに手指をはさまないように充分注意してください。


**注** 折りたたみ時などに、商品に身体の一部や異物をはさまないように注意してください。  
●破損や事故の原因になります。

**注** 商品に、殺虫剤など直接スプレーしないでください。  
●破損や事故の原因になります。

**注** 体位変換（寝返りなど）の際に転落の危険性があるのでマットレス上面からレールの上まで 22 cm 以上を確保してください。  
●怪我や事故の原因になります。  
各種ベッドに対応した「適合周辺機器」をご使用ください。

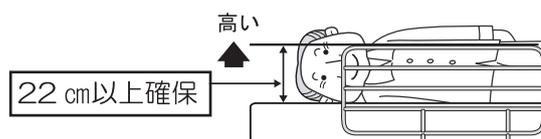

**注** サイドレールを折りたたむときは、ゆっくりと操作してください。  
●操作途中で手を離したり、勢いよく下げると、怪我をする恐れやサイドレール本体が破損する恐れがあります。

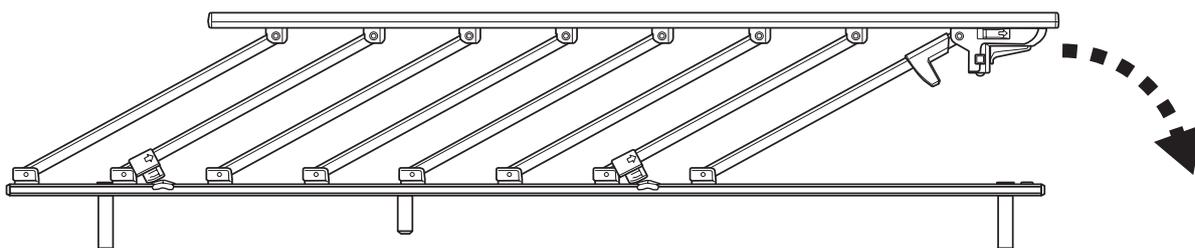

## ⚠️ ご使用上の注意

注

指はさみ防止ストッパーを使用するときは、手や指をはさまないように注意してください。  
●指はさみ防止ストッパーを使用するときは、サイドレールの上部握り部を少し持ち上げながら下図 A のように指先を掛けておこなってください。

下図 B のように指はさみ防止ストッパー全体に指を掛けて操作すると、手や指をはさまれて怪我をする恐れがあります。

図 A


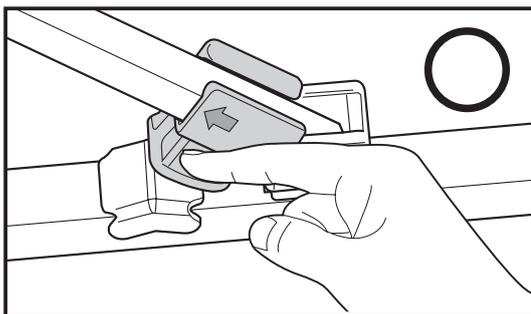




図 B

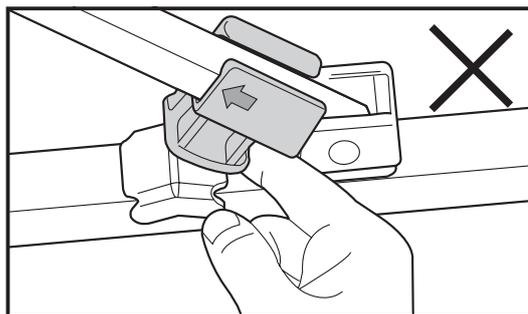

注

解除レバーを操作するときは、手や指がはさまれないように注意してください。

●回転部やロック部にはさまれて、怪我をする恐れがあります。

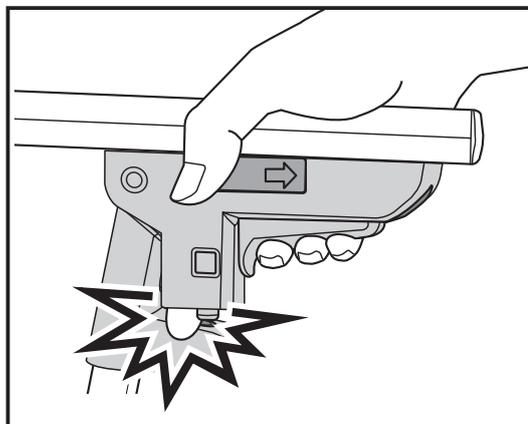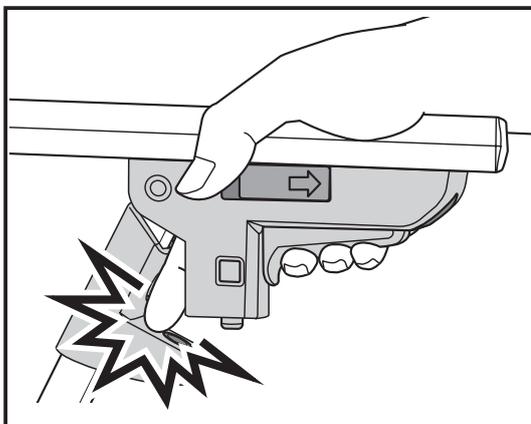

## ⚠️ ご使用上の注意

下記のシール類は特に注意していただきたい項目を記載しています。剥がしたり、傷付けたりしないでください。



ダブルロックを外すときは、  
正しく操作してください。

誤った操作をすると、怪我をしたり、商品が破損する恐れがあります。

シールに記載された手順で、正しく操作してください。

表示窓に **赤色** が見える場合は **ロックが不完全** です。


表示窓がすべて **緑色** になるまで位置を調整してください。

### ⚠️ 注意


- 解除レバーを操作するときは、手や指がはさまれないように注意してください。
- ロック位置まで上げたときは、確実にロックしたことを確認してください。

### サイドレールの折りたたみ方法


① 矢印方向にスライドさせます。

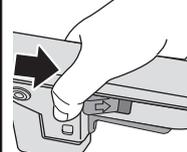

② そのまま、レバーを握ります。

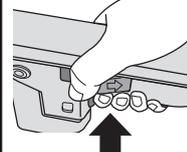

③ サイドレールをゆっくり倒します。

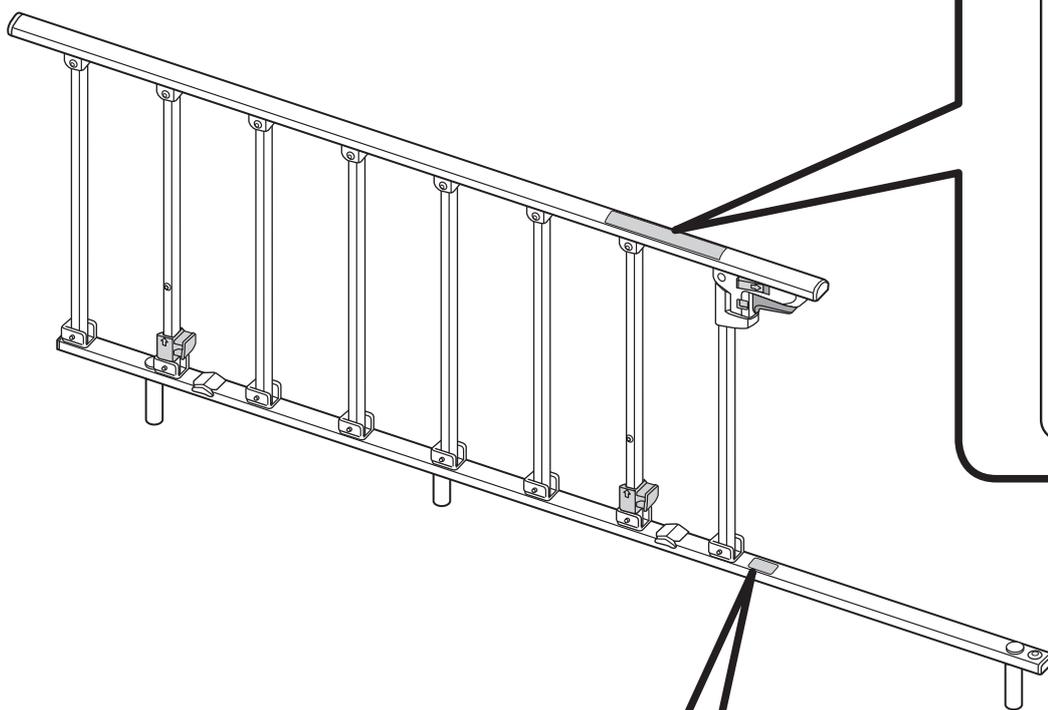

※イラストは PS05-112 です。

警告



指はさみ  
注意!




指はさみに注意してください。

サイドレールを折りたたむ際に、指などの身体の一部をはさまないように注意してください。怪我をする恐れがあります。


⚠️ ご使用上の注意

セパレートタイプ / PS05-90を取り付けた場合の注意

④ 注 セパレートタイプ / PS05-90を取り付けた場合、ベッドのホルダーに IV ポールなどを挿入して使用し、折りたたんだ際に PS05-90と IV ポールが接触する可能性がありますのでご注意ください。

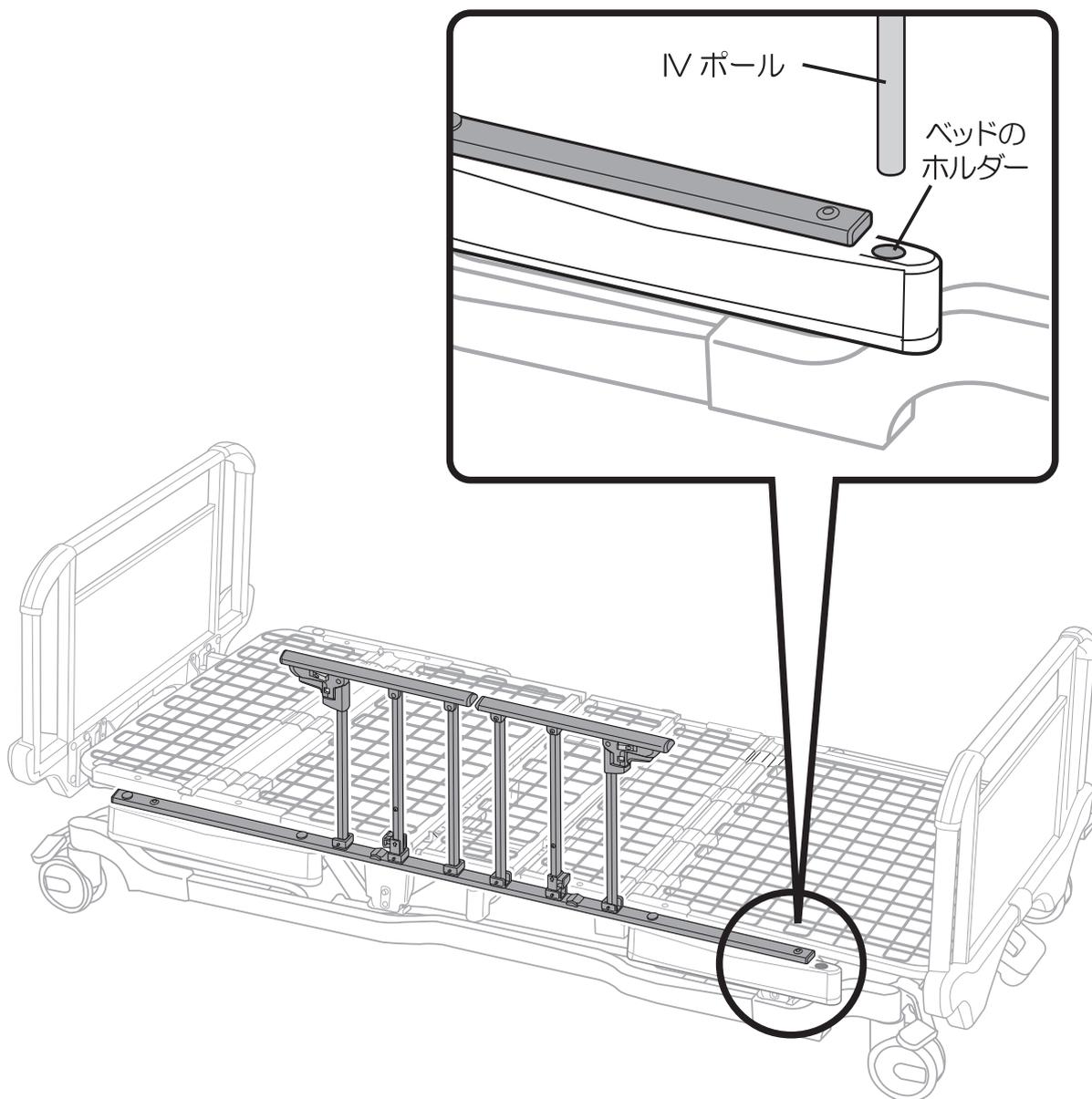

## 各部の名称

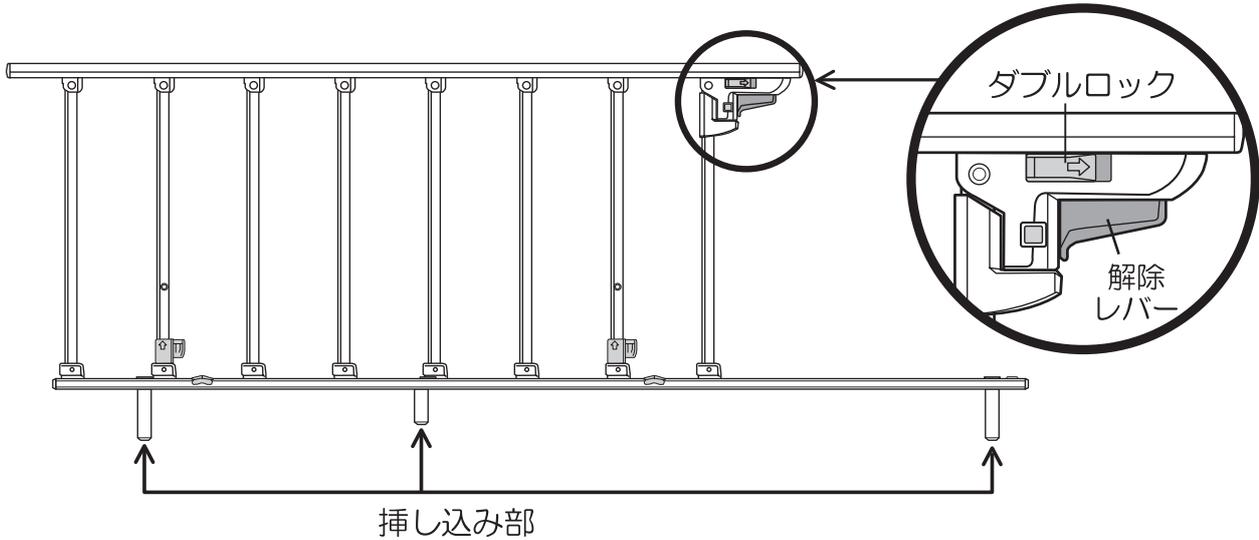

## 商品の確認


●商品が到着した時点で、下記の部品が全て同梱されているか、また、破損していないか下記欄へチェックをしながら確認をしてください。万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

(例)

ワッシャー×4	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------



**ショートタイプ**  
**PS05-112**

折りたたみ サイドレール本体	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

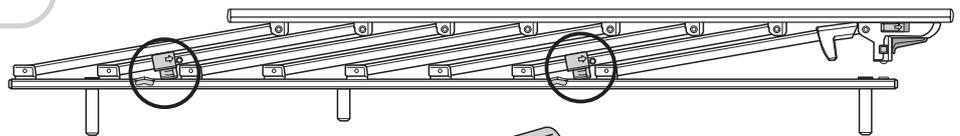

指はさみ防止 ストッパー×2	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

※サイドレールに取り付けられています。

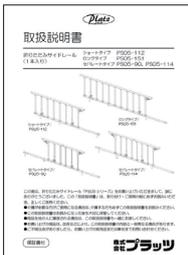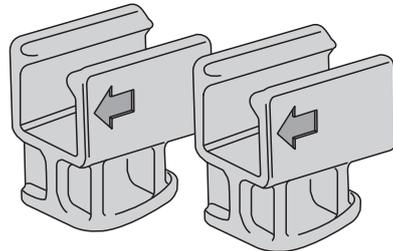


取扱説明書 (本書)〈保証書付〉	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

平ワッシャー×2	<input type="checkbox"/>
スプリング ワッシャー ×2	<input type="checkbox"/>
固定ボルト ×2	<input type="checkbox"/>



ロングタイプ  
PS05-151

折りたたみ サイドレール本体	
-------------------	--

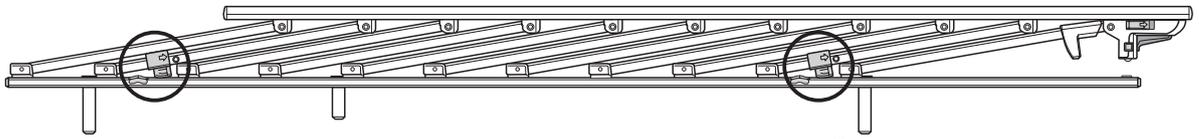

指はさみ防止 ストッパー×2	
-------------------	--

※サイドレールに取り付けられています。

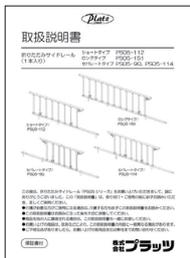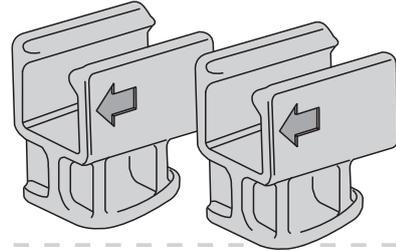


取扱説明書 (本書)〈保証書付〉	
---------------------	--

		平ワッシャー×2	
		スプリング ワッシャー ×2	
		固定ボルト ×2	


セパレートタイプ  
PS05-90

折りたたみ サイドレール本体	
-------------------	--

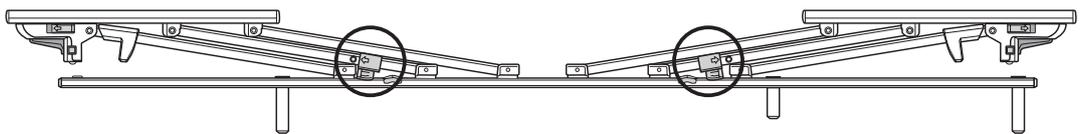

指はさみ防止 ストッパー×2	
-------------------	--

※サイドレールに取り付けられています。

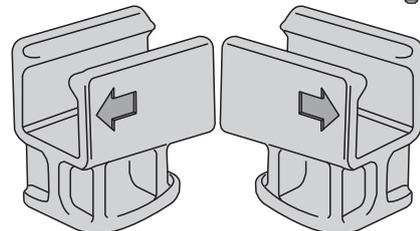


取扱説明書 (本書)〈保証書付〉	
---------------------	--

		平ワッシャー×2	
		スプリング ワッシャー ×2	
		固定ボルト ×2	



セパレートタイプ  
PS05-114

折りたたみ サイドレール本体	
-------------------	--

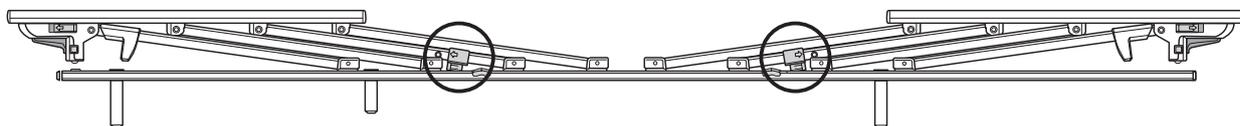

指はさみ防止 ストッパー×2	
-------------------	--

※サイドレールに取り付けられています。

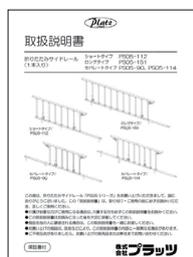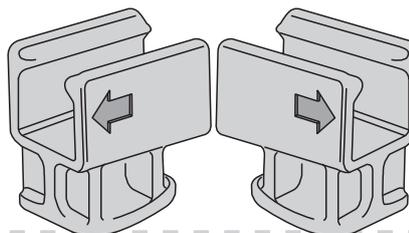


取扱説明書 (本書)〈保証書付〉	
---------------------	--

	平ワッシャー×2	
	スプリング ワッシャー ×2	
	固定ボルト ×2	

## 取り付け方法

1

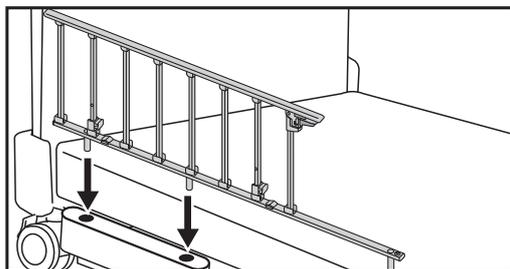


折りたたみサイドレールの挿し込み部を、ベッドのホルダーの穴に挿し込みます。

備考

ベッドの左右どちらにも取り付け可能です。

2

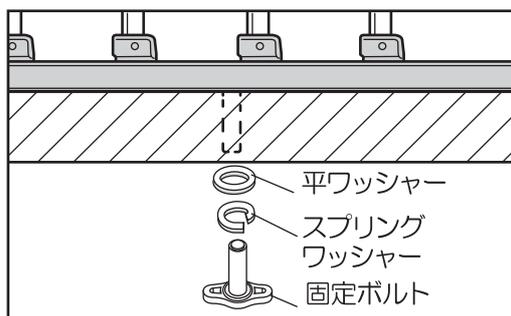


折りたたみサイドレールの挿し込み部の下側から固定ボルトで2箇所固定します。その際、左図のように平ワッシャーとスプリングワッシャーをはさみます。緩みのないようにしっかり締め付けてください。




確認

固定ボルトの取り付け位置はタイプによって異なります。それぞれ下記丸印の2箇所に固定ボルトを取り付けてください。


ショートタイプ

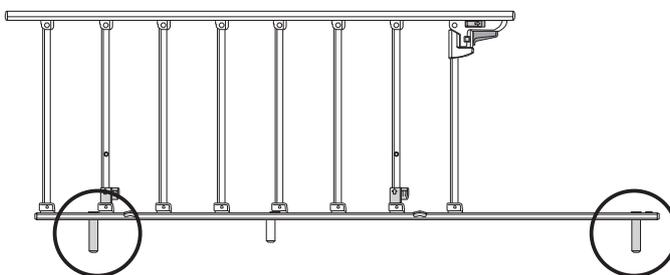

ロングタイプ

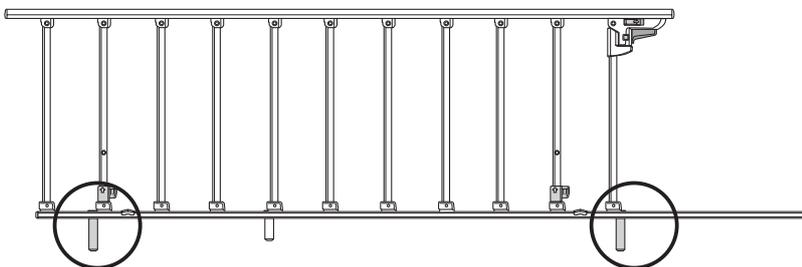


セパレートタイプ

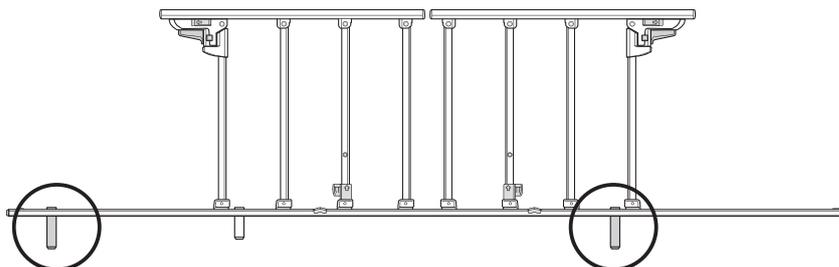

# 折りたたみサイドレールの使用方法

## サイドレールの折りたたみ方法

- ①ダブルロックを、指で矢印方向に最後までスライドさせてください。
- ②そのまま解除レバーをにぎり、サイドレールをゆっくりと倒してください。

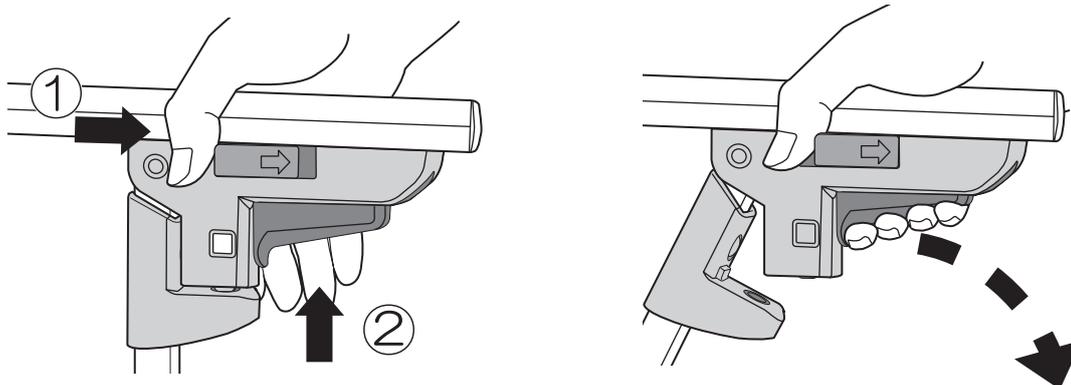


注意

ダブルロックを操作しないと、解除レバーは操作できません。正しく操作しない場合、サイドレールが破損する恐れがあります。

## サイドレールのロックの方法


- ①折りたたんだ状態から持ち上げると、自動的にロックされます。
- ②垂直に起立した状態で、ロックが掛かっているかを確認してください。

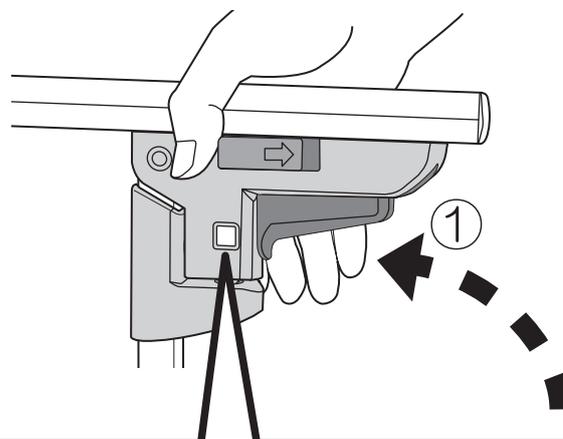


注意

赤色表示が少しでも見える場合は、完全にロックされていません。  
●上部パイプをもう一度強く引き上げて、完全に緑色表示となるように調整してください。

### 表示窓の説明

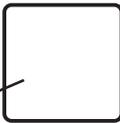- 緑色  緑色の場合は、完全にロックされています。
- 赤色  赤色が少しでも見える場合は、ロックが不完全です。

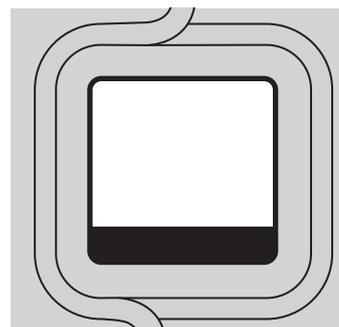


## 指はさみ防止ストッパーの操作方法

指はさみ防止ストッパーは、サイドレールを折りたたむときに、支柱や上部パイプの隙間に指をはさまないように取り付けられています。そのため、通常折りたたむときには指はさみ防止ストッパーがはたらき、折りたたみ高さが 21.0 cm の位置で停止します。

### サイドレールを折りたたむとき

- ①ダブルロックをスライドさせて、解除レバーを上げます。
- ②指はさみ防止ストッパーがはたらき、折りたたみ高さが 21.0 cm の位置で停止します。
- ③上部パイプを少し持ち上げ、指はさみ防止ストッパーを折りたたむ方向へずらしながら、サイドレールを最後まで折りたたんでください。

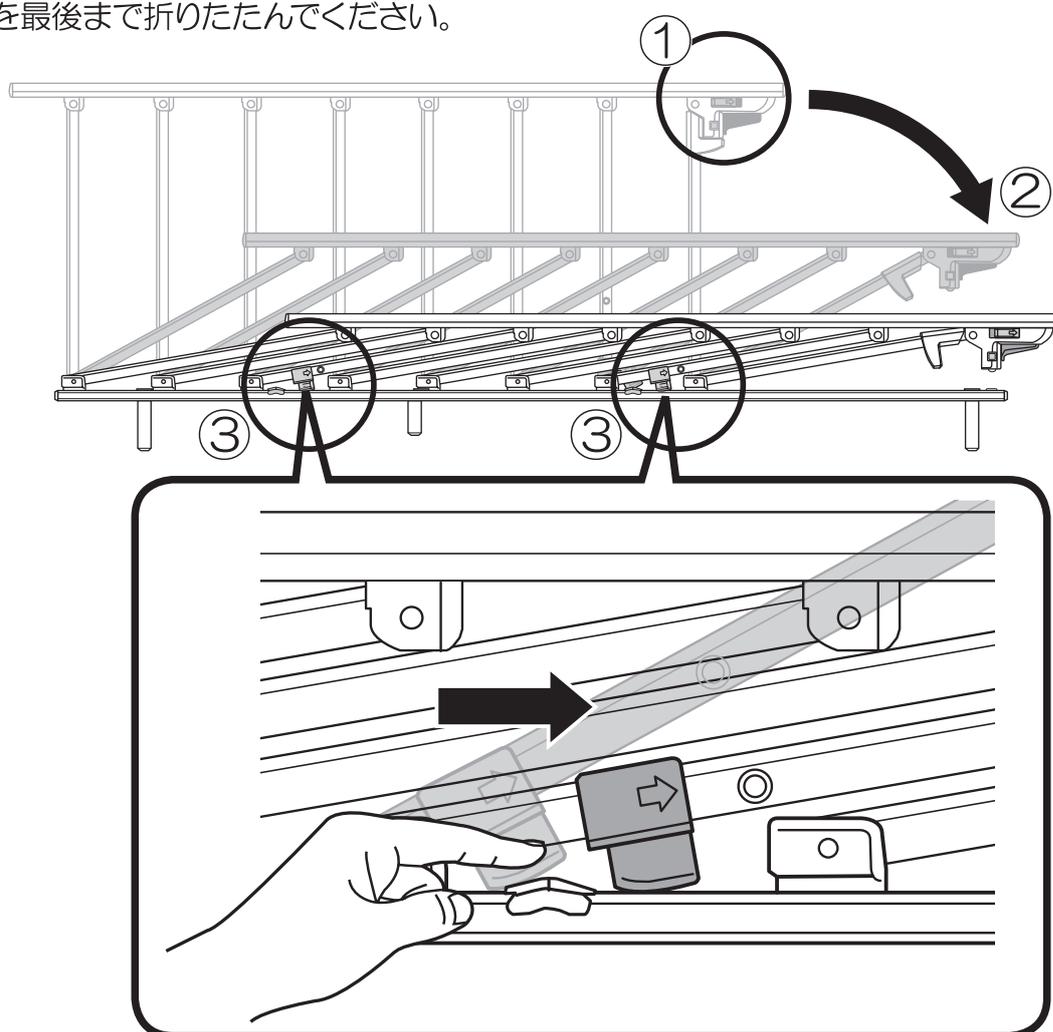

### サイドレールを上げるとき

- ①折りたたんだ状態から上部パイプを持ち上げると自動的に指はさみストッパーが自重で初期位置に戻ります。

## 商品の仕様

型 式	PS05-112
商 品 名	折りたたみサイドレール / ショートタイプ (1本入り)
寸 法	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>46.5 cm ※通常使用状態</p> <p>21.0 cm ※指はさみストップ パー作動時</p> <p>11.5 cm ※完全に折りた たんだとき</p> </div> </div>
梱包サイズ 梱包質量 (本体質量)	28.0 cm × 157.5 cm × 7.0 cm 6.0 kg (4.4 kg / 1set)
原 産 国	ベトナム

型 式	PS05-151
商 品 名	折りたたみサイドレール / ロングタイプ (1本入り)
寸 法	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p>46.5 cm ※通常使用状態</p> <p>21.0 cm ※指はさみストップ パー作動時</p> <p>11.5 cm ※完全に折りた たんだとき</p> </div> </div>
梱包サイズ 梱包質量 (本体質量)	28.0 cm × 197.5 cm × 7.0 cm 7.6 kg (5.6 kg / 1set)
原 産 国	ベトナム

## 商品の仕様

型 式	PS05-90
商 品 名	折りたたみサイドレール / セパレートタイプ (1本入り)
寸 法	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;"> <p>46.5 cm ※通常使用状態</p> <p>21.0 cm ※指はさみストップ パー作動時</p> <p>11.5 cm ※完全に折りた たんだとき</p> </div> </div>
梱包サイズ 梱包質量 (本体質量)	28.0 cm × 181.0 cm × 7.0 cm 6.3 kg (4.5 kg / 1set)
原 産 国	ベトナム

型 式	PS05-114
商 品 名	折りたたみサイドレール / セパレートタイプ 114 cm幅 (1本入り)
寸 法	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;"> <p>46.5 cm ※通常使用状態</p> <p>21.0 cm ※指はさみストップ パー作動時</p> <p>11.5 cm ※完全に折りた たんだとき</p> </div> </div>
梱包サイズ 梱包質量 (本体質量)	28.0 cm × 206.5 cm × 7.0 cm 7.2 kg (5.2 kg / 1set)
原 産 国	ベトナム

## お手入れ・点検

### ○お手入れ

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 清拭する場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って、残った洗剤を拭き取ってください。



最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。

※可動部に水や中性洗剤などを直接かけないでください。

故障の原因になります。


- ベンジン・シンナー・アセトン・磨き粉などは使用しないでください。塗装が剥がれたり、樹脂部品が破損する恐れがあります。
- シールが剥がれないようご注意ください。
- 消毒する場合は下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。



消毒用エタノール	76.9 ~ 81.4%
塩化ベンザルコニウム (オスバン)	0.05 ~ 0.2%
塩化ベンゼトニウム (ハイアミン)	0.05 ~ 0.2%
グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテン)	0.05%
次亜塩素酸ナトリウム (ミルトン)	0.02 ~ 0.05%

### ○点検

- 定期的に各部分のネジの締め具合を確認してください。
- 長期間使用や使用環境によっては、可動部より摩擦音が発生する場合がございます。点検の際には、右記の場所へ潤滑油を差してください。右記以外の箇所より摩擦音が発生している場合は、どの部分で音が発生しているかを確認し、その位置へ潤滑油を差してください。

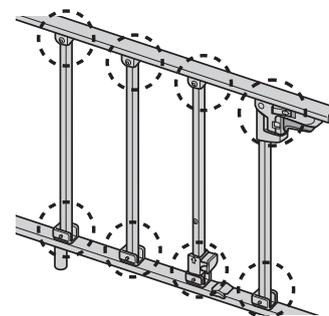

# 保証とアフターサービス ※よくお読みください。

## 保証書について

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、型式・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、お買い上げ時の送り状などを保管してください。

## 修理を依頼される時

### ●修理される前に


今一度この取扱説明書をよくお読みください。

それでも直らない場合は、お買い上げの販売店、またはフリーアクセスまでご連絡ください。

※修理・お取り扱い、お手入れのご相談は、お買い上げの販売店（裏表紙保証書記載）へご連絡ください。

### ●ご連絡いただきたい内容

- ①商品名および型式（表紙記載）
- ②お買い上げ日（裏表紙保証書記載）
- ③お買い上げの販売店（裏表紙保証書記載）
- ④故障内容（できるだけ詳しく）
- ⑤ご住所 / お名前 / お電話番号

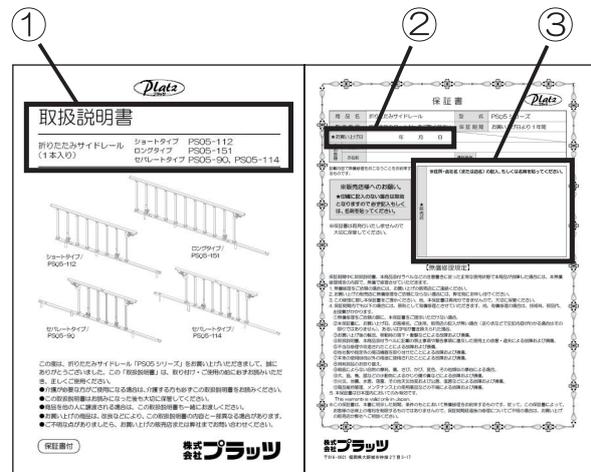

### ●保証期間について

保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。

### ●保証期間を過ぎている場合

修理および部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理いたします。

### ●修理代について

修理代は、部品料、基本出張費、技術料で構成されます。

【部品料】…修理で使用した部品代です。【基本出張料】…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生する費用です。【技術料】…商品の診断・故障箇所の修理などの作業にかかる費用です。



アフターサービスのお問い合わせ

0120-77-3433

平日 午前9時～午後5時30分（土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く）



# 保証書



商品名	折りたたみサイドレール	型式	PS05 シリーズ
製造番号	商品本体のロットNo.をご覧ください	保証期間	お買い上げ日より 1年間
★お買い上げ日	年 月 日		
★お客様	ご住所		
	お名前	電話番号	

記載内容で無償修理をおこなうことをお約束するものです。

**※販売店様へのお願い。**

**★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ず記入もしくは、名刺を貼ってください。**

※保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※住所・会社名（または店名）の記入、もしくは名刺を貼ってください。

★販売店

## 【無償修理規定】

保証期間中に取扱説明書、本商品添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で本商品が故障した場合には、本無償修理規定の内容で、無償で修理させていただきます。

1. 無償修理をご依頼の場合には、お買い上げの販売店にご連絡ください。
2. お買い上げの販売店に無償修理をご依頼にならない場合には、弊社宛にお申し付けください。
3. この修理に際し本保証書をご提示ください。尚、本保証書は再発行できませんので、大切に保管ください。
4. 保証期間内でも以下の場合には、原則として有償修理とさせていただきます。尚、有償修理の場合は、技術料、部品代、出張費がかかります。
  - ①無償修理をご依頼の際に、本保証書をご提示いただけない場合。
  - ②本保証書に、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店の記入が無い場合（送り状などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句が書き換えられた場合。
  - ③お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などによる故障および損傷。
  - ④取扱説明書、本商品添付ラベルに記載の禁止事項や警告事項に違反した使用上の故意・過失による故障および損傷。
  - ⑤不当な修理や改造されたことによる故障および損傷。
  - ⑥他社製や指定外の周辺機器を取り付けたことによる故障および損傷。
  - ⑦本来の使用目的以外の用途に使用されたことによる故障および損傷。
  - ⑧消耗部品のお取り替え。
  - ⑨瑕疵によらない自然の摩耗、傷、さび、かび、変色、その他類似の事由による場合。
  - ⑩犬、猫、鳥、鼠などの小動物によるかじり傷や糞などによる故障および損傷。
  - ⑪火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害などによる故障および損傷。
  - ⑫商品維持管理、メンテナンス上の使用薬品などの不備による故障および損傷。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店か弊社へご相談ください。