

取扱説明書

ガス圧式昇降ベッドテーブル

PZT-840



この度は、「ガス圧式昇降ベッドテーブル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この「取扱説明書」には、商品を安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- 介護が必要な方がご使用になる場合は、介護する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

〈保証書付〉

目次

ページ

■安全にご使用いただくために……………	2～3
■部品の確認……………	4
■主要部品の名称……………	5
■組み立て方法……………	5～6
■使用方法……………	7
■お手入れについて……………	8
■保証とアフターサービス……………	9
■商品の仕様……………	10

商品の特徴

- ワンタッチの昇降レバーで、テーブルの高さを変えることができます。
- テーブルの高さは 60 cm～ 84 cmまで、無段階に調整できます。
- キャスター付きなので、楽に移動できます。

安全にご使用いただくために（必ずお守りください）

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使い頂き、ご利用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしております。下記をよくお読み頂き、内容をよく理解してから正しくお使いください。



警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。



注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■絵表示の例



禁止

この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



この記号は、必ず守っていただきたい「注意喚起」の内容です。




警告



禁止

物を載せた状態で、操作をしないでください。


・怪我や破損の原因になります。

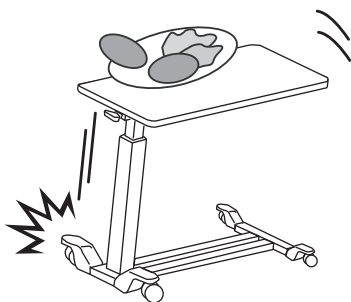

禁止

やかん・ポット類などの高温の物を置かないでください。


・破損や変形の原因になります。

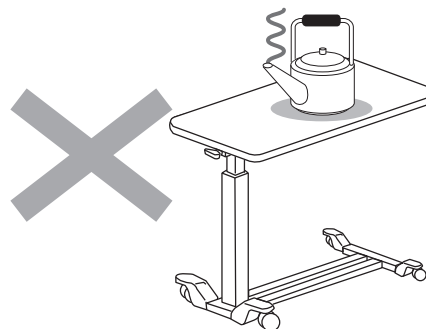

禁止

ベッドの操作時には、ベッドとテーブルの間に体をはさまないように注意してください。

・破損や事故の原因になります。

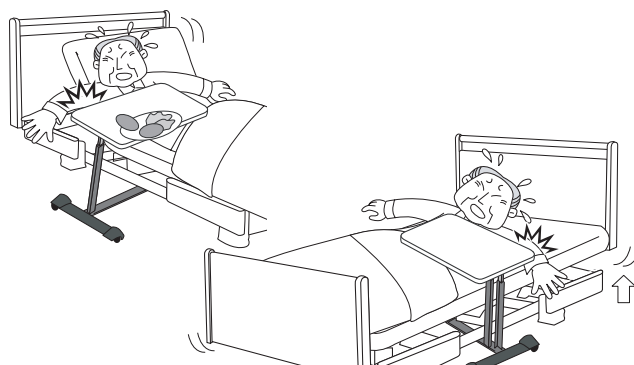


安全にご使用いただくために (必ずお守りください)

警告




禁止

テーブルに寄りかかったり、腰かけたりしないでください。
• 怪我や事故、破損の原因になります。

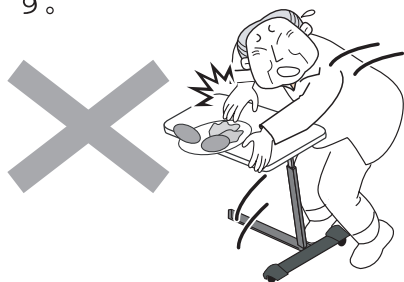

禁止


テーブルを支えにして歩かないでください。
• 怪我や事故、破損の原因になります。

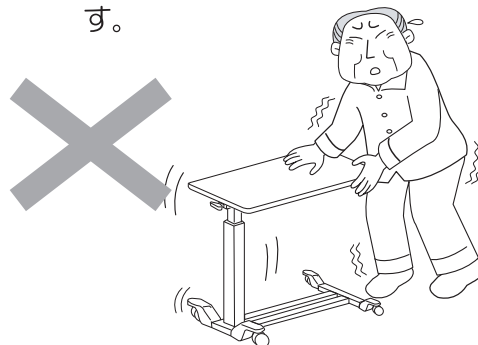

注意




ご使用前には、甲板がしっかり固定されているか確認してください。
• 不完全な固定のまま使用すると、事故の原因になります。

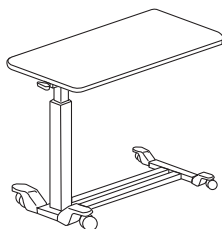


禁止

ストーブなどの火気類をテーブルに近づけ過ぎないでください。
• 変形や火災の原因になります。

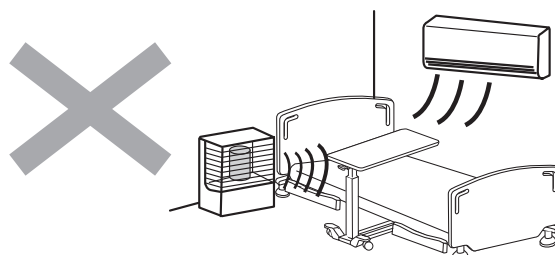


禁止

分解・改造はしないでください。
• 破損や事故の原因になります。

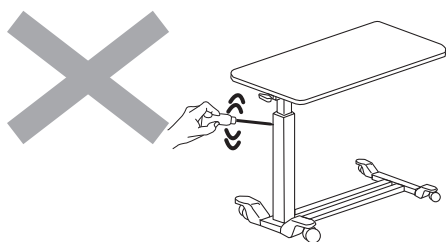


耐荷重 (10 kg) を必ず守ってください。
• 耐荷重以上の物を載せて使用すると、破損や事故の原因になります。

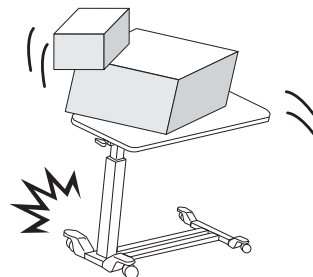


部品の確認

- 開梱した時点で、下記の部品が全て同梱されているか、また、破損していないか確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社までご連絡ください。


ベースフレーム

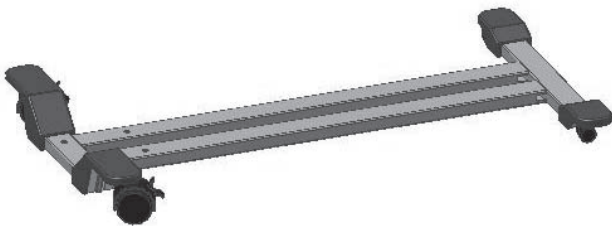

支柱

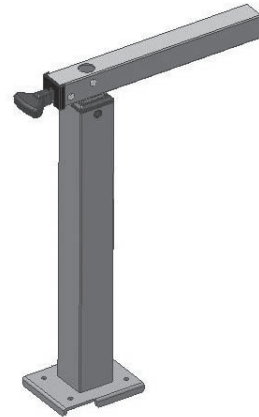

甲板

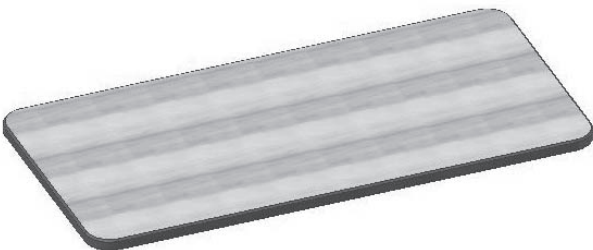


取扱説明書




◇取扱説明書(本書): 1冊

組み立て用部品


◇六角レンチ
(5mm) 1本

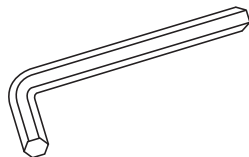

◇六角穴付きボルト
(M6×10) 6本

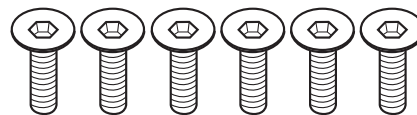

主要部品の名称

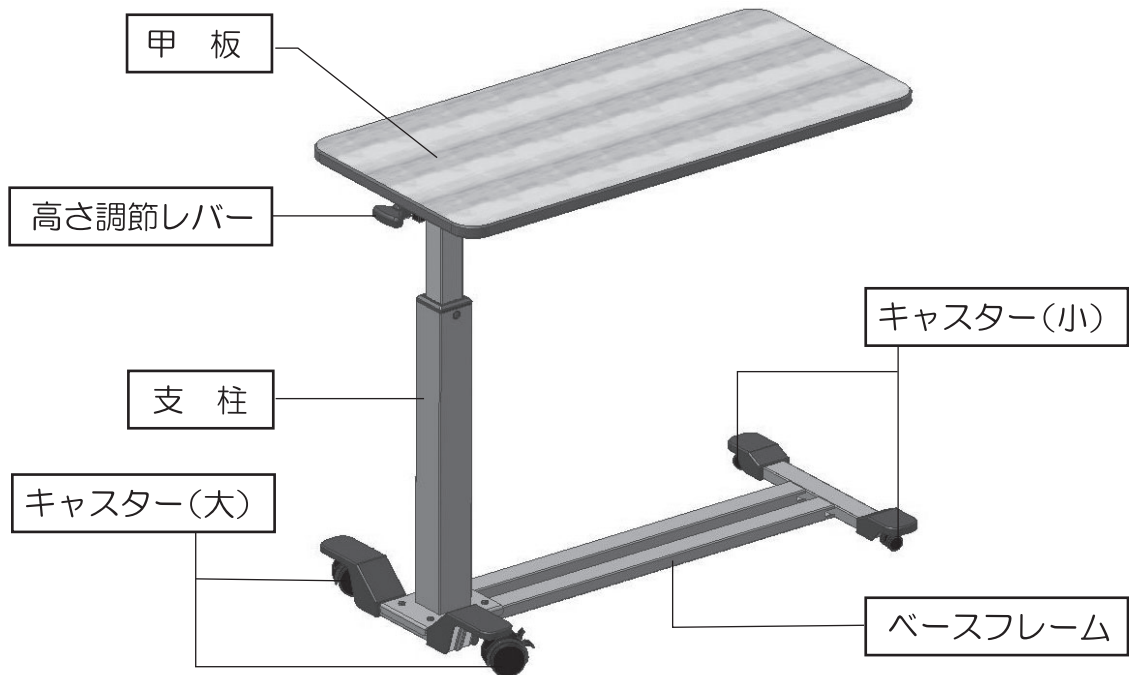

組み立て方法



注意

組み立ての際に、床を傷つけない様に保護シート等を敷いて行ってください

1

支柱の取り付け

支柱をベースフレームにのせ、六角穴付きボルト (M6×10) で4箇所をしっかりと締めてください。




組み立て方法

2


甲板の取り付け

甲板を裏返し、支柱を甲板の金属部分に挿入し、六角穴付きボルト(M6×10)で2箇所をしっかりと締めてください。

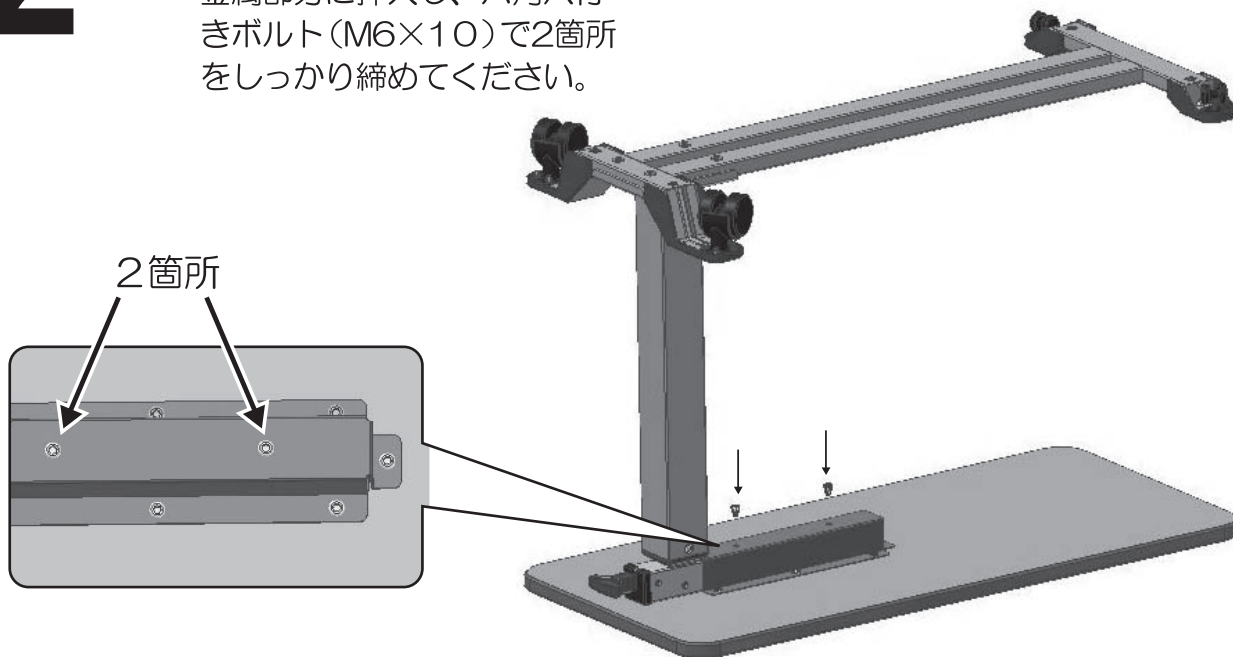

3

使用時には甲板を上にして置き、キャスターのストッパーをフリーにして使用される場所に移動してください。
使用される場所で、キャスター(大)2個のストッパーをロックします。
※キャスター(小)には、ストッパーは付いていません。

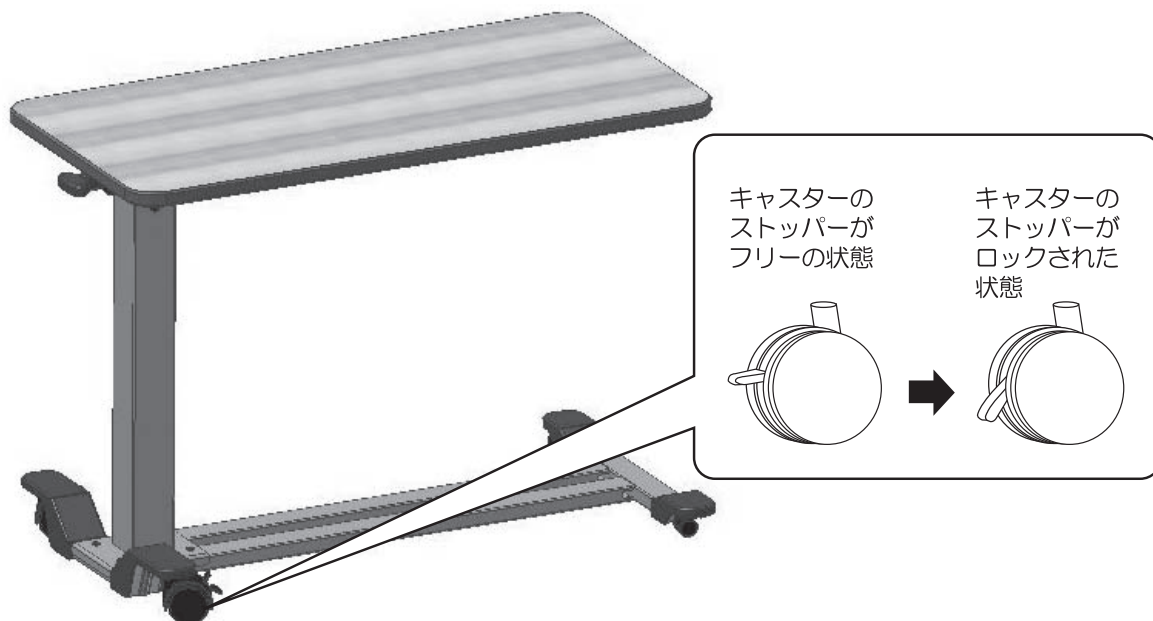


使用方法

※物を載せた状態で、テーブルの上げ/下げをしないでください。


テーブルの上げ方

高さ調節レバーを上へ上げながら、甲板を軽く引き上げます。
任意の位置で、レバーから手を離してください。

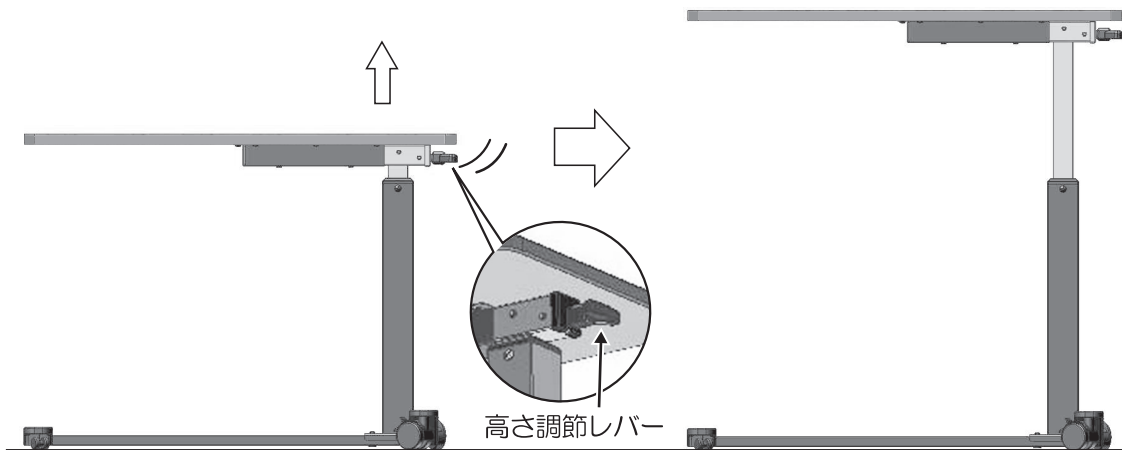

テーブルの下げ方

片手を甲板の上に軽く置き、もう片方の手でレバーを上へ上げ、
甲板を下へ押し下げます。
任意の位置で、レバーから手を離してください。

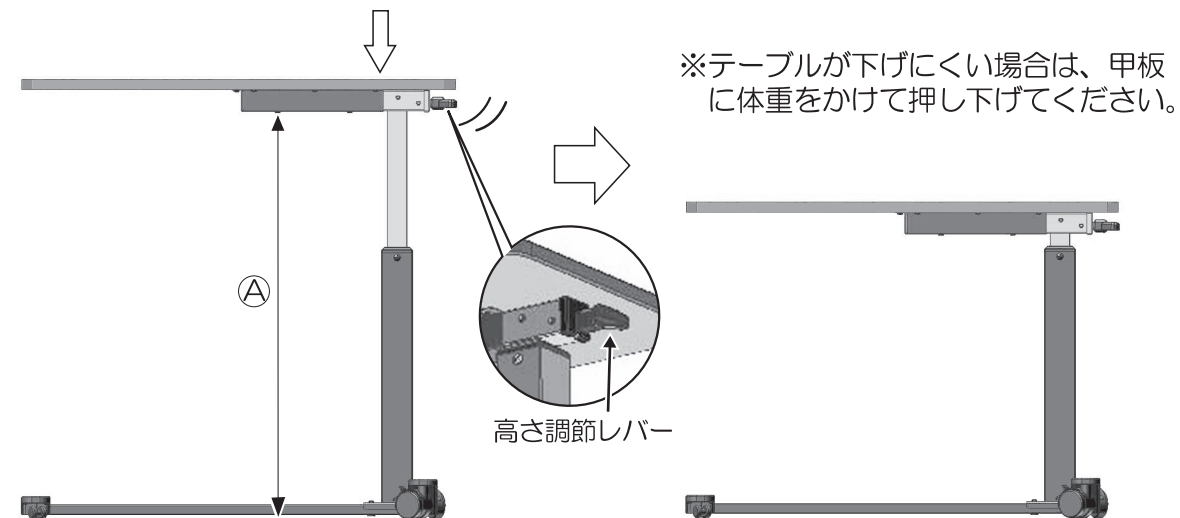

テーブルの高さⒶは最高位置で約765 mmです(P10 参照)。ベッドにレール類を挿した状態で
使用すると、テーブルの甲板裏の支柱がレール類に当たる場合があります。
テーブル甲板裏の支柱とレール類が当たらないか確認してください。



警告

ご使用になる前に、甲板がぐらついたり、上下に動かないことを確認してください。
不安定な状態で使用されますと破損や事故、怪我の原因になります。

お手入れについて

○お手入れ

- 商品が汚れた場合は、石鹼水や中性洗剤を少し含ませた水を湿らせた布で拭いてください。



- 商品の水でぬらしたり、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤などで磨いたりしないでください。殺虫剤をかけたりしないでください。ひび割れの危険があります。



○点検

- 各部分のボルトの締め具合を確認し、常に硬く締めてください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

- サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読みください。
それでも異常がある場合は、お買い上げの販売店か下記フリーアクセスまでご連絡ください。


 **0120-77-3433**
フリーアクセス
携帯・PHS・OK
《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

ご連絡いただきたい内容

- ・商品名及び型式
- ・故障内容(出来るだけ詳しく)
- ・ご住所/お名前/お電話番号
- ・お買い上げ日
- ・お買い上げの販売店

商品名

型式



プラッツ

保証書

お買い上げ日/販売店/お名前を必ず記入し、保証書の内容をよくお読みになって大切に保管してください。(※保証書の再発行は致しません。)

保証期間について

保証期間はお買い上げ日から1年間です。
保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理致します。但し、保証期間内でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。

保証期間を 過ぎている場合

修理及び部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理致します。

修理代について

修理代は、部品代、出張費、技術料で構成されます。

- 部品代…修理で使用した部品代です。
- 出張費…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生する費用です。
- 技術料…商品の診断・故障箇所の修理等の作業にかかる費用です。

※注：お買い上げ時の送り状等を保管いただくことをおすすめします

プラッツネットワーク

■本 社	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目3-17	TEL:092-584-3434
■関東支店	〒105-0014 東京都港区芝2丁目16-9	TEL:03-5427-8033
■東海支店	〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社 3丁目108	TEL:052-704-2700
■関西支店	〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4-2F	TEL:06-6233-2105
■九州支店	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目3-17 (本社内)	TEL:092-584-3433
●東北営業所	〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29	TEL:022-781-7072
●中四国営業所	〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6	TEL:084-946-6000
●北海道営業所	〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102	TEL:011-807-4750

商品の仕様

型 式	PZT-840	
商品名	ガス圧式昇降ベッドテーブル	
テーブル寸法	 <p>(単位 : mm)</p>	
梱包サイズ 梱包質量 (本体質量)	910×510×160	18.5kg(15.5kg)
材質	ベースフレーム部 : スチール 木部 : 合成樹脂(メラミン)化粧繊維板(MDF)	
耐荷重	10kg	
原産国	ベトナム	

