

人感センサー付フットライト(5V仕様)


PL01-5Vシリーズ

P110(ラフィオ)シリーズに取り付ける場合


ベッドへの 取り付けの前に

- ①ご利用様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします
- ②高さを上げ、ベッドの電源プラグを抜きます
- ③ひざ脚ボトムを取り外します


- 1** フットフレーム下図位置の電源部の電源コードを変換アダプター付電源コードに入れ換えます。

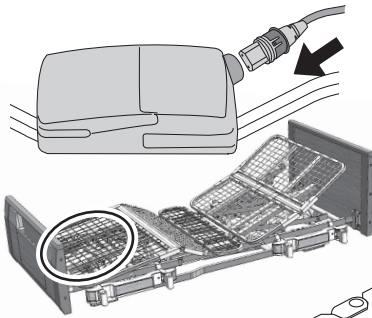


- 2** 変換アダプターの差込穴を下向きにしてパイプに取り付けます。

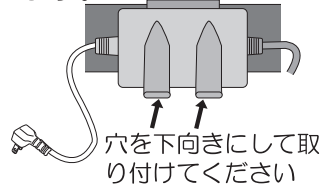

この場所に取り付けてください

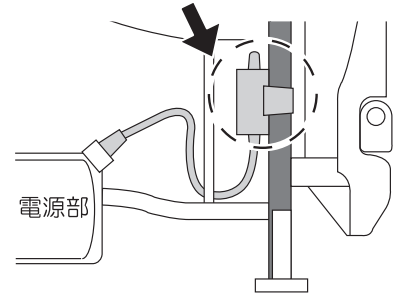


- 3** ③のケーブルプラグのC型クリップを電源部の黒いコードクリップに取り付けてください

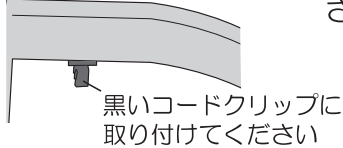

- 5** 右図を参照し①から順にフットライトのケーブルを取り回して本体を取り付けてください
ベッド左右どちらにも取り付けることができます
反対側も、同じように取り回して本体を取り付けてください


コードクリップの取り付け

コードクリップに「C型クリップ」を重ねて図の様に取付けてください

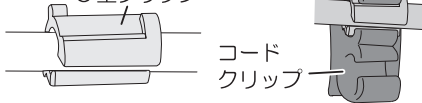

- 4** 黒いコードクリップに取り付けてください


この場所に取り付けてください

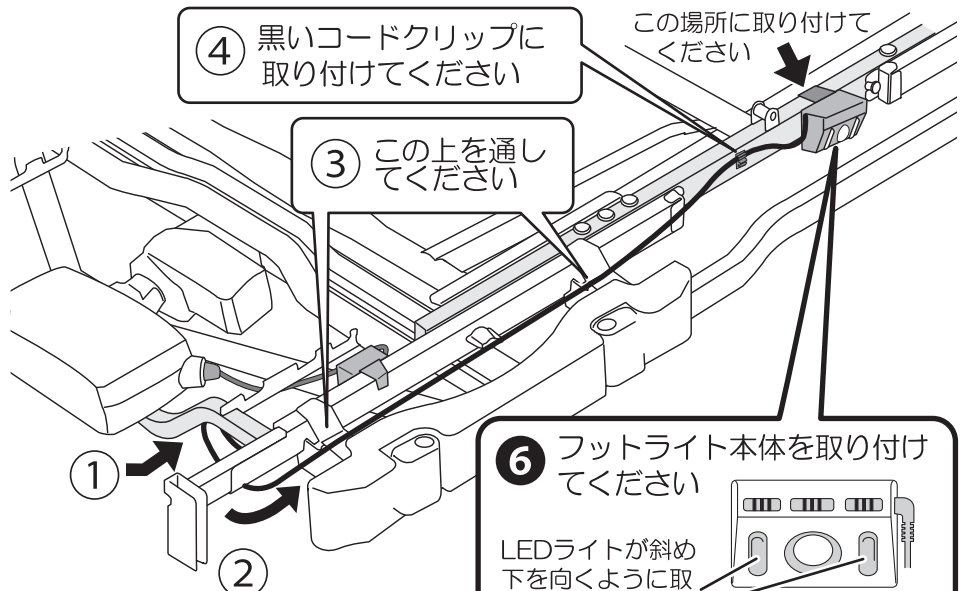

- 3** この上を通してください


- 6** フットライト本体を取り付けてください

LEDライトが斜め下を向くように取付けてください

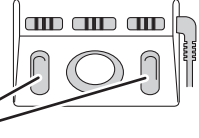

変換アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

※電源を入れてから約 15 秒間はウォーミングアップのため、すべてのスイッチが動きません。

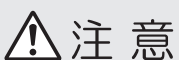

注意

ベッド操作時にコードが駆動部に巻き込まれないように注意して、コードの配線をしてください。
フットライトケーブルの余りについては束ねる等の対応をお願い致します。