

人感センサー付フットライト(5V仕様)


PL01-5Vシリーズ

P300(医療・施設用電動ベッド)シリーズに取り付ける場合

ベッドへの 取り付けの前に

- ①ご利用者様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします
- ②高さを上げ、ベッドの電源プラグを抜きます
- ③ひざ脚ボトムを取り外します


- ①** センターフレーム下図位置の電源部の電源コードを変換アダプター付電源コードに入れ換えます。

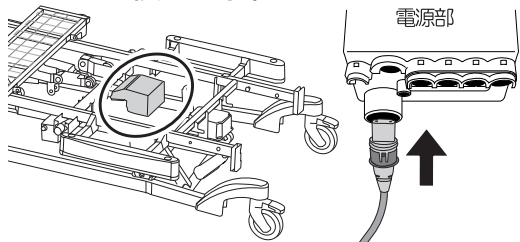

- ②** 変換アダプターの差込穴を下向きにして下記の場所に取り付けます。




下図を参照し①から順にフットライトのケーブルを取り回して腰ボトムの下に本体を取り付けてください。

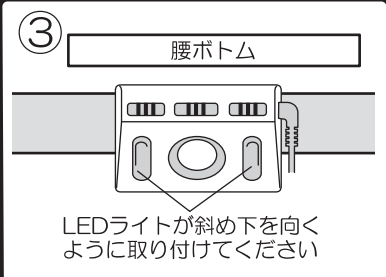


余ったケーブルはビニールタイでまとめてください

- ③** 防水キャップを開け、フットライトのピンプラグを変換アダプターにし込んでください


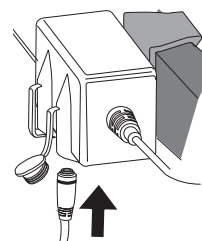


ベッド左右どちらにも取り付けることができます。反対側に取り付ける場合は①から③は共通です。下図を参照してケーブルをとり回し、腰ボトムの下に本体を取り付けてください。

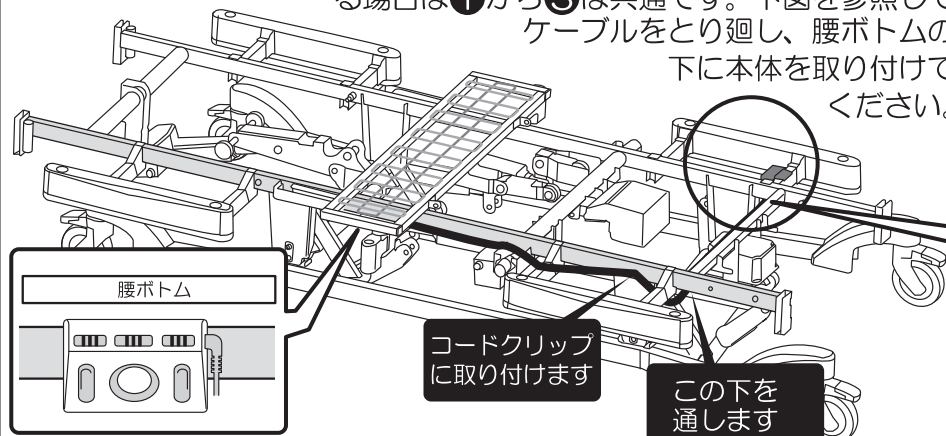


コードクリップの取り付け

コードクリップに「C型クリップ」を重ねて図の様に取り付けてください

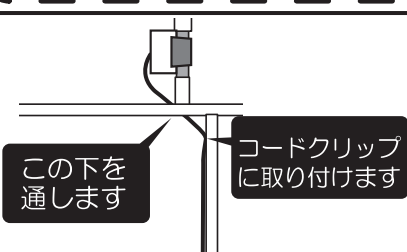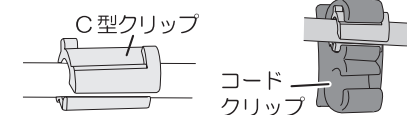

変換アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

※電源を入れてから約 15 秒間はウォーミングアップのため、すべてのスイッチが動きません。

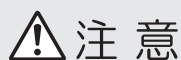

注意

ベッド操作時にコードが駆動部に巻き込まれないように注意して、コードの配線をしてください。フットライトケーブルの余りについては束ねる等の対応をお願い致します。