

人感センサー付フットライト(5V仕様)


PL01-5Vシリーズ

P106(ミオレットⅡ)シリーズに取り付ける場合


ベッドへの取り付けの前に

- ①ご利用者様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします
- ②ベッドの電源プラグを抜きます

- ① センターフレーム下図位置の電源部の電源コードを変換アダプター付電源コードに入れ換えます。

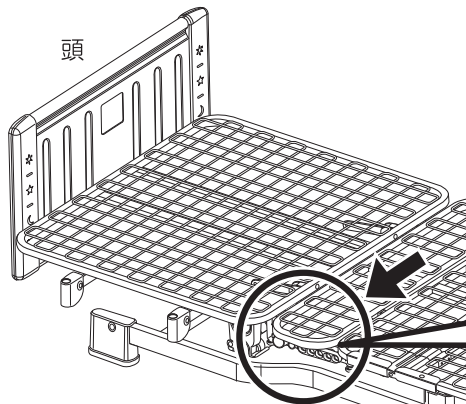


- ①ここをボールペンなどで押しながら電源コードを抜きます

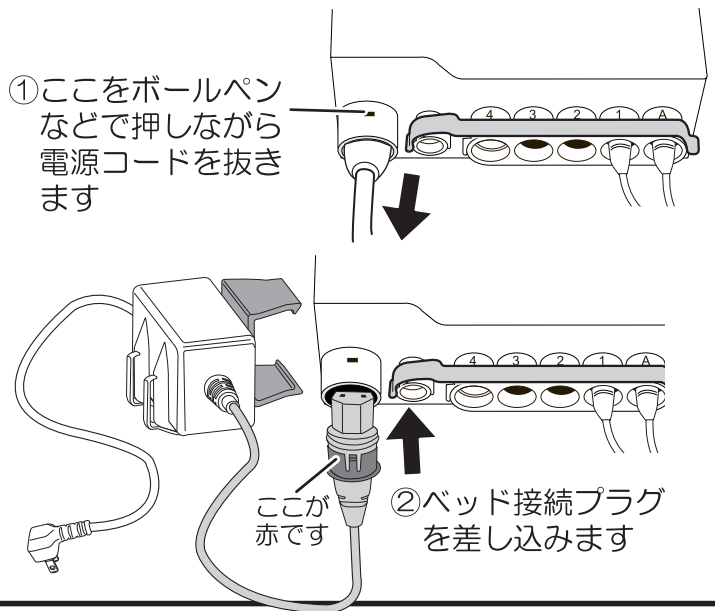


- ②ベッド接続プラグを差し込みます

- ② 変換アダプター付電源コードを右図①の位置に取り付けます。フットライトは②・③、どちら側にも取り付ける事ができます。

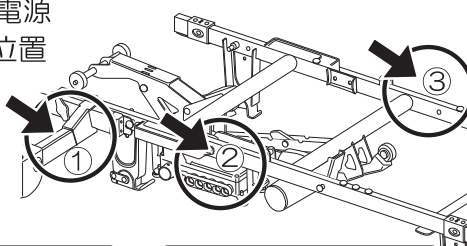

このパイプに変換アダプター付電源コードを取り付けます

このパイプにフットライト本体を取り付けます

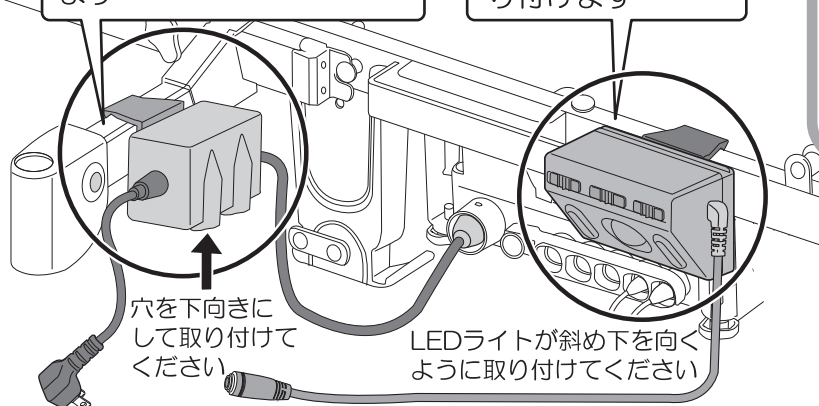


穴を下向きにして取り付けてください

LEDライトが斜め下を向くように取り付けてください

変換アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。
※電源を入れてから約15秒間はウォーミングアップのため、すべてのスイッチが動きません。


コードの取り廻し

下記位置にコードクリップがあります。電源部と反対位置にフットライトを取り付ける場合など、必要に応じてコードをコードクリップに通してください

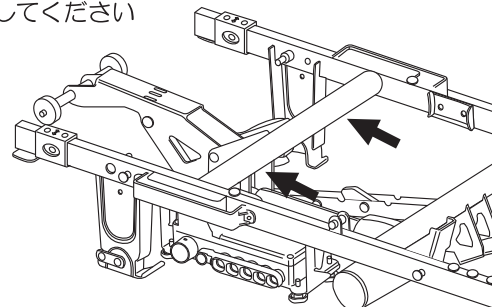

コードクリップの取り付け

コードクリップに「C型クリップ」を重ねて図のように取り付けてください

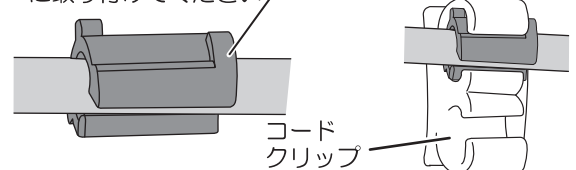

コードクリップ



注意

ベッド操作時にコードが駆動部に巻き込まれないように注意して、コードの配線をしてください。フットライトケーブルの余りについては束ねる等の対応をお願い致します。