


# 人感センサー付フットライト(29V仕様)

PL01-29V


この度は、人感センサー付フットライト(29V仕様)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。


- ●この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- ●本商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ●ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた販売店または、弊社まで お問合せください。

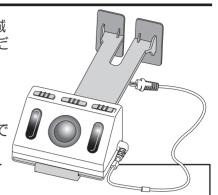

## 使用目的•特徵

- ●本商品は、ベッドに取り付け、人の動きを感知してライトを点灯します。
- ●ベッドにおける起居動作やベッドまわりの動線の把握など、暗所での活動の安全を確保します。
- ●点灯が早く、寿命が長い LED ライトを使用しています。
- ●ベッド駆動部の電源を使用するため、別にコンセントが必要ありません。

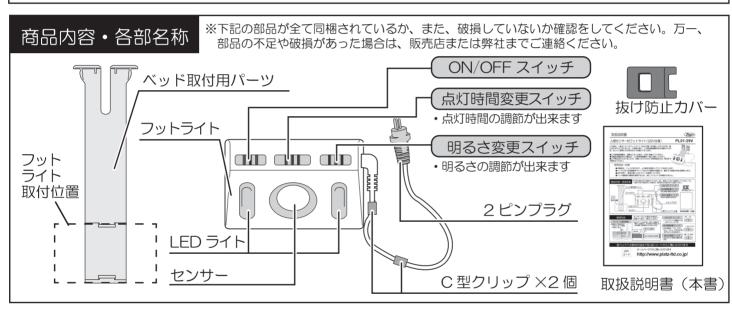

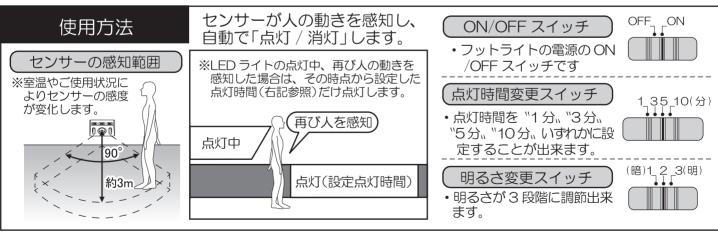

# 各ベッドへの取付方法は下記 QR コードからご覧いただけます



※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

ホームページでもご覧いただけます

http://www.platz-ltd.co.jp/support/manual/index-jinkan.html

#### 安全にご使用いただくために (必ずお守りください)

この取扱説明書では、本商品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や他の方への危害や財産への阻害を未然 に防止するために、いろいろな絵表示をしております。次の内容をよくご理解の上、正しくお使いください

↑注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■絵表示の例



この記号は、してはいけない 「禁止」の内容です。



この記号は、必ず守っていただ きたい「注意喚起」の内容です。

## <u>/ 注</u> 意




分解や改造は絶対にしないでください。

●火災や事故の原因となります。



商品を水に浸けないでください。

●本体は防水加工ですが、プラグは水気厳禁 です。火災や感電の原因となります。

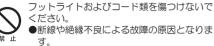



部品が破損した場合、破損したまま使用しな いでください。


●怪我や故障の原因となります。



ださい。

さい。

操作時にコードがベッドの駆動部に巻き込まれ ないよう注意して取り付けてください。

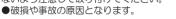


ベッド下部の掃除やサイドテーブルをご利用 の際は、本商品を傷つけないようご注意くだ

●破損や故障の原因となります。



LED ライトを長時間直視しないでください。 ●目が眩んだり、目を傷つける恐れがありま

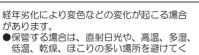



布や紙など燃えやすいものをかぶせないでく ださい。



●火災や感電の原因となります。



専用の電源以外では使用しないでください。 ●火災や故障の原因となります。



ぬれた手でプラグの取り付け、取り外しをし



ないでください。 ●感電する恐れがあります。

### ウォーミングアップについて

電源を入れてから安定作動するまでに約 15 秒間かか ります。その間は、すべてのスイッチが働きません。

### お手入れについて



お手入れの際は、必ず電源を切ってから作業を してください。

○お手入れ

・乾いた柔らかい布で拭いてください。清拭する場合は 柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよ ※5かい中を使用し、水で海のに中性洗剤に浸してよく絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。
・ベンジン・シンナー・アセトン・磨き粉・殺虫剤等をかけたりしないでください。
※印刷部の剥がれにご注意ください。

/<del>/</del> + + 关

1上作家		
商品名	人感センサー付フットライト(29V仕様)	
型 式	PL01-29V	
サイズ	9.0×6.0×5.0cm (コード長さ:1.4m)	
質 量	200	g
入力電圧	DC2	9V
防水性	生活	防水レベル(プラグは除く)
材質		PC, PA
対応ベッド機種		P201(ケアレット)シリーズ
定格消費電力		2.1W
照度/明るさの表示		[1] 40lm [2] 80lm [3] 120lm
使用周囲温度範囲		-10°C~+50°C
原 産	玉	中国