

人感センサー付フットライト(29V仕様)


PL01-29Vシリーズ

P201-1K<電動ヘッドレスト付1モーターベッド>に取り付ける場合


ベッドへの 取り付けの前に

- ①ご利用様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします
- ②ベッドの電源プラグを抜きます ※2人以上で取り付けを行ってください


- 1 ベースフレーム下図位置のフットライト用電源(「LIGHT」のタグが付いています)にフットライトの2ピンプラグを差し込み抜け防止カバーを取り付けます。

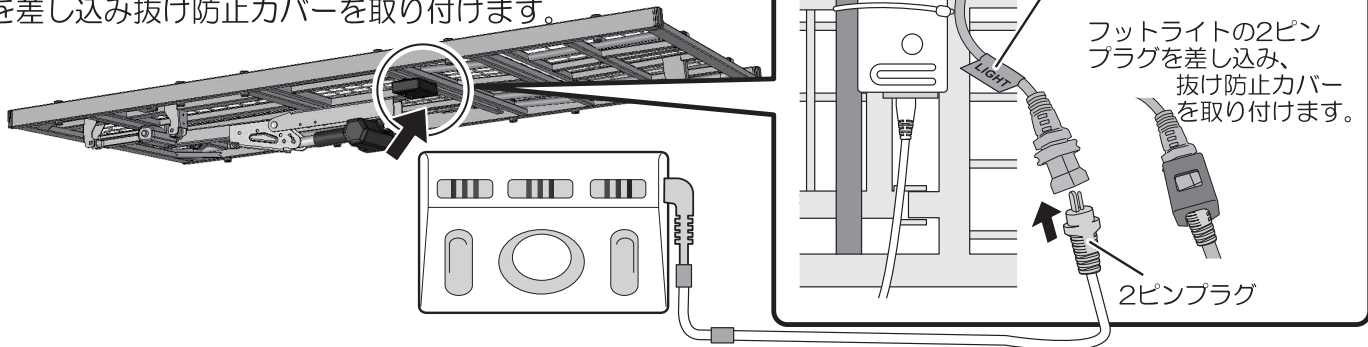

- 2 ベースフレームにベッド取付用パーツを取り付けます。腰ボトムの「左右から1段目または2段目」のネットの間に取付用パーツを差し込み、上から押さえて取り付けます。

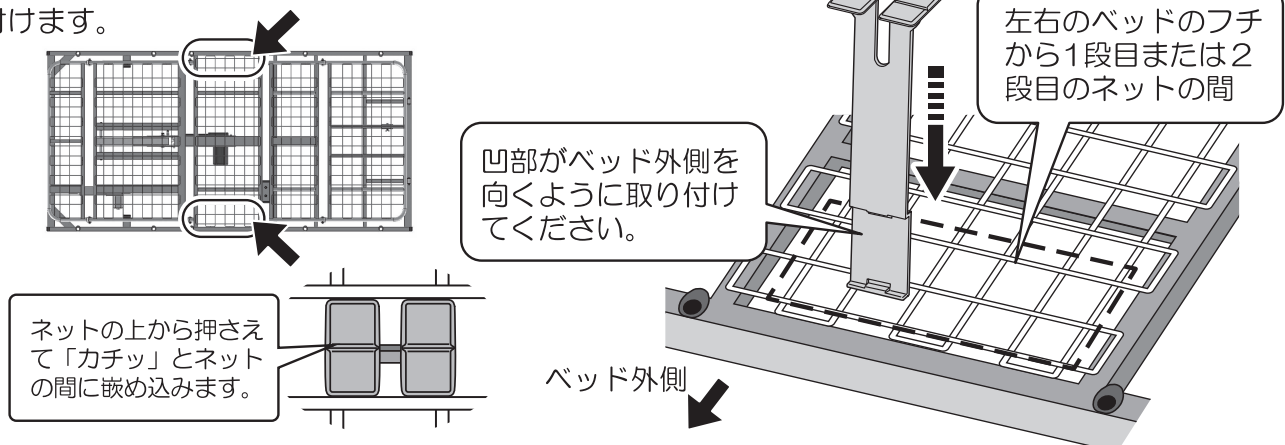


- 3 ベッド取付用パーツのツメ部に、フットライト上部の溝部を「カチッ」という音がする位置までスライドさせて取り付けます。

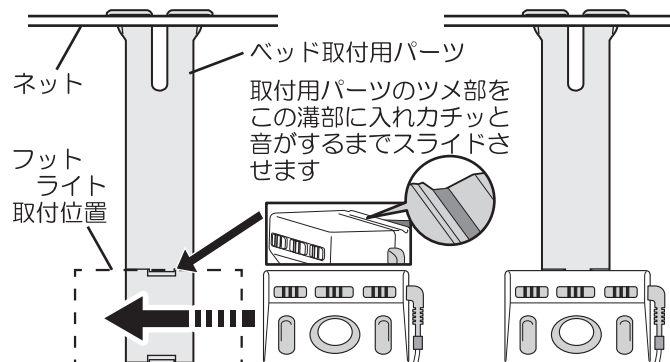

- ・ベッドの電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ※電源を入れてから約15秒間はウォーミングアップのため、すべてのスイッチが動きません。



注意 ベッド操作時にコードが駆動部に巻き込まれないように注意してコードの配線をしてください。

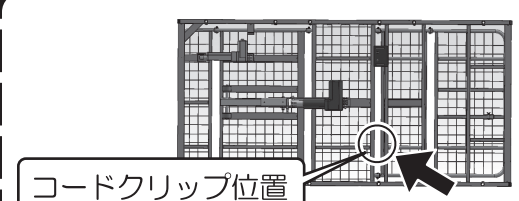

必要に応じて、上部コードクリップにコードを取り付けてください。取り付け方は下記を参照してください。

コードクリップの取り付け

コードクリップに「C型クリップ」を重ねて図の様に付けてください

