


人感センサー付フットライト(29V仕様)

PL01-29Vシリーズ


P201-5K<電動ヘッドレスト付1+1 モーターベッド>に取り付ける場合

ベースフレームを取り外してから取り付け作業をおこなってください。ベースフレームの取り外し・取り付けは2人以上でおこなってください。


- 1** ベースフレーム下図位置にフットライトの2ピンプラグを差し込みます。抜け防止カバーは不要です。

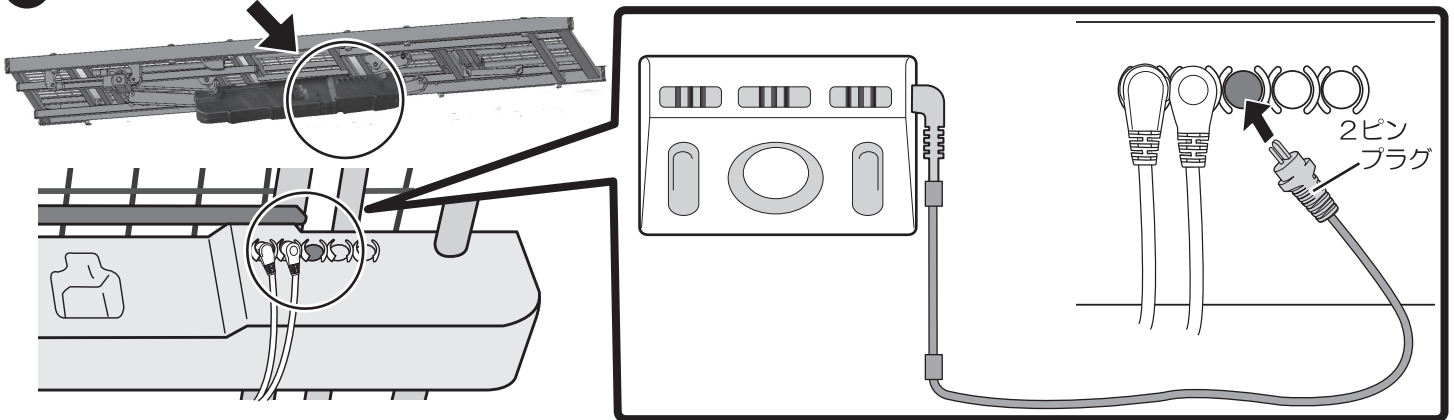

- 2** ベースフレームにベッド取付用パーツを取り付けます。腰ボトムの「左右から1段目または2段目」のネットの間に取付用パーツを差し込み、上から押さえて取り付けます。

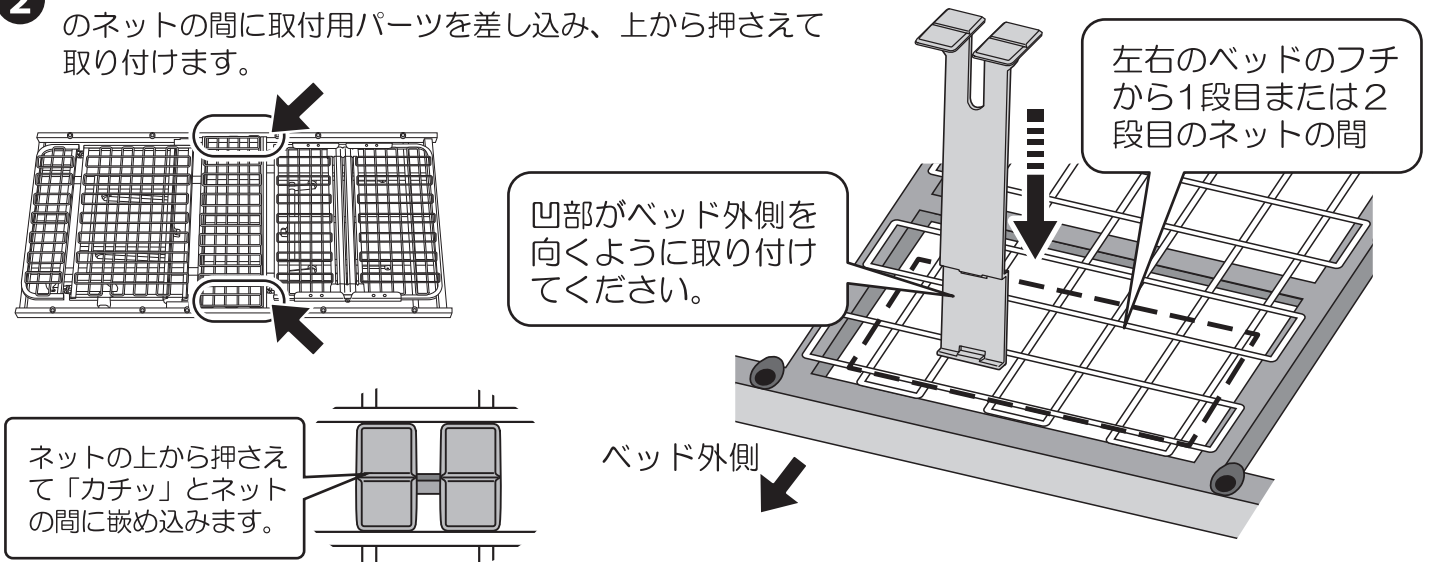



- 3** ベッド取付用パーツのツメ部に、フットライト上部の溝部を「カチッ」という音がする位置までスライドさせて取り付けます。

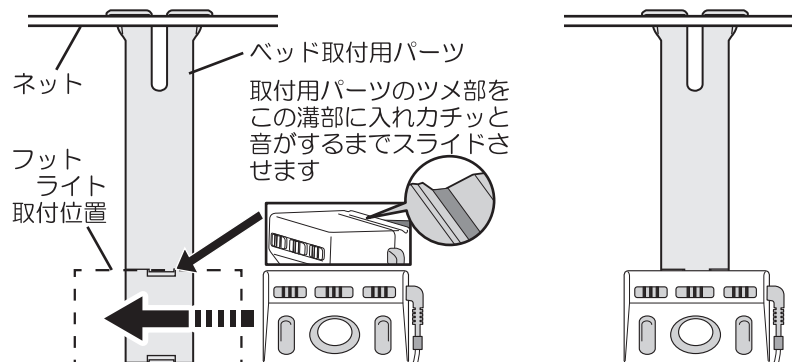

- 4 下記①と②の位置にコードクリップがあります。フットライトのコードがベッドの動作や、ベッド下のお掃除などの際にじゃまにならない様に、必要に応じてコードをコードクリップに通してください。

コードクリップの取り付け

コードクリップに「C型クリップ」を重ねて図の様に取付けてください

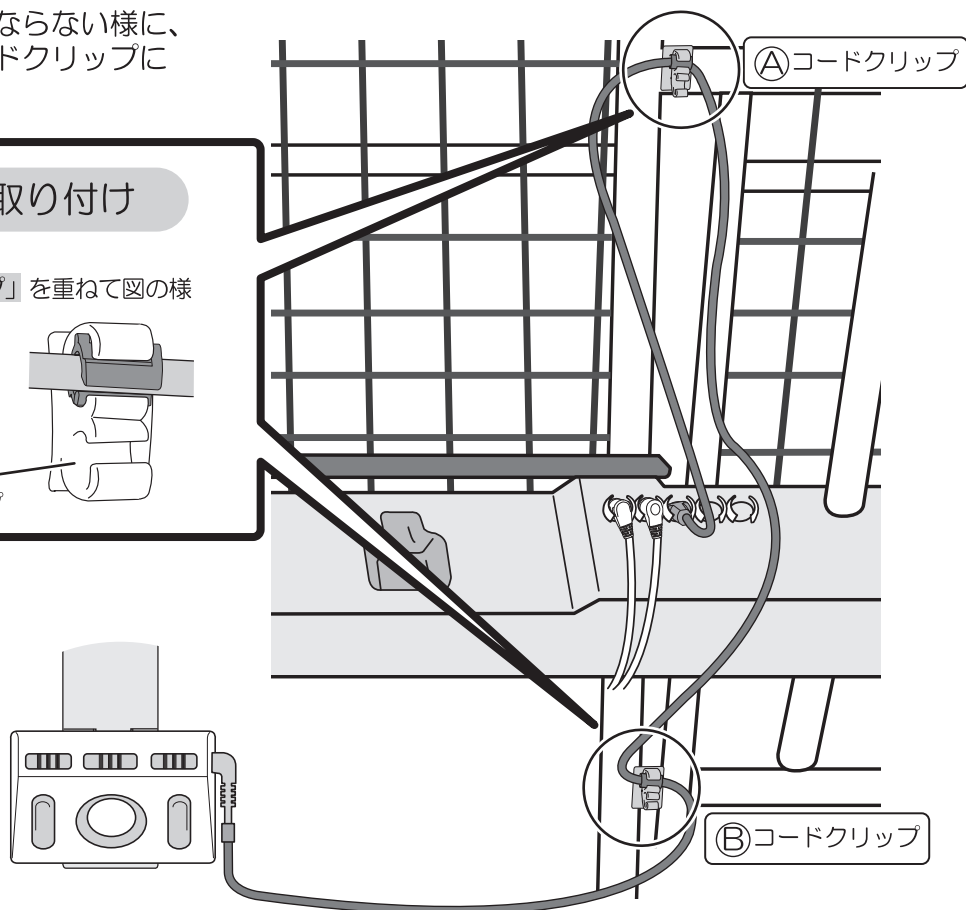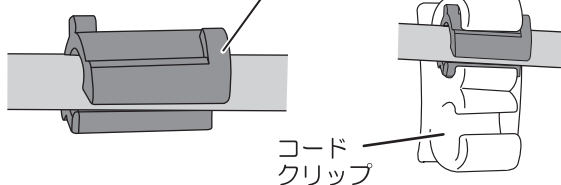

- ベッドの電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ※電源を入れてから約15秒間はウォーミングアップのため、すべてのスイッチが動きません。



注意

ベッド操作時に駆動部に巻き込まれないように注意してコードの配線をしてください。