

人感センサー付フットライト (5V仕様)



PL02-5VL

P113(ミオレットⅢ)シリーズに取り付ける場合

ベッドへの 取り付けの前に



- ①ご利用様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします
- ②高さを上げ、ベッドの電源プラグを抜きます
- ③ひざ脚ボトムを取り外します

- 1** フットフレーム下図位置の電源部の電源コードを変換アダプター付電源コードに入れ換えます。

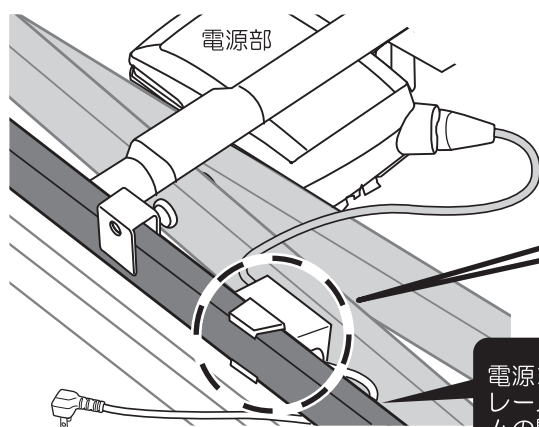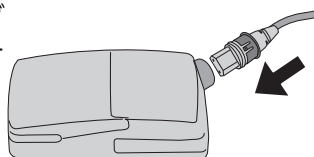

電源コードは、ベースフレームとセンターフレームの間を通してください


- 2** 変換アダプターの差込穴を下向きにしてパイプに取り付けます。

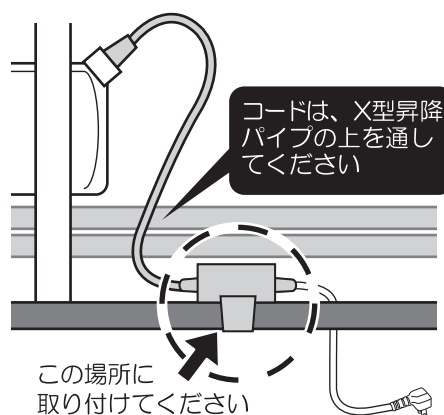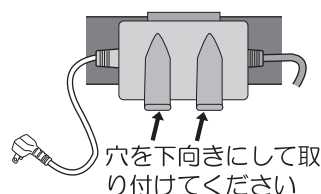


コードは、X型昇降パイプの上を通してください

この場所に取り付けてください

- 3** 防水キャップを開け、フットライトのピンプラグを変換アダプターに差し込んでください。

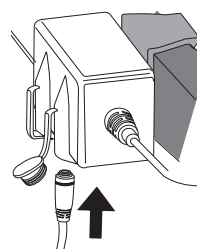


- 4** センターフレームの下図の位置にフットライトを取り付けます。 ※センターフレームの反対側にも取り付けすることができます。

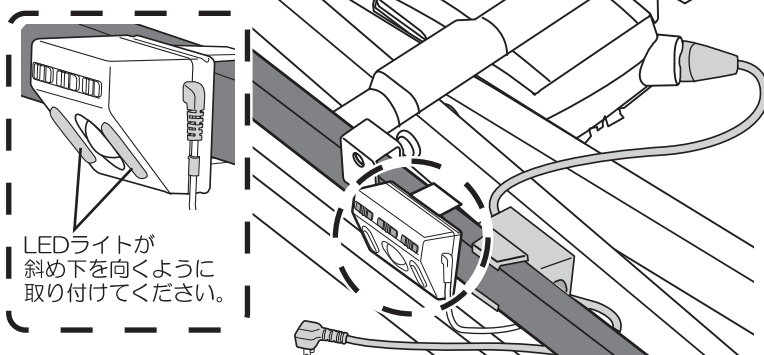

LEDライトが斜め下を向くように取り付けてください。


必要に応じてコードをコードクリップに通してください

コードクリップに「C型クリップ」を重ねて図の様に付けてください。

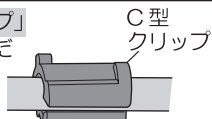

コードクリップ

電源コード・フットライトを反対側に取り廻す場合

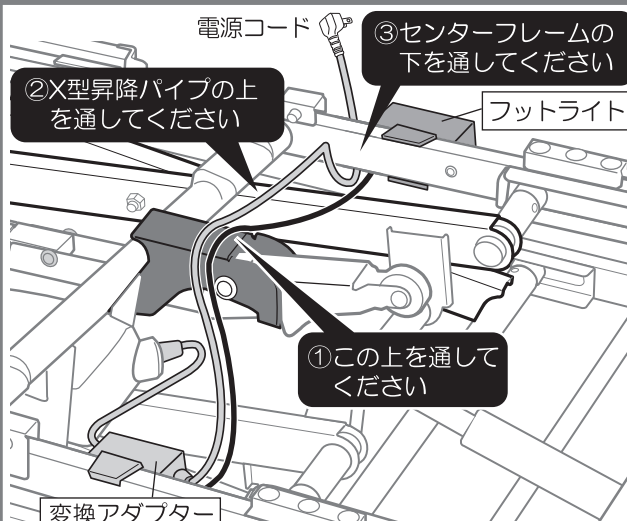

電源コード

②X型昇降パイプの上を通してください

③センターフレームの下を通してください

フットライト

①この上を通してください

変換アダプター

変換アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

※電源を入れてから約 15 秒間はウォーミングアップのため、すべてのスイッチが動きません。



注意

ベッド操作時にコードが駆動部に巻き込まれないように注意して、コードの配線をしてください。フットライトケーブルの余りについては束ねる等の対応をお願い致します。