


ベッドへの 取り付けの前に

- ①ご利用様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします
- ②高さを上げ、ひざ脚ボトムを取り外します
- ③ベッドの電源プラグを抜きます


- 1** センターフレーム下図位置に変換アダプター付電源コードを取り付けます。

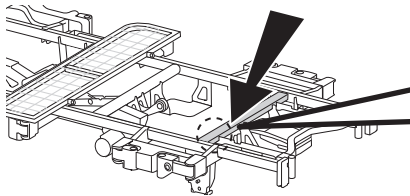


このパイプに「カチッ」と
嵌め込みます。

変換アダプター
付電源コード


プラグ取り付け穴を
頭側に向けて取り
付けてください

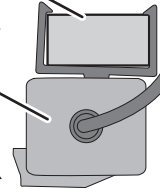

パイプに嵌め込んだ後
矢印位置まで移動
させます

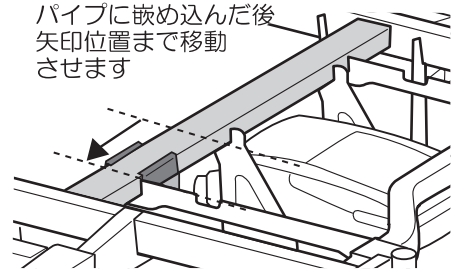


- 2** 電源部の電源コードを抜き、変換アダプター付電源コードを挿し込んでください。

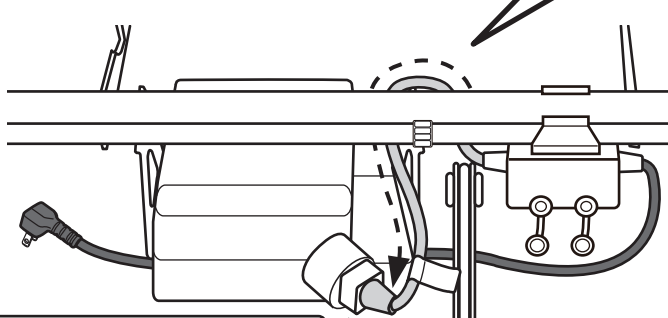

①電源部に挿し込みます。


〈上から見た図〉

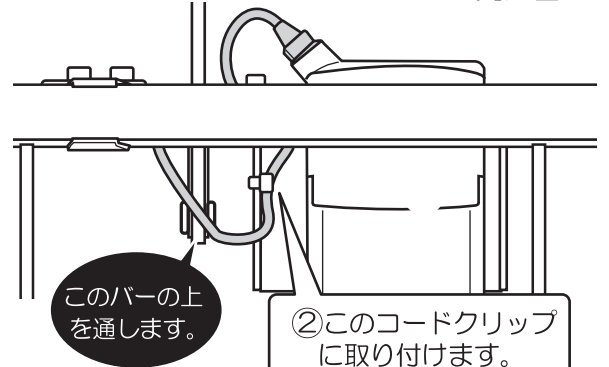

このバーの上
を通します。

②このコードクリップ
に取り付けます。

- 3** 図を参照し③から順にフットライトのケーブルを取り廻してください。

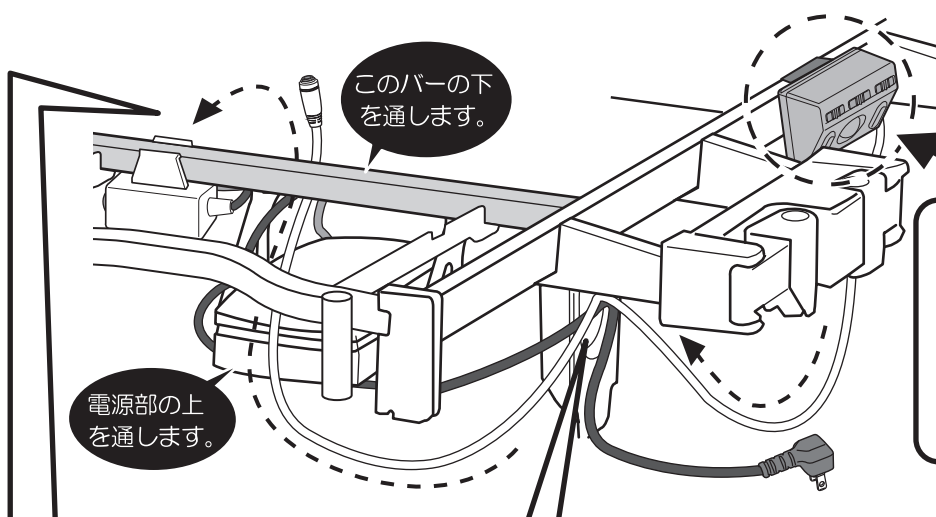


このバーの下
を通します。

電源部の上
を通します。


この場所に取り付けて
ください

- ③フットライト本体を取り付けて
ください。


LEDライトが斜め
下を向くように取
り付けてください。

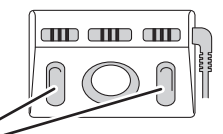

- ⑤フットライトのピンプラグを変換アダプターのプラグ取り付け穴に挿し込んでください。

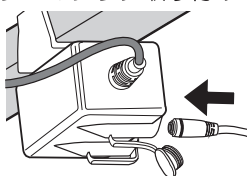

- ④コードクリップに取り付けてください。
※既にモーターコードが取り付けられている場合：取り外し、代わりにフットライトのケーブルを取り付けてください。

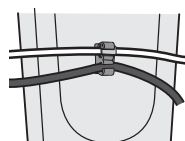


コードクリップの取り付け



コードクリップに「C型クリップ」を重ねて図の様にに取り付けてください

C型クリップ

コード
クリップ

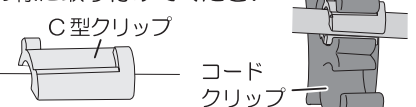

4 フットライトのケーブルをコードクリップに取り付け、余ったコードを束ねてください。

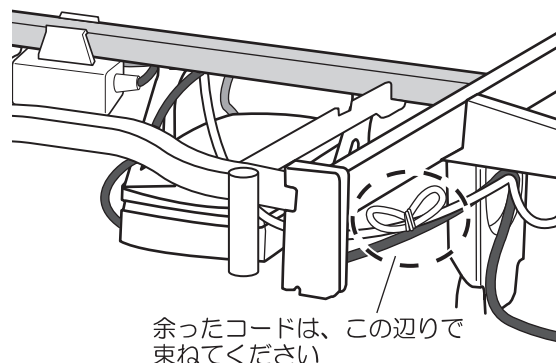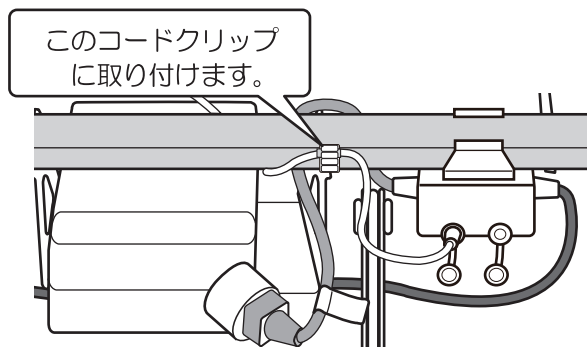


ベッド左右どちらにも取り付けることができます。反対側に取り付け場合も、**① ②**は共通です。
③ ④は下図を参照してケーブルをとり廻してください。

3 図を参照し③から順にフットライトのケーブルを取り廻してください。


③ フットライト本体を取り付けてください。

LEDライトが斜め下を向くように取り付けてください。

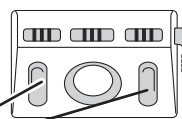


この場所に取り付けてください



④ コードクリップに取り付けてください。
※既にモーターコードが取り付けられている場合：取り外し、代わりにフットライトのケーブルを取り付けてください。

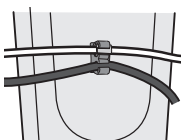

⑤ フットライトのピンプラグを変換アダプターのプラグ取り付け穴に挿し込んでください。

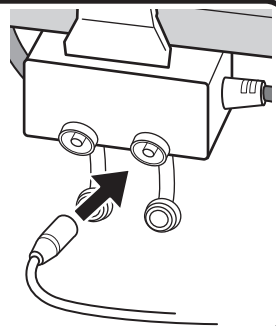


4 余ったコードを束ねてください。

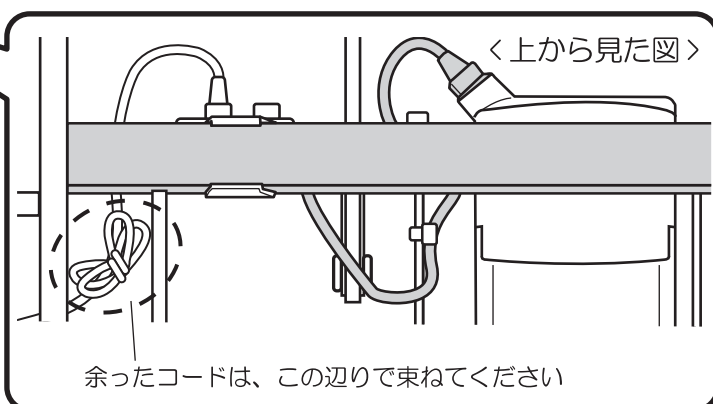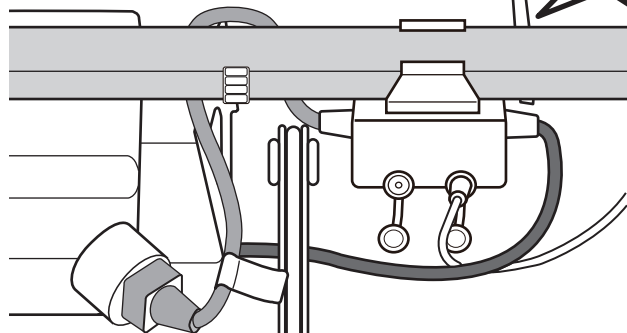

変換アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

※電源を入れてから約 15 秒間はウォーミングアップのため、すべてのスイッチが動きません。

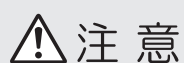

注意

ベッド操作時にコードが駆動部に巻き込まれないように注意して、コードの配線をしてください。
フットライトケーブルの余りについては束ねる等の対応をお願い致します。