

人感センサー付フットライト(5V仕様)



PL02-5VL

P116シリーズ(ヨカロ)に取り付ける場合


ベッドへの 取り付けの前に

- ① ご利用者様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします。
- ② ベッドの高さを上げ、電源プラグをコンセントから抜きます。
- ③ 全てのボトムを取り外します。



- ① センターフレーム右図位置の電源部の電源コードを、変換アダプター付電源コードに入れ換えます。

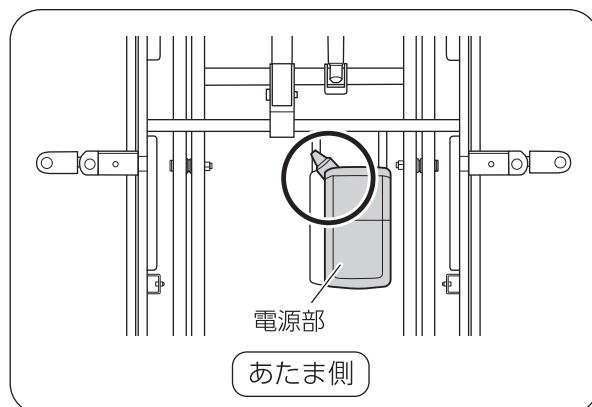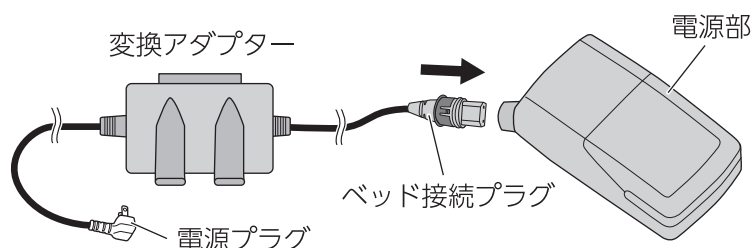


- ② 変換アダプターの挿し込み穴を下向きにして、右図位置のパイプに取り付けます。

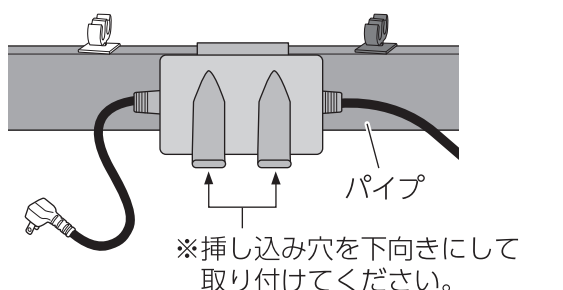

(横側)

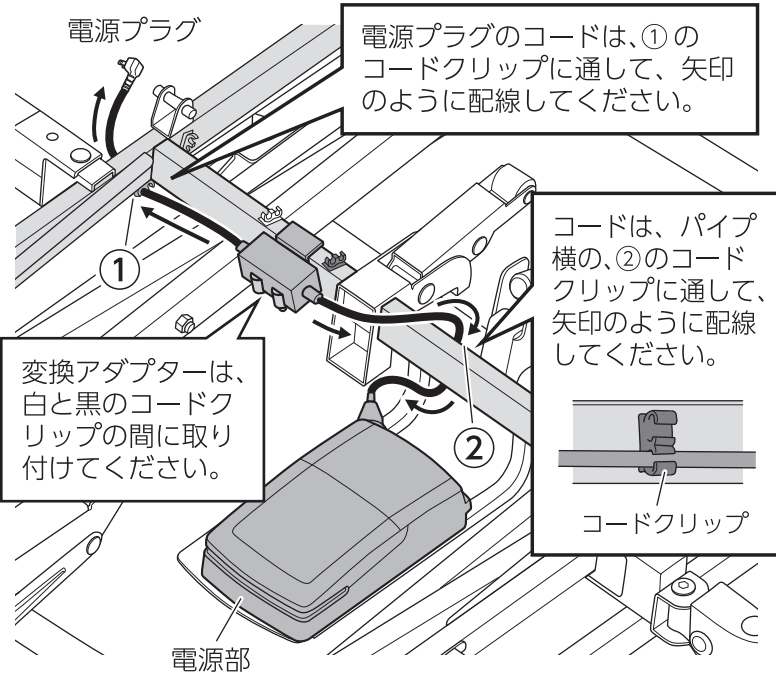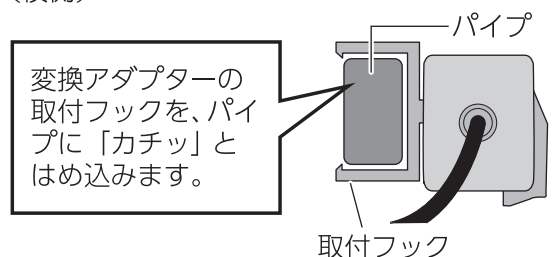


- ③ 変換アダプターの防水キャップを開けて、フットライトのピンプラグを挿し込みます。

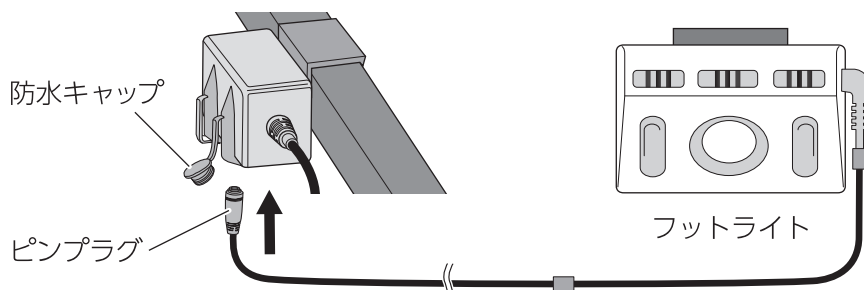



⚠ 注意

ベッドの操作時や移動時に、電源コードが巻き込まれたり挟み込まれたりしないよう注意してコードの配線をしてください。

④ フットライトを、センターフレームの右図位置に取り付けます。


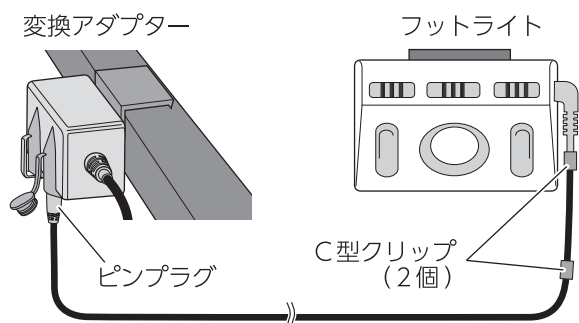


※センターフレームの反対側にもフットライトを取り付けることができます。

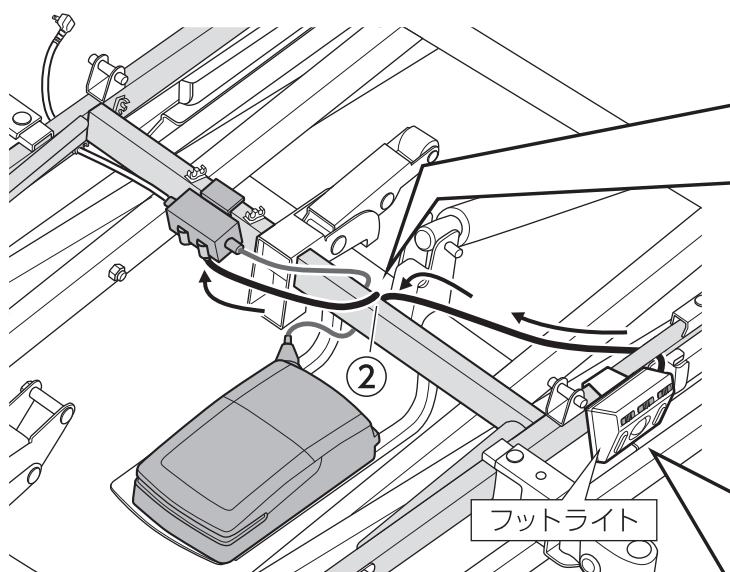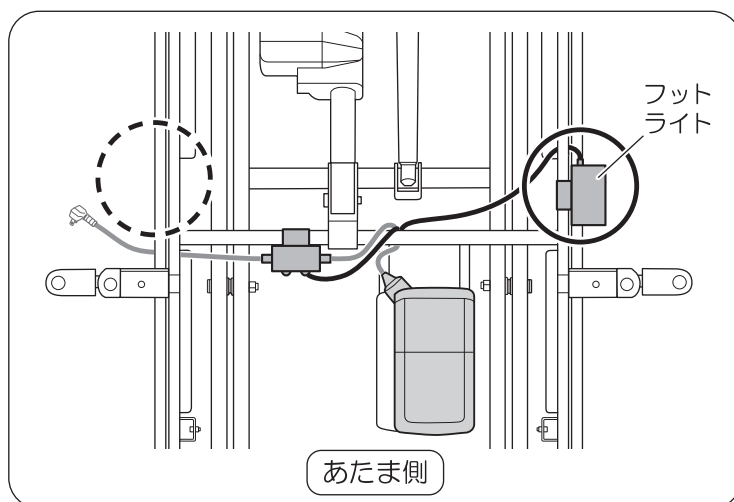

コードはパイプ横の、②のコードクリップに通して、矢印のように配線してください。

※コードクリップに「C型クリップ」を重ねて、下図のように取り付けてください。

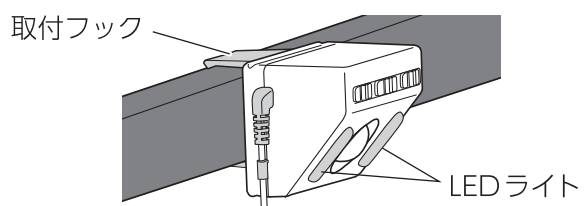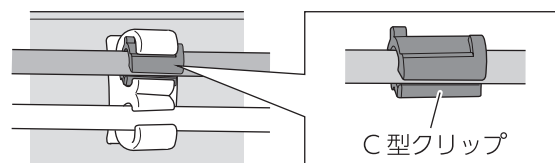


フットライトは、LEDライトが斜め下を向くように取り付けてください。

⚠ 注意

フットライトケーブルの余りについては、束ねるなどの対応をお願いいたします。

電源コード・フットライトを反対側に取り回す場合

フットライトのコードは、③のコードクリップに通して、矢印のように配線してください。

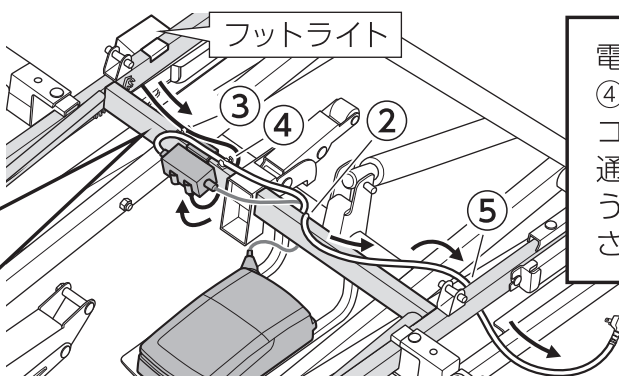

電源コードは、④→②→⑤の順にコードクリップに通して、矢印のように配線してください。

電源コード

⑤ 変換アダプターの電源プラグをコンセントに挿し込みます。

※電源を入れてから約15秒間はウォーミングアップのため、すべてのスイッチが動きません。