


人感センサー付フットライト(5V仕様) PL01/PL02/PL03シリーズ

P300(医療・施設用電動ベッド)シリーズに取り付ける場合


ベッドへの 取り付けの前に

- ①ご利用様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします
- ②高さを上げ、ベッドの電源プラグを抜きます
- ③ひざ脚ボトムを取り外します

- 1 センターフレーム下図位置の電源部の電源コードを変換アダプター付電源コードに入れ換えます。



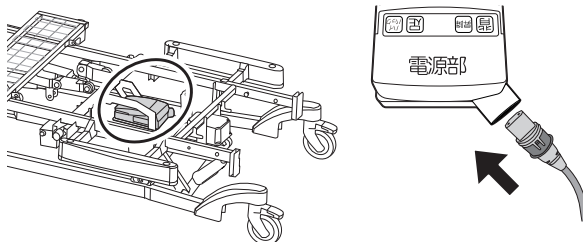


- 2 変換アダプターの差込穴を下向きにして下記の場所に取り付けます。

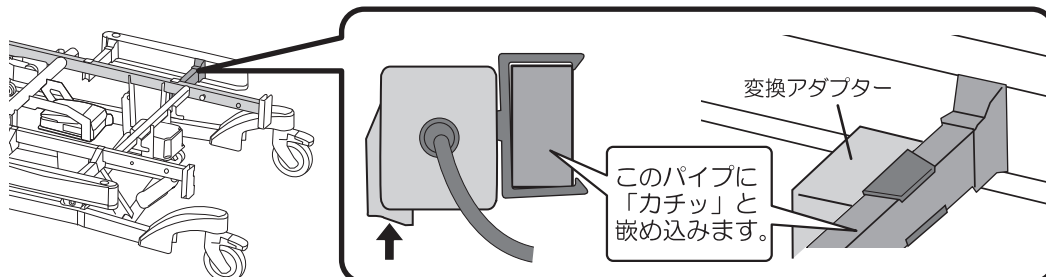


- 4 下図を参照し①から③の順にフットライトのケーブルを取り廻してひざボトムの下に本体を取り付けてください。

- 3 防水キャップを開け、フットライトのピンプラグを変換アダプターに差し込んでください。

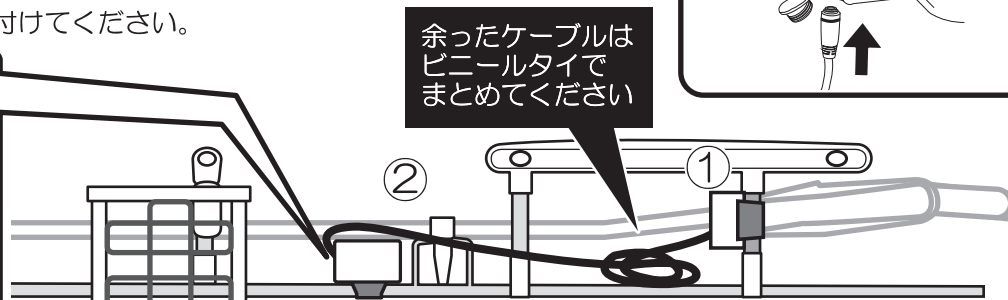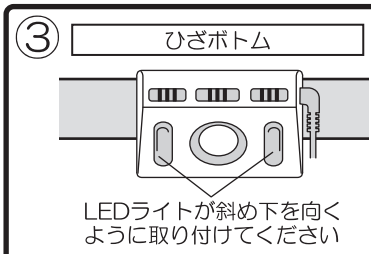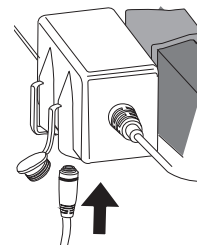


ベッド左右どちらにも取り付けることができます。反対側に取り付ける場合は①から③は共通です。下図を参照してケーブルをとり廻し、ひざボトムの下に本体を取り付けてください。

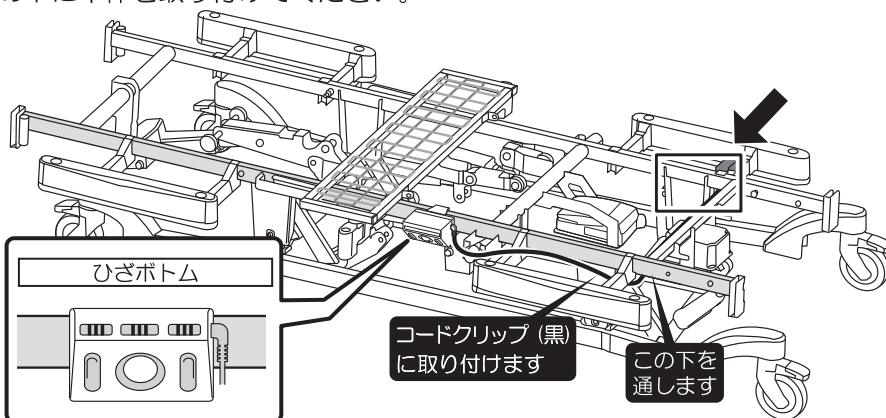


コードクリップ(白)への取付け

下図のようにコードの「C型クリップ」をコードクリップ(白)に取り付けてください

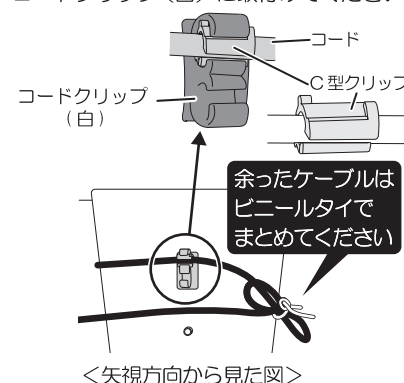

変換アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

※電源を入れてから約 15 秒間はウォーミングアップのため、すべてのスイッチが動きません。

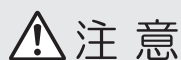

注意 ベッド操作時にコードが駆動部に巻き込まれないように注意して、コードの配線をしてください。フットライトケーブルの余りについては束ねる等の対応をお願い致します。