

変換アダプター付電源コード

PL03シリーズ

P116 (ヨカロ) シリーズに取り付ける場合


ベッドへの 取り付けの前に

- ①ご利用様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします。
- ②ベッドの電源プラグを抜きます。
- ③腰ボトムとひざ脚ボトムを取り外します。


- ① センターフレームの電源部から電源コードを取り外し、変換アダプター付電源コードを挿し込みます。



- ② 変換アダプターをセンターフレームのパイプに取り付けます。

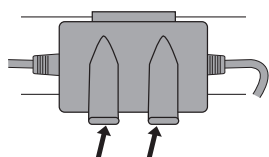


穴を下向きにして取り付けてください。

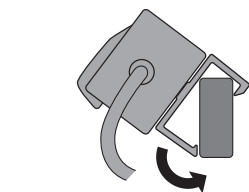

フックの上側の爪をパイプにひっかけ、回転させるように下に押し込んでください。

- ③ 電源部と変換アダプターの間の余りのコードを束ね、バンドでパイプに固定します。

- ④ 電源プラグ側のコードを取り回します。
※電源プラグはベッドの左右どちらにも取り回しできます。図を参考にコードを配線してください。

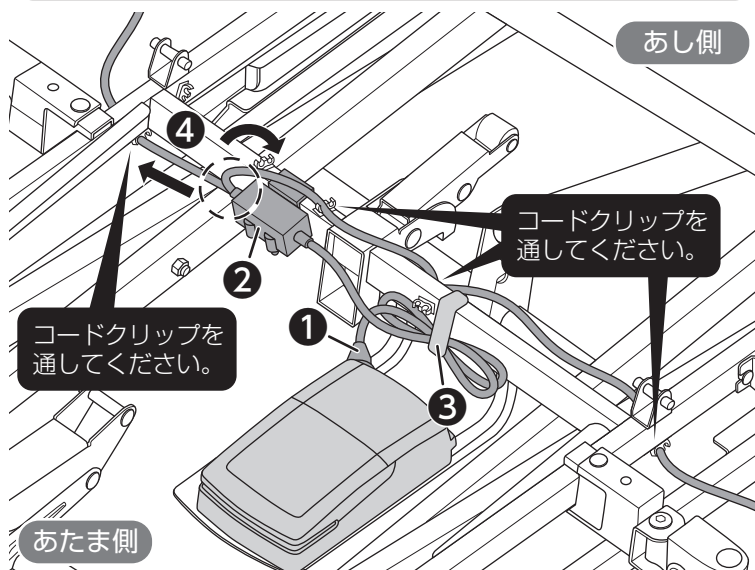


⚠ 注意

・ベッド操作時に変換アダプターおよび変換アダプターに接続する機器が駆動部に巻き込まれないよう注意して、コードを配線してください。

<変換アダプターの使用方法>

変換アダプターの防水キャップを開け、接続する機器のピンプラグを挿し込んでください。

※合計10W以下でご使用ください。

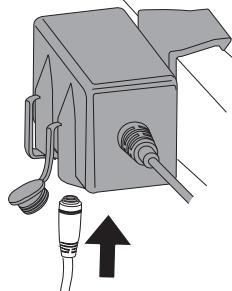

<フットライトを取り付ける場合>

フットライト本体を、センターフレームのパイプに取り付けてください。

※フットライトはベッドの左右どちらでも取り付けできます。図を参考にコードを配線してください。

※余ったコードは束ねてください。

