

変換アダプター付電源コード


PL03シリーズ

P400 シリーズに取り付ける場合

ベッドへの 取り付けの前に

- ①ご利用様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします。
- ②ベッドの電源プラグを抜きます。
- ③ひざ脚ボトムを取り外します。

- ① センターフレームの電源部から電源コードを取り外し、変換アダプター付電源コードを挿し込みます。

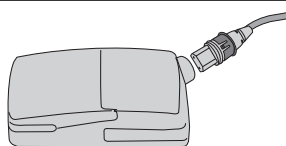

＜上から見た図＞

左側に寄せた状態で
取り付けてください。


ベースフレームの上
を通してください。

①

③

②


- ② 変換アダプターをセンターフレームのパイプに取り付けます。

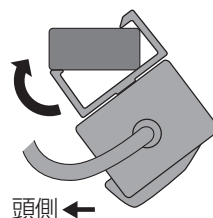

プラグを挿し込む
穴をベッドの頭側
に向け、フックの
上側の爪をパイプ
にひっかけ回転さ
せるように上に押
し込んでください。

頭側 ←

パイプに取り付けた後は、矢印の方向に
移動させてください。

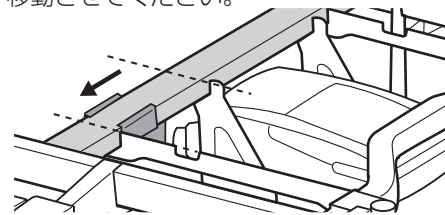

- ③ 電源部と変換アダプターの間の
余りのコードを束ね、バンドで
パイプに固定します。

- ④ 電源プラグ側のコードを交換前
の電源コードと同じように取り
回します。


⚠ 注意

・ベッド操作時に変換アダプターおよび変換アダプターに接続する機器が駆動部に巻き込まれないよう注意して、コードを配線してください。

＜変換アダプターの使用方法＞

変換アダプターの防水
キャップを開け、接続
する機器のピンプラグ
を挿し込んでください。

※合計10W以下でご使用
ください。

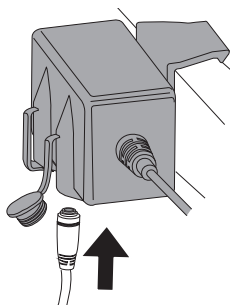


＜フットライトを取り付ける場合＞

フットライト本体を、センターフレームのパイプに
取り付けてください。

※フットライトはベッドの左右どちらでも取り付けできます。

LEDライトが
斜め下を向く
ように取り付
けてください。

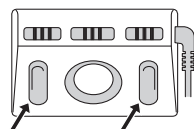

コードクリップを使用
する場合は、C型
クリップを重ねて取
り付けてください。

