

取扱説明書

ベシスサポート(通気タイプ)

90 cm幅

PM14-A9008

83 cm幅

PM14-A8308

この度は、ベシスサポート(通気タイプ)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この「取扱説明書」を必ずお読みいただき正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- 介護が必要な方がご使用になる場合は、介護をする方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- お買い上げ商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。




警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- 火気類にマットレスを近づけ過ぎないでください。
 - ・火災や変色、変形の原因となります。
- サイドレールやベッド用グリップと一緒に使用する場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

サイドレールの上部高さが体の中心より高い事をご確認ください。

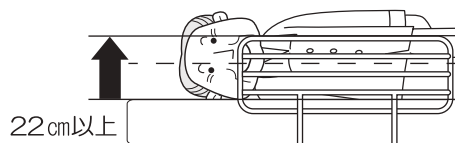

22cm以上



注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・外力バーやウレタンフォームが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転落事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
 - ・危険な隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は 1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因になります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。
- 外力バーを取り外す際は、ファスナー等を強く引っ張らないでください。
 - ・外力バーが破損する原因になります。
- マットレスがずれないように注意してください。マットレスがずれると危険な隙間が発生し、体の一部が入り込む恐れがあります。
 - ・マットレスストッパーや適合するサイドレールを取り付ける事でマットレスのずれ防止になります。

特徴

- ・マットレスはレギュラーサイズ、ショートサイズ、ロングサイズへ長さ切替えが可能です。
※ロングサイズに切替える際は、ロング専用オプション(別売り)をご使用ください。
- ・外カバーは取り外しができ、洗濯が可能です。
- ・ファスナーは、外カバー着脱のしやすいL字ファスナーを採用しています。

使用方法

- ・マットレスは、ベッドの上に直接敷いてお使いください。
- ・マットレスは、ベッドパットやシーツを敷いてお使いください。
- ・ご使用前は、ウレタンフォームがずれていないか確認してください。
ずれていたら整えてご使用ください。

梱包内容

マットレス：1枚




取扱説明書：1枚




各部の名称



マットレス(表面)

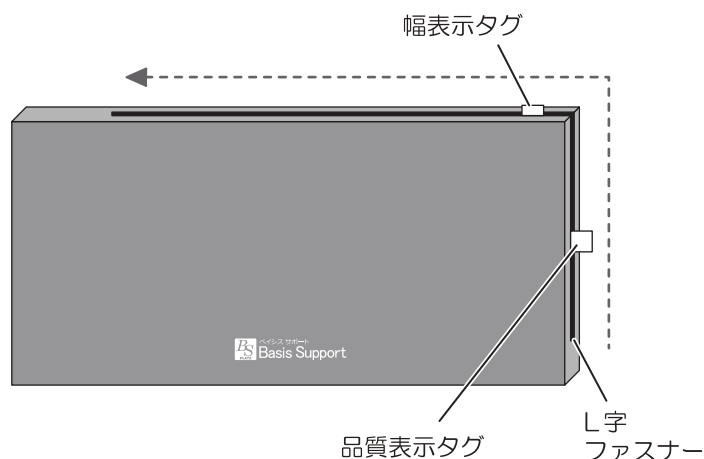

マットレス(裏面) ※イラストはロングサイズ時です。

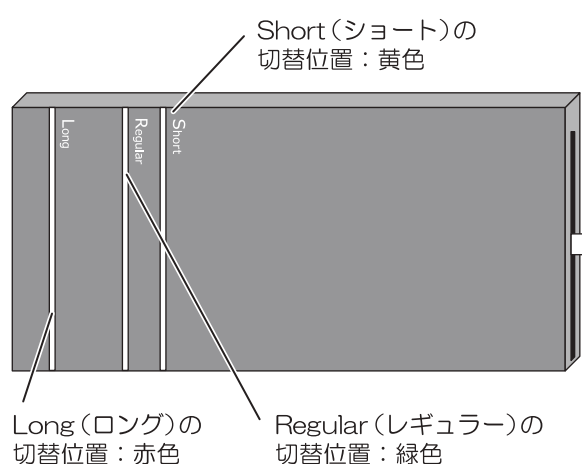


ウレタンフォーム ※ウレタンフォームには、内カバーが付いています。

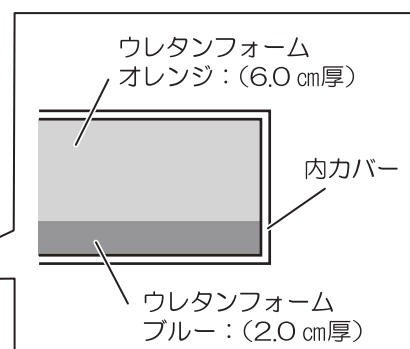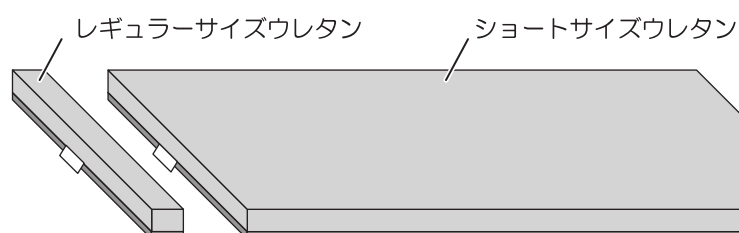


長さ切替え方法

マットレスをレギュラーサイズ、ショートサイズ、ロングサイズへの長さ切替えが可能です。ベッドのサイズに合わせて長さを切替えてご使用ください。


※梱包時はレギュラーサイズです。

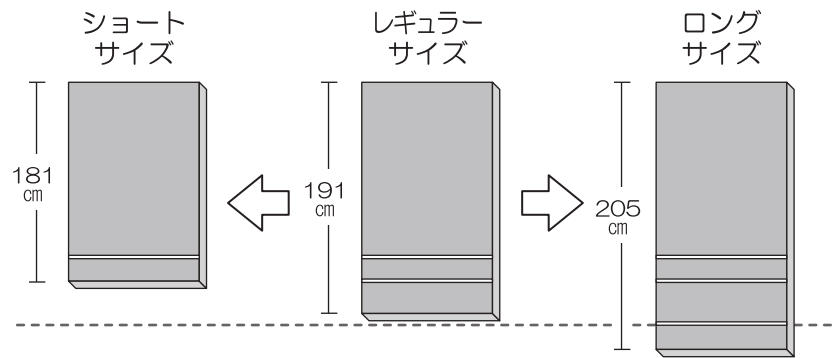


レギュラーサイズからショートサイズへの長さ切替え方法

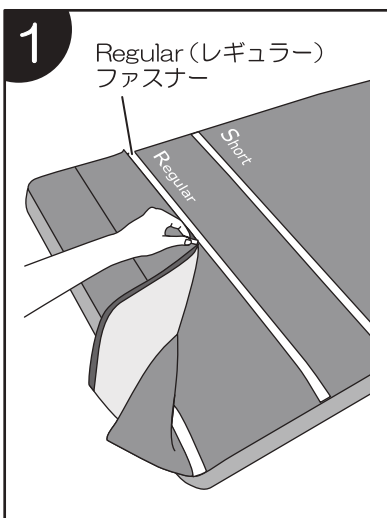

Regular (レギュラー) の緑色のファスナーを開けます。

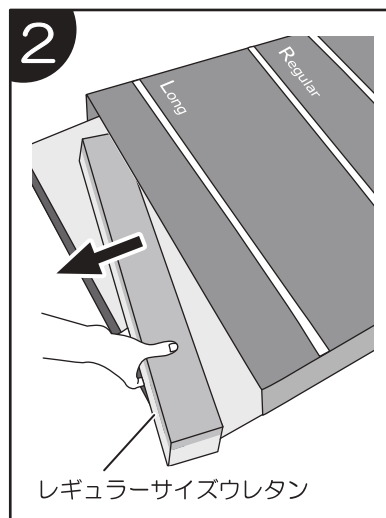


レギュラーサイズウレタンを抜きます。
※レギュラーサイズウレタンは保管しておいてください。

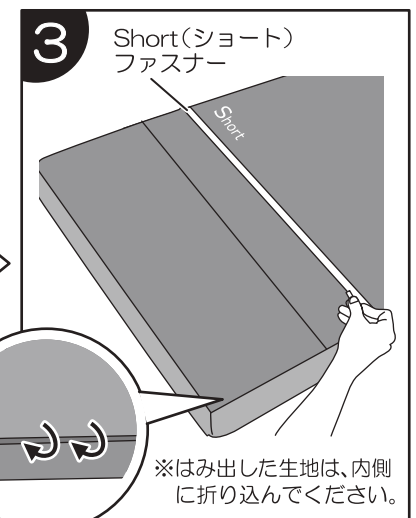


Short (ショート) の黄色のファスナーで閉じます。


レギュラーサイズからロングサイズへの長さ切替え方法

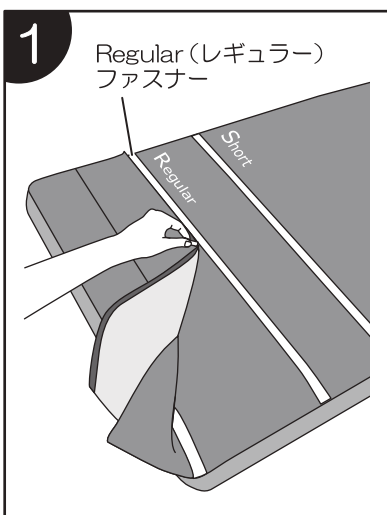

Regular (レギュラー) の緑色のファスナーを開けます。

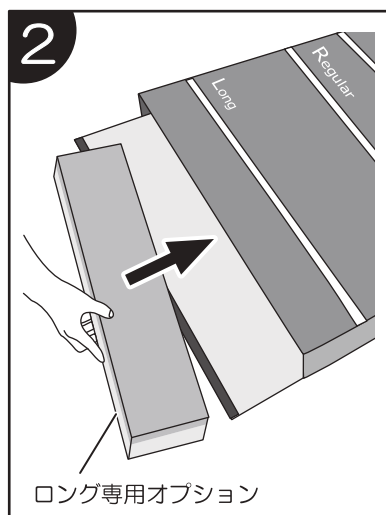

ロング専用オプションを外カバー内に入れます。

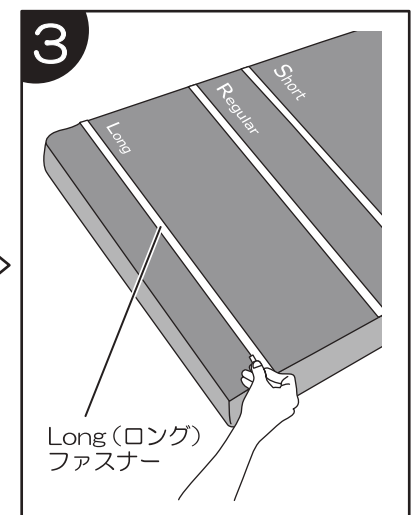

Long (ロング) の赤色のファスナーで閉じます。

お手入れ

- マットレスを清潔にご使用いただくために
 - ・定期的に通気や換気を行ってください。
 - ・定期的に日陰干しを行ってください。
 - ・定期的にマットレス全面に掃除機をかけ、チリやホコリを吸引してください。
- 外カバーは家庭用洗濯機で洗濯可能です。
- 外カバーの洗濯時の注意(品質表示タグの説明)



液温は40℃までで、洗濯機の弱水流による洗濯ができます。



漂白処理はできません。



洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。



アイロンは使わないでください。



弱く絞る

日陰でつり干ししてください。
2分以下の短時間で絞ってください。



ドライクリーニングには対応していません。



弱いウェットクリーニング処理ができます。

⚠注意

- マットレスは十分に乾燥させた状態で使用してください。
 - ・乾燥が不十分な状態で使用すると、カビが発生する原因になります。
- 天日干しをしないでください。
- オゾン殺菌は行わないでください。
 - ・マットレスが変形、変質する恐れがあります。

⚠保管時の注意

- 長時間重い物を置いた状態、また高温、多湿、直射日光のある環境で保管しないでください。
変色、変形等の原因になります。
- 長期の保管によって、ウレタンフォームが変色することがありますが、商品の性能に問題はありません。

商品の仕様

商品名・型式	ベシスサポート（通気タイプ） / 90cm幅：PM14-A9008 / 83cm幅：PM14-A8308
寸法： 幅×長さ×厚さ / 商品質量	PM14-A9008： 幅90.0cm×長さ191.0(ショート：181.0)cm×厚さ8.0cm / 5.8(ショート：5.5) kg PM14-A8308： 幅83.0cm×長さ191.0(ショート：181.0)cm×厚さ8.0cm / 5.4(ショート：5.1) kg
構造	平形
硬さ	・上面<オレンジ>：かため（190ニュートン） ・上面<ブルー>：かため（220ニュートン）
復元率	95%
材料	ウレタンフォーム
外装生地組成	外カバー、内カバー：ポリエステル100%
原産国	ベトナム

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

'19.09月 作成

NPO237-Z