

取扱説明書

延長マットレス (清拭ウレタンタイプ)

PM08-90B / PM08-83B
PM20-L9011 / PM20-L8311

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくご使用いただきますようお願いいたします。


- この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書もお渡しください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問い合わせください。

警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。

- サイドレールやベッド用グリップと一緒に使用する場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。
- 火気類にマットレスを近づけ過ぎないでください。
 - ・火災や変色、変形の原因になります。

サイドレールの上部高さが体の中心より高いことをご確認ください。

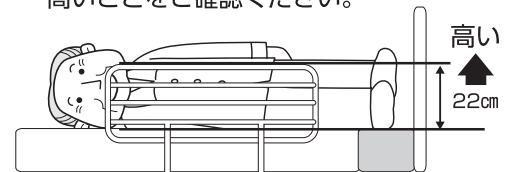

注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています。

- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・外力バーやウレタンフォームが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転落事故の恐れがあります。
- 対応したベッド、マットレス以外に取り付けしないでください。
 - ・危険な隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

各ベッドへの取り付け方法は、下記の二次元バーコードからご覧いただけます。



ホームページでもご覧いただけます。

<https://www.platz-ltd.co.jp/support/manual/index-enchomat.html>

使用方法

● この延長マットレスは、必ず適合のベッド、マットレスと組み合わせてご使用ください。

型 式	幅	厚み	適合ベッド	適合マットレス（レギュラータイプ）
PM08-90B	90cm	8cm	90cm幅、ロングサイズの弊社ベッド	厚さ 8～9cmのマットレス
PM08-83B	83cm		83cm幅、ロングサイズの弊社ベッド	
PM20-L9011	90cm	11cm	90cm幅、ロングサイズの弊社ベッド	厚さ10～12cmのマットレス
PM20-L8311	83cm		83cm幅、ロングサイズの弊社ベッド	

※ベッドの取扱説明書に記載の適合マットレスを使用してください。

● 延長マットレスの取り付け用ひもをロングサイズのベッドの所定の位置に結び、固定されていることを確認してお使いください。各ベッドへの取り付け方法は、表面記載の二次元バーコードからご覧いただけます。

お手入れについて

外カバーの洗濯時の注意（品質表示タグの説明）

- 洗濯機による洗濯は避けてください。防水性が高いため水が抜けず、洗濯機が転倒するなどの危険性があります。
- ドライクリーニング・乾燥機は表面のポリウレタンラミネートを傷めますので使用しないでください。
- タンブラーでの乾燥はポリウレタンラミネートが剥がれたり、破れたりする恐れがありますので避けてください。
- アイロンの使用は避けてください。

	液温は 40℃ 以下のお湯で、手洗いができます。 ※つけおき洗いは避けてください。		漂白処理はできません。		洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。
	日陰での濡れつき干し乾燥が適しています。※絞らないでください。		アイロンは使わないでください。		ドライクリーニングには対応していません。
	弱いウェットクリーニング処理ができます。				

仕様

商品名・型式	延長マットレス（清拭ウレタンタイプ） / 90cm幅 8cm厚：PM08-90B / 83cm幅 8cm厚：PM08-83B / 90cm幅 11cm厚：PM20-L9011 / 83cm幅 11cm厚：PM20-L8311
寸 法： 幅×長さ×厚さ	・ PM08-90B ：幅90.0cm × 長さ14.0cm × 厚さ 8.0cm ・ PM08-83B ：幅83.0cm × 長さ14.0cm × 厚さ 8.0cm ・ PM20-L9011：幅90.0cm × 長さ14.0cm × 厚さ11.0cm ・ PM20-L8311：幅83.0cm × 長さ14.0cm × 厚さ11.0cm
硬さ	かため（205ニュートン）
復元率	95%
材料	ウレタンフォーム
外装生地組成	外カバー：ポリエステル、ポリウレタンラミネート
原産国	ベトナム