

取扱説明書

アミカルサポートマットレス（通気タイプ）

PM11-9009/PM11-9009S

PM11-8309/PM11-8309S


この度は、アミカルサポートマットレス（通気タイプ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問い合わせください。

警告 この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用グリップと一緒に使用する場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。
- 火気類にマットレスを近づけ過ぎないでください。
 - ・火災や変色、変形の原因になります。

サイドレールの上部高さが体の中心より高い事をご確認ください。

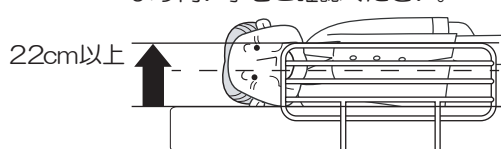


注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・外カバーやウレタンフォームが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転落事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
 - ・危険な隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。
- マットレスを使用する際は側面をシーツで覆い、取っ手をむき出しにしたまま使用しないでください。
 - ・取っ手に手や足が引っ掛かり、怪我をする恐れがあります。また、ベッドや周辺機器に引っ掛かり破損する原因となります。
- 外カバーを取り外す際は、ファスナー等を強く引っ張らないでください。
 - ・外カバーが破損する原因になります。
- マットレスがずれないように注意してください。マットレスがずれると危険な隙間が発生し、体の一部が入り込む恐れがあります。
 - ・マットレスストッパーや適合するサイドレールを取り付ける事でマットレスのずれ防止になります。

特徴


- 中材に通気性・通水性が良いウレタンフォームを使用しており、洗浄が可能です。
- 外カバーは取り外しができ、家庭用洗濯機での洗濯が可能です。
- ファスナーは、外カバー着脱のしやすいL字ファスナーを採用しています。
- かたさの異なるリバーシブルタイプで、お好きな寝心地の方をお選びいただけます。
- ウレタンフォーム・外カバーともに伸縮性が高く、ベッドへの追従性に優れたマットレスです。
- 外カバーには抗菌性能を持たせています。

各部の名称


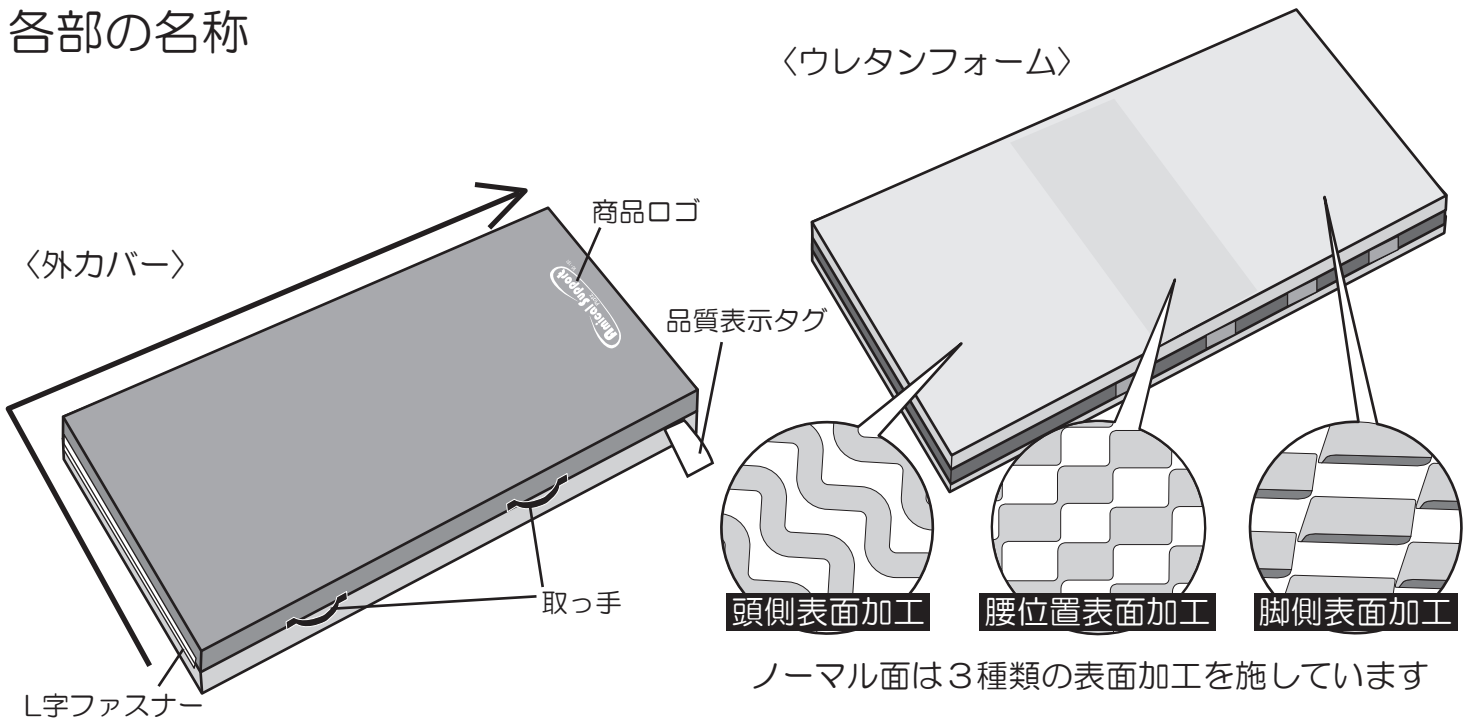


使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。
- マットレスはシーツで覆ってお使いください。
- 商品ロゴが脚側(フットボード側)に来るようにマットレスを敷いてお使いください。
- ウレタンフォームの頭脚は入れ替えず、向きが正しいかを確認してお使いください。

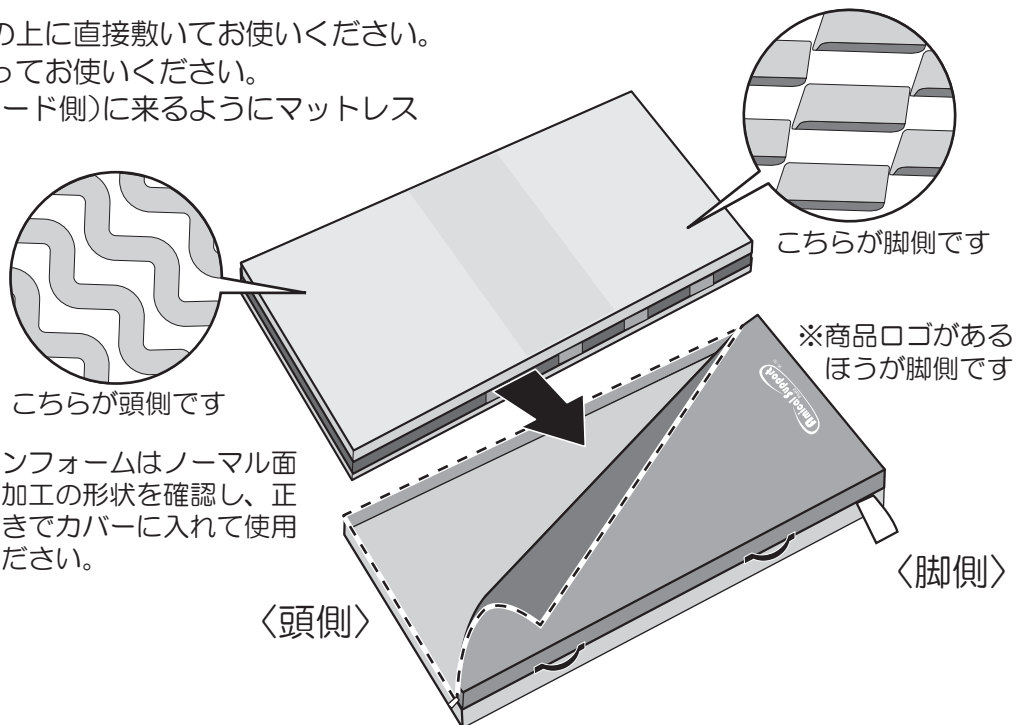

- ハード面を上面にすると「かため」で使用できます。お好きな寝心地をお選びください。

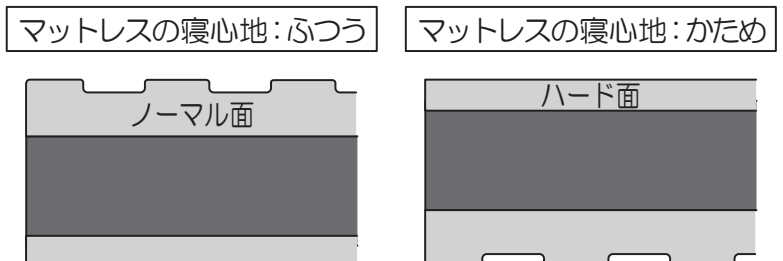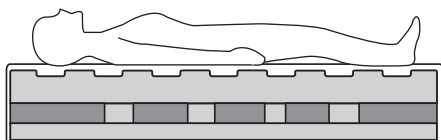

お手入れ

- マットレスを清潔にご使用いただくために
 - ・ 定期的に通気や換気を行ってください。
 - ・ 定期的に日陰干しを行ってください。
 - ・ 定期的にマットレス全面に掃除機をかけ、チリやホコリを吸引してください。
- 外カバーは家庭用洗濯機で洗濯可能です。
- 外カバーの洗濯時の注意（品質表示タグの説明）



液温は40℃までで、洗濯機の弱水流による洗濯ができます。



漂白処理はできません。



洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。



弱く絞る

日陰でつり干ししてください。
2分以下の短時間で絞ってください。



アイロンは使わないでください。



ドライクリーニングには対応していません。



弱いウエットクリーニング処理ができます。

- ウレタンフォームの洗浄が可能です。下記の手順でお手入れをしてください。
 - ① 中性洗剤を使用し、水温40℃以下で洗浄してください。
 - ② 洗剤成分が無くなるまですすいでください。
 - ③ 水気をよく切ってください。
 - ④ 陰干しして乾燥させてください。

※乾燥機を使用する場合は、80℃以下で乾燥させてください。

⚠ 注意

- マットレスは十分に乾燥させた状態で使用してください。
 - ・ 乾燥が不十分な状態で使用すると、カビが発生する原因になります。
- 天日干しをしないでください。
- オゾン殺菌は行わないでください。
 - ・ マットレスが変形、変質する恐れがあります。
- 洗浄機、脱水機、乾燥機等を使用して洗浄した後、マットレスの破損や変形が見られた場合は、同一条件での洗浄をおやめください。
 - ・ 使用する機器によって洗浄条件が異なります。

⚠ 保管時の注意

- ・ 長時間重い物を置いた状態、また高温、多湿、直射日光のある環境で保管しないでください。変色、変形等の原因になります。
- ・ 長期の保管によって、ウレタンフォームが変色することがありますが、商品の性能に問題はありません。

仕様

商品名・型式	アミカルサポートマットレス (通気タイプ) /90cm幅 レギュラータイプ：PM11-9009 /90cm幅 ショートタイプ：PM11-9009S /83cm幅 レギュラータイプ：PM11-8309 /83cm幅 ショートタイプ：PM11-8309S
寸法： 幅×長さ×厚さ (商品質量)	PM11-9009：幅90.0cm×長さ191.0cm×厚さ9.0cm (5.5kg) PM11-9009S：幅90.0cm×長さ182.0cm×厚さ9.0cm (5.0kg) PM11-8309：幅83.0cm×長さ191.0cm×厚さ9.0cm (5.0kg) PM11-8309S：幅83.0cm×長さ182.0cm×厚さ9.0cm (4.5kg)
構造	波形
硬さ	・ノーマル面：かため (160ニュートン) ・ハード面：かため (195ニュートン)
復元率	95%
材料	ウレタンフォーム
外装生地組成	外カバー：ポリエステル
原産国	日本

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

商品についてのお問い合わせは下記フリーアクセスまでご連絡ください



0120-77-3433

フリーアクセス
携帯・PHS・OK

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

17.10月作成

NP0184-A