

取扱説明書

アミカルサポート (清拭タイプ)

PM41-A9009 / PM41-A8309 /
PM41-A7809


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問い合わせください。

警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。

- サイドレールやベッド用グリップと一緒に使用する場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。
- 火気類にマットレスを近づけ過ぎないでください。
 - ・火災や変色、変形の原因になります。

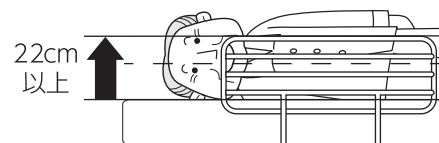

※サイドレールの上部高さが体の中心より高いことをご確認ください。

注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています。


- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・外カバーやウレタンフォームが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転落事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
 - ・危険な隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。
- マットレスを使用する際は側面をシートで覆い、取っ手をむき出しにしたまま使用しないでください。
 - ・取っ手に手や足が引っ掛かり、怪我をする恐れがあります。また、ベッドや周辺機器に引っ掛かり、破損する原因となります。
- 外カバーを取り外す際は、ファスナーなどを強く引っ張らないでください。
 - ・外カバーが破損する原因になります。
- マットレスがずれないように注意してください。マットレスがずれると危険な隙間が発生し、体の一部が入り込む恐れがあります。
 - ・マットレスストッパーや適合するサイドレールを取り付けることでマットレスのずれ防止になります。

特長

- ファスナーは、外カバー着脱のしやすいファスナー形状を採用しています。
- リバーシブルタイプで、お好きな寝心地をお選びいただけます。
- ウレタンフォームの伸縮性が高く、ベッドへの追従性に優れたマットレスです。
- 外カバーには抗菌性を持たせています。

各部の名称

外カバー

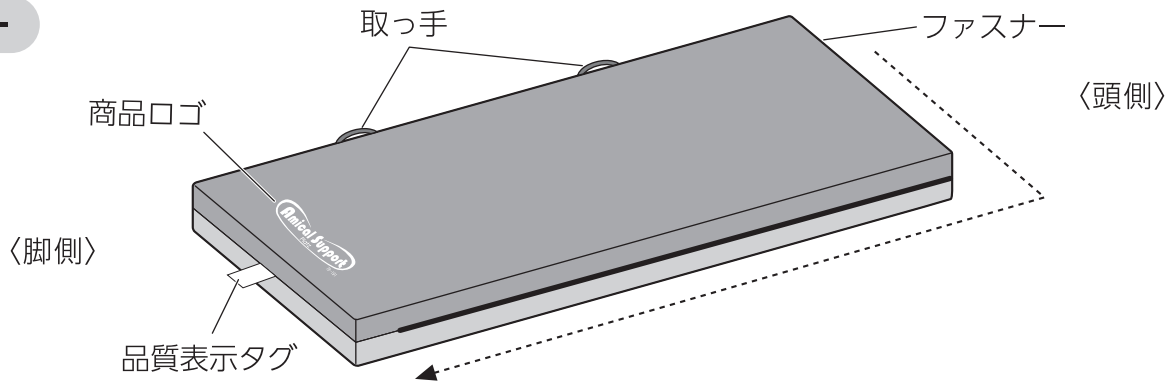

ウレタンフォーム


ウレタンフォームの厚み

ライトグレー (3.0cm厚)

グレー (4.5cm厚)


ライトグレー (1.5cm厚)

脚側表面加工

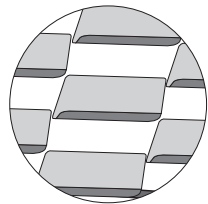


かかと・ふくらはぎは優しく包んで支える形状

頭側表面加工

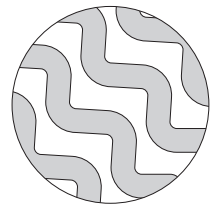

ハイバック・背・腰は屈曲しやすい形状


腰位置表面加工

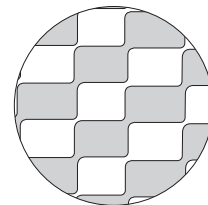

腰・臀部はより自由に变形する形状

使用方法



- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。
- マットレスはシーツで覆ってお使いください。
- 商品ロゴが脚側（フットボード側）に来るようにマットレスを敷いてお使いください。
- ウレタンフォームの頭側・脚側は入れ替えず、向きが正しいかを確認してお使いください。
※ウレタンフォームは表面加工の形状を確認し、正しい向きでカバーに入れてください。

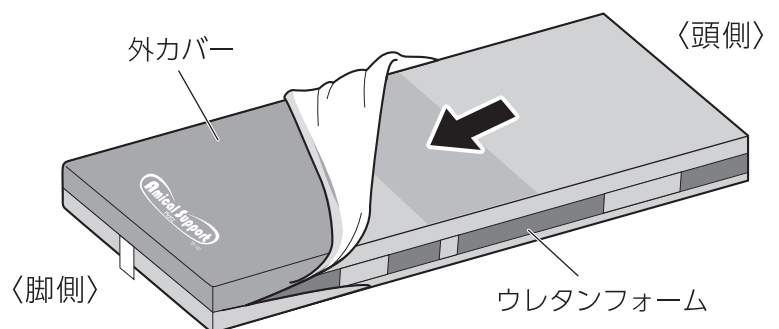

※商品のロゴがあるほうが脚側です。

脚側

頭側

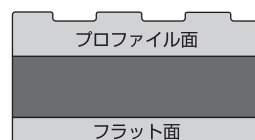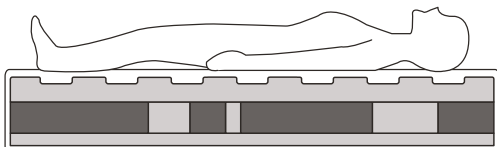

フラット面を上面になると、寝心地を変更できます。お好きな寝心地をお選びください。

お手入れについて

- 外カバーは、清拭消毒してください。
- 外カバーの洗濯時の注意（品質表示タグの説明）



液温は 40℃ 以下のお湯で、手洗いができます。
※つけおき洗いは避けてください。



漂白処理は
できません。



洗濯処理後のタンブル
乾燥処理はできません。



日陰での濡れつき干し乾燥が適
しています。※絞らないでください。



アイロンは使わ
ないでください。



ドライクリーニングには
対応していません。



弱いウエットクリーニング処理が
できます。

⚠ 注意

- マットレスは十分に乾燥させた状態で使用してください。
 - ・乾燥が不十分な状態で使用すると、カビが発生する原因になります。
- 天日干しをしないでください。
- オゾン殺菌はおこなわないでください。
 - ・マットレスが変形、変質する恐れがあります。

⚠ 保管時の注意

- 長時間重い物を置いた状態、また高温、多湿、直射日光のある環境で保管しないでください。
 - ・変色、変形などの原因になります。
- 長期の保管によって、ウレタンフォームが変色することがありますが、商品の性能に問題はありません。

仕様

商品名・型式	アミカルサポート(清拭タイプ) / 90cm幅 レギュラータイプ : PM41-A9009 / 83cm幅 レギュラータイプ : PM41-A8309 / 78cm幅 レギュラータイプ : PM41-A7809
寸法: 幅×長さ×厚さ (商品質量)	・ PM41-A9009 : 幅90.0cm × 長さ191.0cm × 厚さ9.0cm (5.8kg) ・ PM41-A8309 : 幅83.0cm × 長さ191.0cm × 厚さ9.0cm (5.3kg) ・ PM41-A7809 : 幅78.0cm × 長さ191.0cm × 厚さ9.0cm (4.9kg)
構造	波形
硬さ	かため(190ニュートン)
復元率	95%
材料	ウレタンフォーム
外装生地組成	外カバー: ポリエステル、ポリウレタンラミネート
原産国	日本