

## 取扱説明書

### ゼロソア アコーネ (清拭タイプ)

**PM22-A9010 / PM22-A9010S**  
**PM22-A8310 / PM22-A8310S**


この度は、ゼロソア アコーネ（清拭タイプ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問い合わせください。

#### **警告**

この表示の欄は、生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。

- サイドレールやベッド用グリップと一緒に使用する場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
  - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
  - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。
- 火気類にマットレスを近付け過ぎないでください。
  - ・火災や変色、変形の原因になります。

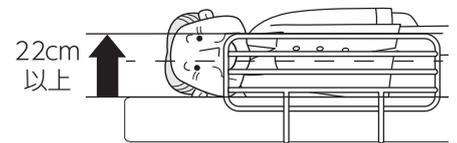

※サイドレールの上部高さが体の中心より高いことをご確認ください。

#### **注意**

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています。


- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
  - ・外力バーやウレタンフォームが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転落事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
  - ・危険な隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
  - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
  - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。
- マットレスを使用する際は側面をシートで覆い、取っ手をむき出しにしたまま使用しないでください。
  - ・取手に手や足が引っ掛かり、怪我をする恐れがあります。また、ベッドや周辺機器に引っ掛かり、破損する原因となります。
- 外力バーを取り外す際は、ファスナーなどを強く引っ張らないでください。
  - ・外力バーが破損する原因になります。
- マットレスがずれないように注意してください。マットレスがずれると危険な隙間が発生し、体の一部が入り込む恐れがあります。
  - ・マットレスストッパーや適合するサイドレールを取り付けることでマットレスのずれ防止になります。

#### 特長



- 中材に通気性・通水性が良いウレタンフォームを使用しており、洗浄が可能です。
- ファスナーは、外力バー着脱のしやすいL字ファスナーを採用しています。
- “じゃばらアシスト機能”が身体への高い追従性を発揮し、ベッドの背上げ・下げ時の身体への負担を軽減します。
- 外力バーには抗菌性を持たせています。

# 各部の名称

## 外カバー

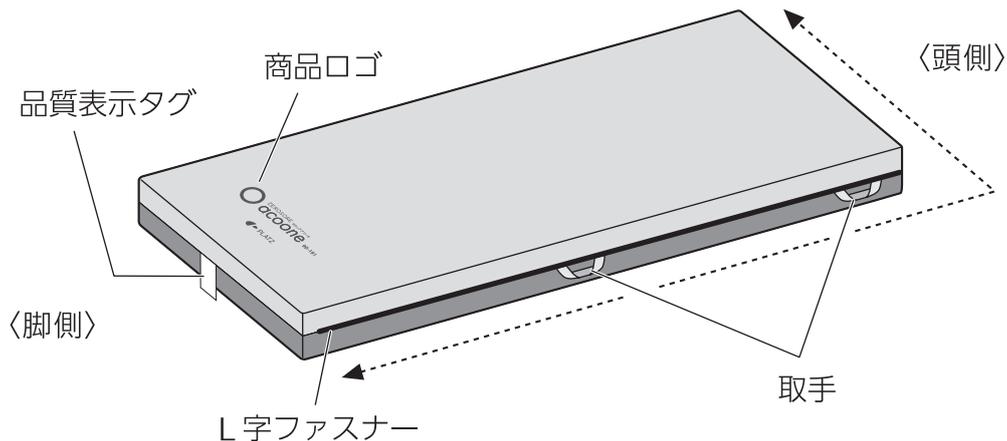


## ウレタンフォーム

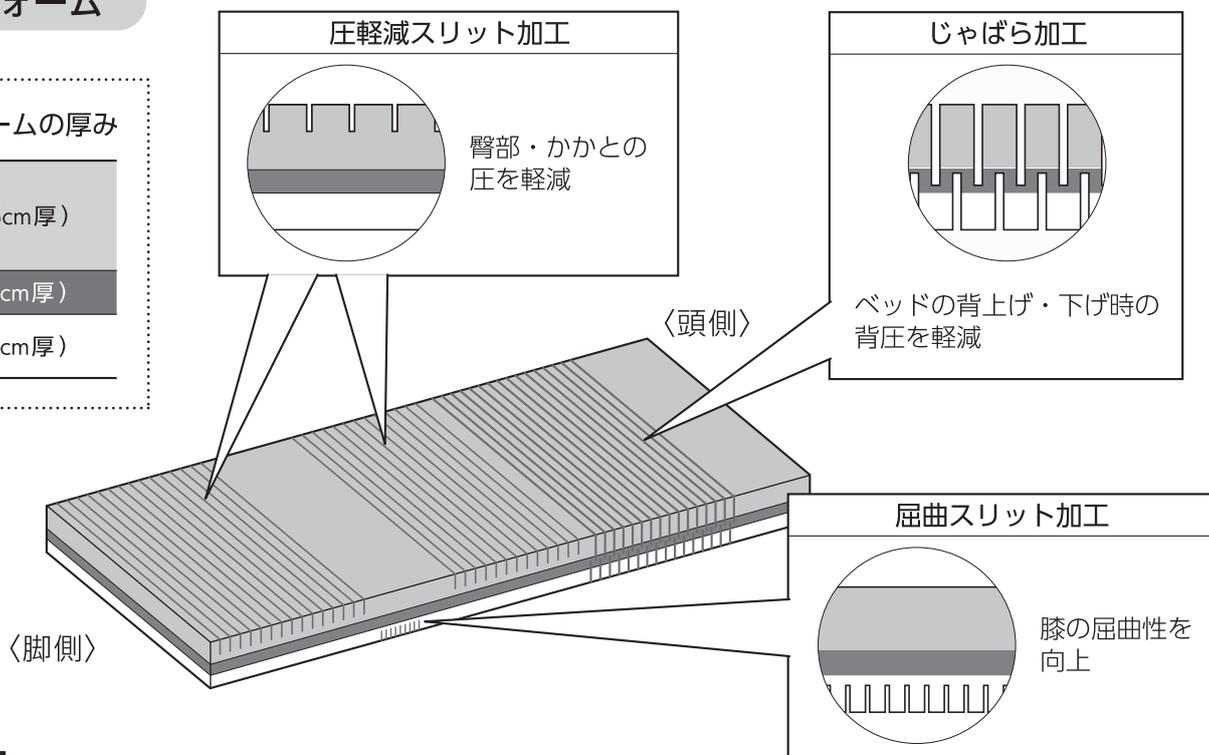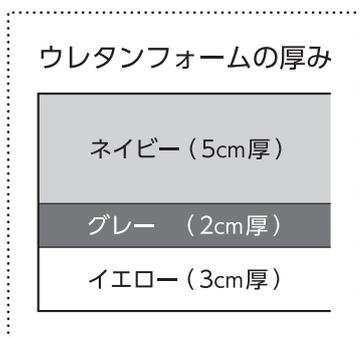


# 使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。
- マットレスはシーツで覆ってお使いください。
- 商品ロゴが脚側（フットボード側）に来るようにマットレスを敷いてお使いください。
- ウレタンフォームの頭側・脚側は入れ替えず、向きが正しいかを確認してお使いください。

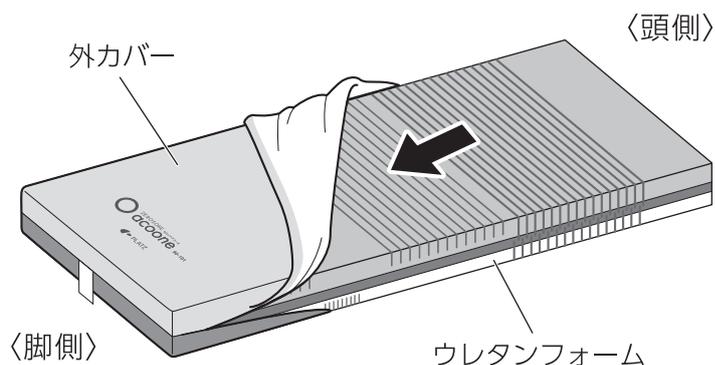

※商品のロゴがあるほうが脚側です。

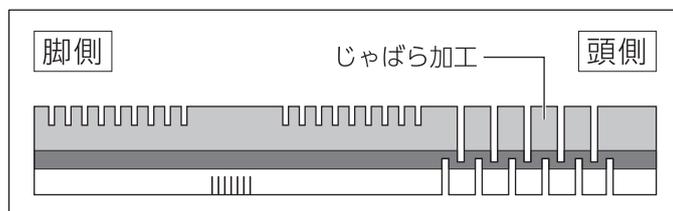

# お手入れについて

## 外カバーの洗濯時の注意（品質表示タグの説明）

- 洗濯機による洗濯は避けてください。  
防水性が高いため水が抜けず、洗濯機が転倒するなどの危険性があります。
- ドライクリーニング・乾燥機は表面のポリウレタンラミネートを傷めますので使用しないでください。
- タンブラーでの乾燥はポリウレタンラミネートが剥がれたり、破れたりする恐れがありますので避けてください。
- アイロンの使用は避けてください。



液温は 40℃ 以下のお湯で、手洗いができます。  
※つけおき洗いは避けてください。



漂白処理は  
できません。



洗濯処理後のタンブル  
乾燥処理はできません。



日陰での濡れつきり干し乾燥が適  
しています。※絞らないでください。



アイロンは使わ  
ないでください。



ドライクリーニングに  
は対応していません。



弱いウェットクリーニング処理が  
できます。

- ウレタンフォームの洗浄が可能です。下記の手順でお手入れをしてください。

- ①中性洗剤を使用し、水温40℃以下で洗浄してください。
  - ②洗剤成分が無くなるまですすいでください。
  - ③水気をよく切ってください。
  - ④陰干しして乾燥させてください。
- ※乾燥機を使用する場合は、80℃以下で乾燥させてください。

## ⚠ 注意

- マットレスは十分に乾燥させた状態で使用してください。  
・乾燥が不十分な状態で使用すると、カビが発生する原因になります。
- 天日干しをしないでください。
- オゾン殺菌はおこなわないでください。  
・マットレスが変形、変質する恐れがあります。
- 洗浄機、脱水機、乾燥機などを使用して洗浄した後、マットレスの破損や変形が見られた場合は、同一条件での洗浄をおやめください。  
・使用する機器によって洗浄条件が異なります。

## ⚠ 保管時の注意

- 長時間重い物を置いた状態、また高温、多湿、直射日光のある環境で保管しないでください。  
・変色、変形などの原因になります。
- 長期の保管によって、ウレタンフォームが変色することがありますが、商品の性能に問題はありません。

# 仕様

商品名・型式	ゼロソア アコーネ (清拭タイプ) ・ 90cm幅 レギュラータイプ : PM22-A9010 ・ 90cm幅 ショートタイプ : PM22-A9010S ・ 83cm幅 レギュラータイプ : PM22-A8310 ・ 83cm幅 ショートタイプ : PM22-A8310S
寸法: 幅×長さ×厚さ (商品質量)	・ PM22-A9010 : 幅90.0cm×長さ191.0cm×厚さ10.0cm (6.0kg) ・ PM22-A9010S : 幅90.0cm×長さ182.0cm×厚さ10.0cm (5.5kg) ・ PM22-A8310 : 幅83.0cm×長さ191.0cm×厚さ10.0cm (5.5kg) ・ PM22-A8310S : 幅83.0cm×長さ182.0cm×厚さ10.0cm (5.5kg)
構造	波形
硬さ	・ フラット部 : かため (185ニュートン) ・ じゃばら部 : ふつう (85ニュートン)
復元率	95%
材料	ウレタンフォーム
外装生地組成	外カバー : ポリエステル、ポリウレタンラミネート
原産国	日本