


ミオレットⅢネクスト専用 3モーター変換キット(2モーター → 3モーター) BS-003

この度は、ミオレットⅢネクスト専用 3モーター変換キット (2モーター→3モーター) BS-003 をご購入いただき、誠にありがとうございます。取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。



●梱包内容

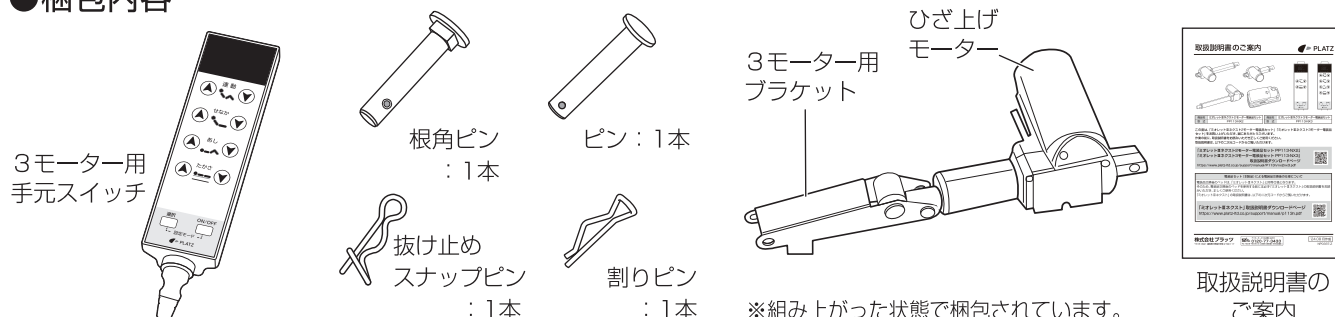

2モーター → 3モーター変換方法

- ① 背ボトムと昇降高さを、完全に下げてください。
- ② ベッドの取扱説明書を参照し、背ボトムと腰ボトム、ひざ脚ボトムを取り外してください。
- ③ 下図を参照し、「ライジングバー」「2モーター用ブラケット」を固定している **A B C** 3箇所のピンと割りピンを外し、「ライジングバー」「2モーター用ブラケット」を取り外してください。

※ **A** のピンと割りピンは、部品パックに収納してください。

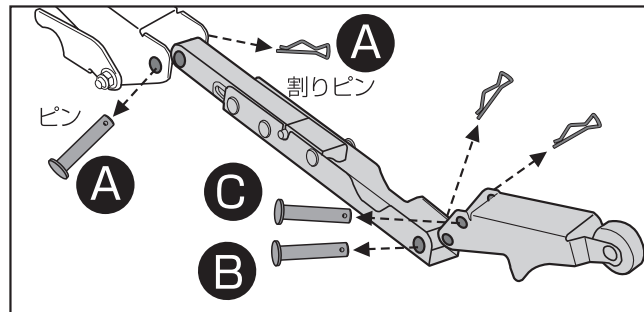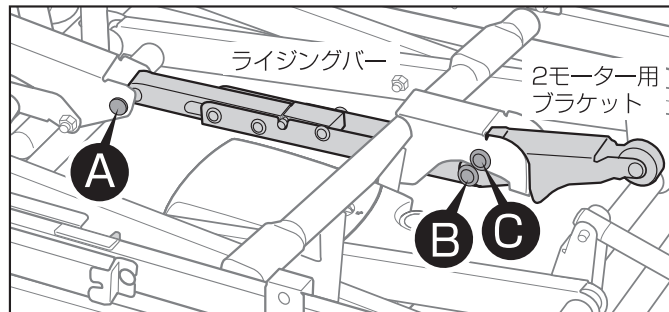


- ④ センターフレームに、3モーター用ブラケットとひざ上げモーターを取り付けます。


⚠ 注意

ひざ上げモーターは、「上」シールを参照して、必ず下図の向きに取り付けてください。誤った向きに取り付けると、昇降時に破損する恐れがあります。


3モーター用ブラケットを、同梱されたピンと割りピンを使用してセンターフレームに取り付けます。

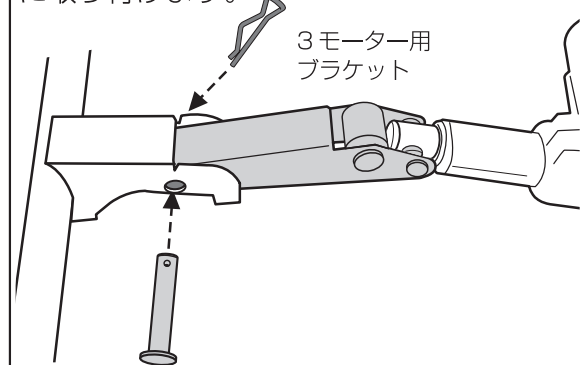

ひざ上げモーターを、同梱された根角ピンと抜け止めスナップピンでセンターフレームに取り付けます。

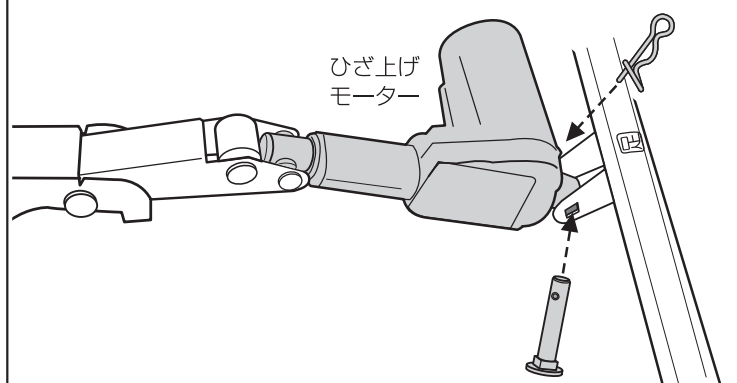

- ⑤ 電源部の「足」に挿し込まれているキャップを外し、ひざ上げモーターコードを挿し込んでください。
取り外したキャップは部品パックに収納してください。
※コントロールボックスのふたの着脱方法は、ベッドの取扱説明書を参照してください。

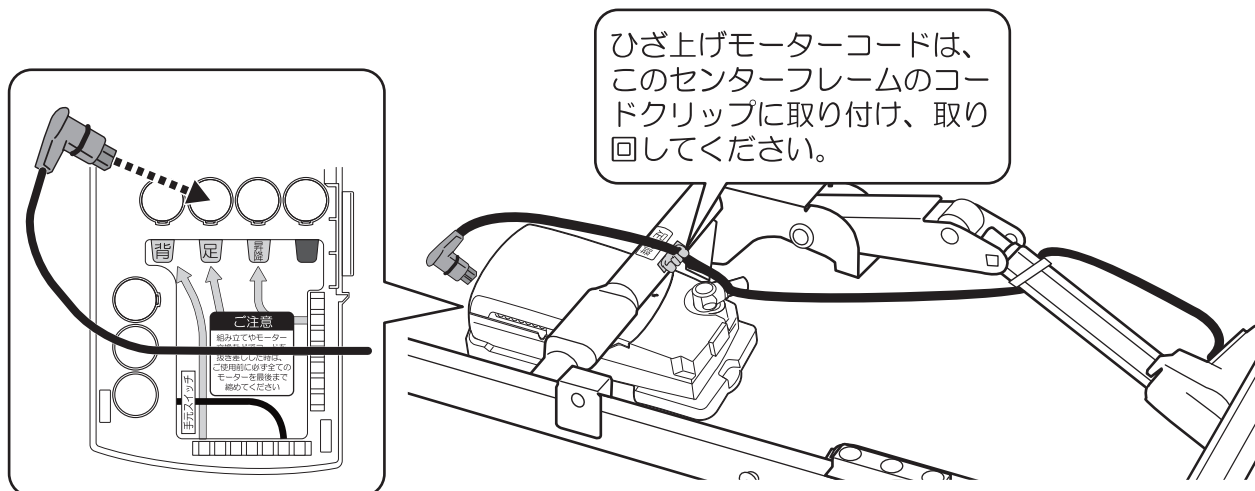


- ⑥ 2 モーター用手元スイッチを取り外し、3 モーター用手元スイッチを取り付けてください。
下図を参照しコードを取り回してください。


手元スイッチコードの取り回し

手元スイッチを梱包のビニール袋から取り出してください。

手元スイッチのコードは、図のように昇降モーターのコードの輪に通し、X型昇降パイプの上を通してください。X型昇降パイプの間を通すと、コードの破断や故障の原因となります。
※コードクリップ（黒）にコードを取り付けてください。

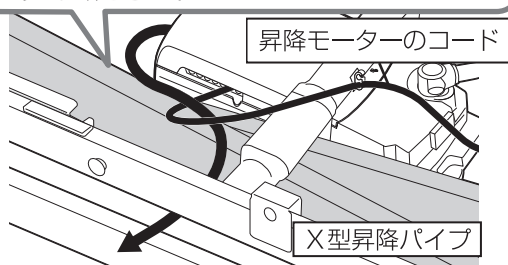

反対側に取り回す場合

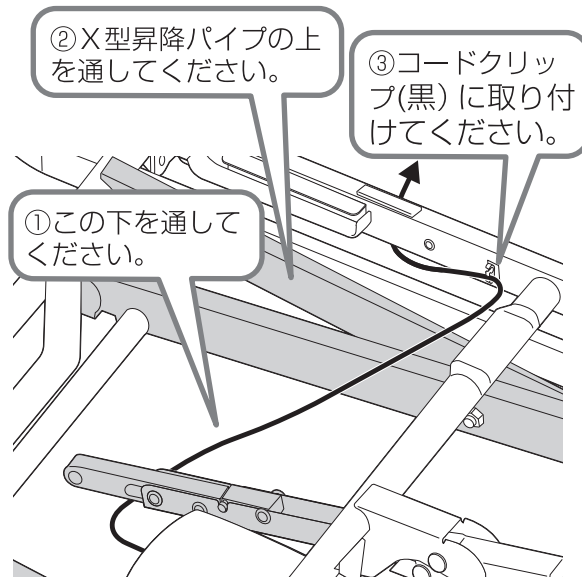

点検 / お手入れについて

- 取り付けが確実かどうか、必ず定期的に点検をおこなってください。
しっかり取り付けられていない状態で使用を続けると破損や事故、故障の原因になります。
- 乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 商品にベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、使用しないでください。

⚠ 警告・注意

- 安全のため、作業は2人以上でおこなってください。
- 取り付けの際に、手や指をはさまないようにご注意ください。
- この商品はミオレットⅢネクスト専用です。他のベッドに取り付けしないでください。
- コードのはさみ込みがないように、取り付けてください。