


ミオレットⅢネクスト専用 2モーター変換キット(3モーター → 2モーター) BS-004



この度は、ミオレットⅢネクスト専用2モーター変換キット(3モーター→2モーター) BS-004をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

●梱包内容


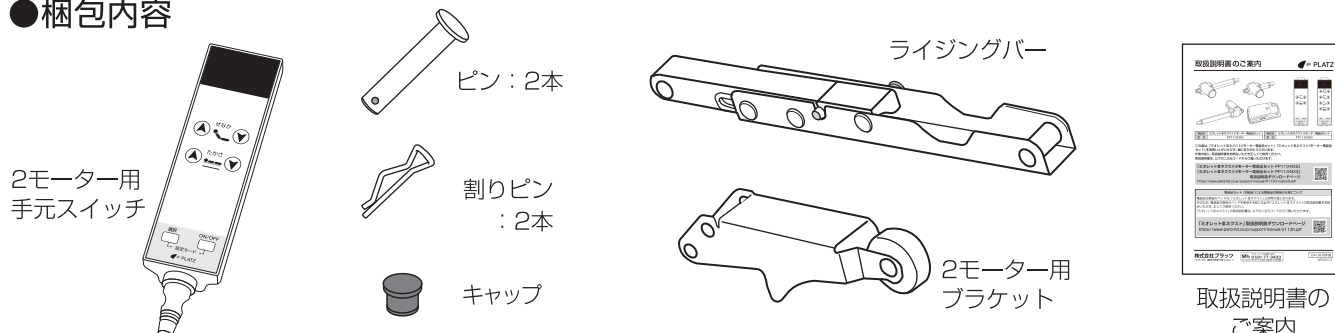


3モーター → 2モーター変換方法

- ① 背ボトムと昇降高さを、完全に下げてください。
- ② ベッドの取扱説明書を参照し、背ボトムと腰ボトム、ひざ脚ボトムを取り外してください。
- ③ ひざ上げモーターコードを抜いて、付属のキャップを挿し込んでください。
※コントロールボックスのふたの着脱方法は、ベッドの取扱説明書を参照してください。
- ④ 下図を参照し **A** と **B** 2箇所のピンと割りピンを外し、「3モーター用ブラケット」「ひざ上げモーター」を取り外します。

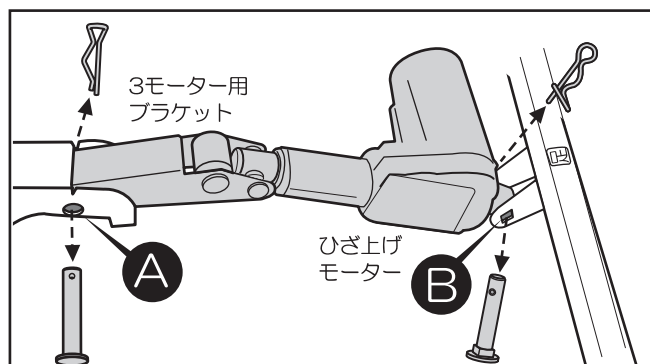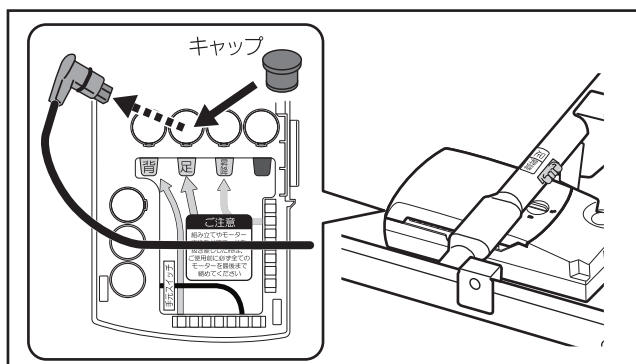

- ⑤ センターフレームに、2モーター用ブラケットとライジングバーを取り付けます。

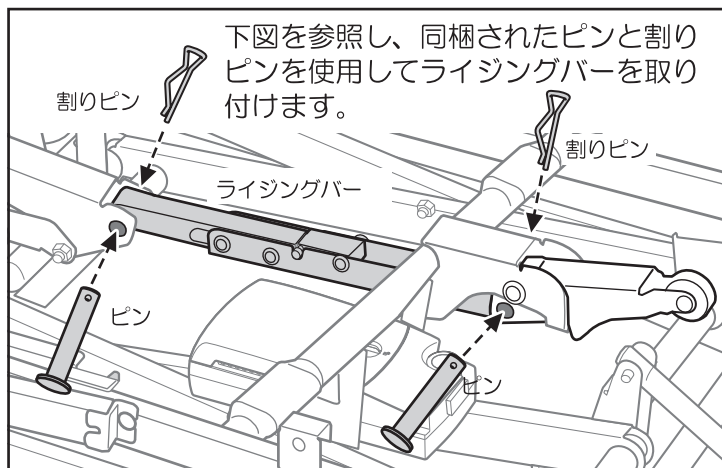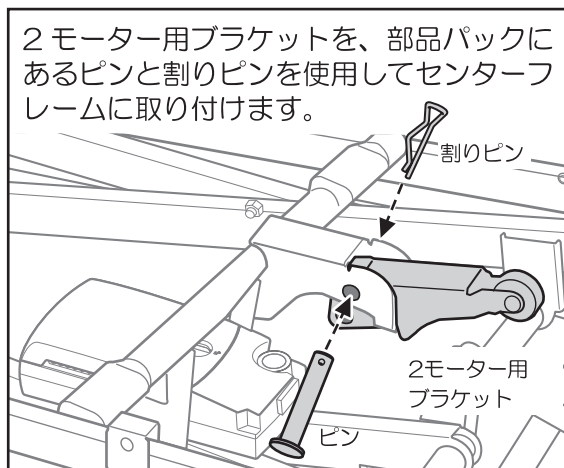


- ⑥ 3 モーター用手元スイッチを取り外し、2 モーター用の手元スイッチを取り付けてください。
下図を参照しコードを取り回してください。

手元スイッチコードの取り回し

手元スイッチを梱包のビニール袋から取り出してください。

手元スイッチのコードは、図のように昇降モーターのコードの輪に通し、X型昇降パイプの上を通してください。X型昇降パイプの間を通すと、コードの破断や故障の原因となります。
※コードクリップ（黒）にコードを取り付けてください。

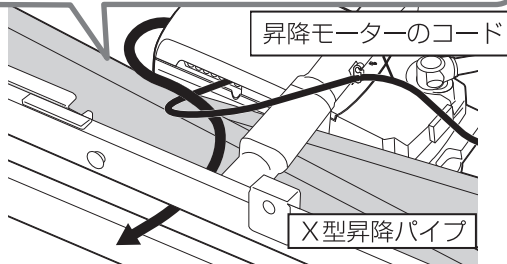


反対側に取り回す場合

② X型昇降パイプの上を通してください。

③ コードクリップ（黒）に取り付けてください。

① この下を通してください。

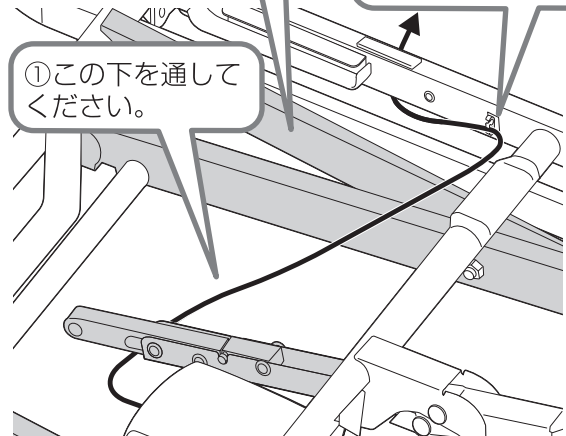

点検 / お手入れについて

- 取り付けが確実かどうか、必ず定期的に点検をおこなってください。
しっかり取り付けられていない状態で使用を続けると破損や事故、故障の原因になります。
- 乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 商品にベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、使用しないでください。

⚠ 警告・注意

- 安全のため、作業は2人以上でおこなってください。
- 取り付けの際に、手や指をはさまないようにご注意ください。
- この商品はミオレットⅢネクスト専用です。他のベッドに取り付けしないでください。
- コードのはさみ込みがないように、取り付けてください。