

ミオレットⅢネクスト 2 モーター電装品セット ミオレットⅢネクスト 3 モーター電装品セット

PP113-NX2 PP113-NX3

この度は、ミオレットⅢネクスト 2 モーター電装品セット PP113-NX2/ ミオレットⅢネクスト 3 モーター電装品セット PP113-NX3 をご購入いただき、誠にありがとうございます。
作業の前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

電装品セット（本製品）による電装品交換後の仕様について

電装品交換後のベッドは、「ミオレットⅢネクスト」と同等仕様となります。

そのため、電装品交換後のベッドを使用する前には必ず「ミオレットⅢネクスト」の取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。



「ミオレットⅢネクスト」の取扱説明書は、以下の二次元コードからご覧いただけます。

「ミオレットⅢネクスト」取扱説明書ダウンロードページ


<https://www.platz-ltd.co.jp/support/manual/p113n.pdf>



梱包内容【PP113-NX2】


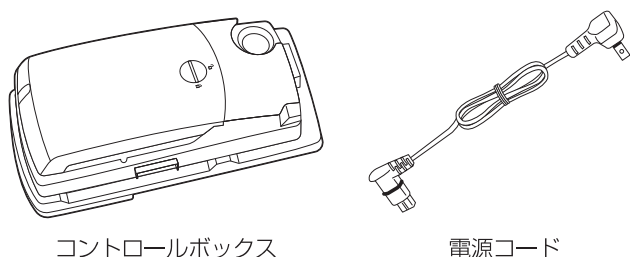
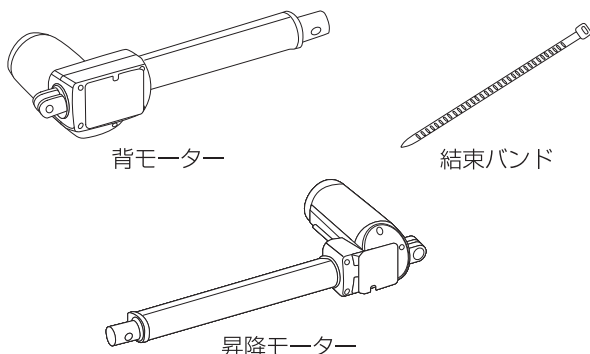


表示パネル付き
手元スイッチ(2M)

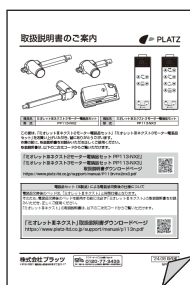

取扱説明書のご案内

梱包内容【PP113-NX3】

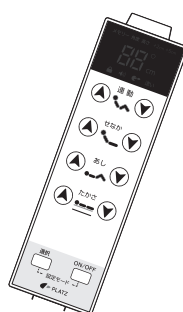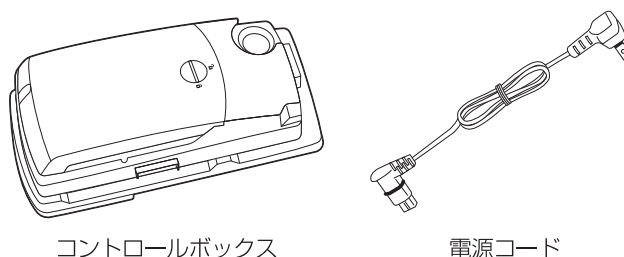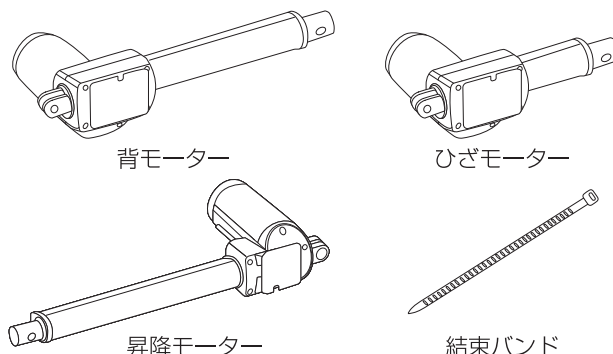

表示パネル付き
手元スイッチ(3M)






取扱説明書のご案内

電装品の交換作業について




すでに取り付けられている電装品を取り外し、電装品セット（本製品）の電装品を取り付けます。
交換後のモーターコードは、交換前と同じように配線してください。

① 背モーターを交換します。

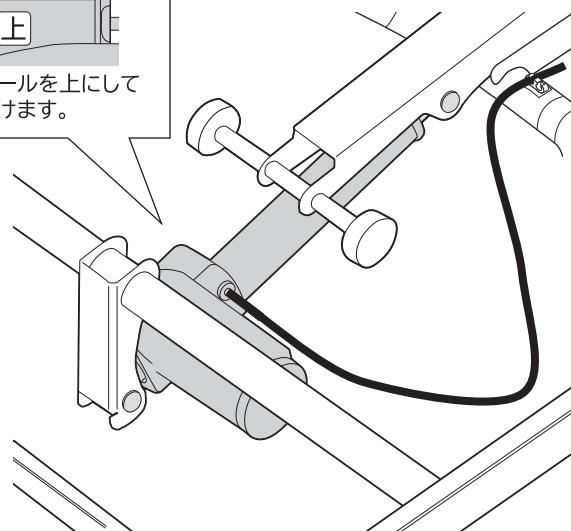
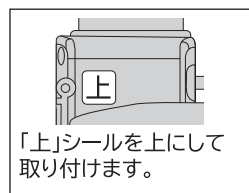
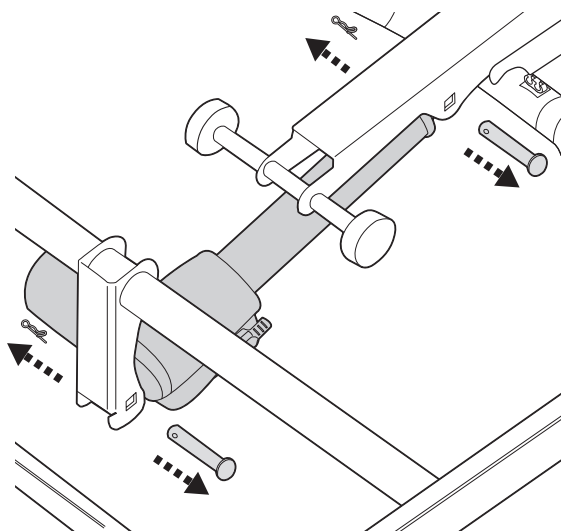


② ひざモーターを交換します。



※PP113-NX3のみ

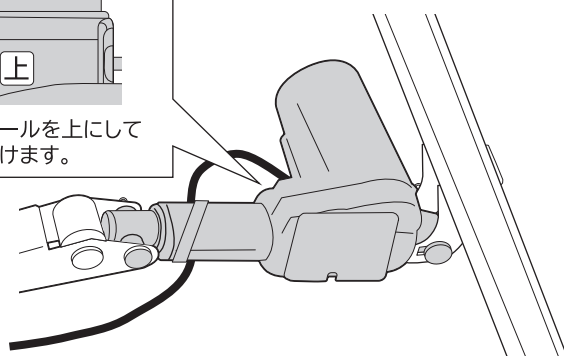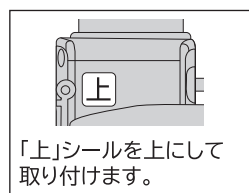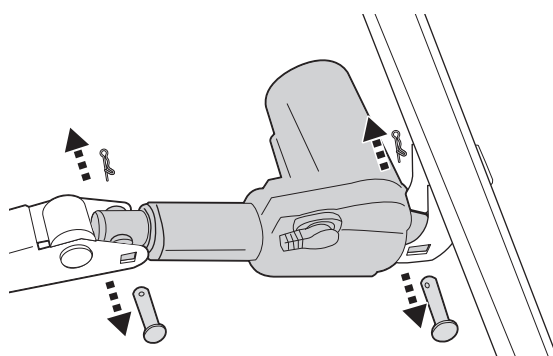

③ 昇降モーターを交換します。

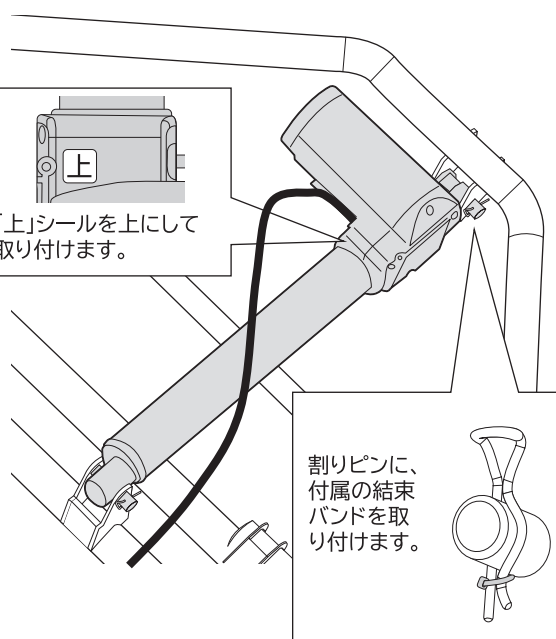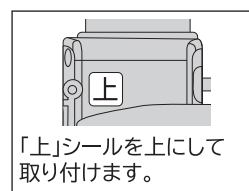
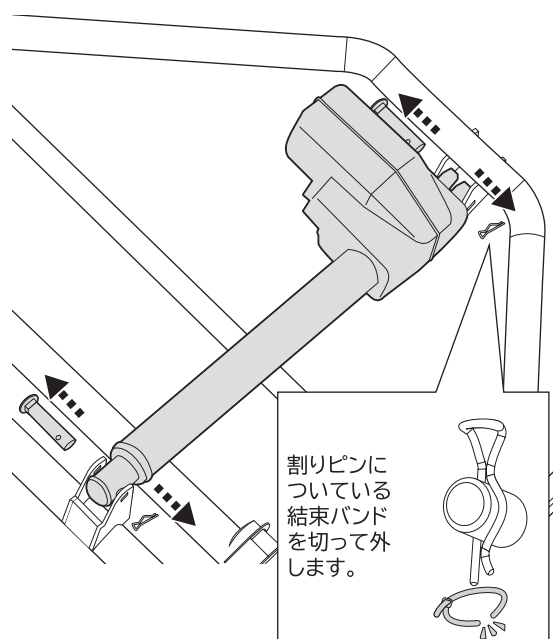


④ コントロールボックスを交換します。

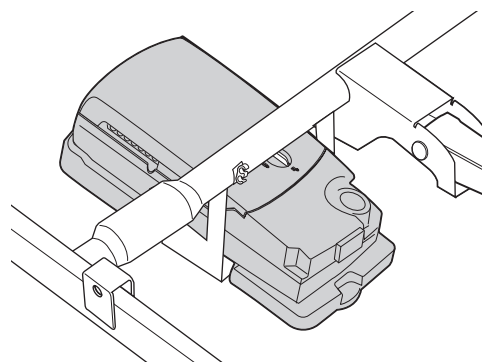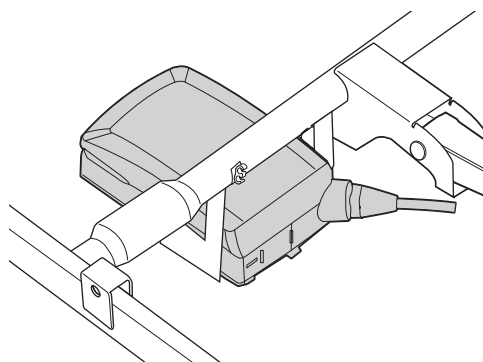

～既に取り付けられているコントロールボックスの取り外し～


- ① つまみ(☆印)を軽く押し下げながら、
- ② コントロールボックスを矢印の向きにスライドさせます。

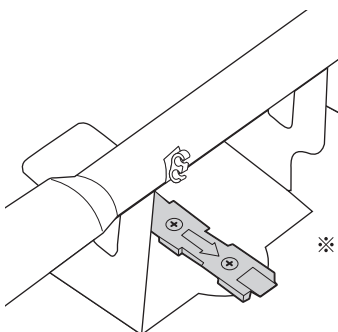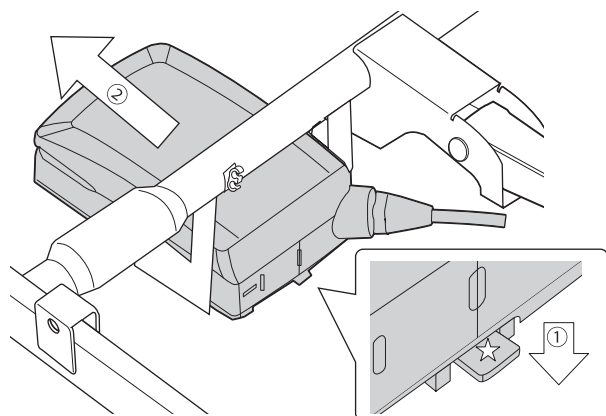

※ コントロールボックスを取り外した後に残る部品は、取り外す必要はありません。


～電装品セット(本製品)のコントロールボックスの取り付け～

- ① つまみ(☆印)を軽く押し下げながら、
- ② Aの部品を手前に引き出します。

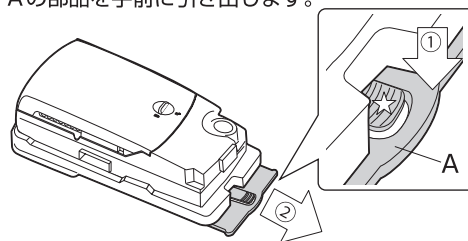


- ③ コントロールボックスをブラケットの上で矢印の向きにスライドさせ、Bの部品の底部にある2箇所のツメ部分をブラケットに引っ掛けます。


※正しい位置になると、自重で落ちるように嵌まります。

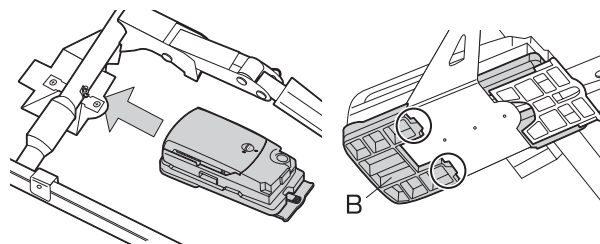


- ④ ②で手前に引き出したAの部品を押し込みます。底部で合計4箇所のツメ部分が確実に引っ掛かっていることを確認してください。

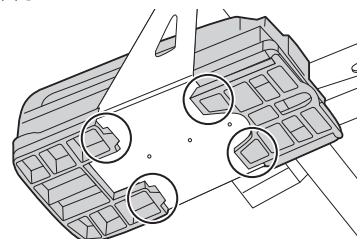

⑤ 手元スイッチを交換します。




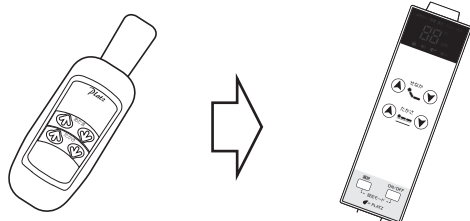



PP113-NX2

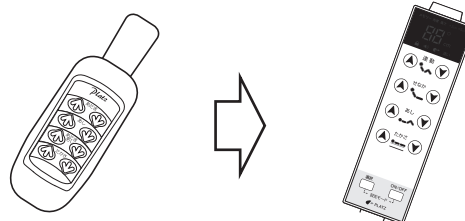

PP113-NX3

- ⑥「ミオレットⅢネクスト」の取扱説明書を参照し、コントロールボックスに各コードを接続します。
各コードの配線をするときは、電源部のふたの着脱が必要です。

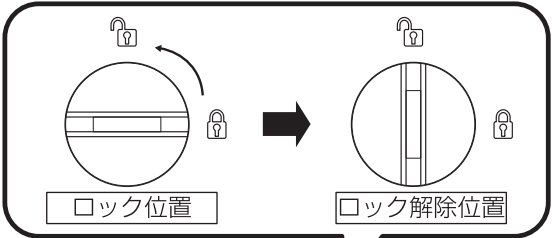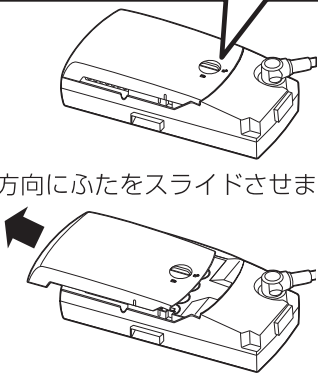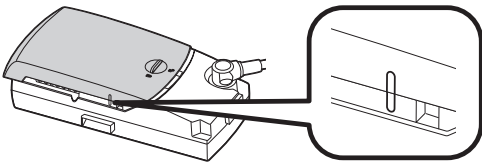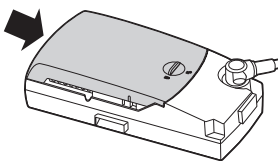ふたを取り外す場合	ふたを取り付ける場合
① ふたの上面にあるつまみを回して、「ロック位置」から「ロック解除位置」にします。  ② 矢印の方向にふたをスライドさせます。 	① ふたと電源部の側面の位置マークを合わせます。  ② 矢印の方向にふたをスライドさせます。それぞれのプラグが奥まで挿さっていない場合、ふたがしっかりと取り付けられないことがあります。 

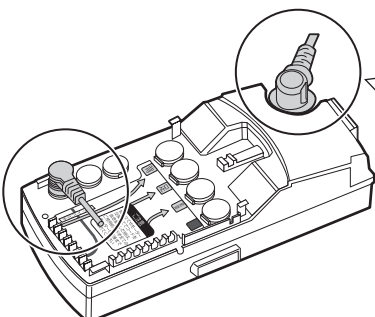

手元スイッチのコードは図のように挿し込んでください。

電源コードは図のように挿し込んでください。

- ⑦「ミオレットⅢネクスト」の取扱説明書を参照し、動作確認を実施してください。
すべてのモーターが正しく動作することを確認してください。

点検 / お手入れについて

- 取り付けが確実かどうか、必ず定期的に点検をおこなってください。
しっかり取り付けられていない状態で使用を続けると破損や事故、故障の原因になります。
- 乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 商品にベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、使用しないでください。

⚠ 警告・注意

- 安全のため、作業は2人以上でおこなってください。
- 取り付けの際に、手や指をはさまないようにご注意ください。
- この商品はミオレットⅢ専用です。他のベッドに取り付けしないでください。
- コードのはさみ込みがないように、取り付けてください。